



## Bomba de Aspiracion Manual Yuwell 7B-1

## Información del Producto

Inicialmente, la Bomba de Aspiración Manual Yuwell 7B-1 es un dispositivo portátil de uso masivo en hospitales, clínicas y en el hogar, que permite absorber secreciones con una potencia de succión de 40 kPa de forma manual, almacenándolas en un recipiente de 200 ml.

La Bomba manual de succión tiene la ventaja de tener tamaño pequeño, peso ligero, ser de fácil transporte y almacenamiento, además de ser extremadamente simple de uso. Al no necesitar electricidad, la bomba manual Yuwell es perfecta para áreas remotas, atención domiciliaria y primeros auxilios.

## Características

- La Bomba de Aspiración Manual Yuwell es de tamaño adecuado para la mano del usuario.
- Equipado con tubo de succión desechable para prevenir la infección cruzada, limpio y sanitario.
- bomba manual ideal en adulto y pediátrico.
- Recipiente contenedor de 200 ml.
- La bomba de succión manual tiene una succión de 40 kPa.
- Flujo de 20 litros por minuto.
- La Bomba Manual Yuwell es transportable, con un tamaño pequeño y ligero uso manual (sin conexión corriente)
- Uso en hospitales para succión de sangre, flema y otros fluidos durante cirugías. Pero también para rescate in situ, visitas in situ y cuidado en el hogar.
- El uso de la Bomba manual es para personas cuya respiración está bloqueada por el esputo y tiene dificultad para respirar.

## Recomendaciones de uso

- El tubo de succión y la botella de almacenamiento no deben instalarse con demasiada fuerza.
- Estrictamente requiere una persona y una máquina para evitar la infección cruzada.
- No tire de él o use demasiado durante el uso para evitar que la presión negativa excesiva dañe la mucosa nasal.
- Los pacientes con vías respiratorias bloqueadas por una gran cantidad de vómito o secreción y con dificultad para respirar no deben usar este producto, además deben usar succión eléctrica de esputo, de lo contrario causará lesiones.

## Especificaciones Técnicas

- Vacío máximo:  $\geq 0,04$  MPa.
- Flujo máximo:  $\geq 20L / \text{min}$ .
- Capacidad del reservorio: 200mL
- Capacidad de almacenamiento del recipiente de succión: 200 ml.
- Peso: 192 gr.

### Incluye:

- Bomba manual Yuwell 7B-1
- Conductor de succión
- Catéter / Cánulas de succión (uno para niños y otro para adultos)
- Funda de tela protectora para almacenamiento
- Manual de uso e instrucciones