



Máscara CPAP Oronasal Wizard 220

Descripción

Máscara CPAP Wizard 220 para el tratamiento de apnea del sueño. Indicada para uso domiciliario u hospitalario en pacientes adultos de más de 30 kg y se compone de una sola pieza desmontable con soporte frontal y apoyo en barbilla, fabricado en policarbonato, para una mayor sujeción.

Características

- A diferencia de las nasales, la máscara CPAP Wizard cubre mayor superficie del rostro y el diseño de la barbilla inferior, proporciona una estabilidad y un cierre máximo, incluido con movimientos de la mandíbula, brindando descanso y ayudando con la apnea del sueño.
-
- Uso hospitalario o domiciliario para aquellos pacientes acostumbrados a respirar por la boca, ya que, si en este caso se usase la de sujeción nasal.
-
- Se recomienda el uso de las máscaras Wizard con el dispositivo CPAP encendido, ya que si no el aire exhalado, no sale del sistema y es muy posible que se re-inspire. Cuenta con una válvula anti-asfixia en caso de fallo de potencia del sistema.
-
- Para limpiarla, desmóntela y lave todas las piezas a mano con jabón suave y diluido en agua y utilice un cepillo de púas suaves para mantener los orificios de ventilación despejados. Déjela secar al aire antes de una nueva utilización.
-
- La talla a elegir se establece midiendo desde debajo del labio inferior, hasta la parte más alta de la nariz (largo) y la anchura de la boca (ancho):
-
- Talla L: 14cm de largo por 11 cm de ancho

Incluye

- Máscara CPAP con arnés.

