

Manual de Uso

Balanza Bluetooth Batería Recargable

Senssun - IF1011AR




TOPMEDIC*



CARGA DE LA BALANZA

1. La balanza debe cargarse hasta el 100% en su primer uso o tras estar mucho tiempo sin usarse. El icono de la batería parpadea mientras esté cargándose y se mantiene fijo cuando la carga ha finalizado. Toma sólo 2 horas hasta cargar totalmente.
2. Por favor, utilizar un cargador estándar de 5V con salida igual o mayor a 0.5A.
3. Se sugiere cargar cada 3 meses si la balanza no se usa por un largo tiempo.


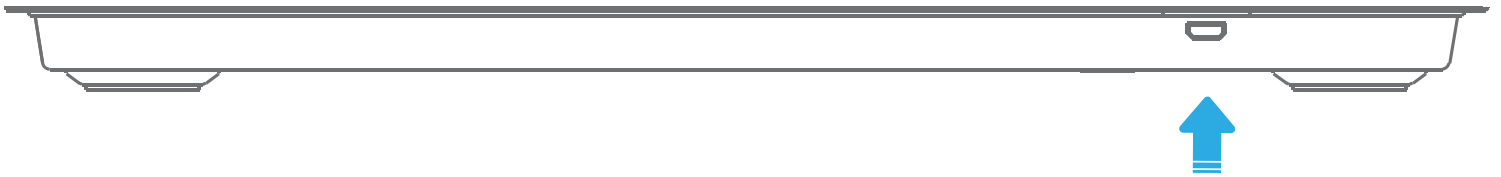


OBSERVACIÓN

El icono de la batería se muestra en la pantalla LCD durante la carga. Para su seguridad, no ocupe la balanza mientras se está cargando. Comience a ocupar la balanza tras remover el cargador.


DESCARGAR Y CONFIGURAR LA APLICACIÓN

Busque "SenssunLife" en el AppStore de su dispositivo iOS para descargar la aplicación. O también puede escanear el siguiente código QR con la cámara de su celular.

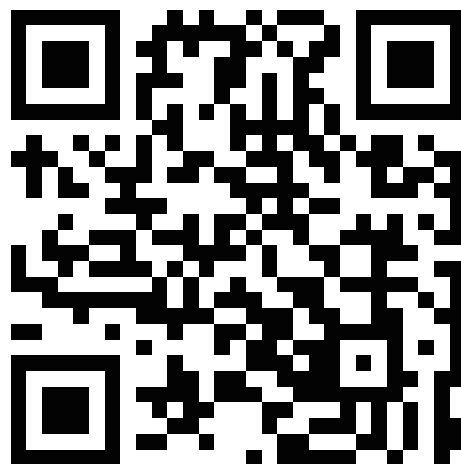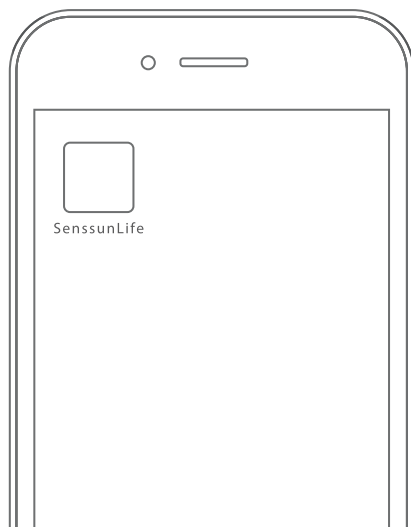


REGISTRAR Y CONECTAR

Abrir la aplicación SenssunLife, conectar el dispositivo con la aplicación y administrar la información personal (Antes de la conexión, confirmar que el Bluetooth está activo y que la pantalla LCD se ilumina). Nota: Confirmar que la información personal es correcta, con el objetivo de obtener resultados precisos.

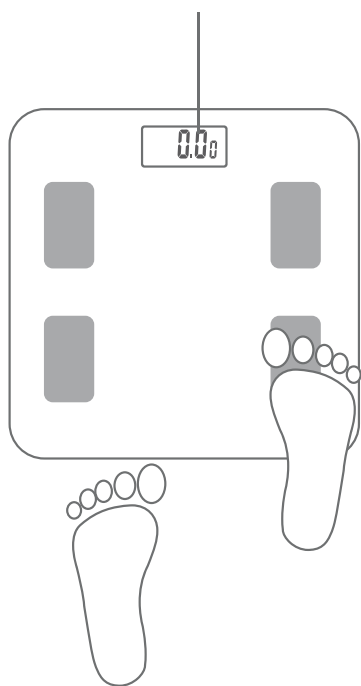


Subir suavemente
en la balanza

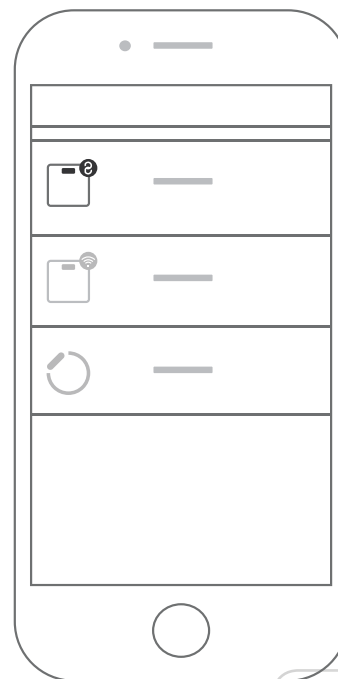

Conectar balanza
con la App

INICIAR PESAJE

Ubicar la balanza en una superficie firme y sólida. Subirse lentamente sobre la balanza. Comenzará a realizar la medición y la pantalla LCD comenzará a parpadear mientras se transmiten los datos. La aplicación almacenará la información en el registro histórico del usuario.

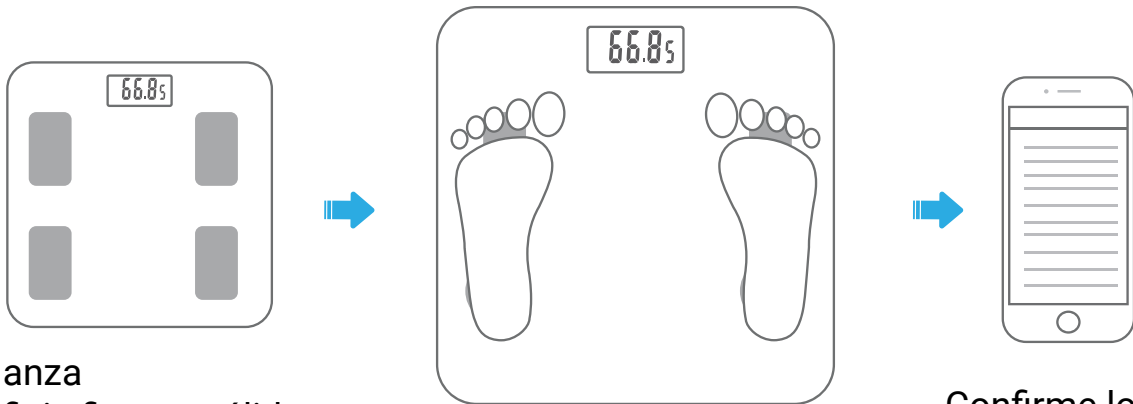

Ubique la balanza en una superficie firme y sólida

Mantenga sus pies descalzos sobre los electrodos de la balanza

Confirme los resultados de la medición en la App

Nota: para obtener un resultado preciso de la grasa corporal, por favor mantenga los pies sobre los electrodos de la balanza.

FUNCIÓN DE BOTONES Y CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

SET	Encienda la balanza e inserte el siguiente parámetro.
▲	Agregar valor por cada intervalo de presión. Presione y mantenga el botón para agregar valores consecutivamente.
▼	Reducir valor por cada intervalo de presión. Presione y mantenga el botón para reducir valores consecutivamente.

Nota: Si el modelo de balanza no incluye botones, por favor configure los valores manualmente en la aplicación de su dispositivo.


Los botones son para usuarios invitados y el código predeterminado es 0. No puede configurar el código del usuario en la balanza, debe realizar el registro mediante la aplicación.

Rango de parámetros a configurar

Género	Altura	Edad
Hombre Mujer	100~250cm	10~100

SOPORTE MULTI-USUARIO

La Balanza se puede conectar con múltiples usuarios y almacenar registros hasta en 15 diferentes miembros. Los datos, serán sincronizados una vez la aplicación esté activada.

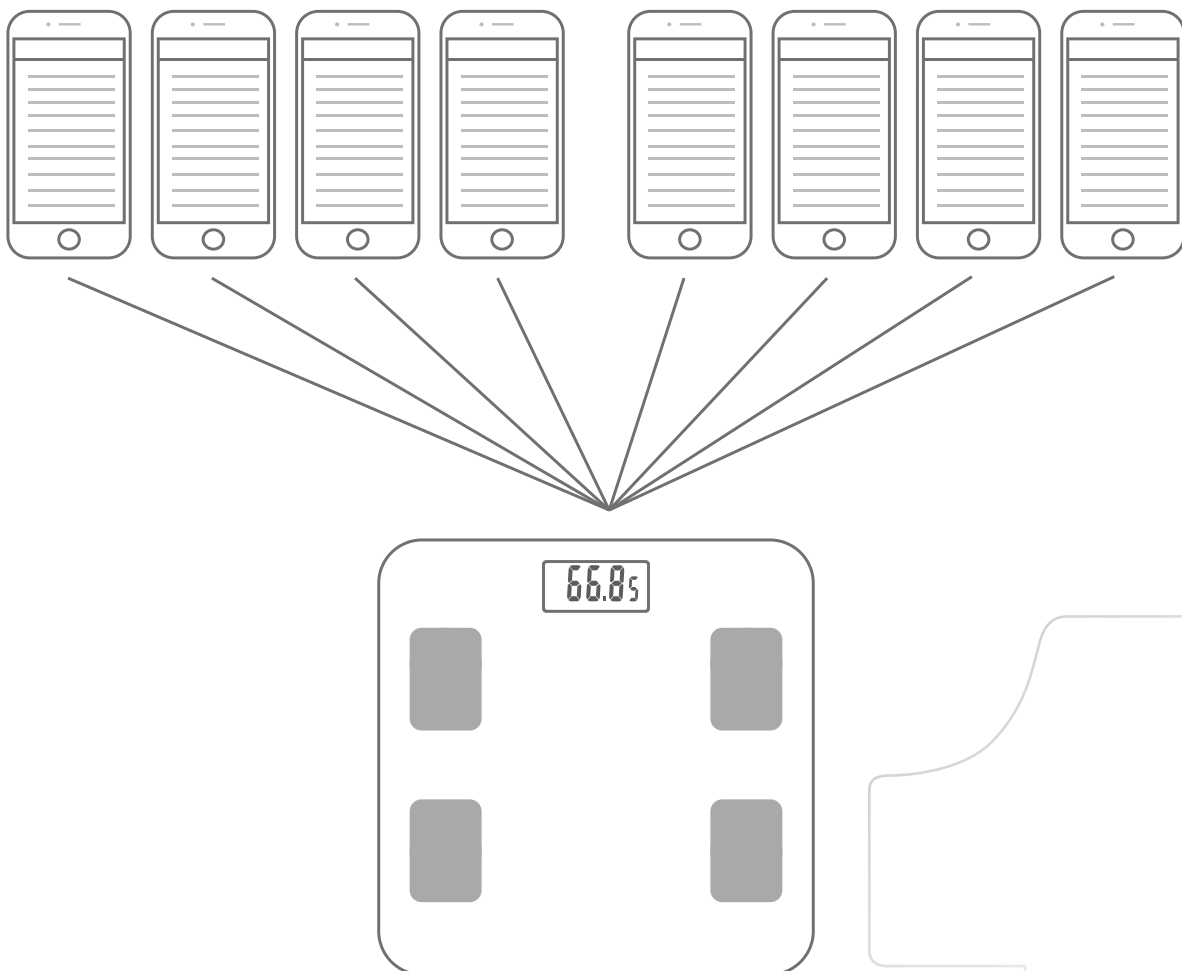

ICONOS INDICADORES

Icono	Indicación	Icono	Indicación
	Porcentaje Grasa Corporal		Hidratación
	Músculo Esquelético		Musculatura


Icono	Indicación
	Indicador de grasa corporal
Fondo LCD Amarillo	Delgado
Fondo LCD Azul	Esbelto
Fondo LCD Verde	Normal
Fondo LCD Naranja	Obeso
Fondo LCD Rojo	Sobrepeso

Icono	Indicación
0000	Medición de Grasa Corporal
Err	Indicador de Sobrecarga
ErrL	Indicador de Bajo nivel Grasa Corporal
Lo	Indicador de Batería Baja
L	Calibración
Errh	Indicador de alto porcentaje Grasa Corporal

SOPORTE MULTI-USUARIO

Por favor, configure la unidad de peso en la Aplicación o presione el botón UNIT en la parte posterior de la balanza para convertir la unidad.

Botón de Reinicio

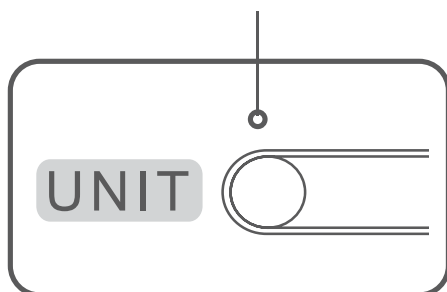

Parte posterior de la balanza

Nota: por favor presionar este botón para reiniciar la balanza si no funciona correctamente

SOBRE LA BALANZA

Balanza inteligente de alta precisión, que permite almacenar datos en equipos celulares mediante transmisión Bluetooth hacia aplicaciones. Permite también mostrar un gráfico con resultado de pesos y demás detalles. Por lo tanto, importante descargar aplicación a celulares y realizar conexión vía Bluetooth, para dar el inicio al control de peso.

CONSEJOS DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Se recomienda no realizar más de un pesaje al día.
2. Ubique los pies lentamente sobre la balanza y toque los electrodos.
3. Use el equipo en una base firme y sólida.
4. No use la balanza en ambientes de humedad o altas temperaturas.
5. Rango de funcionamiento óptimo es desde 5°C hasta los 35°C.
6. Evite golpear, lanzar, o dejar caer la balanza, ya que es un equipo de precisión.
7. Mantenga la balanza limpia. No use agentes con ácido o químicos.

CONSEJOS PARA UN FÁCIL USO

El producto puede usarse para calcular el peso y la masa corporal e hidratación tras confirmar los parámetros de género, altura y edad. Dichas mediciones son vitales para indicar estatus de masa corporal.

Este producto no es un tratamiento médico y no se recomienda su uso en instituciones médicas. No es recomendado su uso en mujeres embarazadas, niños en proceso de crecimiento y personas con carencias cardíacas.

PREGUNTAS FRECUENTES

La aplicación no puede obtener resultados de la Balanza con Bluetooth

- Favor confirmar la conexión en la aplicación para conocer el estatus.
- Confirmar que el dispositivo móvil cuenta con conexión Bluetooth
- Confirmar que la balanza está en una distancia razonable de cobertura.
- Confirmar el nivel de batería y si es bajo, recargar la balanza.
- Reiniciar la aplicación.
- Apague y encienda el Bluetooth, luego realice la sincronización.

Error de conexión con el dispositivo

- Confirmar que el dispositivo posee una conexión Bluetooth con la balanza.
- Favor, confirmar que el dispositivo está diseñado con Bluetooth 4.0 o mayor.

Pantalla LCD no responde

- Favor, confirmar nivel de baterías de la balanza.
- Las reparaciones solo pueden ejecutarse por el fabricante o servicios

