

El Mini Audífono Amplificador Ortopédico Recargable de Sonido Digital Inalámbrico Recargable para Sordera redefine la experiencia auditiva. Este audífono ortopédico presenta un diseño digital fácil de ocultar, con la comodidad de uso en ambos oídos. Su función de cancelación de ruido digital, combinada con un chip inteligente de última generación, proporciona una reducción de ruido un 30% más alta que los modelos convencionales, ofreciendo un sonido natural y una experiencia auditiva maravillosa.

Cómo usar el audífono:

- Inserte el tapón para los oídos en la base del teléfono móvil. **(Ver Figura 1)**
- Cambie el interruptor "O-N" a "O" o ajuste el volumen a "1".
- Use el audífono detrás de la oreja y firme el enchufe del audífono en su oído. **(Ver Figura 2)**
- Cambie el interruptor "O-N" a "N" y ajuste el volumen para obtener un sonido claro.
- En entornos ruidosos, presione el botón de modo para cambiar el programa de escucha. El audífono emitirá un pitido con cada presión del botón de modo. **(Ver Figura 3).**

- **Modo Normal** - 1 Pitido
- **Modo de Reducción de Ruido** - 2 Pitidos
- **Modo de Reducción de Ruido** - 3 Pitidos
- **Modo de Reducción de Ruido** - 4 Pitidos



Diagrama del Dispositivo:

Cómo cargar el audífono:

- Cuando el sonido es muy bajo y el audífono no funciona, puede deberse a una batería baja. El audífono emitirá un pitido para indicar que la batería está baja. Cargue la ayuda auditiva a tiempo.
- Apague el audífono antes de cargarlo. Inserte un extremo del cargador DC 5V/50mA~1A en la ayuda auditiva.
- Conecte el cargador a la toma de corriente.
- En las primeras veces de uso, cargue el nuevo audífono durante 6 horas. Para usos posteriores, es recomendable cargarlo después de que la batería se agote. Después de tres ciclos consecutivos, la batería alcanzará su mejor condición.
- La luz LED se pondrá verde durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Importante:

La batería de litio incorporada, con 60 mAh, proporciona más de 100 horas de funcionamiento continuo después de una carga completa.

Precaución: Utilice nuestra batería correspondiente y cargador. No desmonte ni vuelva a colocar la batería.



Especificaciones del Dispositivo:

Cargador:	5V DC /50mA~1A
Batería:	Batería de Litio - 60mAh
Salida Máxima de Sonido:	129±4 dB
Ganancia de Sonido:	38 ± 5dB
Distorsión de Onda Armónica:	≤5%
Rango de Frecuencia:	400 Hz~3800Hz
Ruido de Entrada:	≤28 dB
Voltaje:	3.7V D.C.
Corriente:	≤2mA
Adaptador (Universal):	110V220V o 5060Hz
Tamaño:	4.2 x 1.6 cm
Peso:	6,5g

Consejos para el Uso del Audífono:

- Si percibe un silbido, asegúrese de que el tapón para los oídos esté colocado firmemente o utilice un tamaño adecuado.
- Evite utilizar el audífono a un volumen alto durante períodos prolongados, ya que podría dañar su audición.
- Mantenga el producto siempre para evitar que el tapón para los oídos y la abertura del micrófono se obstruyan con objetos extraños.
- No utilice el audífono mientras se ducha, nada o en ambientes húmedos. Evite exponer el audífono al sol o a fuentes de calor.
- Maneje el audífono con cuidado y evite dejarlo caer al suelo.
- Mantenga el audífono fuera del alcance de los niños.
- Evite que el dispositivo entre en contacto con goteos o salpicaduras.
- El enchufe del adaptador se utiliza como dispositivo de desconexión. Asegúrese de que sea fácilmente operable.
- Preste atención a los aspectos medioambientales en la eliminación de la batería.

Advertencia: No exponga las baterías al calor excesivo, como la luz solar directa o el fuego.

Precauciones para el Uso del Audífono:

- Ajuste el volumen al mínimo antes de usarlo.
- Elija un tapón para los oídos ligeramente más grande para evitar silbidos.
- Aumente el volumen gradualmente para evitar aumentos repentinos del sonido.
- Si escucha un aullido, verifique que el gel de sílice en el oído sea apropiado y que el tamaño del enchufe sea adecuado. Asegúrese de que no haya fugas de aire.
- Mantenga limpio el tapón para los oídos.
- Retire la batería si no usa el audífono durante mucho tiempo.