

Manual de Usuario



Este es un generador de ozono profesional. Está diseñado para limpiar la máquina, el tubo y la mascarilla CPAP. Para obtener mejores resultados, mantenga este limpiador CPAP con la máquina, el tubo de la manguera o la máscara en un solo cierre.

FUNCIONES DEL MODO CPAP

Hay tres funciones de modo.

1. **Estándar:** Funciona automáticamente y se apaga automáticamente después de 30 min. 5 min de desinfección y 5 min de soplado sin ozono.
2. **Continuo:** Funciona con la limpieza aún apagado.
3. **Impuls:** Funciona durante 1 minuto y luego 1 min más, soplando aire sin ozono, puede apagarse manualmente o esperar el ciclo completo para apagado automático.

CARGANDO

Entrada: 110-240VAC



Batería de Carga: 2200mAh

Puerto de Carga: Interfaz Tipo C

Tiempo de Carga: Aprox. 4 horas

Tiempo de Trabajo: 120 minutos

- La batería interna recargable es de 2200 mAh.
- La carga por tiempo completo será de más de 4 horas y el trabajo durante 120 minutos.
- Este limpiador CPAP puede funcionar en conjunto mientras se carga.
- Puedes cargar y utilizar el dispositivo simultáneamente.

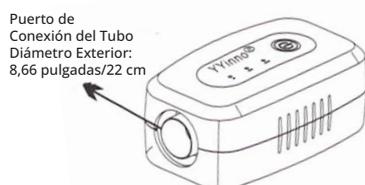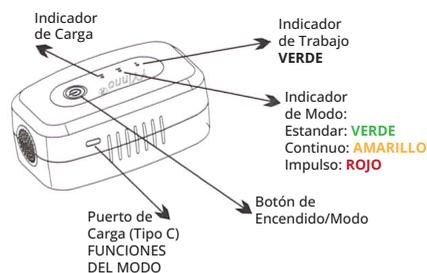

OBSERVACIONES:

- Si su tubo mide 15 cm, utilice adaptador de conexión.
- Si su tubo es calefaccionado, utilice adaptador de conexión especial.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender: presione el botón de encendido durante 1,5 segundos

Para apagar: presione el botón de encendido durante 1,5 segundos.

Es obligatorio apagarlo cuando el dispositivo no esté en uso.


2. OPERACIÓN EN TRES MODOS

Los tres modos son Estándar, continuo e impulso. Se encienden por turnos y se ciclan.


A. Modo Estándar: presione el botón de encendido durante 1,5 segundos, el indicador de encendido se encenderá en ROJO y el indicador de modo se encenderá en VERDE. Esto es estándar y el limpiador CPAP funcionará 25 minutos con ozono y luego soplará aire durante 5 minutos. Esto ayudará a disminuir el olor a ozono más rápidamente.

B. Modo Continuo: presione el botón de encendido nuevamente, luego el indicador de modo cambia a AMARILLO

C. Modo de Impuls: presione el botón de encendido nuevamente, luego el indicador de modo cambia a AZUL. Vuelva a presionar el botón de encendido, luego el indicador Made cambia a VERDE y luego cambiará en ciclo.

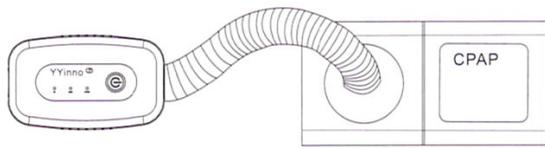

Limpiador en Equipo CPAP

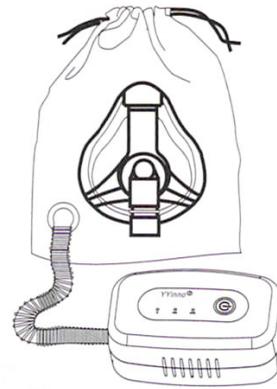

Limpiador en Máscara CPAP

OTRA INFORMACIÓN

1. Al desinfectar el humidificador, asegúrese de secar el agua del tanque antes de comenzar.
2. Después de la desinfección, no utilice la mascarilla de tubo CPAP inmediatamente, el ozono puede disiparse por completo después de media hora.
3. Si todavía huele a ozono después de la limpieza, ejecute el CPAP para eliminar el olor residual.
4. El ozono es como el oxígeno con un átomo extra. Por eso puede destruir bacterias y virus sin necesidad de agua y jabón. La concentración de ozono está determinada por el volumen de la bolsa utilizada y el tiempo de encendido del limpiador. No aumentar el tiempo ni la concentración de desinfección, ya que esto podría perjudicar la CPAP.
5. La capacidad de la batería de litio incorporada de YY-CPAP07 cumple con los requisitos de la FAA y puede transportarse en aeronaves.
6. Se sugiere desinfectar la máquina CPAP al menos cada dos días y el tubo de la mascarilla y la cámara de agua al menos cada dos días.
7. Comuníquese con nosotros incluso si supera los 2 años de garantía, brindaremos nuestros servicios lo mejor que podamos.

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

	ASUNTO	SOLUCIÓN
1.	El limpiador no se inicia después de presionar el botón de Encendido	<ul style="list-style-type: none"> • La pulsación dura más de 1,5 segundos. • Cargando la batería
2.	El indicador de carga no se ilumina	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique el cable y la conexión del adaptador de corriente tipo C. <i>(Si todos funcionan bien, contáctenos para repararlos).</i>
3.	No se puede cambiar el modo	<ul style="list-style-type: none"> • Simplemente haga clic o presione el botón 'Encendido'. <i>(Por favor contáctenos para reparación)</i>
4.	No se genera ozono	<ul style="list-style-type: none"> • Si el indicador de alimentación no está encendido, cargue la batería. <i>(Si el ventilador No funciona, contáctenos para repararlo).</i>
5.	Todas las demás cuestiones	<ul style="list-style-type: none"> • Por favor contáctenos para reparación