

Nopea valkaisu hampaiden puhdistuksen yhteydessä

- FI** BlancOne® CLICK on nopea valkaisuhoito hampaiden puhdistuksen yhteydessä vastaanotolla. BlancOne® CLICK valkaisee hampaat välittömästi ja edullisesti vain 10 minuutissa. BlancOne® CLICK on suunniteltu myynninedistämistuotteeksi valkaisuhoidoille (TOUCH ja ULTRA) ja se toimii myynninedistämis- ja markkinointityökaluna vastaanotoilla.

KÄYTTÖOHJEET

A) Valkaisugeelin valmisteleminen

1. Irrota kahden ruiskun (valkaisugeeli ja aktivointigeeli) korkit ja liitä ne yhteen luer-lock-liitimellä.
2. Työnnä varovasti toisen ruiskun männästä, jotta geeli siirtyy kokonaan toiseen ruiskuun.
3. Työnnä nyt geeliä sisältävän ruiskun mäntää ja siirrä se tyhjiin ruiskuun.
4. Toista edellisessä vaiheessa kuvattu toimenpide, kunnes kaksi geeliä (valkaisuaine ja aktivaattori) ovat täysin sekoittuneet, jolloin muodostuu yksi homogeeninen geeli.
5. Irrota geeliä sisältävän ruiskun liittin ja kiinnitä applikaattorin kärki.


B) Potilaan valmistelu

1. Laita potilaalle BlancOne® suunaukipitäjä, jossa on osa kielen poissa pitämiseksi ja lisäksi sen jälkeen tarvittaessa vanurullia ylä- ja alahuulen alle eristämään ne hoidettavasta alueesta jos tarpeellista.
2. Tehokkain tapa valmistella hampaat valkaisu varten on suorittaa jauhepuhdistus. Tämä varmistaa valkaisugeelin optimaalisen tunkeutumisen kiilteeseen ja dentiiniin. **Vältä profypastaa, fluoria, öljyjä tai kaliumnitraattia sisältäviä aineita ennen valkaisu, sillä ne tukkivat kiilteen pinnan. Tämä heikentää valkaisun lopputulosta merkittävästi.**
3. Määritä värikartan avulla potilaan hampaiden alkusävy.

C) Valkaisuhoito

1. Työnnä varovasti valkaisugeelin sisältävän ruiskun mäntää levittääksesi valkaisugeeliä kaikkien valkaistavien hampaiden pinnalle.
2. Aktivoi valkaisugeeliä 10 minuutin ajan BlancOne® ARCUS+ LED valolla.

Kun geeli on aktivoitu, se on turvonnut ja täynnä happea (isoja kuplia), kuten viimeisessä kuvassa oikealla näkyy.

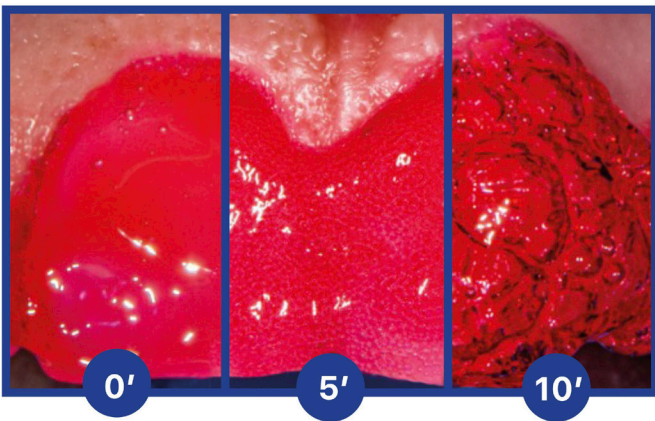

3. Poista ylimääräinen valkaisugeeli vanurullalla ja tehoimulla. Huuhtelee huolellisesti ilma/vesiruiskulla. **VAROITUS:** aktivoitu geeli on melko sitkeää. Jos imukärki tukkeutuu, huuhtelee kärki ime-mällä runsaasti vettä. **HUOMAA:** ikenien reunat voivat punoittaa joissakin kohdissa, mutta vaikutus on vain tilapäinen, ja katoaa noin tunnissa.

D) Hoidon lopettaminen

1. Määritä värikartan avulla potilaan hampaiden lopullinen sävy.
2. Poista suunaukipitäjä potilaan suusta ja huuhtelee suu.

Geelin valoaktivointi

BlancOne-valkaisugeelit vaativat sopivan valonlähteen valokemialliseen aktivointiin.

lhanteellisen valkaisu tuloksen takaamiseksi suosittelemme BlancOne® ARCUS-valkaisu-lampun käyttöä, jonka 10 tehokasta 5W led-valoa takaavat geelin täyden aktivoitumisen samanaikaisesti molemmilla kaarilla, mukaan lukien hampaiston sivuilla lyhyen ajan sisällä. BlancOne® ARCUS-lampun valkaisuvaloyksikkö tulee sijoittaa kohtisuoraan hampaisiin nähdän 5–10 cm:n etäisyydelle suusta hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi.

Muiden valkaisu lampujen käyttö saattaa heikentää hoidon tehoa, vaatii pidemmän ajan tai joissain tapauksissa valkaisugeelin aktivointi saattaa epäonnistua kokonaan.

SUOSITELTU AKTIVOINTIAIKA

Laite	Teho	Aktivointityyppi	Aika
BlancOne® ARCUS-lamppu	250 mW/cm ²	samanaikaisesti molemmissa kaarissa	10 minuuttia

EUROOPAN UNIONIN VAROITUKSET

- Prosessin aikana vapautuu 5,6 % H₂O₂ (vetyperoksidi).
- Älä käytä alle 18-vuotiaille.
- Saa myydä vain laillistetuille suunhoidon ammattilaisille.
- Käytettävä vain laillistetun suunhoidon ammattilaisen toimesta tai heidän välittömässä valvonnassaan, jos riittävä turvallisuustaso varmistetaan.

VAROTOIMENPITEET

- Hammastarkastus on pakollinen ennen valkaisu.
- Valkaisu ei valkaise posliiniruunu ja tai hammaslääketieteellisiä restaurointeja.
- Vältä tupakka tuotteita, kahvia sekä punaviiniä kuusi tuntia valkaisu toimenpiteen jälkeen. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi noudata valkoista ruokavaliota 48 tunnin ajan valkaisun jälkeen.
- Valkaisu ei ole tarkoitettu raskaana oleville naisille. Ota yhteys lääkäriin, jos imetat.
- Älä niele geeliä. Vältä kosketusta muiden kudosten kuin hampaiden kanssa.
- Happamat elintarvikkeet/mehut voivat aiheuttaa herkkyttä, jos niitä nautitaan pian valkaisuun jälkeen.
- Kudosten ärsytystä voi ilmetä, jos hampaiden valkaisu suoritetaan henkilölle, joilla on parodontiitti.
- Pidä hampaiden valkaisu tuotteet poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä kosketusta ihon, limakalvojen ja silmien kanssa. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee silmiä varoen vedellä usean minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.
- Jos tuotetta on nieltä pieninä määrinä, tuote on vaaratonta, muutoin ota yhteys lääkäriin.
- Joillain potilailla ikenet saattavat herkistyä tai ärtä. Oireet ovat lieviä ja ohimeneviä useimmissa tapauksissa, mutta joskus hammaslääkärin hoito saattaa olla tarpeen.