

BLANCOONE®

SEAL



Ref. 900342

2. Tarkistus - Huhtikuu 24, 2019

Suojalakan käyttö hampaanvalkaisun jälkeen

Tupakointi ja kahvin tai teen juominen hampaiden valkaisun jälkeen voi nopeasti muuttaa hampaiden valkaisun lopputulosta. Tavallisesti valkaisun jälkeen suositellaan lopettamaan tupakointi ja kahvin ja teen juominen vähintään 72 tunniksi, jotta vaalentuneet hampaat eivät värjäydy. Useimpien potilaiden on erittäin vaikea noudattaa tällaisia rajoituksia.

KÄYTTÖOHJE

BlancOne® SEAL on silikonipohjainen, hapoilta suojaava lakka hampaan pinnan suojaamiseen värjääviltä aineilta valkaisuainemaitteiden jälkeen. Lakka muodostaa kalvon, joka suojaaa hampaita värjääviltä happamilta juomilta ja ruoilta sekä savulta, rajoittamalla uusien värimuutosten muodostumista ja tekemällä hampaiden valkaisu tuloksista kestävämpiä.

BlancOne® SEAL -lakka sisältää Nano- fluoripatiittia ja Nano- kalsiumfluoridia. Nano-fluoripatiittihiukasten tiedetään parantavan hampaan remineralisaatiota. BlancOne® SEAL on yksi komponenttilakka, joka ei vaadi etsausta. Se muodostaa hampaan pinnalle suoja kalvon, joka voidaan tarvittaessa uusia tai korjata halutulla tavalla. Sen levittäminen on helppoa ja nopeaa. Yksi pakkauksia riittää yleensä noin 20 potilaalle.

Käyttötarkoitus

Hampaiden suojaaminen värjääviltä aineilta hampaiden valkaisuainemaitteiden jälkeen.

BlancOne® SEAL lakan levitys hampaiden pinnalle valkaisu jälkeä

1. Ravista voimakkaasti BlancOne® SEAL -pulloa ennen käyttöä. Ravistuksen aikana kuulet ääntä pullon sisällä olevien lasihelmien osuessa toisiinsa.
2. Pidä huulienlevittäjä paikoillaan, jotta lakan levitys on helpompaa.
3. Poista iensuoja, jos sitä käytettiin valkaisuainemaitteiden aikana.
4. Käytä pakkauksessa olevia kertakäyttöisiä kuppeja ja harjoja. Yksi harjan kasto lakkaa riittää peittämään noin 3 hammasta.
5. Sulje pullo heti käytön jälkeen.
6. Levitä BlancOne® SEAL suoraan puhtaalle ja kuivalle hampaan pinnalle. Vältä kosketusta limakalvoon.
7. Levitä BlancOne® SEAL lakkaa tasaisesti ohut kerros 2-3 kertaa jokaiselle hampaalle. Jos hampaat on valkaisu myös takaa, levitä lakkaa myös sinne. BlancOne® SEAL voidaan levittää myös paljastuneiden hammas-kaulojen alueille ja hammasvälisiin.
8. Anna lakan kuivua 1 minuutti tai kuivaa se kevyesti.
9. Huuhtele potilaan suu ja hampaat huolellisesti lakan laiton jälkeen.

Tärkeää

- Älä syö mitään tai harjaa hampaita ensimmäisten 2 tunnin aikana BlancOne® SEAL -lakan levittämisen jälkeen.
- Älä käytä lakkaa hampailla, jos valkaisuhoito ei ole valmis! Suorita lakkakäsittely vasta kotivalkaisu- jakson jälkeen, jos jatkotoimenpiteitä suoritetaan kotivalkaisuhoitojen yhteydessä.
- Lakalla käsittelylle hampaille suositellaan tehtäväksi jauhepuhdistus ennen hampaiden valkaisu.
- BlancOne® SEAL lakan voimakas haju haihtuu minuutin aikana.
- BlancOne® SEAL sisältää etyyliasettaattia. Etyyliasettaatti on erittäin syttyvä. Suojaa syytyslähteiltä. Vältä etyyliasettaattihöyryn hengittämistä. Poisheet silmiin huuhdeltava runsaalla vedellä ja ottamalla välittömästi yhteyttä silmälääkäriin. Ihokosketus: pestä runsaalla vedellä ja saippualla.
- Vältä BlancOne® SEAL lakan kontaminaatiota käyttämällä aina annoskuppia ja kertakäyttöisiä harjoja.
- Jäljennösten otto vinyylisilikonilla voidaan tehdä aikaisintaan 4 viikkoa BlancOne® SEAL -hoidon jälkeen.

Säilytys:

Säilytä alle 25 ° C (77 ° F)! Älä käytä viimeisen käyttö- päivämäärän jälkeen! Varastoi BlancOne® SEAL tiiviisti suljettuna hyvin ilmastoidussa paikassa.



Pidä poissa lasten ulottuvilta!
Tarkoitettu ainoastaan hampaiden hoitoon!

Takuu

SanaPro Dental GmbH takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä. SanaPro Dental GmbH ei anna mitään muita takuita, mukaan lukien mitään epäsuoria takuita kaupallisuudelle tai sopivuutta johonkin erityiseen käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on vastuussa tuotteen sopivuuden määrittämisestä käyttäjän sovelluksiin. Jos tämä tuote on viollinen takuuaikana, yksinomainen korjauskeino ja SanaPro Dental GmbH: n ainoa velvollisuus on SanaPro Dental GmbH -tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen.

Vastuun rajoitus

SanaPro Dental GmbH ei ole vastuussa mistään tuotteesta aiheutuvista välittömistä, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai seurauksellisista menetyksistä tai vahingoista, riippumatta väitetystä teoriasta, mukaan lukien takuu, sopimus, laininlyönti tai tiukka vastuu.