


## CORTANDO RIBBOND CON UN BISTURI #15 o #20

Ribbon es fabricado con las mismas fibras moleculares de polietileno usadas para hacer chalecos anti-balas. Estas fibras son resistentes a la fractura y mayoría de las tijeras no podrían cortar las Ribbon sin dejar varias fibras sin cortar.

Es importante que cuando use las cintas Ribbon no deje fibras sin cortar porque estas pueden “flotar” en la resina y volverse incómodas para el paciente. Los kits de Introducción de Ribbon incluyen tijeras especialmente hechas para cortar Ribbon.

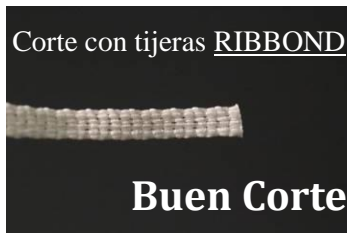

Las Tijeras especiales Ribbon so hechas de acero inoxidable, son autoclavables y pueden ser utilizadas de forma intra-oral.



Para cortar las Ribbon sin tijeras especiales, puede usar las láminas de bisturí #15 o #20. Necesitará ser bien preciso en medir cuanto Ribbon necesitará, ya que no podrá hacer los ajustes intraorales que podrá hacer con las tijeras especiales.

1. No remueva la Ribbon del paquete plástico.
2. Coloque el paquete de la Ribbon en una superficie seca.
3. Corte la cantidad de Ribbon que necesite y el paquete plástico con un movimiento oscilante con la parte redonda de la lámina.
4. Remueva la Ribbon cortada del empaque utilizando un instrumento metálico.

**RECUERDE:** Ribbon es usado para adherirse a la resina dental y al acrílico. Es importante que no toque las Ribbon con sus dedos ni guantes de latex hasta **DESPUES** de que haya sido humedecido. **No toque la Ribbon con sus dedos mientras corte la cinta.**