

# GEBRAUCHSANWEISUNG

## IR 10+

Indoor Rollator



MOBILITY **Plus+**

CE

# 1. INHALT

|  |    |
|--|----|
| 1. Inhalt.....   | 2  |
| 2. Vorbemerkung.....                                   | 4  |
| 3. Allgemeine Hinweise.....                            | 5  |
| 3.1 Zweckbestimmung.....                               | 5  |
| 3.2 Indikationen.....                                  | 5  |
| 3.3 Kontraindikationen.....                            | 5  |
| 3.4 Nutzungsdauer.....                                 | 6  |
| 3.5 Verantwortlichkeit.....                            | 6  |
| 4. Produkt- und Lieferübersicht.....                   | 6  |
| 4.1 Prüfung der Lieferung.....                         | 6  |
| 4.2 Lieferumfang.....                                  | 7  |
| 4.3 Übersicht des IR10+ Rollator.....                  | 8  |
| 5. Montage des Rollators.....                          | 9  |
| 5.1 Rollen anbringen.....                              | 9  |
| 5.2 Rückenbügel anbringen.....                         | 10 |
| 5.3 Entfalten.....                                     | 10 |
| 5.4 Einstellung der Bremsen.....                       | 11 |
| 5.5 Nutzung der Bremsen.....                           | 11 |
| 6. Einrichten des Rollators auf benutzende Person..... | 12 |
| 6.1 Griffhöhe einstellen.....                          | 12 |
| 6.2 Tablett anbringen/entfernen.....                   | 13 |
| 6.3 Netze verwenden.....                               | 14 |
| 7. Benutzung des IR10+.....                            | 14 |
| 7.1 Gehen.....   | 14 |
| 7.2 Lenken.....  | 15 |
| 7.3 Bremsen.....                                       | 15 |
| 7.4 Sitzen.....  | 16 |
| 7.5 Überwinden von Hindernissen.....                   | 17 |
| 7.6 Zusammenfalten.....                                | 18 |
| 7.7 Der Rollator als Sitzgelegenheit.....              | 18 |
| 7.8 Tragen des Rollators.....                          | 19 |
| 7.9 Sicherheitshinweise.....                           | 19 |









|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 8.  | Reinigung und Desinfektion.....       | 20 |
| 8.1 | Reinigung.....                        | 20 |
| 8.2 | Desinfektion.....                     | 21 |
| 9.  | Wiedereinsatz.....                    | 21 |
| 10. | Technische Daten.....                 | 22 |
| 11. | Entsorgung.....                       | 23 |
| 12. | Kontrolle, Reparatur und Wartung..... | 23 |
| 13. | Garantie.....                         | 24 |
| 14. | Konformitätserklärung.....            | 25 |

## 2. VORBEMERKUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Rollator IR10+ entschieden haben.

Der Rollator IR10+ ist ein Medizinprodukt und wurde für Menschen mit einem Körpergewicht bis zu 136 kg entwickelt. Er lässt sich Ihren Bedürfnissen optimal anpassen und gewährt Ihnen Sicherheit und neue Bewegungsfreiheit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie den Rollator zum ersten Mal benutzen.

Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps für die richtige Benutzung und Pflege des Rollators. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, welcher Ihnen den IR10+ Rollator geliefert hat. Er berät Sie gerne.

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
|   | Seriennummer                | Ermöglicht die Zuordnung des Medizinproduktes zu einer Produktionscharge                             |
|  | Hersteller                  | Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes  |
|  | Herstellungsdatum           | Zeitpunkt der Herstellung  |
|  | Gebrauchsanweisung beachten | Die Gebrauchsanweisung ist vom Anwender vor der Anwendung vollständig durchzulesen                   |
|  | CE- Kennzeichnung           | Konformitätserklärung, Gerät entspricht der Europäischen Verordnung für Medizinprodukte MDR 2017/745 |
|  | Sicherheitshinweis          | Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Gefährdungen  |
|  | Kennzeichnung               | Medizinprodukt   |
|  | Wichtige Information        | Hilfreiche Tipps zur Anwendung des Produktes   |

## 3. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Ihnen vorliegende Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollators besser vertraut zu machen. Diese ist ein fester und notwendiger Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Rollators komplett durch.

### 3.1 Zweckbestimmung

Der Rollator erweitert Ihre Mobilität bei Einschränkungen in der Gehfähigkeit. Er ist für die Anwendung auf ebenem Untergrund im Innenbereich vorgesehen. Der IR10+ ist besonders leicht und lässt sich gut in Innenräumen manövrieren. Mit Hilfe des Tablett können Sie im Haushalt kleinere Gegenstände transportieren, ohne auf die Sicherheit und Unterstützung des Rollators verzichten zu müssen. Sie können sich jederzeit hinsetzen (Tablett vorher entfernen) und ausruhen.

### 3.2 Indikationen

Der Rollator ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, die noch über ausreichend Gehfähigkeit, Kraft und Standsicherheit verfügen, um mit Unterstützung des Rollators zu gehen. Der Rollator ist für den Innenbereich ausgelegt.

### 3.3 Kontraindikationen

Die Verwendung des Rollators ist ungeeignet bei

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Gliedmaßenverlust an den Armen
- Sitzunfähigkeit

### **3.4 Nutzungsdauer**

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu 4 Jahren. Über diesen Zeitraum hinaus kann der Rollator, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, weiterverwendet werden.

### **3.5 Verantwortlichkeit**

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Rollators verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von solchen Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

## **4. PRODUKT- UND LIEFERÜBERSICHT**

### **4.1 Prüfung der Lieferung**


Der Rollator IR10+ wird in einem Karton geliefert. Nach dem Auspacken bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit auf. Er dient zur evtl. späteren Einlagerung des Rollators.

Prüfen Sie den Lieferungsinhalt nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Im Falle von Beschädigungen benutzen Sie das Produkt noch nicht. Informieren Sie zuerst Ihren Fachhändler.

## 4.2 Lieferumfang

Der Inhalt besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- Umverpackung
- Rahmen inkl. Klappbarer Sitzfläche
- Höhenverstellbare Griffe
- Laufräder inkl. Ankipphilfe
- Bewegliche Lenkräder
- Betriebs- und Feststellbremse, beidseitig
- Rückenbügel
- Zwei vormontierte Transportnetze
- Tablett
- Gebrauchsanweisung
- Serviceheft

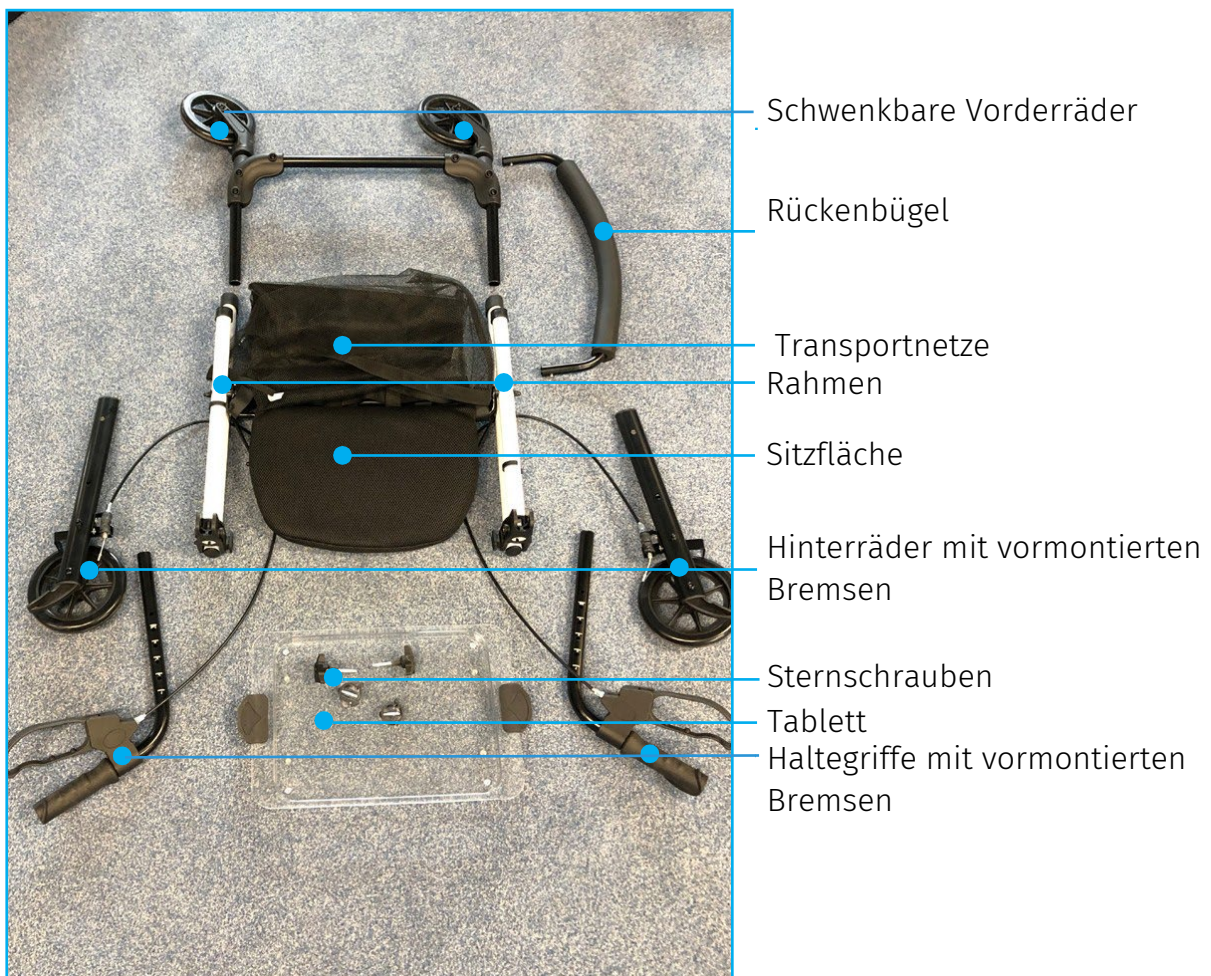

### 4.3 Übersicht des IR10+ Rollator



Der IR10+ verfügt über ein praktisches Tablett.



Überprüfen Sie anhand des angegebenen Lieferumfangs, ob alle Teile vorhanden sind.



Die Netze unter dem Sitz fassen bis zu 5kg.

An der Innenseite des linken Rahmens befindet sich ein Typenschild mit Seriennummer und Herstellungsdatum, ähnlich dem Beispiel rechts:

|   |  |                       |   |
|---|--|-----------------------|---|
| <b>IR10+</b>  |  | <b>MOBILITY Plus+</b> |   |
| Indoor  | Max. Breite/width:   | 61 cm                 |  08-2019 |
|    | Max. Benutzergewicht/user weight:  | 136 kg                |   |
|   | Max. Zuladung Tasche/payload bag:  | 5kg                   |   |
|   | Max. Schiebegriffhöhe/push handle height:  | 96 cm                 |   |
| Gebrauchsanweisung beachten!<br>Observe instructions for use!   |  |                       |   |
|  <b>Rehab Direct GmbH &amp; Co. KG</b><br>Düsseldorf Str. 6-8 * 68219 Mannheim |  |                       |   |
|    | <br>7510250230212345 |                       |          |



## 5. MONTAGE DES ROLLATORS


### 5.1 Rollen anbringen



Legen Sie alle Teile vor sich auf den Boden. Die Hinterräder sind bereits mit den korrekten Seiten verbunden.



Der Bügel mit den Vorderrädern wird in die runden Rohe des Rahmens geschoben.

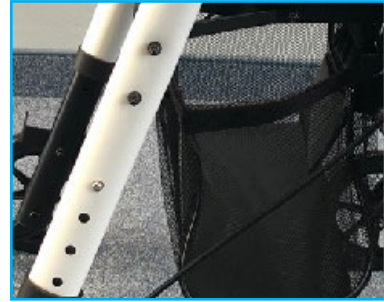

Alle Metallzapfen müssen hör- und sichtbar einrasten.

Legen Sie alle Teile wie abgebildet vor sich auf den Boden. Die rund geformten Rohre des Rahmens nehmen den Bügel mit den vormontierten Vorderrädern auf. Fixieren Sie die Stangen mit dem Stift und der Plastikspange.


Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor. In die oval geformten Rohre des Rahmens schieben Sie die Hinterräder. Drücken Sie hierfür die Stifte ein, sodass sich das Rohr in den Rahmen schieben lässt. Die hinteren Räder müssen außen am Rahmen entlanglaufen und die Ankipphilfen müssen innen liegen.



Fixieren Sie die Vorderräder mit den Stiften und der Plastikspange.



Drücken Sie den Plastikring zu, sodass er mit einem Klick einrastet und schließt.

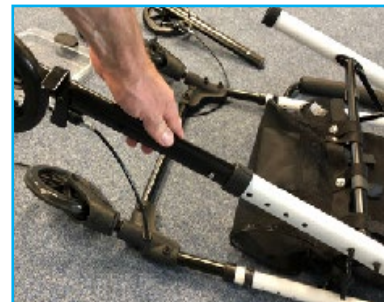

Die Hinterräder werden in den ovalen Rohren des Rahmens fixiert.



Achten Sie darauf, dass alle vier Räder in der gleichen Höhe angebracht sind.

Um große Körperlängen abzudecken, stellen Sie zuerst den Rahmen auf die größte Höhe ein und passen dann die Griffhöhe wie beschrieben an. Siehe Abschnitt „Griffhöhe einstellen“

Stellen Sie sicher, dass alle Rohre in der gleichen Höhe (Bohrung) angebracht sind.


## 5.2 Rückenbügel anbringen

Die Wölbung des Rückenbügel zeigt nach vorn in Fahrtrichtung. Drücken Sie die Metallzapfen ein und schieben Sie den Bügel in die Aussparung der Halterung. Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor.



## 5.3 Entfalten

Halten Sie den Rollator an den Griffen und stellen ihn vor sich auf. Betätigen Sie die Bremsen und schieben Sie gleichzeitig die Griffe nach vorn, sodass die Vorderräder nach vorn rollen und der Rollator sich entfaltet. Klappen Sie die Sitzfläche herunter und drücken Sie diese nach unten, um sicherzustellen, dass diese aufliegt.

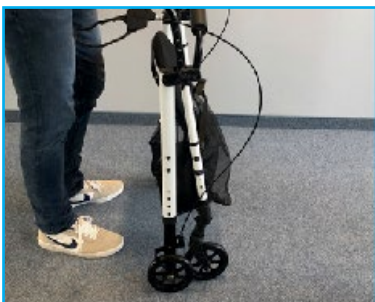



**STURZGEFAHR!** Gehen Sie mit Bedacht vor. In gefaltetem Zustand bietet Ihr Rollator noch keinen ausreichenden Halt.

## 5.4 Einstellung der Bremsen

Die Einstellung der Bremse sollten Sie nur durchführen, wenn Sie über ausreichende Kenntnisse verfügen. Lösen Sie die Kontermutter an der Halterung. Nun können Sie durch Drehen der längeren Einstellmutter die Bremswirkung verringern (drehen im Uhrzeigersinn) oder verstärken (entgegen dem Uhrzeigersinn). Ziehen Sie nun die Kontermutter wieder fest. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



Die Bremsen sind dann korrekt eingestellt, wenn ohne Betätigung der Bremse die Räder freilaufen und der Bremsbolzen die Räder nicht berührt.

Die Feststellbremse muss sich ohne größeren Kraftaufwand betätigen lassen.



Falsch eingestellte Bremsen können lebensbedrohliche Folgen haben. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen Medizinprodukteberater oder direkt an uns.

## 5.5 Nutzung der Bremsen

Der Rollator darf sich bei angezogenen Bremsen nicht wegschieben lassen. Wie Sie die Bremsen betätigen, lesen Sie im

entsprechenden Kapitel. Die korrekte Einstellung der Bremsen wird separat in dieser Gebrauchsanweisung erläutert.

## 6. EINRICHTEN DES ROLLATORS AUF BENUTZENDE PERSON

### 6.1 Griffhöhe einstellen

Stellen Sie sich hinter den Rollator, lassen Sie die Arme locker hängen. Die Griffe sollten sich nun in Höhe Ihrer Handgelenke befinden. Falls die Höhe nicht korrekt ist, gehen Sie wie folgt vor:


Lösen Sie die Sternschraube und ziehen Sie sie komplett aus dem Rahmen. Schieben oder ziehen Sie nun das Griffrohr in die gewünschte Höhe. Beachten Sie hierbei die äußere Markierung. Die Änderung kann in 5 Stufen erfolgen. Ist der Griff in der gewünschten Höhe, schieben Sie nun die Sternschraube wieder durch die Bohrungen und ziehen sie fest.



Stellen Sie sicher, dass beide Griffe in der gleichen Höhe eingestellt sind. Die Striche der Skala befinden sich außen am Schieberohr.



Lösen Sie die Sternschraube.

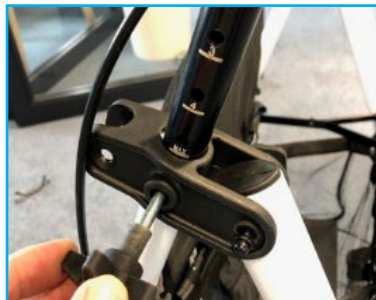

Ist der Griff in der gewünschten Höhe, schieben Sie die Schraube durch das Rohr und die Griffstange und ziehen Sie sie fest.



„MAX“ (Stufe 5) ist die maximale Höhe, welche Sie an den Griffen einstellen können.



Die korrekte Höheneinstellung haben Sie erreicht, wenn Sie zwischen den Hinterrädern stehend mit leicht gebeugten Armen die Schiebegriffe umfassen können.



Vergewissern sie sich vor Benutzung, dass beide Schiebegriffe eingerastet sind!

## 6.2 Tablett anbringen/entfernen

Der Rollator IR10+ ist mit einem Tablett ausgestattet. Si können Sie bequem z.B. ein Glas Wasser, eine Tasse Kaffee oder ähnliche Utensilien transportieren. Zum Anbringen des Tablett legen Sie es von oben auf die Halterungen, sodass beide Steckverbindungen rechts und links in die Halterungen gedrückt werden können.



Unterseite der Steckverbindung des Tablett.



So stecken Sie das Tablett auf die Halterungen.



Achten Sie darauf, dass die zu transportierenden Utensilien 3 kg nicht überschreiten.

Zum Entfernen ziehen Sie das leere Tablett einfach mit beiden Händen nach oben ab. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände auf dem Tablett befinden, wenn Sie es entfernen.

### 6.3 Netze verwenden

Der IR10+ verfügt über vormontierte Lasten-Netze, diese transportieren bis zu 5kg.



Klappen Sie die Sitzfläche nach oben.



Legen Sie Ihre zu transportierenden Gegenstände in das Netz.



Klappen Sie den Sitz wieder nach unten.




Bitte beachten Sie, dass die gesamte zusätzliche Last, die Sie mit Hilfe der Netze und des Tablett transportieren, 5kg nicht überschreiten darf.

## 7. BENUTZUNG DES IR10+

### 7.1 Gehen

Ihr Rollator ist entfaltet. Legen Sie die Hände auf die Griffe und halten Sie diese ohne Kraftaufwand fest. Treten Sie zwischen die hinteren Räder, sodass Ihre Füße auf der Höhe der Räder stehen. Wenn Sie nun den ersten Schritt machen, schieben Sie gleichzeitig den Rollator mit beiden Griffen vorwärts. Achten Sie darauf, dass Sie aufrecht zwischen den Griffen bleiben und den Oberkörper nicht vorbeugen. Sie können die Fahrt jederzeit verlangsamen, indem Sie einfach Ihre Schrittgeschwindigkeit verringern.

Fühlen Sie sich unsicher, können Sie durch Bremsen (s. Kapitel Bremsen) die Fahrt verlangsamen oder direkt zum Halten kommen.

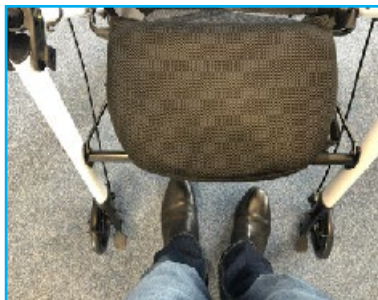

Ihre Füße befinden sich parallel zu den hinteren Laufrädern.



Gehen Sie so aufrecht wie möglich. Die hinteren Räder sollten sich seitlich neben Ihnen befinden.



So bitte nicht.



Üben Sie zunächst in Anwesenheit einer Begleitperson, bis Sie sich sicher fühlen.

## 7.2 Lenken

Wenn Sie die Richtung ändern möchten, z.B. nach rechts, wenden Sie sich nach rechts und erhöhen die Schubkraft mit der linken Hand am linken Griff und verlangsamen Sie gleichzeitig mit der rechten Hand am rechten Griff die Schubkraft. Zum Fahren nach links gehen Sie umgekehrt vor.

## 7.3 Bremsen

### Betriebsbremse

Ihr Rollator ist mit einer Betriebsbremse und einer Feststellbremse ausgestattet.

Um Ihre Fahrt zu verlangsamen oder zum Stehen zu kommen, betätigen Sie die Betriebsbremse, indem Sie die Bremshebel, wie an einem Fahrrad, nach oben zu den Griffen ziehen. Wenn sie loslassen, sind die Räder wieder freigegeben, und Sie können Ihre Fahrt ungebremst fortsetzen.

## Feststellbremse

Um Ihren Rollator gegen Wegrollen zu sichern oder auf der Sitzfläche Platz zu nehmen, drücken Sie beide Bremshebel nach unten, Richtung Boden, bis diese einrasten und der Rollator sicher steht.

Wenn Sie Ihre Fahrt fortsetzen möchten, lösen Sie die Bremse, indem Sie die Bremshebel wieder in die Ausgangsposition zurückstellen.

 Nutzen Sie immer beide Bremsen gleichzeitig. Ansonsten driftet der Rollator zur Seite weg und Sie riskieren, zu stürzen.



In dieser Position der Bremsen ist Ihr Rollator fahrbereit.



Feststellbremse: In dieser Position ist Ihr Rollator gegen Wegrollen geschützt und Sie können auf der Sitzfläche Platz nehmen.



Betriebsbremse: So bremsen Sie die Fahrt ab. Betätigen Sie immer beide Bremsen gleichzeitig.

## 7.4 Sitzen

Bevor Sie auf der Sitzfläche Ihres Rollators Platz nehmen können, müssen Sie die Feststellbremse betätigen und das Tablett entfernen. Vergewissern Sie sich, dass der Rollator auf ebener Fläche steht und beide Feststellbremsen arretiert sind, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern.







Nicht hinsetzen, wenn der Rollator nicht komplett entfaltet ist.



## 7.5 Überwinden von Hindernissen

Kleinere Hindernisse wie einen niedrigen Absatz überwinden Sie einfach durch Anwenden der Ankipphilfe. Halten Sie den Rollator mit beiden Händen an den Griffen. Betätigen Sie beidseitig die Betriebsbremsen, um ein unkontrolliertes Wegrollen zu vermeiden. Treten Sie nun mit dem rechten oder linken Fuß auf eine der Ankipphilfen an den hinteren Rädern. Ziehen Sie gleichzeitig die Griffe zu sich, bis die vorderen Rollen sich vom Boden abheben. Lassen Sie die Bremsen wieder los, nun können Sie leicht den Bordstein oder ein ähnliches Hindernis überwinden.

Bei höheren Hindernissen muss der Rollator angehoben oder getragen werden. Lassen Sie sich hier unbedingt von einer weiteren Person helfen. Der Rollator kann an den Griffen angehoben werden.

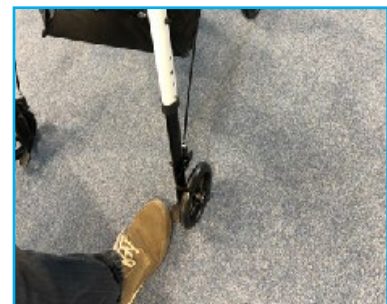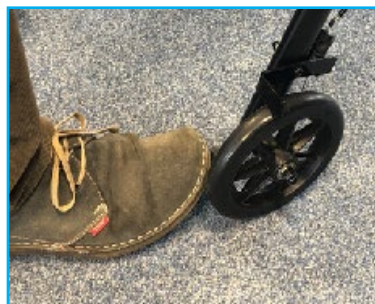



Nutzen Sie den Rollator nicht auf Rolltreppen. Sie könnten stürzen und sich oder andere schwer verletzen. Nehmen Sie stattdessen den Fahrstuhl oder die Hilfe anderer Personen in Anspruch.

## 7.6 Zusammenfallen

Betätigen Sie die Feststellbremsen. Entfernen Sie das Tablett. Klappen Sie den Sitz hoch und ziehen Sie anschließend den Bügel des Halterahmens, auf dem der Sitz aufliegt, nach oben. In dem Sie den Bügel hochziehen, lösen Sie den Klappmechanismus aus, und die Vorderräder gleiten zwischen die Hinterräder. Klappen Sie nun den Rückenbügel nach oben.



So zusammengefaltet lässt sich der Rollator bequem lagern und im Koffer- raum eines PKW transportieren. Die Mitnahme im Flugzeug klären Sie bitte mit der Fluggesellschaft. Beachten Sie die Maße in den technischen Daten des Rollators.

## 7.7 Der Rollator als Sitzgelegenheit

Ihr Rollator ist mit einer Sitzfläche und einer Rückenlehne ausgestattet. Bevor Sie sich setzen, müssen Sie **beide** Feststellbremsen anziehen. Der Rollator könnte sonst wegrollen und Sie könnten stürzen.



Verwenden Sie kein zusätzliches Sitzkissen, es könnte wegrutschen und Sie könnten stürzen.

## 7.8 Tragen des Rollators

Wenn Sie den Rollator tragen möchten, z. B. über ein Hindernis, klappen Sie ihn zusammen und legen den roten Halteriegel an. Tragen Sie den Rollator an dem Handgriff, der an der Oberseite der Sitzfläche angebracht ist.

## 7.9 Sicherheitshinweise

Vor jeder Verwendung muss der Rollator auf Beschädigungen untersucht und die Bremsen auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden.



Der Rollator ist nicht für die Verwendung auf einer Rolltreppe geeignet (Sturzgefahr!).

Das Material des Rollators ist nicht flammhemmend ausgerüstet.

Die maximale Belastbarkeit des Rollators von 136kg, des Tablett von 3kg und der Netztasche von 5kg dürfen nicht überschritten werden. Insgesamt dürfen nur 5kg Gepäck mit transportiert werden. Der Rollator darf nicht zum Transport von Lasten verwendet werden. Die Tragetasche ist nicht für den Transport von Tieren geeignet.

Der Rollator kann platzsparend zusammengefaltet werden. Beachten Sie bitte, dass beim Zusammen- und Auseinanderfalten Klemmgefahr besteht. Ziehen Sie zum Falten bzw. Entfalten des Rollators nicht an den Anbauteilen (Bremse, Räder, Korb etc.) sondern immer am Gestänge des Rollators.



Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und befestigt sind.

- Machen Sie die ersten Gehversuche nur in Begleitung einer Hilfsperson.
- Benutzen Sie den Rollator ausschließlich in Innenräumen auf trockenem Boden.
- Benutzen Sie den Rollator niemals als Rollstuhl oder zum Schieben anderer Personen.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Bremsen einwandfrei funktionieren.
- Nutzen Sie die Betriebs- sowie die Feststellbremse immer beidseitig.
- Beachten Sie die Klemmgefahr beim Falten und Entfalten
- Hängen Sie keine Taschen an die Griffe, dies beeinträchtigt die Stabilität und kann Stürze verursachen
- Nutzen Sie den Rollator niemals als Aufstiegshilfe
- Lassen Sie den Rollator nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von kleinen Kindern
- Schützen Sie den Rollator vor direkter Sonneneinstrahlung. Es können sich Teile wie z.B. Griffe oder Sitzfläche extrem aufheizen und beim Berühren Verbrennungen verursachen.
- Sollten Sie Schäden an Ihrem Rollator feststellen, benutzen Sie ihn nicht. Wenden Sie sich an Ihren Händler, einen Medizinprodukteberater oder an uns.
- Der Rollator ist nicht zur Nutzung in Kombination mit anderen Geräten vorgesehen.

## **8. REINIGUNG UND DESINFEKTION**

### **8.1 Reinigung**

Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (keine Drahtbürste verwenden!)

Die Rückenlehne, der Sitz und die Transporttasche können mit einer milden Seifenlauge abgewaschen werden.



**Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger!**

## **8.2 Desinfektion**

Der Rollator ist mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel desinfizierbar. Verwenden Sie zugelassene Sprüh-Desinfektionsmittel oder Wisch-Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis. Die Robert-Koch-Liste der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie z.B. unter <https://www.rki.de>.

## **9. WIEDEREINSATZ**

Der Rollator IR10+ ist nicht für den Wiedereinsatz geeignet.

## 10. TECHNISCHE DATEN

| <b>Gewichte</b>                              |                     |                |                |                |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Max. Nutzergewicht                           | 136 kg              |                |                |                |
| Eigengewicht inkl. Netz und Tablet           | 6,0 kg              |                |                |                |
| Gewicht Netz/Tablett                         | 0,15 kg/0,37 kg     |                |                |                |
| Max. Nutzlast Netz                           | 5kg                 | Gesamt: 5kg    |                |                |
| Max. Nutzlast des Tablettts                  | 3kg                 |                |                |                |
| <b>Abmessungen</b>                           |                     |                |                |                |
| Breite                                       | 620 mm              |                |                |                |
| Sitzbreite                                   | 375 mm              |                |                |                |
| Sitztiefe                                    | 245 mm              |                |                |                |
| Breite zwischen den Schiebegriffen           | 410 mm              |                |                |                |
| Durchmesser Schiebegriffe                    | 30 mm               |                |                |                |
| Faltmaß (H x B x L)                          | 870 x 290 x 630 mm  |                |                |                |
| <b>Rahmeneinstellung von klein nach groß</b> | <b>Stufe 1</b>      | <b>Stufe 2</b> | <b>Stufe 3</b> | <b>Stufe 4</b> |
| Sitzhöhe in mm                               | 490                 | 515            | 540            | 565            |
| Max. Länge in mm                             | 570                 | 590            | 610            | 630            |
| Wendekreis in mm                             | 780                 | 790            | 800            | 810            |
| Höhe der Schiebegriffe (5-fach) in mm        | 785-885             | 810-910        | 835-935        | 860-960        |
| Räder: Durchmesser x Breite                  | 150 x 20 mm         |                |                |                |
| <b>Materialien</b>                           |                     |                |                |                |
| Rahmen                                       | Aluminium, lackiert |                |                |                |
| Griffe                                       | PU                  |                |                |                |
| Sitz   | PVC, PP, Mesh       |                |                |                |
| Entflammbarkeit                              | flammhemmend        |                |                |                |
| Trocken lagern, vor Sonne und Hitze schützen |                     |                |                |                |

## 11. ENTSORGUNG

Wenn Ihr IR10+ nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wenn Sie die Entsorgung selbst übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften Ihres Wohnorts.

## 12. KONTROLLE, REPARATUR UND WARTUNG

Ihr Rollator braucht regelmäßige Wartung. Ein schlecht gewarteter Rollator kann zu technischen Problemen bis hin zum Verlust der Garantieansprüche führen.

Daher ist es sehr wichtig, dass Sie vorbeugend regelmäßig einige Punkte überprüfen. Wir zeigen untenstehend die Wartung, die Sie selbst durchführen können.

| Inspektion  | Vor Fahrt-<br>antritt | monatlich | jährlich |
|---|-----------------------|-----------|----------|
| Funktion der Fahrbremse prüfen                                | X                     |           |          |
| Funktion der Feststellbremse prüfen                           | X                     |           |          |
| Festen Sitz des Rückengurts prüfen                            | X                     |           |          |
| Überprüfung der Räder und Lenkung<br>der Radgabeln            | X                     |           |          |
| Reinigung   |                       | X         |          |
| <b>Überprüfung Ihres Produkts durch<br/>einen Fachhändler</b> |                       |           | X        |

Erkundigen Sie sich beim Fachhändler ob ggf. Ersatzgeräte vorhanden sind.



Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

## 13. GARANTIE

Für dieses Produkt von Rehab Direct gilt eingeschränkte Gewährleistung von 1 Jahr. Für den Rahmen oder das Kreuz des Produkts verlängert sich bei regelmäßiger und sachgerecht dokumentierter Überprüfung und Wartung die Gewährleistung auf 5 Jahre.

Unsere Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Mängel dieses Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. In jedem Falle ist der Gewährleistungsabschnitt vollständig ausgefüllt und eine Kopie der Servicedokumentation bei uns einzureichen.

Von Gewährleistungs- und Produkthaftungsansprüchen ausdrücklich ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch einen Gebrauch außerhalb der Zweckbestimmung und der Regelungen dieser Gebrauchsanweisung entstanden sind. Das Gleiche gilt für Veränderungen des Rollators und den Austausch oder Ersatz von Originalbauteilen gegen Fremdteile oder dem Original nachgebaute Teil sowie für Folgender Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Ebenfalls wird die Gewährleistung ausgeschlossen, wenn Wartungsarbeiten nicht oder nicht sachgerecht durchgeführt wurden, sowie bei **Änderungen und Ergänzungen an diesem Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung.**

| <b>GARANTIEINFORMATION FÜR DAS HILFSMITTEL:</b> |                          |
|---|--------------------------|
| Modell  |                          |
| Seriennummer                                    | Stempel des Fachhändlers |
| Datum der Inbetriebnahme                        |                          |



## **14. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Die Rehab Direct GmbH & Co. KG erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt die Anforderungen der EU- Verordnung für Medizinprodukte MDR 2017/745 erfüllt.

## 15. NOTIZEN





**Rehab Direct GmbH & Co. KG**

Düsseldorfer Straße 6-8

68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 – 950 495 55