

TR



KULLANIM KILAVUZU

PHI MASTER MACHINE

KABLOLU PMU MACHINE

İÇERİK

El aleti	1 adet
Yedek batarya	2 adet
Şarj Cihazı	1 adet
USB-A-USB-C Kablosu	1 adet



TEKNİK BİLGİLER

ADI

Phi Master Makinesi

AME

2015 Fırçasız motor

MAKİNE AĞIRLIĞI

205.8g (batarya dahil)

BATARYA AĞIRLIĞI

32g

BOYUTLAR (D X U)

33 x 137.3 mm

İĞNE UZUNLUĞU

4.0mm

İĞNE DARBESİ

3.5mm

BATARYA KAPASİTESİ

1900mAh

BEKLEME SÜRESİ

8V'ta yaklaşık 8 saat sürekli kullanım

EKRAN

OLED ekran



ÇALIŞMA GERİLİMİ


5-12V

ÇALIŞMA MODU

E-Tasarruf modu / F-Esnek mod

MAKİNEYE GENEL BAKIŞ

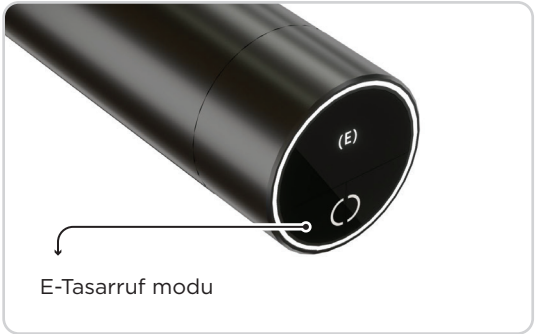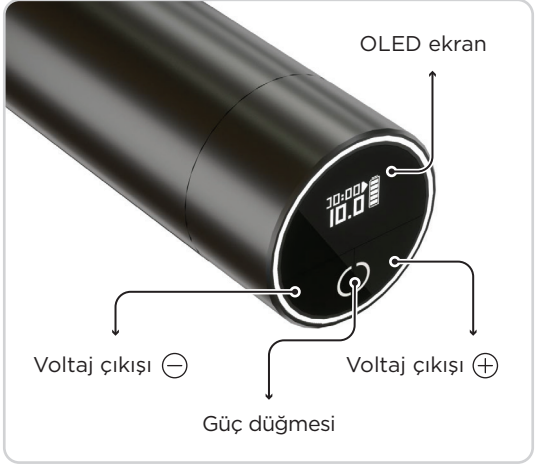

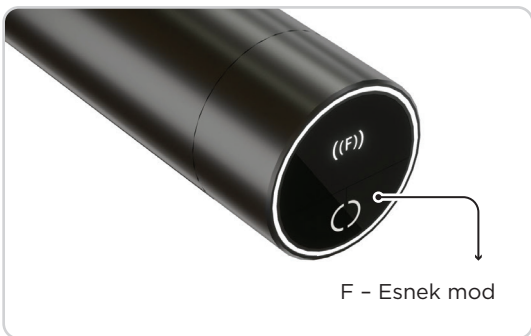



Voltaj	PPS (saniye başına darbe)	F modu
4.0V	30	25
4.5V	32	27
5.0V	35	30
5.5V	40	35
6.0V	45	40
6.5V	50	45
7.0V	55	50
7.5V	65	60
8.0V	75	70
8.5V	80	75
9.0V	85	80
9.5V	90	85
10.0V	95	90
10.5V	100	95
11.0V	105	100
11.5V	115	110
12.0V	125	120

NASIL KULLANILIR

İğne Kartuşu Bağlantısı


Sterilize edilmiş paketten bir iğne kartuşu çıkarın ve el aletine bağlayın. Kartuşu saat yönünde çevirerek kilitleyin. İğne kartuşunu çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin ve el aletinden ayırın.

Güç AÇMA/KAPAMA, hız seviyesi ve çalışma modu ayarı

Makineyi AÇMAK/KAPATMAK için güç düğmesine uzun basın. Makineyi DURAKLATMAK/BAŞLATMAK için güç düğmesine kısa basın. E moduna girmek için makine duraklatıldıktan sonra voltaj çıkışı - düğmesine veya F moduna girmek için voltaj çıkışı + düğmesine basın. Hız seviyesini değiştirmek için voltaj çıkışı - / + düğmesine basın.

İğne Uzunluğu Ayarı

Ayar bölümünü sola veya sağa çevirerek iğne uzunluğunu ayarlayın.

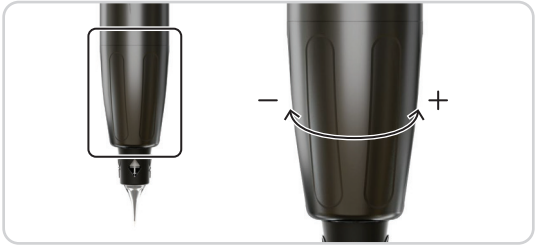

Bataryayı Şarj Etme

Bataryayı, batarya şarj cihazı yuvasına yerleştirin. USB-A'yı USB-C kablosuna bağlayarak şarj cihazını bağlayın.

ÖNLEMLER VE BAKIM

- Cihazı onarmayın, demonte etmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Makineyi ıslak ellerle tutmayın veya güç kablolarını çıkarmayın.
- Kabloyu çizmeyin, kesmeyin veya bükmeyin.
- Makineyi aşırı güç kullanarak sallamayın veya çekmeyin.

- Makineyi kuru bir yerde, oda sıcaklığında tutun.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Makineyi manyetik güçlerden uzak tutun.
- Makine temiz tutulmalıdır.

KULLANMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

- Bu makine sadece profesyonel kullanım içindir.
- Kullanmadan önce makinenin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Kullanmadan önce iğne kartuşu paketinin açık veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca son kullanma tarihini de kontrol edin. İğne kartuşu hasar görmüşse, kullanılmamış olsa bile atılmalıdır. İğne kartuşu kullanılıp atılabilir ve sadece tek kullanımlıdır.
- İşlem bölgesini ve ellerinizi temiz tutun.
- Cihazı kullanırken aşırı basınç uygulamayın. Cihazı sadece sağlıklı, yetişkin cilt üzerinde kullanın. Alerji veya enfeksiyondan şüpheleniyorsanız, makineyi kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora danışın.

• **Aşağıdaki belirtilere sahip bir kişiye uygulama yapmadan önce lütfen bir doktora danışın:**

- 1) Yüksek vücut ısısı nedeniyle düzenli olarak tedavi gören kişiler.
- 2) 38°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda daha da kötüleşen kronik hastalıklardan muzdarip kişiler.
- 3) Uzun süre steroid kullanmış veya karaciğer hastalığı nedeniyle kapiller ektaziye yatkın kişiler.
- 4) Yüz bölgesinde melanozdan muzdarip kişiler.
- 5) Ciltlerinin durumundan emin olmayan kişiler.
- 6) Kötü huylu tümörler, bulaşıcı hastalıklar, hemofili, tüberküloz epilepsi, lösemi veya alerjik hastalıklardan muzdarip kişiler.
- 7) Artrit, yüksek tansiyon, diyabet, keloit veya kalp hastalığı olan kişiler.
- 8) Düzensiz tansiyondan muzdarip kişiler.
- 9) Hamile veya emziren kadınlar.

10) Fiziksel olarak aşırı zayıf olan kişiler.

11) İşlem bölgesinde cilt sorunları olan kişiler (hassas cilt, atopik cilt).

GARANTİ

Teknik sorunlar olması durumunda, lütfen satın aldığınız yerle iletişime geçin. Garanti süresi satın alma tarihinden itibaren 2 yıldır ve garanti hizmeti ücretsizdir. Garanti, dikkatsiz muameleden kaynaklanan yan etkileri; yanlış kullanım, kötüye kullanım, kaza, değişiklik, uygun olmayan fiziksel ortam veya çalışma ortamı, doğal afetler, dalgalı çalışma, uygun olmayan bakım veya ürün bilgi materyaline uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan arıza veya hasarı; nakliye sırasında üründe meydana gelen arıza veya hasarı; onaysız bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan arızayı kapsamaz.







PHIACADEMY