




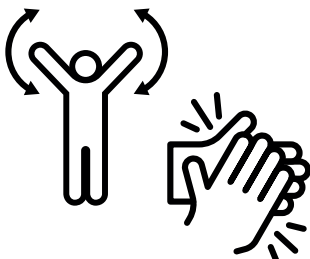
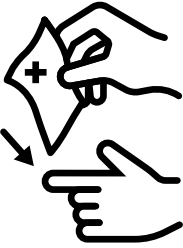
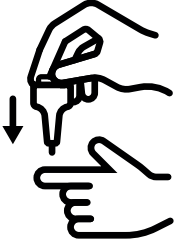
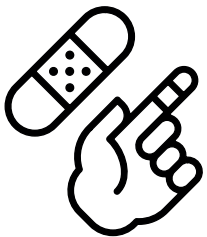
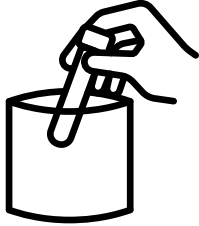
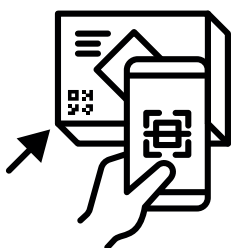


<p>1.  WICHTIG </p>  <p>NUTZE DIE WEBAPP UM DIE TESTBOX ZU AKTIVIEREN UND DEN TEST ZU STARTEN. OHNE WEBAPP, KEIN ERGEBNIS.</p>	<p>2. </p> <ul style="list-style-type: none"> • SAFETYBAG • ABSORPTIONSTUCH • PROBENRÖHRCHEN • 2X DESINFZEKTIONSTUCH • 2X VERSCH. LANZETTEN • 2X PFLASTER <p>PRÜFE DIE BESTANDTEILE DER TESTBOX AUF VOLLSTÄNDIGKEIT BEVOR DU MIT DEM TEST BEGINNST.</p>
<p>3. </p> <p>SCANNE DEN BARCODE UM DEINE PROBE MIT DEINEM AKTIVIERUNGSCODE ZU VERKNÜPFEN.</p>	<p>4. </p> <p>BEWEGE DEINE ARME KREISFÖRMIG UND KLATSCH/ REIBE DEINE HÄNDE ZUSAMMEN UM DEN BLUTFLUSS ZU ERHÖHEN.</p>
<p>5. </p> <p>DESINFIZIERE DEN FINGER WELCHER ZUR BLUTABNAHME DIENEN SOLL MIT DEM BEIGELEGTEM DESINFZEKTIONSTUCH.</p>	<p>6. </p> <p>LEGE DEINEN FINGER AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE, DRÜCKE DIE LANZETTE SEITLICH AN UND LÖSE SIE ERST DANN AUS.</p>
<p>7. </p> <p>FÜLLE DAS PROBENRÖHRCHEN BIS ZUR 500µl LINIE MIT BLUT AUF. BEKLEBE DANN DEN FINGER MIT DEM PFLASTER.</p>	<p>8. </p> <p>LEGE DAS PROBENRÖHRCHEN IN DEN BEIGEFÜGTEN SAFETYBAG UND VERSCHLIEßE DIESEN IN DER TESTBOX.</p>
<p>9. </p> <p>SCANNE DEN CODE AUF DER RÜCKSEITE DER TESTBOX UM DIESE FÜR DEN RÜCKVERSAND ZU REGISTRIEREN.</p>	<p>10. </p> <p>GIB DEINE PROBE AM SELBEN TAG (AM BESTEN) ODER SPÄTESTENS AM FOLGETAG IN EINER POSTFILIALE AB.</p>