


## 1. **WICHTIG**



**NUTZE DIE WEBAPP** UM DIE TESTBOX ZU AKTIVIEREN UND DEN TEST ZU STARTEN. **OHNE WEBAPP, KEIN ERGEBNIS.**

## 2.

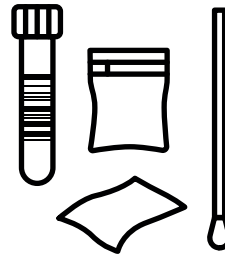

- SAFETYBAG
- ABSORPTIONSTUCH
- PROBENRÖHRCHEN
- ABSTRICHSTÄBCHEN


PRÜFE DIE BESTANDTEILE DER TESTBOX AUF VOLLSTÄNDIGKEIT BEVOR DU MIT DEM TEST BEGINNST.

## 3.




SCANNE DEN BARCODE UM DEINE PROBE MIT DEINEM AKTIVIERUNGSCODE ZU VERKNÜPFEN.

## 4.

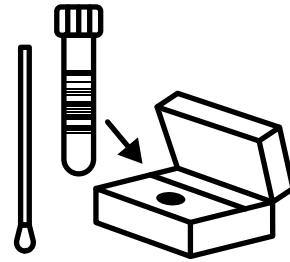


WASCH DIR DIE HÄNDE, ÖFFNE DAS ABSTRICHSTÄBCHEN UND PROBENRÖHRCHEN UND STELLE DIESES AB.

## 5.

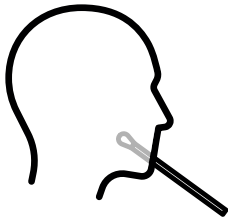

NEHME DAS ABSTRICHSTÄBCHEN IN DEN MUND UND LEGE ES MITTIG AUF DEINER ZUNGE AB.


## 6.

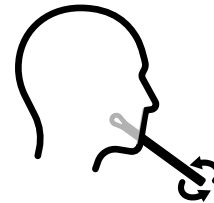

**53 SEKUNDEN**


DREHE DAS ABSTRICHSTÄBCHEN HIN UND HER BIS DER IN DER WEBAPP INTEGRIERTE TIMER ABGELAUFEN IST.

## 7.

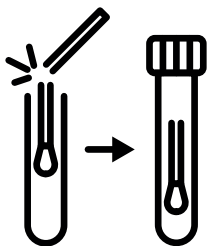


KNICKE DAS ABSTRICHSTÄBCHEN IN DEM PROBENRÖHRCHEN AB UND VERSCHLIEßE DIESES.

## 8.

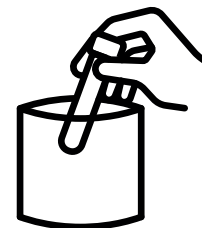


LEGE DAS PROBENRÖHRCHEN IN DEN BEIGEFÜGTEN SAFETYBAG UND VERSCHLIEßE DIESEN IN DER TESTBOX.

## 9.

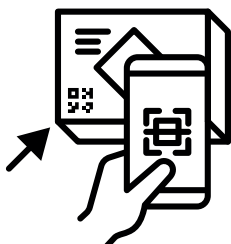

SCANNE DEN CODE AUF DER RÜCKSEITE DER TESTBOX UM DIESE FÜR DEN RÜCKVERSAND ZU REGISTRIEREN.

## 10.

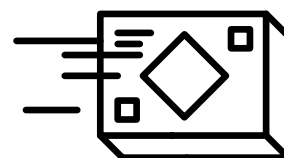

GIB DEINE PROBE AM SELBEN TAG (AM BESTEN) ODER SPÄTESTENS AM FOLGETAG IN EINER POSTFILIALE AB.