

ABSTRICH-TEST KURZANLEITUNG

SO FÜHRST DU DEINEN ABSTRICH-TEST DURCH:

ONLINE REGISTRIEREN



Scanne den QR-Code, um direkt in die WebApp zu gelangen oder besuche die folgende Seite:
home.covimedical.de

Wenn dies dein erster Hometest ist, erstelle dir ein **Benutzerkonto**, um mit dem Test loszulegen.


PROBE ENTNEHMEN



Halte den **Aktivierungscode** bereit, den du separat erhalten hast, um deine Testbox zu aktivieren.

Unsere **WebApp** führt dich durch den Probenentnahmeprozess. Bitte beachte ganz genau die Schritte in der Anleitung.

TESTBOX ZURÜCKSENDEN

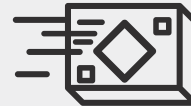

Verpacke deine Probe gemäß der **Packanleitung** in der WebApp. Achte darauf, **alles sicher** zu verschließen.

Wähle einen **Drop-Off-Punkt** und gib die Testbox innerhalb der in der WebApp genannten Fristen ab.

WICHTIGE HINWEISE:

Um deine Testbox zu nutzen und einen Test zu starten, benötigst du einen gültigen Aktivierungscode, den du beim Kauf der Testbox erhalten hast. Es gelten testspezifische Nutzungsbedingungen. Diese sind auf der Webseite www.covimedical.de sowie in der WebApp abrufbar.

Diese Testbox dient der einmaligen Gewinnung von Abstrichproben. Bitte befolge genau die Anweisungen in der WebApp und beachte, dass eine qualitativ unzureichende Probenentnahme zu einem falschen Testergebnis führen kann.

Das Probenröhrchen enthält ein Konservierungsmittel und sollte von Kindern ferngehalten werden. Verschlucken sowie Kontakt mit Haut und Augen müssen vermieden werden. Bei Kontakt Haut und Augen mit Wasser gründlich ausspülen.

Nach Auswertung des von dir eingesandten Probenmaterials übermitteln wir dir einen digitalen Laborbefund. Die Ergebnisse unserer Tests dürfen auf keinen Fall als Ersatz für eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete medizinische Fachkräfte angesehen werden. Ausdrücklich warnen müssen wir vor unkontrollierten Selbstbehandlungsversuchen.

DIESE TESTBOX ENTHÄLT:

Kurzanleitung

CoviMedical GmbH, Steinwiese 18, 35685 Dillenburg, Germany

Probenröhrchen

Medical Wire & Equipment Co Ltd, Unit 21, Leafield Industrial Estate, Corsham SN13 9SW, UK 

Abstrichtupfer

Medical Wire & Equipment Co Ltd, Unit 21, Leafield Industrial Estate, Corsham SN13 9SW, UK 

Absorptionsblatt

Daklapack Europe B.V., Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad, Netherlands

Safetybag

Daklapack Europe B.V., Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad, Netherlands

LEGENDE:



Hersteller



Chargennummer



Verfallsdatum



Anleitung beachten



Verpackung recycelbar



Nur zum einmaligen Gebrauch



Lagerung bei 5°C-25°C



EU-Konformitätszeichen

SUPPORT:



Hilfe zu deinem Test findest du unter qr.covimedical.de/home/swab/hilfe



COVIMEDICAL GMBH

Steinwiese 18
35685 Dillenburg, Germany