

# BLUT-TEST KURZANLEITUNG

## SO FÜHRST DU DEINEN BLUT-TEST DURCH:

### ONLINE REGISTRIEREN



Scanne den QR-Code, um direkt in die WebApp zu gelangen oder besuche die folgende Seite:  
**home.covimedical.de**

Wenn dies dein erster Hometest ist, erstelle dir ein **Benutzerkonto**, um mit dem Test loszulegen.

### PROBE ENTNEHMEN



Halte den **Aktivierungscode** bereit, den du separat erhalten hast, um deine Testbox zu aktivieren. Unsere **WebApp** führt dich durch den Probenentnahmeprozess.

**Bitte trinke min. 1 Stunde vor dem Test min. 1 l Flüssigkeit!**

### TESTBOX ZURÜCKSENDEN



Verpacke deine Probe gemäß der **Packanleitung** in der WebApp. Achte darauf, alles sicher zu verschließen.

Wähle einen **Drop-Off-Punkt** und gib die Testbox innerhalb der in der WebApp genannten Fristen ab.

## WICHTIGE HINWEISE:

Um deine Testbox zu nutzen und einen Test zu starten, benötigst du einen gültigen Aktivierungscode, den du beim Kauf der Testbox erhalten hast. Es gelten testspezifische Nutzungsbedingungen. Diese sind auf der Webseite [www.covimedical.de](http://www.covimedical.de) sowie in der WebApp abrufbar.

Diese Testbox dient der einmaligen Gewinnung von Blutproben. Bitte befolge genau die Anweisungen in der WebApp und beachte, dass eine qualitativ unzureichende Probenentnahme zu einem fehlerhaften Befund führen kann. Das Probenröhrchen enthält ein Konservierungsmittel und sollte von Kindern ferngehalten werden.


Nach Auswertung des von dir eingesandten Probenmaterials übermitteln wir dir einen digitalen Laborbefund. Die Ergebnisse unserer Tests dürfen auf keinen Fall als Ersatz für eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete medizinische Fachkräfte angesehen werden. Ausdrücklich warnen müssen wir vor Selbstbehandlungsversuchen ohne ärztliche Beratung.

## DIESE TESTBOX ENTHÄLT:

### Kurzanleitung

CoviMedical GmbH, Steinwiese 18, 35685 Dillenburg, Germany


### Probenröhrchen

Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstr. 1, 51588 Nürmbrecht, Germany 

### Einweg-Lanzette (blau)

Becton, Dickinson and Company, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland 

### Einweg-Lanzette (rosa)

Sarstedt AG & Co. KG, Sarstedtstr. 1, 51588 Nürmbrecht, Germany 

### Desinfektionstuch (2 x)

B.Braun Melsung AG, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany

### Pflaster (2 x)

NOBAMED PAUL DANZ AG, Höltkenstr. 1-5, 58300 Wetter, Germany 

### Absorptionsblatt

Daklapack Europe B.V., Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad, Netherlands

### Safetybag

Daklapack Europe B.V., Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad, Netherlands

## LEGENDE:



Hersteller



Chargennummer



Verfallsdatum



Anleitung beachten



Verpackung recyclebar



Nur zum einmaligen Gebrauch



EU-Konformitätszeichen

## SUPPORT:



Hilfe zu deinem Test findest du unter [qr.covimedical.de/home/blood/hilfe](http://qr.covimedical.de/home/blood/hilfe)



**COVIMEDICAL GMBH**

Steinwiese 18  
35685 Dillenburg, Germany

Bei Raumtemperatur lagern