


1. **WICHTIG**



NUTZE DIE WEBAPP UM DIE TESTBOX ZU AKTIVIEREN UND DEN TEST ZU STARTEN. **OHNE WEBAPP, KEIN ERGEBNIS.**

2.

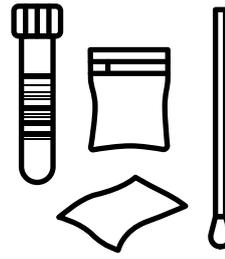

- SAFETYBAG
- ABSORPTIONSTUCH
- PROBENRÖHRCHEN
- ABSTRICHSTÄBCHEN


PRÜFE DIE BESTANDTEILE DER TESTBOX AUF VOLLSTÄNDIGKEIT BEVOR DU MIT DEM TEST BEGINNST.

3.




SCANNE DEN BARCODE UM DEINE PROBE MIT DEINEM AKTIVIERUNGSCODE ZU VERKNÜPFEN.

4.

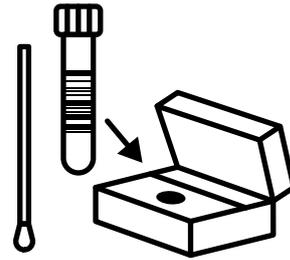

WASCH DIR DIE HÄNDE, ÖFFNE DAS ABSTRICHSTÄBCHEN UND PROBENRÖHRCHEN UND STELLE DIESES AB.

5.

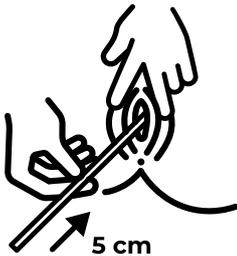


BEGEBE DICH IN EINE HOCKENDE POSITION UND FÜHRE DAS STÄBCHEN BIS ZU 5 CM VAGINAL EIN.

6.




WENN DIE TIEFE VON 5 CM ERREICHT IST, DREHE DAS ABSTRICHSTÄBCHEN 10-15 SEKUNDEN LANG.

7.

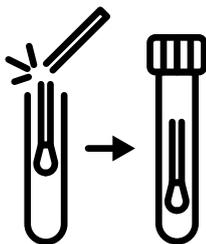

KNICKE DAS ABSTRICHSTÄBCHEN IN DEM PROBENRÖHRCHEN AB UND VERSCHLIEßE DIESES.

8.

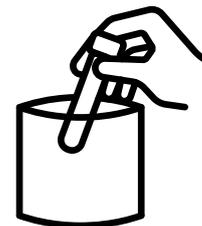


LEGE DAS PROBENRÖHRCHEN IN DEN BEIGEFÜGTEN SAFETYBAG UND VERSCHLIEßE DIESEN IN DER TESTBOX.

9.



SCANNE DEN CODE AUF DER RÜCKSEITE DER TESTBOX UM DIESE FÜR DEN RÜCKVERSAND ZU REGISTRIEREN.

10.

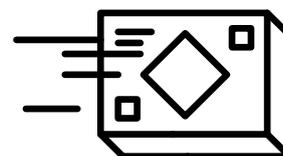

GIB DEINE PROBE AM SELBEN TAG (AM BESTEN) ODER SPÄTESTENS AM FOLGETAG IN EINER POSTFILIALE AB.

1.  **WICHTIG** 



NUTZE DIE WEBAPP UM DIE TESTBOX ZU AKTIVIEREN UND DEN TEST ZU STARTEN. **OHNE WEBAPP, KEIN ERGEBNIS.**

2.



- SAFETYBAG
- ABSORPTIONSTUCH
- PROBENRÖHRCHEN
- FALTBARER URINBECHER
- STERILE PIPETTE


PRÜFE DIE BESTANDTEILE DER TESTBOX AUF VOLLSTÄNDIGKEIT BEVOR DU MIT DEM TEST BEGINNST.

3.




SCANNE DEN BARCODE UM DEINE PROBE MIT DEINEM AKTIVIERUNGSCODE ZU VERKNÜPFEN.

4.

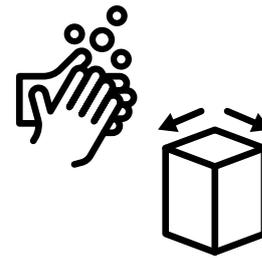


WASCH DIR DIE HÄNDE, ÖFFNE DIE STERILE PIPETTE UND FALTE DEN URINBECHER AUF.

5.

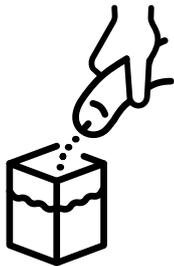


GEBE ETWAS VOM ERSTSTRAHL DES **MORGEN-URINS** IN DEN BECHER (**HÖCHSTE ERREGERDICHTHEIT AM MORGEN**).

6.

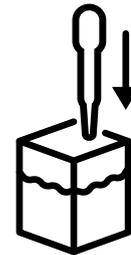


STECKE DIE PIPETTE IN DEN URINBECHER UND ZIEHE ETWAS MORGEN-URIN IN DIE PIPETTE AUF.

7.

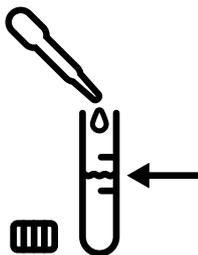

HALTE DIE PIPETTE NUN IN ÜBER DAS PROBENRÖHRCHEN UND FÜLLE DIES BIS ZWISCHEN DIE MARKIERUNGEN AUF.

8.

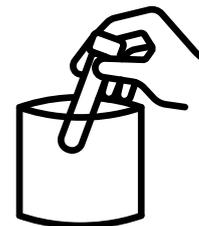


LEGE DAS PROBENRÖHRCHEN IN DEN BEIGEFÜGTEN SAFETYBAG UND VERSCHLIEßE DIESEN IN DER TESTBOX.

9.



SCANNE DEN CODE AUF DER RÜCKSEITE DER TESTBOX UM DIESE FÜR DEN RÜCKVERSAND ZU REGISTRIEREN.

10.

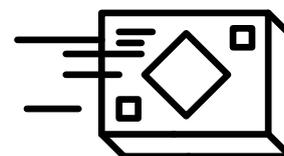

GIB DEINE PROBE AM SELBEN TAG (AM BESTEN) ODER SPÄTESTENS AM FOLGETAG IN EINER POSTFILIALE AB.