

# URIN-TEST

## KURZANLEITUNG

### SO FÜHRST DU DEINEN URIN-TEST DURCH:


#### ONLINE REGISTRIEREN



Scanne den QR-Code, um direkt in die WebApp zu gelangen oder besuche die folgende Seite:  
**home.covimedical.de**

Wenn dies dein erster Hometest ist, erstelle dir ein **Benutzerkonto**, um mit dem Test loszulegen.


#### PROBE ENTNEHMEN

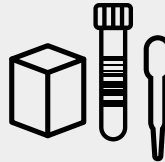

Halte den **Aktivierungscode** bereit, den du separat erhalten hast, um deine Testbox zu aktivieren. Unsere **WebApp** führt dich durch den Probenentnahmevergang.

**Bitte verwende für diesen Test den ersten Morgenurin!**

#### TESTBOX ZURÜCKSENDEN

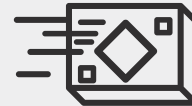

Verpacke deine Probe gemäß der **Packanleitung** in der WebApp. Achte darauf, **alles sicher** zu verschließen.

Wähle einen **Drop-Off-Punkt** und gib die Testbox innerhalb der in der WebApp genannten Fristen ab.

## WICHTIGE HINWEISE:

Um deine Testbox zu nutzen und einen Test zu starten, benötigst du einen gültigen Aktivierungscode, den du beim Kauf der Testbox erhalten hast. Es gelten testspezifische Nutzungsbedingungen. Diese sind auf der Webseite [www.covimedical.de](http://www.covimedical.de) sowie in der WebApp abrufbar.

Diese Testbox dient der einmaligen Gewinnung von Urinproben. Es sollte der allererste Morgenurin verwendet werden. Bitte befolge genau die Anweisungen in der WebApp und beachte, dass eine qualitativ unzureichende Probenentnahme zu einem falschen Testergebnis führen kann.

Das Probenröhrchen enthält ein Konservierungsmittel und sollte von Kindern ferngehalten werden. Verschlucken sowie Kontakt mit Haut und Augen müssen vermieden werden. Bei Kontakt Haut und Augen mit Wasser gründlich ausspülen.

Nach Auswertung des von dir eingesandten Probenmaterials übermitteln wir dir einen digitalen Laborbefund. Die Ergebnisse unserer Tests dürfen auf keinen Fall als Ersatz für eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete medizinische Fachkräfte angesehen werden. Ausdrücklich warnen müssen wir vor unkontrollierten Selbstbehandlungsversuchen.

## DIESE TESTBOX ENTHÄLT:

### Kurzanleitung

CoviMedical GmbH, Steinwiese 18, 35685 Dillenburg, Germany

### Probenröhrchen

Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Sandhofer Straße 115, 63805 Mannheim, Germany 

### Pasteurpipette

Biosigma SpA, Via Valletta 6, 30010 Cona VE, Italy 

### Urin-Sammelbecher

MedDX Solutions Limited, Unit 3, Skylon Place, Hursey Road, Rotherwas, Hereford, HR2 6NX, UK 

### Absorptionsblatt

Daklapack Europe B.V., Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad, Netherlands

### Safetybag

Daklapack Europe B.V., Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad, Netherlands

## LEGENDE:



Hersteller



Chargennummer



Verfallsdatum



Anleitung beachten



Verpackung recycelbar



Nur zum einmaligen Gebrauch



Lagerung bei 15°C-25°C



EU-Konformitätszeichen

## SUPPORT:



Hilfe zu deinem Test findest du unter [qr.covimedical.de/home/urine/hilfe](https://qr.covimedical.de/home/urine/hilfe)



**COVIMEDICAL GMBH**

Steinwiese 18  
35685 Dillenburg, Germany