

EVA GEBRAUCHSANWEISUNG



Wir gratulieren zum Kauf Ihres EVA Evakuierungsbezug aus dem Hause IQfy GmbH
Sie können sich auf dieses Qualitätsprodukt verlassen.

EINSATZORT: Krankenhaus und Pflegeheim –
für alle Matratzen entsprechend
der Größe geeignet

ZWECKBESTIMMUNG: Mit Evakuierungsmatratzen können PatientInnen,
Menschen mit Einschränkungen oder Verletzte
auch über Treppen evakuiert werden, wenn Aufzüge
nicht mehr genutzt werden können. Sie sind besonders
einfach in der Anwendung und komfortabel für PatientInnen.

Sie verfügen über eine extrem hohe Gleitfähigkeit auf allen
festen Unterlagen wie PVC, Laminat, Linoleum, Stein, Nadelfilz usw.

- Leichte Handhabung
- Evakuierung durch nur eine Person möglich
- Stabile Transportschlaufen abgestimmt mit Fachleuten der Feuerwehr
- Hohe Gleitfähigkeit

KONTRAINDIKATION: Keine Kontraindikationen bzw. Anwendungsrisiken bekannt.

ANWENDUNGSHINWEISE: Eine Produktvorbereitung ist nicht erforderlich!

Beim Austausch eines bereits vorhandenen Bezuges ziehen Sie diesen ab und beziehen
den Matratzenkern mit dem EVA Evakuierungsbezug.

Die Ober- und Unterseite sind durch einen verdeckten aushabbaren Reißverschluss
verbunden. Die Oberseite ist dadurch für Reinigungszwecke abnehmbar.

Die Trageschlaufen und Sicherheitsgurte sind im Alltag sicher mit Klettverschlüssen befestigt.
Im Bedarfsfall lässt sich alles leicht lösen. Eine Evakuierungsempfehlung / Handhabung finden
Sie rückseitig!

WARTUNG UND PFLEGE:

REINIGUNG: Der Bezug kann bis 95° C gereinigt werden.


DESINFEKTION: Wischdesinfektion u./o. Waschdesinfektion. PU-Bezüge sind sehr gut beständig gegen
Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Phenol oder Phenolderivate können auch in verdünnter
Konzentration verwendet werden. Bitte die Empfehlungen des Herstellers beachten und an
einer kleinen Stelle testen.



- Vor dem Wiedereinsatz die Unversehrtheit des Bezuges prüfen.
- Eine Liste empfohlener Desinfektionsmittel finden Sie unter
www.iqcare.info/images/pdf/IQcare_Desinfektionsmittel.pdf

EVA-Evakuierungsbezüge sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar:

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe
1902	EVA – Bezug	90x200x12/14 cm
1903	EVA – Bezug	87x200x12/14 cm
1920	EVA – Bezug	100x200x12/14cm

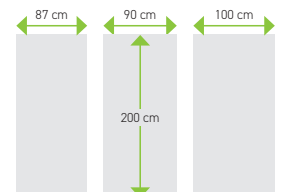

Für alle Matratzengrößen
lieferbar in 12 cm
bis 14 cm Höhe

>>>

BEI FRAGEN: EINFACH ANRUFEN ODER MAILEN!

0 23 54 / 944 99 69 · INFO@IQFY.DE

IQfy GmbH
Heerstraße 5
58540 Meinerzhagen



TECHNISCHE DATEN:

Oberseite: 100 % PU beschichtete Strickware, Farbe: hellgrau
 Unterseite: 100 % PES-Gewebe, Farbe schwarz
 Reißverschluss: verdeckter Reißverschluss

ZERTIFIZIERT:

getestet nach der Norm BS EN 597-1:1995 und BS EN 597-2:1995

LIEFERUMFANG:

1 Bezug

HINWEIS:


Reinigung und Desinfektion des Bezuges vor dem Wiedereinsatz oder PatientInnenwechsel ist zwingend erforderlich. Beschädigte Bezüge nicht mehr verwenden!

ENTSORGUNG:

Der Bezug kann gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Das Produkt sollte vor der Entsorgung gereinigt werden, um ein Kontaminationsrisiko zu verhindern.


HANDHABUNG:

1

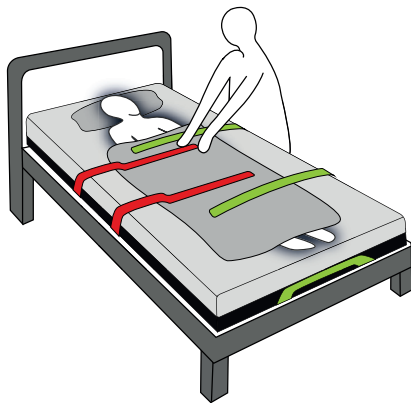

Bitte Sie die BewohnerInnen / PatientInnen, die Arme unter die Decke zu nehmen und befestigen Sie die seitlich versteuerten Gurte mittels Klettverschluss.


2

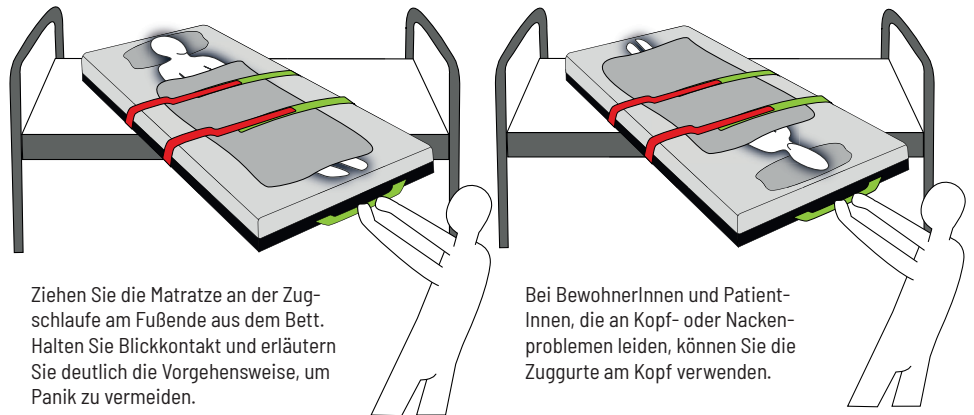

Ziehen Sie die Matratze an der Zugschleife am Fußende aus dem Bett. Halten Sie Blickkontakt und erläutern Sie deutlich die Vorgehensweise, um Panik zu vermeiden.

Bei BewohnerInnen und PatientInnen, die an Kopf- oder Nackenproblemen leiden, können Sie die Zuggurte am Kopf verwenden.

3

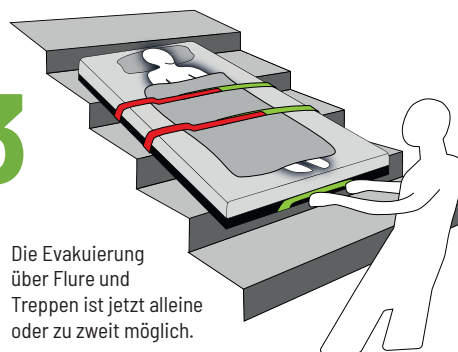

Die Evakuierung über Flure und Treppen ist jetzt alleine oder zu zweit möglich.



Ein Markenprodukt aus dem Hause IQfy GmbH

BEI FRAGEN: EINFACH ANRUFEN ODER MAILEN!

0 23 54 / 944 99 69 · INFO@IQFY.DE

IQfy GmbH
Heerstraße 5
58540 Meinerzhagen