

DEKU3 GEBRAUCHSANWEISUNG


DEKU3

Wir gratulieren zu dem Kauf einer DEKU 3 Matratze aus dem Hause IQfy. Sie können sich auf dieses Qualitätsprodukt verlassen. Bitte beachten Sie deshalb folgenden Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung.

Sie haben sich für eine Antidekubitusmatratze entschieden, die das Weichlagerungsprinzip nutzt und damit den Druck verteilt. Die Matratze bietet dabei als Basis der Umlagerung druckverteilende Möglichkeiten und leistet deshalb bis zu hohem Dekubitusrisiko und bei Dekubitustherapien (Stadium I bis III) ihren Beitrag.

Die Matratze hat zwei Schaumstoffeinschübe, die leicht, durch ein SESY Bettfluchtsystem zur Beobachtung dementer und kognitiv veränderter Menschen, ausgetauscht werden können – siehe Bild rechts. (Im Zubehör erhältlich)!

Die Matratze wird mit einem hochwertigen PU Bezug ausgeliefert. Austausch durch Öffnen des Reißverschlusses möglich! →

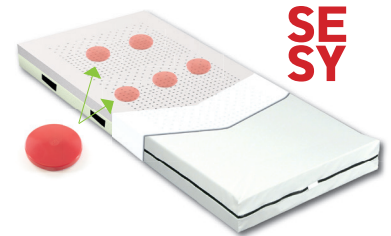

EINSATZORT: Krankenhaus, Pflegeheim und Pflege zu Hause (Home Care)

ZWECKBESTIMMUNG: Die Matratze dient der Dekubitusprophylaxe bei hohem Risiko und Dekubitustherapie. Einzusetzen auch zur Weichlagerung bei auftretenden Druckschmerzen.

KONTRAINDIKATION: Keine Kontraindikationen bzw. Anwendungsrisiken bekannt.

ANWENDUNGSHINWEISE: Kein Zusammenbau bzw. Montage notwendig.

Matratze auf ein belüftetes Bettgestell legen.
Ohne Beeinträchtigung bei verstellbarer Liegefläche.

Auf Kennzeichnung der Oberseite/Kopfseite achten. →



Wir empfehlen, die Matratze immer mit einem Laken zu nutzen! Matratzen entsprechend der Größe des Bettes einsetzen. Keine Risiken bei Seitengittern (auf Abstand (22 cm) achten). Höhe der Oberkante des Seitengitters über der unbelasteten Matratze!

NUTZERGEWICHT: Anwendungsempfehlung von 40 kg – 140 kg Körpergewicht, für alle Matratzengrößen und -höhen.

WARTUNG UND PFLEGE:

KERN: Keine Wartung der Materialien. Empfohlen Autoklave bei 75° VDV Kammer, Sprühdesinfektion ist möglich. Nach entsprechender Aufbereitung ist die Matratze wieder einsetzbar.

BEZUG: Es gibt verschiedene Ausführungen, achten Sie auf die Pflegehinweise im Bezug.

REINIGUNG: Der Bezug kann bei 90° C Grad in der Waschmaschine gewaschen werden.

DESINFEKTION: Wischdesinfektion u./o. Waschdesinfektion. PU-Bezüge sind sehr gut beständig gegen Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Phenol oder Phenolderivate können auch in verdünnter Konzentration verwendet werden. Bitte die Empfehlungen des Desinfektionsmittelherstellers beachten und an einer kleinen Stelle testen.

• Vor dem Wiedereinsatz die Unversehrtheit des Bezuges prüfen.

• Eine Liste empfohlener Desinfektionsmittel finden Sie unter www.iqcare.info/images/pdf/IQcare_Desinfektionsmittel.pdf

>>>

BEI FRAGEN: EINFACH ANRUFEN ODER MAILEN!

0 23 54 / 944 99 69 · INFO@IQFY.DE

IQfy GmbH
Heerstraße 5
58540 Meinerzhagen

ACHTUNG! HINWEISE ZUR ROLL-VERPACKUNG UND FOLIEN

- Die Roll-Verpackung der komprimierten Matratze bitte möglichst sofort nach Erhalt öffnen. Die Matratze aus der Kartontage nehmen und die Folienverpackung entlang des Schneidschutzes (Kartonstreifen) öffnen. Die zweite Folie der ausgerollten Matratze an den Enden vorsichtig einstechen, damit die Matratze in der Folie Luft zieht und die Matratze ihre volle Größe entfalten kann.
- Die Folien dienen der Verpackung und dem Transport.
- Bitte von Kindern fernhalten.
- Nicht über den Kopf stülpen.
- Nach 24 h hat die Matratze das Volumen zurück erlangt und ist für den Gebrauch bereit.

EMPFEHLUNGEN:

Im Bett nicht rauchen!

Bei Reanimation ein Brett unter den Betroffenen legen

DEKU 3 Matratzen sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar:

Art. Nr.	Bezeichnung	Einheit	Größe cm	Gewicht
1011	DEKU 3 Matratze mit PU Bezug	Stk.	87/90x200x14	13,2
1014	DEKU 3 Matratze mit PU Bezug	Stk.	87/90x200x12	11,6
1016	DEKU 3 Matratze mit PU Bezug	Stk.	100x200x14	16,5
1017	DEKU 3 Matratze mit PU Bezug	Stk.	100x200x12	14,4
1018	DEKU 3 Matratze mit Evakuierungsbezug	Stk.	87/90x200x12	13,0
1019	DEKU 3 Matratze mit Evakuierungsbezug	Stk.	87/90x200x14	14,5
1020	DEKU 3 Matratze mit Evakuierungsbezug	Stk.	100x200x12	15,0
1021	DEKU 3 Matratze mit Evakuierungsbezug	Stk.	100x200x14	15,5

Bitte beachten Sie die Angaben des Bettenherstellers!

TECHNISCHE DATEN:

Kern: 100 % PU Schaumstoff

Bezug: PU-beschichtete Strickware



LIEFERUMFANG: 1 Matratze mit einem Bezug.

HINWEIS: Bei schwerwiegenden Vorfällen im Zusammenhang mit dem Produkt müssen sowohl der Hersteller, als auch die zuständigen Behörden vor Ort informiert werden!

ENTSORGUNG: Die Matratze kann gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Das Produkt sollte vor der Entsorgung gereinigt werden um ein Kontaminationsrisiko zu verhindern.

Ein Markenprodukt aus dem Hause IQfy GmbH

 LÜCK GMBH & CO KG, VENNWEG 22, D-46395 BOCHOLT

BEI FRAGEN: EINFACH ANRUFEN ODER MAILEN!

0 23 54 / 944 99 69 · INFO@IQFY.DE

IQfy GmbH
Heerstraße 5
58540 Meinerzhagen