

Do not print this page!

Specifications

The user manual is A5 148mm x 210mm landscape format.

The covers need to be one-side color-printed on 200 gram paper (PRT-00245) separately!

- Front cover
- Back cover

For color specifications please refer to RFD-02127!



PMS color 541
dark blue

PMS color 284
light blue

PMS color 283
soft blue

The content pages need to be:

- double-side color-printed
- on A4 paper 80 gram (PRT-00244)!
- starting from the first page of the manual (Page 1)

Paper binder (PRT-00246): A5 length 148.5 mm

For the Binding instruction please refer to RFD-00321

Compact 7 HD




KÄYTTÖOHJE

Näköpiste Polar Print Oy 2012

WEEE Ilmoitus

EU:n WEEE-direktiivi

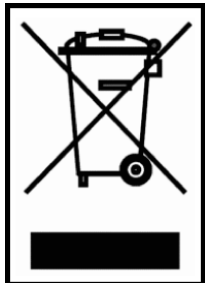

Euroopan unionin WEEE-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) astui voimaan vuonna 2003. Sen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja terveyttä sekä edistää uusiokäyttöä.

Jos tuotteessa tai sen myyntipakkauksessa on oheinen merkintä, sitä ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen.

Tietoa elektroniikka- ja sähkölaitteiden jäte- ja kierrätyspisteistä saat omasta kunnastasi.

Compact 7 HD

Käyttöohje

OPN: UDC- Version 1.0
© 2012 Optelec, the Netherlands
All rights reserved



Itälahdenkatu 23 A, 00210 Helsinki
puh. 09-615 001 22, 09-615 001 23
GSM 0400 885 301, 044 0900 790
info@polarprint.fi

www.optelec.com

www.polarprint.fi

Sisällys

1. Johdanto	5
Tästä käyttöohjeesta	6
Mitä pakkaus sisältää?	6
2. Aloittaminen	7
Compact 7 HD:n käyttäminen kiini- tai auki -asennossa	8
Kameralinssin ja peilin puhdistaminen	10
Näppäimet.....	11
Virta päälle ja pois.....	13
Suurennuksen säätäminen.....	13
Katselutilan valinta	14
Pysäytysnäppäimen käyttö.....	15
3. Akun lataus	17
Compact 7 HD:n lataaminen	17
Valmiustila ja automaattinen sammutus.....	18
Akkuvaroitus.....	19
4. Compact 7 HD:n valikko	19
Valikon avaaminen.....	20
Liikkuminen valikossa	20
Poistuminen valikosta	20
Valikko: Information (Tiedot)	21

Valikko: Brightness (Kirkkaus).....	21
Valikko: Power (Virta).....	23
Valikko: Sound (Ääni).....	28
Valikko: Light (Valo)	29
Valikko: Color (Väri)	30
Valikko: Reset (Alkuasetusten palautus).....	31
Liite A: Turvallisuus.....	32
Liite B: Tekniset tiedot.....	33
Liite C: Takuehdot.....	35

1. Johdanto

Onnittelut kun valitsit Compact 7 HD:n!

Optelecin ainutlaatuisen automaattitarkenteisen elektronisen suurennuslaitteen avulla voit katsella ja suurentaa painettua tekstiä sekä kuvia korkearesoluutioisella HD:lla väritilassa tai jossakin suurikontrastisessa katselutilassa. Compact 7 HD:n 7-tuumainen näyttö tarjoaa alhaisen 2-kertaisen suurennuksen avulla hyvän yleisnäkymän ja toisaalta jopa 24-kertaisen suurennuksen henkilöille, jotka tarvitsevat enemmän suurennusta.

Compact HD 7:tä voi monitoimintaisen muotoilun, ainutlaatuisen valaistuksen ja integroidun lukuasennon johdosta käyttää lukemiseen, kuvien ja hintalappujen sekä moneen muuhun katselemiseen kotona ja liikkeellä ollessa.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia tähän tuotteeseen liittyen, ole ystävällinen ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Optelecin pääkonttoriin. Yhteystiedot löytyvät tästä käyttöohjeesta. Olemme kiitollisia palautteestasi. Toivomme, että nautit Compact / HD:n käyttämisestä!

Tästä käyttöohjeesta

Tämä käyttöohje tutustuttaa sinut Compact 7 HD:n ominaisuuksiin ja toimintoihin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät laitettasi.

Mitä pakkaus sisältää?


Compact 7 HD pakkaus sisältää:

- Compact 7 HD suurennuslaite
- Suojakotelo
- Kantohihna
- Verkkolaite
- Näytön puhdistusliina
- Käyttöohje

Mikäli jokin näistä puuttuu, ota yhteys myyjääsi.

2. Aloitus

Compact 7 HD on sijoitettu oikein eteesi, kun näyttö on ylöspäin ja iso hopeanvärinen painike sekä oranssi virtapainike ovat näytön alaosassa.

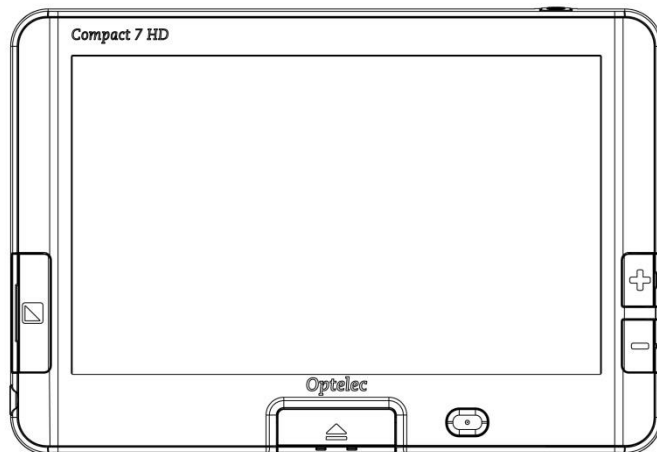


Compact 7 HD:n käyttö suljettuna tai avattuna

Compact 7 HD:tä voi käyttää kahdella tavalla: suljettuna tai avattuna

Suljettu-asennossa pidä laitetta kädessäsi ja osoita kamera (sijaitsee laitteen takana) kohden esinettä tai tekstiä, jonka haluat katsoa tai lukea.


Käyttö suljettuna sopii tilanteisiin kun halutaan katsoa välimatkan päässä olevia kohteita ja pikaisesti silmäillä esineitä tai papereita.

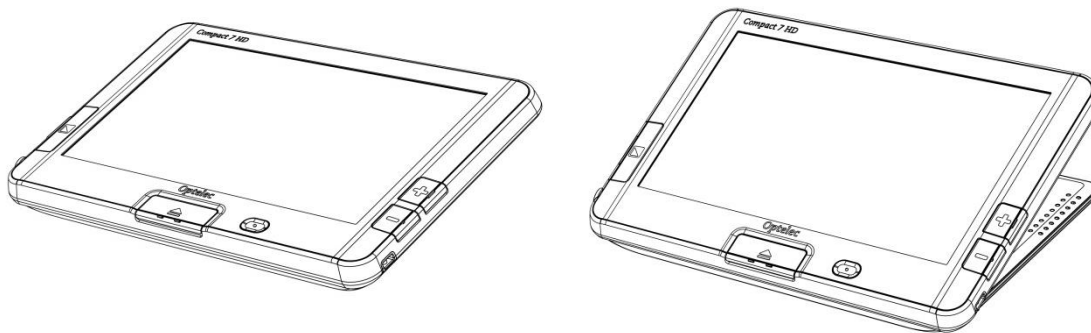

Avattuna näyttö asettuu ergonomiseen lukuasentoon ja kamera osoittaa alaspäin. Tämän sisäänrakennetun lukutason ansiosta voit lukea myös pidempiä tekstejä.

Avaa laite näin:

1. Aseta Compact 7 HD eteesi niin, että näyttö on ylöspäin jai so hopeanvärinen painike sekä oranssi virtapainike ovat näytön alalaidassa.
2. Paina hopeanväristä painiketta, joka sijaitsee keskellä näytön alalaitaa. Näyttö avautuu ja Compact 7 HD käynnistyy.

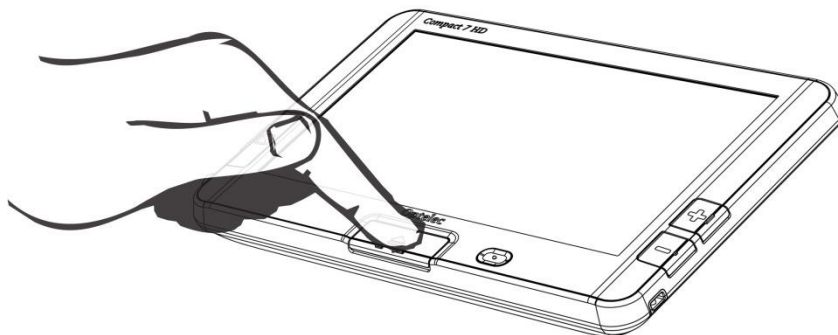

Kameralinssin ja peilin puhdistus

Paras kuvanlaatu saadaan, kun kameran linssi ja valopeili pidetään puhtaina. Likainen linssi näyttää sotkuisen kuvan ja saattaa aiheuttaa sen, että automaattitarkentava kamera tarkentaa väärin. Puhdas valopeili on tärkeä vaaleiden tai tummien tahrojen estämiseksi. Samalla varmistetaan tasaisesti valaistu kuva. Käytä puhdistamiseen mukana toimitettua puhdistusliinaa tai muuta pehmeää linssinpuhdistusliinaa.

Huom! Älä käytä linssin tai peilin puhdistamiseen vettä tai puhdistusainetta.

Näppäimet

Compact 7 HD:ssä on seuraavat näppäimet

Avaa



Painamalla hopeanväristä painiketta keskellä näytön alareunaa avataan Compact 7 HD.

Katselutila



Painamalla Katselutila-näppäintä näytön vasemmalla puolella valitaan katselutila. Kolmen sekunnin painallus samuttaa valot.

Suurennus



Painamalla + tai - näppäintä näytön oikealla puolella kuvaa suurennetaan tai pienennetään. Painamalla + ja - näppäimiä samanaikaisesti avataan ja suljetaan Compact 7 HD:n valikko.

Pysäytys




Pysäytys-näppäin on laitteen päällä oikealla. Sitä painamalla voi ottaa pysäytyskuvan kauempana olevasta kohteesta. Näin voit tuoda kuvan lähemmäksi silmiä.

Virta päälle/pois

Käynnistä tai sammuta laite painamalla soikion muotoista oranssia näppäintä. Näppäin sijaitsee näytön alareunassa hopean värisen Avaa-näppäimen oikealla puolella.

Verkkolaitteen liitäntä

Verkkolaitteen liitäntä on laitteen alanurkassa vasemmalla puolella. Liitä verkkolaite tähän ja lataa laite. Käytä ainoastaan Compact 7 HD:n mukana tullutta verkkolaitetta.

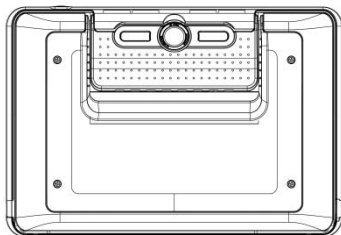

Compact 7 HD:n kamera on laitteen kääntöpuolella. Kameran vasemmalla ja oikealla puolella on kaksi kohdevaloa, joita käytetään kun laite on suljettu-asennossa.

Virta päälle ja pois

Ennen kuin Compact 7 HD käynnistetään ensimmäistä kertaa, laitteen akku on ladattava. Kun laite on ladattu, paina sekunnin ajan oranssia ovaalin muotoista virtanäppäintä, joka sijaitsee hopean värisen Avaa-näppäimen oikealla puolella näytön alareunassa. Laite käynnistyy samassa katselutilassa, missä se sammutettiin. Sammuta Compact 7 HD painamalla taas oranssia virtanäppäintä sekunnin ajan.

Kun Compact 7 HD käynnistetään, kestää noin kolme sekuntia kunnes näytöllä näkyy kuva.


Laitteen voi myös käynnistää avaamalla se kuten edellä on kerrottu (oletusasetus). Laitteen sulkeminen ei automaattisesti sammuta sitä. Laite sammutetaan painamalla virtanäppäintä noin sekunnin ajan tai valikosta aktivoidaan valinta 'turn off on closing' eli "sammuta suljettaessa". Oletusarvoja voi muuttaa Compact 7 HD:n valikossa. Katso niistä tarkemmin kappaleessa 4.

Suurennuksen muuttaminen

Suurennusta muutetaan painamalla näytön oikeassa reunassa olevaa + tai - näppäintä. Paina + näppäintä halutessasi lisätä suurennusta tai - näppäintä pienentää suurennusta. Avattuna asetettuna tekstin päälle suurennus alkaa 2- kertaisesta suurennuksesta jota

voidaan kasvattaa 24-kertaiseksi. Compact 7 HD:ssä on automaattitarkentava kamera. Se mahdollistaa laitteen käytön kun pidät sitä käsissäsi suljettuna. Se antaa laajemman yleiskuvan mutta vähentää pienintä ja suurinta suurennusta.

Huom: pienimmässä 2-kertaisessa suurennuksessa tekstirivit saattavat näkyä hieman kaartuvina. Tämä näkyy etenkin luettaessa pieniä tekstejä. Tämän “kalansilmä”-ilmiön aiheuttaa laajakulmalinssi.

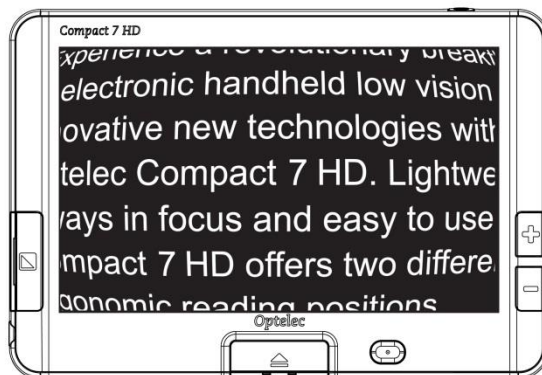

“Kalansilmä”-ilmiö 2-kertaisessa suurennuksessa

Katselutilan valinta

Paina Katselutila-näppäintä näytön vasemmassa reunassa jolloin valittavanasi on joku seuraavista katselutiloista:

Valokuvatila: näyttää tekstit ja valokuvat väreissä

Negatiivitila: näyttää tekstin valkoisena mustalla taustalla (suuri kontrasti)

Positiivitila: näyttää tekstin mustana valkoisella taustalla (suuri kontrasti)

Suurikontrastinen **väriyhdistelmä 1**

Suurikontrastinen **väriyhdistelmä 2**

Painamalla Katselutila-näppäintä noin 3 sekuntia kohdevalo syttyy tai sammuu. Katselutilan vaihto sytyttää automaattisesti kohdevalon.

Pysäytysnäppäimen käyttö

Pysäytysnäppäimen avulla voit pysäyttää kuvan tai tekstin väliaikaisesti näytölle.

- Pidä Compact 7 HD haluamasi kuvan tai tekstin päällä
- Paina ja pidä painettuna pysäytysnäppäintä, joka sijaitsee laitteen päällä oikealla.
 - o Painaessasi näppäintä kuulet piippauksen.
 - o Pidä pysäytysnäppäin painettuna.
 - o Compact 7 HD näyttää kamerakuvakkeen, ottaa kuvan ja kuulet kaksi piippausta.
 - o Päästä pysäytysnäppäin.
 - o Compact 7 HD näyttää otetun kuvan.

- Kuva tallentuu väliaikaisesti Compact 7 HD:n muistiin. Kun tuot Compact 7 HD:n lähemmäksi silmiä, voit tarkastella kuvaa tai teksitä tarkemmin.
- Käytä näytön oikealla puolella sijaitsevia suurennusnäppäimiä muuttaaksesi kuvan suurennusta.
- Paina Tilanäppäintä muuttaaksesi katselutilaa.
- Paina pysäytysnäppäintä uudelleen vapauttaaksesi kuvan. Voit nyt ottaa uuden kuvan..

HUOM: Jos vapautat pysäytysnäppäimen ennen kuin kuulet kaksi piippausta, kuva ei pysähdy vaan Compact 7 HD palaa takaisin entiseen tilaan.

3. Akun lataaminen

Compact 7 HD:n lataaminen

Lataa Compact 7 HD liittämällä verkkolaitteen kapea pistoke laitteen vasemmassa reunassa olevaan liittimeen. Yhdistä sitten verkkolaite verkkopistokkeeseen. Liittimen vieressä oleva oranssi LED-valo palaa jatkuvasti kun Compact 7 HD latautuu. Kun akku on täysin latautunut, valo muuttuu vihreäksi. Jos LED-valo vilkkuu, latauksessa on ongelma. Irrota tällöin verkkolaite ja yritä uudelleen.

Compact 7 HD:n lataaminen kestää noin 3,5 tuntia. Täysin ladattu Compact 7 HD voi toimia keskimäärin 4 tuntia riippuen virta-asetuksista. Huomioithan, että turvallisuussyistä vain Compact 7 HD:n omaa verkkolaitetta saa käyttää akun lataamiseen.

Lepotila ja automaattinen sammutus

Compact 7 HD siirtyy automaattisesti lepotilaan kahden minuutin kuluttua ellei mitään näppäintä paineta tai kuvaa vaihdeta. Painamalla mitä tahansa näppäintä laite käynnistyy uudelleen. Neljä minuuttia lepotilaan siirtymisen jälkeen Compact 7 HD sammuu automaattisesti. Painamalla oranssia näppäintä oikeassa reunassa laite käynnistyy uudelleen. Lepotila-aikaa ja automaattisammutusaikaa voi muuttaa tai sen voi poistaa Compact 7 HD:n valikossa. Seuraavassa luvussa kerrotaan miten näitä asetuksia muutetaan.

Akkuvaroitus



Kun akun latausaste on alle 5 % sen koko kapasiteetista, näytölle ilmestyy tyhjä akku-kuvake kerran minuutissa 2 sekunnin ajan ja kuuluu piippaus. Tämän tapahtuessa aloita lataaminen mahdollisimman nopeasti. Kun akku on tyhjä, laite sammuu automaattisesti.

Jos laite ei käynnisty, tarkista että sen akku on ladattu.

4. Compact 7 HD:n valikko

Information: Näyttää akun latausasteen ja ohjelmaversion.



information

Brightness: Kirkkaus.



brightness

Power: Virta.



power

Sound: Ääni.



sound

Light: Kohdevalot.



light

Color: Väriyhdistelmät.



color

Reset: Alkuasetusten palauttaminen.



reset

Valikon avaaminen



Avaa valikko painamalla sekunnin ajan yhtaikaa + ja – näppäimiä.



Liikkuminen valikossa



Käytä + tai – näppäintä liikkuaksesi valikkojen välillä. Vasemmalla Katselutilanäppäimellä avaat valitun valikkokohtan ja sen sisällä – näppäimillä. Katselutilanäppäimellä hyväksyt valitsemasi vaihtoehdon.



olevalla
liikut + tai

Valikosta poistuminen



Poistu valikosta painamalla sekunnin ajan yhtaikaa + ja – näppäimiä



Valikko: Information

information

Tässä näkyy akun lataustilanne ja nykyinen ohjelmaversio. Tässä kohtaa ei ole mahdollista tehdä muutoksia.

- Valikkoon pääset ja poistut siitä painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Tämä kohta näkyy ensimmäisenä kun valikko avataan.

Valikko: Brightness = Kirkkaus

Tässä kohtaa voidaan muuttaa näytön kirkkautta.


- Siirry valikon Information kohdasta seuraavaan painamalla – näppäintä, jolloin Brightness eli Kirkkaus kohta aukeaa
- Kun haluat muuttaa kirkkautta paina ensin Katselutila-näppäintä.
- Valitse sitten kirkkausaste lisäämällä sitä + näppäimellä ja vähentämällä sitä painamalla – näppäintä. Kirkkausasteita on 5. Oletusarvona on 5.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

Valikko: Power = Virta

Tämän otsakkeen alla on neljä alivalikkoa:

**Power off
Sammutus**

Asetetaan aika milloin Compact 7 HD sammuu automaattisesti. Oletusarvona on 4 minuuttia. Nämä 4 minuuttia käynnistyvät 2 minuutin lepotilan jälkeen. Oletusarvona laite sammuu silloin automaattisesti 6 minuutin jälkeen.

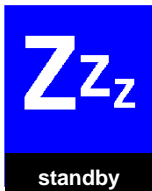**Standby
Lepotila**

Asetetaan aika milloin Compact 7 HD siirtyy lepotilaan virran säästämiseksi. Lepotilasta poistutaan painamalla Katselutila-näppäintä. Oletusarvona lepotila alkaa 2 minuutin kuluttua.



Open
Auki

Voit valita että Compact 7 HD käynnistyy automaattisesti kun se avataan. Oletusarvona Compact 7 HD **käynnistyy kun se avataan.**



Close
Kiinni

Kun Compact 7 HD suljetaan on oletusarvona että virta **ei sammu.**

Alavalikko Standby = Lepotila

Lepotilan oletusarvo on 2 minuuttia. Muuta Compact 7 HD:n lepotilan alkamista:

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Paina – näppäintä kunnes olet kohdassa Power=Virta. Hyväksy se painamalla Katselutila-näppäintä.
- Paina – näppäintä jolloin näytölle tulee standby = lepotila. Hyväksy painamalla Katselutila-näppäintä.
- Painamalla + ja – näppäimiä näet nyt vaihtoehdot. Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä. Jos valitset disabled = ei toimintoa, laite ei ollenkaan siirry lepotilaan.

Alavalikko Power off = Sammutus

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku ylöspäin käyttämällä + ja – näppäintä alaspäin. Valitse Power ja hyväksy se painamalla Kuvatila-näppäintä.
- Valitse Power off = Sammutus ja hyväksy painamalla Kuvatila-näppäintä.
- Valitse aika jonka jälkeen laite sammuu painamalla + näppäintä lisäämään aikaa ja – näppäintä vähentämään aikaa. Hyväksy valinta painamalla Katselutila-näppäintä. Valitsemalla disabled = Ei toimintoa hylkää automaattisammutuksen.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutilanäppäintä ja poistu valikosta.

Alavalikko Open = Avaa, auki


Voit valita käynnistyykö Compact 7 HD samalla kun avaat sen vai ei:

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtä aikaa sekunnin ajan.
- Valitse Power=Virta painamalla Katselutila-näppäintä.
- Paina nyt – näppäintä kunnes tulet kohtaan open =avaa ja hyväksy painamalla Katselutila-näppäintä.
- Valitse Open = auki painamalla Katselutila-näppäintä.
- Kun haluat että laite käynnistyy avatessasi sen, hyväksy power on = virta päällä. Hyväksy painamalla Katselutila-näppäintä.
- Jos ET halua että laite käynnistyy kun avaat sen valitse no action = ei toimintoa
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

Alavalikko Close = Sulje

Voit valita sammuuko virta automaattisesti kun suljet Compact 7 HD:n:

- Avaa valikko painamalla + ja – näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku painamalla – näppäintä kunnes tulet kohtaan Power = Virta ja hyväksy se painamalla Katselutila-näppäintä.
- Jos haluat että laite sammuu samalla kun suljet sen, valitse Power off eli sammuta virta ja hyväksy valinta painamalla Katselutila-näppäintä, jolloin myös poistut valikosta. Jos valitset No action, laite ei sammuta suljettaessa.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

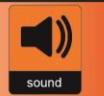Valikko: Sound = Ääni


Oletusarvona on että äänimerkit ovat käytössä. Tässä valikon kohdassa äänimerkit voi myös poistaa käytöstä.

- Avaa valikko painamalla **+** ja **-** näppäimiä yhtä aikaa sekunnin ajan.
- Liiku ylöspäin käyttämällä **+** ja **-** näppäintä alaspäin. Valitse Sound = Ääni painamalla Katselutila-näppäintä.
- Kun haluat että äänimerkit ovat käytössä liiku **+** and **-** näppäimillä ja valitse ON eli käytössä ja hyväksy se painamalla Katselutila-näppäintä. OFF vaihtoehto tarkoittaa "pois käytöstä".

Valikko: Light = Valo


Oletusarvona kohdevalot ovat käytössä, mutta ne voi myös asettaa pois käytöstä. Kohdevalot sijaitsevat kameran vasemmalla ja oikealla puolella ja ne ovat käytössä kun laitteella katsotaan välimatkan päähän.

- Avaa valikko painamalla **+** ja **-** näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku valikossa ylöspäin painamalla **+** näppäintä ja **-** näppäintä alaspäin. Valitse valikosta kohta Light = valo painamalla Katselutila näppäintä.
- Valitse ON kun haluat että kohdevalot syttyvät ja hyväksy valinta painamalla Katselutila näppäintä, jolloin samalla poistut valikosta. Valitsemalla OFF kohdevalot ovat pois käytöstä.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

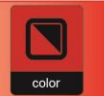Valikko: Color = Väri

Compact 7 HD:ssä on valittavana neljä korkeakontrastista keinoväritilaa, joissa voidaan valita tekstin ja taustan väri. Kolme keinoväritilaa voidaan jättää pois käytöstä jos halutaan käyttää vain yhtä vaihtoehtoa.

- Avaa valikko painamalla **+** ja **-** näppäimiä yhtäikaa sekunnin ajan.
- Liiku valikossa ylöspäin painamalla **+** näppäintä ja **-** näppäintä alaspäin. Valitse valikosta kohta Color eli väri ja hyväksy se painamalla Katselutila näppäintä.
- Painamalla **-** näppäintä näet näytön alareunassa katselutilan numeron eli 1, 2, 3 tai 4. Yläpuolella näet valitun tekstin ja taustan värit.
- Kun haluat valita uudet värit tekstille ja taustalle paina **+** tai **-** näppäintä jolloin näet eri vaihtoehdot. Hyväksy valintasi painamalla Katselutila näppäintä.
- Keinoväritilat 2, 3 ja 4 voidaan valita pois käytöstä. Kun näytössä näkyy iso X ja reunassa lukee disabled, painetaan Katselutila näppäintä niin valittu tila on poistettu käytöstä.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

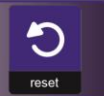Valikko: Reset = Palauta tehdasasetukset

Compact 7 HD:n tehdasasetukset voidaan palauttaa. Kaikki muutetut asetukset palautetaan alkuperäisiksi.

- Avaa valikko painamalla **+** ja **-** näppäimiä yhtä aikaa sekunnin ajan.
- Liiku valikossa ylöspäin painamalla **+** näppäintä ja **-** näppäintä alaspäin. Valitse valikosta kohta Reset eli Palauta tehdasasetukset ja hyväksy se painamalla Katselutila näppäintä.
- Paina **+** ja **-** näppäimiä jolloin näet vaihtoehdot YES (KYLLÄ) ja NO (EI). Jos haluat palauttaa alkuasetukset hyväksy YES painamalla Katselutila näppäintä. Valitsemalla NO säilytät olemassa olevat asetukset.
- Hyväksy valintasi painamalla Katselutila-näppäintä ja poistu valikosta.

Liite A: Turvallisuus

- Älä altista Compact 7 HD:tä liialliselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle. Näin vältetään tulipalovaara.
- Älä irrota mitään osia Compact 7 HD:sta.
- Pidä Compact 7 HD erossa nesteistä ja kemikaaleista sähkövikojan välttämiseksi.
- Käsittele Compact 7 HD:tä huolellisesti. Kovakourainen käsittely vahingoittaa laitteen sisäosia.
- Älä käytä Compact 7 HD:tä riittämättömästi suojattujen lääkelaitteiden lähellä.
- Älä yritä avata akkukoteloä tai poistaa akkua.
- Tarvittaessa ota yhteys myyjään jos laite on huollon tarpeessa. **Älä avaa laitetta**, koska takuu raukeaa silloin.
- Irrota aina laite verkosta ennen puhdistamista. Käytä pehmeää, hieman kosteaa (El märkää) liinaa ulkoiseen puhdistukseen. Älä käytä puhdistusaineita tai hankausaineita, koska ne vahingoittavat laitetta.

Jos Compact 7 HD:tä käytetään muulla tavalla kuin tässä käyttöohjeessa on kerrottu, takuehdot raukeavat.

Appendix B: Technical information

Suurennus	2 - 24x
Katselutitlat	Täysväri Korkeakontrastinen valkoinen mustalla pohjalla Korkeakontrastinen musta valkoisella pohjalla Korkeakontrastinen väriyhdistelmä 1 Korkeakontrastinen väriyhdistelmä 2
Tarkennus	Automaattitarkennus
Korkeakontrastisuhte	500:1
Kirkasvalonäyttö	350 cd/m ²
Näyttö	7" TFT
Näytön resoluutio	800 x 480
Mitat	190 x 130 x 26,7 mm
Akku	Keskimäärin 4,5 tunnin yhtäjaksoinen käyttö Latausaika 3,5 tuntia
Li-ion akku	Ladattava , 3.7V 2800mAh
Paino	640 g
Verkkolaite	POWER WIN, PW-M024A-1Y120K
Sisäänmeno	100-240V, 50-60Hz, 0.3A
Ulostulo	DC12V-2A

Käyttöolosuhteet

Lämpötila	+10°C - +35°C
Kosteus	< 70 %, ei kondensaatiota

Säilytys & kuljetusolosuhteet

Lämpötila	+10°C - + 40°C
Kosteus	< 95 %, ei kondensaatiota

Liite C: Takuuehdot

Optelec antaa Compact 7 HD:lle materiaaliin ja työhön liittyvän takuun, joka alkaa toimituspäivästä.

Takuuta ei voi siirtää eikä se koske ryhmiä, ryhmäkäyttäjiä eikä edustajia.

Compact 7 HD on suunniteltu yksityiselle käyttäjälle kotiin ja liikkeellä ollessa. Optelecilla on oikeus korjata tai korvata jokainen Compact 7 HD samantyyppisellä tai parannetulla tuotteella.

Optelecia tai sen myyjä ei milloinkaan ole pidettävä vastuullisena mistään välillisestä tai seuraavasta vahingosta. Alkuperäisen käyttäjän korvausvaatimukset on rajoitettu Compact 7 HD:n korvaamiseen samanlaisella. Tämä takuu on voimassa vain kun se on huollettu alkuperäisessä ostomaassa eikä sitä ole avattu. Takuuaikaisesta tai sen jälkeisestä huollosta, ole hyvä ja ota yhteys Optelec myyjääsi.

Optelec ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen käytöstä, paitsi tässä käyttöohjeessa selostetusta. Käyttöohjeen vastainen Compact 7 HD:n käyttö poissulkee sen takuuehdoista.

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and its amendments.

European Union Notice

Products with CE marking comply with the EMC Directive (2004/108/EC), the MDD directive (2007/47/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following international standards:

EMC

EN 55022

EN 55024

EN 60601-1-2

FCC

FCC part 15 Class B

Safety

UL 60950-1

EN 60601-1-1

WARNING: The use of accessories, transducers and cables, with the exception of transducers and cables sold by the manufacturer of the Compact 7 HD as replacement parts for components, may result in increased emissions or decreased immunity of the Compact 7 HD.



This device bears the CE and FCC approval mark

Federal Communications Commission (FCC) Statement:

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,

uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received; including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Please dispose of used batteries according to the disposal and recycling regulations that are applicable in your country or region!

Optelec Offices Worldwide / Optelec kantoren wereldwijd / Optelec dans le monde / Optelec oficinas por todo el mundo / Optelec Zweigniederlassungen Weltweit

Optelec U.S. Ltd

3030 Enterprise Court, Ste C
Vista, CA 92081
U.S.A.
T: +1 (800) 826-4200
www.optelec.com

Optelec Canada

1832 Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9
Canada
T: +1 (450) 677-1171
www.optelec.com

Optelec Nederland BV

Breslau 4
2993 LT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3555
www.optelec.nl

Optelec Limited

2 Millfield House
Woodshots Meadow
Croxley Business Park
Watford WD18 8YX
United Kingdom
T: +44 1923 23 13 13
www.optelec.co.uk

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Belgium
T: +32 (0)50 35 75 55
www.optelec.be

Optelec GmbH

Fritzlärer Strasse 25
34613 Schwalmstadt
Germany
T: +49 669 196 170
www.optelec.de

Optelec Corporate Headquarters

Breslau 4 – 2993 LT Barendrecht – The Netherlands –
T: +31 (0)88 678 3444 – www.optelec.com

www.optelec.com

UDC-02105 Rev. A

