

Focus Blue V -pistenäyttöihin on lokakuussa 2021 julkaistu ohjelmistopäivitys, versionumeroltaan 5.82-14.

Focus Blue V:n ohjelmiston päivittäminen versioksi 5.82-14

Yhdistä Focus USB-kaapelilla tietokoneeseen.

[LI]Lataa ohjelmistopäivitys Zip-tiedostona seuraavasta linkistä:

<https://support.freedomscientific.com/Downloads/Focus>

Pura Zip-tiedosto: Paina tiedoston kohdalla Sovellusnäppäintä, siirry nuolella alas kohtaan "Pura kaikki..." ja paina sen kohdalla Enter. Hyväksy oletusarvoinen sijainti painamalla Enter uudestaan. Windows avaa oletuksena puretun kansion sisällön purkamisen jälkeen.

Suorita avatun kansion sisällä oleva Focus5\_FW\_\_Update-v5.82-14.exe.

Jos näkyviin tulee "Windows Defender Smart Screen" -ikkuna, siirry sarkaimella kohtaan "Lisätietoja" ja paina Enter. Siirry tämän jälkeen sarkaimella kohtaan "Suorita joka tapauksessa" ja paina Enter.

Näkyviin tulee ikkuna, jonka ensimmäinen painike on "Update Firmware...". Paina siitä Enter.

Seuraavan ikkunan ensimmäinen painike on "Start Download". Paina Enter siitäkin.

Päivitys kestää hetken ja Focus kytkeytyy irti tietokoneesta. Paina lopuksi Enter OK-painikkeen kohdalla.

Voit varmistaa, että päivitys on onnistunut painamalla valikkonäppäintä ja sen jälkeen jompaakumpaa etureunan keinukytkimistä ylöspäin. Tällöin pisteriville pitäisi ilmestyä teksti "Focus 40 tai 14 5.82-14". Huomaa, että jos pistenäyttö on yhteydessä johonkin ruudunlukuohjelmaan, joudut painamaan valikkonäppäintä kahdesti päästäksesi valikkoon. Valikkonäppäin sijaitsee pisteiden 1 ja 4 välissä.

Uutta versiossa 5.82-14

Bluetooth ei vaadi oletuksena PIN-koodia. Tämän voi muuttaa valikon uudella "Vaadi PIN" -toiminnolla.

Pikaviestit ovat lyhyitä viestejä, jotka poistuvat näytöltä tietyn ajan kuluttua. Voit poistaa ne näytöltä myös siirtymispainikkeella. Voit muuttaa pikaviestien näkymisaikaa näytöllä valikon "Viestin kesto" -toiminnolla. Oletus on kolme sekuntia.

Scratchpad

toiminnallisia parannuksia

Tiedostokokoa ei ole enää rajoitettu 32 kilotavuun tiedostoja muokattaessa. FNZ-tiedostot voivat olla 1 Mt:n kokoisia ja sekä TXT-, BRL-, että BRF-tiedostoja voidaan nyt muokata jopa 10 Mt:hen asti. Scratchpadilla voi avata jopa 100 Mt:n kokoisia tiedostoja. [/LI]

Kirjainnavigointia voi nyt käyttää tiedostoja avattaessa ja poistettaessa. Voit myös käyttää näppäinyhdistelmää Väli+pisteet 1-2-3 siirtyäksesi tiedostoluettelon alkuun tai Väli+pisteet 4-5-6 siirtyäksesi tiedostoluettelon loppuun.

Uusia komentoja

Näytä nykyisen tiedoston nimi: Vasen Shift+T

Näytä nykyinen sivu ja sivumäärä (edellyttää sivunvaihtomerkkejä, joita löytyy mm. useimmista BRF-formaatissa olevista kirjatiedostoista): Oikea Shift+P

Vaihda nykyisen ja viimeksi avatun tiedoston välillä: Väli+Ö

Etsi edeltävä: Oikea Shift+Wäli+Piste 8 tai Muokkaa-valikosta löytyvä "Etsi edeltävä" -toiminto

Uusi Lisäasetukset-valikko, joka sisältää seuraavat kohdat:

Rivitys: Kun tämä on käytössä, Scratchpad ei jaa sanaa, joka on liian pitkä mahtuakseen pistenäytölle, vaan näyttää sen seuraavalla rivillä. Oletuksena tämä on pois käytöstä.

Käännetty vieritys: Kun tämä on käytössä, vasen vierityspainike vierittää oikealle ja päinvastoin. Tämä on oletuksena pois käytöstä.

Piilota kohdistin: Kun tämä on käytössä, kohdistinta ei näytetä, ellei siirtymispainiketta paineta. Tällöin kohdistin näytetään hetkellisesti kohdassa, johon se siirtyi. Tämä on oletuksena pois käytöstä.

Piilota pisteet 7 ja 8: Tämä on oletuksena pois käytöstä.

Yksikätkäinen tila

Yksikätkäinen tila mahdollistaa Focuksen käytön yhdellä kädellä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä joko painamalla välinäppäintä valikossa kohteen "Yksikätkäinen tila" kohdalla tai komennolla Vasen Shift+pisteet 1-2-3-7 tai Oikea Shift+pisteet 4-5-6-8 riippuen siitä, kumpaa kättä käytät. Yksikätkäinen tila toimii niin Scratchpadissa kuin käytettäessä Focusta muiden laitteiden kanssa.

Yksikätisen tilan ollessa käytössä voit antaa komentoja painamalla niin monta näppäintä kerrallaan kuin mikä sinulle on mieluista. Kun olet lopettanut komennon antamisen, paina välinäppäintä. Jos haluat kirjoittaa välilyönnin, paina välinäppäintä kahdesti.