


ONYX® Deskset HD Kaukosäädin

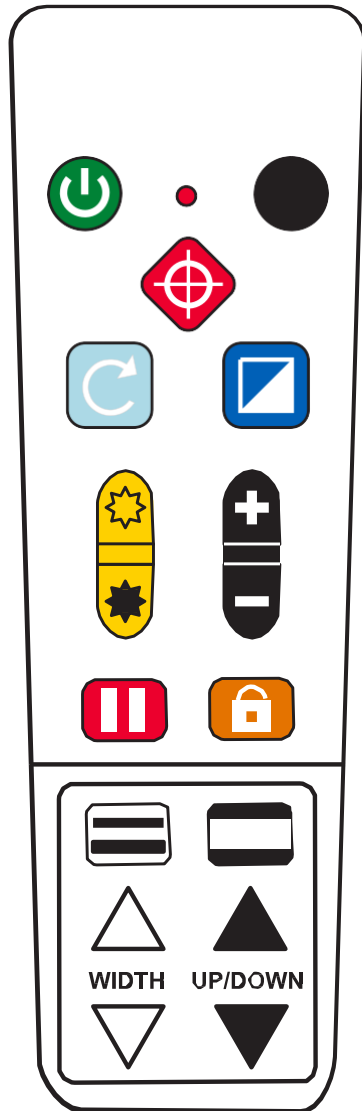

Virta (Vihreä)

Laite päälle ja pois päältä



Lisätoiminnot (Musta)

Käytä yhdessä muiden näppäimien kanssa suorittaaksesi lisätoimintoja. Aina paina ja pidä pohjassa ensin tämä näppäin, sen jälkeen toinen näppäin.



Etsi (Punainen)

Näyttää hiusristikon ja poistaa suurennuksen. Helpottaa kamerasuuntaamisessa.



Käännä (Vaaleansininen)

Vaihtaa kuvan neljään eri suuntaan.



Väritila (Sininen)

Vaihtaa eri väritilojen välillä.



Kirkkaus (Keltainen)

Muuttaa kuvan kirkkautta



Suurennus (Musta)

Suurentaa ja pienentää



Pysäytä (Punainen)

Jäädyttää ruudulla näkyvän kuvan.



Tarkennuksen lukitsin (Oranssi)

Automaattinen tarkennus päälle ja pois



Apuviivat (Valko-musta)

Näyttää kaksi vaakasuoraa tai pystysuoraa viivaa.



Verhot (Musta-valkoinen)

Näyttää verhot tai varjostukset, jotka peittävät osan ruudusta.



Leveys (Valkoinen)

Muuttaa apuviivojen tai verhojen välistä leveyttä.



Ylös ja alas (Musta)

Siirtää apuviivojen ja verhojen paikkaa ruudulla.



Lisätoiminto + Virta

Pidä pohjassa noin kuusi sekuntia niin Asetus-valikko avautuu. Voit lisätä ja poistaa värejä.

