



magnification

ClearView C

User manual

Gebruikershandleiding

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual del usuario

Bedienungsanleitung

使用手冊

Optelec

Käyttöohje

Versio 1.6

Copyright 2016 Optelec, the Netherlands
All rights reserved



Nuijamiestentie 5 A, 00400 Helsinki
puh. 09-615 001 23, 09-615 001 24

info@polarprint.fi
www.polarprint.fi

Sisältö

1. Johdanto	6
1.1. Tästä käyttöohjeesta	6
2. ClearView C HD ja ClearView C One	7
2.1. Mitä pakkaus sisältää	7
2.2. Opi tuntemaan ClearView C	7
2.3. Pakkauksesta purkaminen ja asennus	8
2.4. Muuta lukupöydän paikkaa	8
3. Käyttö	10
3.1. Johdanto	10
3.2. Ohjain, perustoiminnot	10
3.2.1. Virta päälle / pois	10
3.2.2. Suurennuksen säätäminen	11
3.2.3. Katselutilojen valinta	11
3.2.4. Valo päälle / pois	11
3.2.5. Yleiskuva (paikannin)	12
3.2.6. Osoitin (paikannin)	12
3.2.7. Lukupöydän jarrut ja liike	12
3.3. Ohjain, lisätoiminnot	13
3.3.1. Kuvansäätö	13
3.3.2. Apuviivojen ja verhojen asetus	13
3.3.3. Apuviivojen ja verhojen säätäminen	13
3.3.4. CleraView C Menu / valikon aktivointi	13
3.3.5. ClearView C ja tietokone /muu kuvalähde, kuvanvaihto	14
3.3.6. Automaattitarkennuksen lukitus	14
3.4. Ohjaimen paristot	14
3.5. Ohjaimen parittaminen	14
4. ClearView C Menu / Valikko	15
4.1. Valikon aktivointi	16
4.2. Liikkuminen valikossa	16
4.3. Poistuminen valikosta	16
Menu: Brihtness / Kirkkaus	16
Menu: Color / Väri	16
Menu: Light / Valo	17
Menu: Keylock / Näppäinlukko	18
Menu: Power / Virta	18
Menu: Standby / Virransäästötila	18
Menu: Reset / Palauta oletusasetukset	19
Menu: Information / Tiedot	19
Menu: Exit / Poistu	19
5. Näytön säätäminen	20

6. Kantokahva	20
Liite A: Ongelmanratkaisu	21
Liite B: Turvallisuus	22
Liite C: Tekniset ominaisuudet	24

1. Johdanto

Onneksi olkoon, kun valitsit ClearView C :n, Optelecin kehittämän pöytäsuurenuslaitteen. ClearView C :n avulla voit luke, kirjoittaa, katsoa valokuvia, työskennellä ja paljon muuta. The ClearView C suurentaa ja parantaa tekstin, esineet ja kuvat sekä sallii sinun katsoa niitä sinulle parhaiten sopivalla väriyhdistelmällä, kirkkaudella ja kontrastilla. Sitä on helppo käyttää sekä kotona, työssä että koulussa.

ClearView C on muotoiltu ainutlaatuisen ergonomisella tavalla, joka mahdollistaa helpon käytön, mukavan lukemisen ja maksimaalisen työskentelytilan. Korkealaatuisella lukupöydällä voit liikutella tekstiä ja esineitä helposti kameran alla. Integroitu ohjain mahdollistaa käytön sekä perusominaisuuksilla että laajemmilla toiminnoilla. Ainutlaatuinen ClearView C :n muotoilu varmistaa mukavan lukukokemuksen ja sopii kotisi sisustukseen täydellisesti.

1.1. Käyttöohjeesta

Tämä käyttöohje auttaa sinua tutustumaan ClearView C :n ominaisuuksiin ja käyttöön. Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

Huomioithan, että ClearView C koostuu moduuleista. Eri ClearView C mallit voidaan koota valitsemalla eri moduuleja. Tämä käyttöohje kattaa kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat mallit. Joitakin ominaisuuksia ja toimintoja voi lisätä asentamalla eri moduulit. On mahdollista, että käyttämäsi laite ei tue kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja toimintoja tai ominaisuuksia.

Mikäli sinulla on tätä tuotetta koskevia kysymyksiä tai ehdotuksia, käänny maahantuojan puoleen. Palautteesi on tervetullutta.

2. ClearView C HD ja ClearView C One

ClearView C One on perusominaisuuksilla varustettu laite ja ClearView C HD tarjoaa sekä perus- että lisäominaisuudet.

2.1. Mitä pakkaus sisältää?

ClearView C pakkaus sisältää seuraavaa:

- ClearView C
- Virtajohto
- Langaton ohjain
- Käyttöohje
- Kaaviokuva ohjaimesta (engl.)
- Kaaviokuva lukupöydän säätämisestä (engl.)

Lisävarusteena:

- Suurempi lukupöytä

Mikäli jokin näistä puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjäsi.

2.2. Opi tuntemaan ClearView C

Seuraavassa kuvassa näet ClearView C :n pääosat.



- | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | Näyttö | 8. | Kamera |
| 2. | Lukupöytä | 9. | HDMI ulos |
| 3. | C-muotoinen runko | 10. | HDMI sisään |
| 4. | Ohjain | 11. | Power ulos |
| 5. | X & Y jarrut | 12. | Power sisään |
| 6. | Kahva | 13. | Kameraliitäntä (malli:speech) |
| 7. | Päävirtakatkaisin | | |

2.3. Pakkauksesta purkaminen ja asennus

ClearView C toimitetaan yhdessä laatikossa valmiiksi koottuna. Sinun tarvitsee vain purkaa laite laatikosta, kiinnittää virtajohto laitteeseen ja kytkeä virtojohto pistokkeeseen.

Kun laitot virran päälle, tee seuraavasti:

- Kytke virtajohto seinäpistokkeeseen;
- Paina On / Off näppäintä kameralaatikon vasemmalla puolella.

2.4. Muuta lukupöydän paikkaa



Kompakti asento



Laajempi asento

ClearView C :ssä on kaksi lukupöydän asentoa: kompakti ja laajempi asento. Kompakti asento on oletuksena. Jos haluat saada enemmän tilaa, esimerkiksi kun teet käsitöitä tai luet isompaa julkaisua, voit vaihtaa laajempaan asentoon. Tarkista erillisestä kaaviokuvasta kuvat vaihe vaiheelta.

Muuta kompaktista laajempaan asentoon:

1. Poista suojalevy C-muotoisen varren yläosasta;
2. Löysää musta nuppi;
3. Liu´uta näyttö ja kamerakotelo oikealle nostamalla niitä kevyesti;
4. Tiukenna musta nuppi ja laita suojakansi takaisin paikalleen;
5. Löysää jarrut ja siirrä lukupöytä oikealle;
6. Löysää musta nuppi;
7. Siirrä lukupöytä takaisin paikalleen ja laita jarrut päälle siirtämällä ne keskiasentoon;
8. Pidä pöydästä kiinni ja vedä varsi ulospäin kunnes kuulet klikkauksen
9. Siirrä lukupöytä oikealle ja tiukenna musta nuppi;

Muuta takaisin kompaktiin asentoon:

1. Poista suojalevy C-muotoisen varren yläosasta;
2. Löysää musta nuppi;
3. Liu´uta näyttö ja kamerakotelo vasemmalle nostamalla niitä kevyesti;
4. Tiukenna musta nuppi ja laita suojakansi takaisin paikalleen.
5. Löysää jarrut ja siirrä lukupöytä oikealle;
6. Löysää musta nuppi;
7. Siirrä lukupöytä takaisin paikalleen ja laita jarrut päälle siirtämällä ne keskiasentoon;
8. Pidä pöydästä kiinni ja työnnä varsi lukupöydän alle kunnes kuulet klikkauksen
9. Siirrä lukupöytä oikealle ja tiukenna musta nuppi;

3. Käyttö

3.1. Johdanto

Kun käytät ClearView C :tä, aseta kädet lukupöydän etuosaan, jotta voit helposti käyttää ohjaimen painikkeita ja hallita lukupöydän liikkeitä.

ClearView C:ssä on langaton ohjain lukupöydän keskellä. Mikäli ohjain on asetettu lukupöydälle niin, että Optelecin logo on sinuun päin, peruskäytön näppäimet ovat käytettävissä.

Kun haluat käyttää laajempia ominaisuuksia, käännä ohjain siten, että viisi suorakaiteen muotoista näppäintä ovat sinuun päin.

3.2. Ohjain, peruskäyttö

Ohjain peruskäytössä on oikein asetettu lukupöytään, kun Optelec logo on sinuun päin ja kolme isoa näppäintä ovat ohjaimen päällä näkyvissä.



3.2.1. Virta päälle/pois



Laittaaksesi virran päälle paina oranssia Päälle/Pois näppäintä, joka sijaitsee pyöreän suurennusvalitsimen vieressä. ClearView C aukeaa samassa katselutilassa kuin se suljettiin.

Kestää noin 5 sekuntia, kunnes kuva näkyy.

Mikäli virta ei tule päälle, tarkista että kaikki johdot on kytketty ja että virtakytkin, joka sijaitsee näytön takana kamerakotelon vasemmalla puolella, on ON asennossa.

3.2.2. Suurennuksen säätäminen



Suurennussäädin on ohjaimen keskellä. Käännä sitä myötäpäivään lisätäksesi suurennusta ja vastapäivään vähentääksesi suurennusta.

3.2.3. Katselutilojen valinta



Painamalla valkoista näppäintä, joka sijaitsee suurennussäätimen keskellä, voit vaihtaa maksimissaan viiden eri katselutilan välillä. Halutut katselutilat voidaan itse asettaa laitteeseen.

1. **Väritila:** Tämä tila näyttää kuvan ja tekstin alkuperäiset värit.
2. **Lukutila 1:** Tämä tila parantaa tekstin ja taustan kontrastia. Oletuksena on musta teksti valkoisella pohjalla. Tekstin ja taustan värit voidaan muuttaa ClearView C :n valikossa /Menussa;
3. **Lukutila 2 (valinnainen):** Tämä tila parantaa tekstin ja taustan kontrastia. Oletuksena on valkoinen teksti mustalla taustalla. Tekstin ja taustan värit voidaan muuttaa tai poistaa käytöstä ClearView C :n valikossa /Menussa;
4. **Lukutila 3 (valinnainen):** Tämä tila parantaa tekstin ja taustan kontrastia. Oletuksena tämä lukutila on pois käytöstä. Tekstin ja taustan värit voidaan muuttaa tai poistaa käytöstä ClearView C :n valikossa /Menussa;
5. **Lukutila 4 (valinnainen):** Tämä tila parantaa tekstin ja taustan kontrastia. Oletuksena tämä lukutila on pois käytöstä. Tekstin ja taustan värit voidaan muuttaa tai poistaa käytöstä ClearView C :n valikossa /Menussa.

3.2.4. Valo päälle/pois



Kun painat valkoista Katselutilanäppäintä neljä sekuntia, valo sammuu. Voit haluta sammuttaa valon tilapäisesti vähentääksesi heijastusta. Kun painat näppäintä uudelleen, laite siirtyy seuraavaan katselutilaan ja valot syttyvät takaisin. Jos painat näppäintä pitempään neljän sekunnin ajan, valot syttyvät takaisin mutta laite ei siirry seuraavaan katselutilaan.

3.2.5. Yleiskuva (paikannin)



Näppäimellä saat nopeasti yleiskuvan tekstistä. Tämä helpottaa sinua löytämään haluamasi kohdan tekstistä.

Paina sinistä neliön muotoista Yleiskuva näppäintä laittaaksesi toiminnon päälle. ClearView C pienentää suurennuksen minimiin ja näyttää neliönmuotoisella kehyksellä näytön keskikohdan. Siirrä haluamasi kohta lukupöytää siirtämällä neliön keskelle. Paina näppäintä uudelleen ja laite näyttää valitsemasi kohdan suurennuksella, jota olit käyttänyt aiemmin.

3.2.6. Osoitin (paikannin)



Painamalla näppäintä kolme sekuntia punainen LED valo syttyy. Punainen piste näkyy lukupöydällä. Tämä näyttää kameran kohdan lukupöydällä. Esimerkiksi kun kirjoitat, vie kynä valon kohdalle niin kynä näkyy näytön keskellä. Paina näppäintä uudelleen niin valo sammuu tai 30 sekunnin kuluttua valo sammuu automaattisesti.

3.2.7. Lukupöydän jarrut ja liikkeen säätäminen

Käytä lukupöydän etuosassa olevia kahta liukukytöntä säätääksesi tai lukitaksesi lukupöydän liikkumista oikealle / vasemmalle tai ylös / alas. Kun kytkimet ovat uloimmassa asennossa, lukupöytä liikkuu vapaasti oikealle / vasemmalle ja ylös / alas. Kun haluat jarruttaa liikettä, siirrä kytkimiä keskeskemmälle. Vasen kytkin säätää oikealle / vasemmalle liikettä ja oikea kytkin säätää ylös / alas liikettä. Kun kytkimet ovat keskiasennossa, lukupöytä lukittuu. Ominaisuus voi olla hyödyllinen, kun kirjoitat, piirrät, tai teet käsitöitä. Lukitse pöytä myös, kun siirrät laitetta.

3.3. Ohjain, lisätoiminnot

Ohjain on oikeassa asennossa, kun viisi suorakaiteen muotoista painiketta ovat sinuun päin.

ClearView C One laitteessa tällä kaukosäätimellä pääsy on vain valikkoon (MENU). Muut painikkeet eivät toimi ilman erillistä toimintoasetusta (vain maahantuoja voi tehdä tämän).



3.3.1. Kuvansäätö



Jos kuva ei näy tarkasti, voit parantaa kuvaa ja säätää sen terävyyttä. Paina valkoista kuvansäätönäppäintä, joka on merkitty kohopisteellä ja auringon kuvalla (vasen näppäin).

Käännä suurennusnäppäintä säätääksesi kuvaa. Jos mitään näppäintä ei paineta kolmen sekunnin aikana, suurennussäädin palaa normaaliin toimintoonsa.


3.3.2. Apuviivojen ja verhojen asetus



Painamalla harmaata Viivat / Verhot näppäintä (toinen näppäin vasemmalta) voit selata apuviivat, verhot ja takaisin normaaliin näkymään. Apuviivat auttavat lukemisessa tai kirjoittamisessa. Verhot (kuvan rajausta)

voivat auttaa, jos kuva on liian kirkas tai jos sinun pitää keskittyä vain yhteen riviin tekstissä.

3.3.3. Apuviivojen ja verhojen paikka ja säätäminen

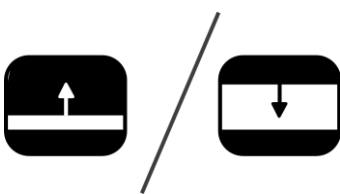

Kun apuviivat tai verhot on aktivoitu, ylimmäinen tai vasemmanpuoleinen viiva tai verho vilkkuu. Silloin sitä voi siirtää ylös, alas, oikealle, vasemmalle. Käytä suurennusnäppäintä liikuttamiseen. Paina kuvatilinäppäintä aktivoidaksesi toinen viiva tai verho.

Käytä taas suurennusnäppäintä liikuuttamiseen. Jos mitään näppäintä ei paineta 3 sekuntiin, suurennusnäppäin palaa takaisin alkuperäiseen toimintoon ja vilkkuminen päättyy. Paina valitsinta uudelleen poistaaksesi viivat tai verhot käytöstä.

3.3.4. ClearView C Menun /asetusten valikon aktivointi



Paina keskellä olevaa sinistä Menu näppäintä aktivoidaksesi asetusten valikon. Lisää valikosta kappaleessa 4.

3.3.5. ClearView C ja tietokone tai muu kuvalähde – kuvan vaihtaminen



Kun tietokone tai muu kuvalähde on yhdistetty ClearView C :hen, vaihda kuvaa painamalla harmaata nuolella merkittyä näppäintä (toinen näppäin oikealta).

Jotta tietokoneen kuva näkyy oikein, tarkista että tietokoneen resolution on säädetty 1920 x 1080.

3.3.6. Automaattitarkennuksen lukitus pois päältä



ClearView C :n kamerassa on automaattitarkennus. Painamalla valkoista kohopisteellä ja kynän kuvalla merkittyä näppäintä (oikeanpuoleinen näppäin)

automaattitarkennus lukittuu pois päältä. Tämä voi olla hyödyllistä kirjoittaessa, piirtäessä tai tehdessä käsitöitä. Oikeassa yläkulmassa näkyy kuvake, kun automaattinen tarkennus on pois päältä. Paina näppäintä uudelleen palauttaaksesi automaattitarkennuksen. Kuvake häviää ruudulta.

3.4. Ohjaimen paristot

Ohjaimessa on kaksi litteää paristoa, malli CR2025. Paristot kestävät kaksi tai kolme vuotta. Vaihtaaksesi paristot avaa ohjaimen sivussa oleva paristokotelo ja vaihda molemmat paristot samalla kertaa.

3.5. Ohjaimen parittaminen

Mikäli ohjain katoaa tai menee Rikki ja tarvitaan uusi ohjain, se pitää parittaa ClearView C :n kanssa.

1. Laita ClearView C päälle;
2. Pidä ohjainta pystyasennossa kamerakotelon oikeaa reunaa vasten, pohja kiinni kotelossa;
3. Ruudulle tulee näkyviin kuvake, joka kertoo paritusprosessin aloittamisesta;
4. Paina ohjaimen virta- ja yleiskuvanäppäimiä samanaikaisesti viiden sekunnin ajan. Vapauta näppäimet;
5. Jos paritus on onnistunut, kuvake häviää ruudulta;
6. Mikäli ClearView C ei tunnista tai näe ohjainta, paritusprosessi päättyy 30 sekunnin kuluttua ja parituskuvake katoaa. Toista kohdat 1-5 kunnes paritus on onnistunut. Mahdollisia syitä, jos paritus ei onnistu
 - Ohjaimen paristot ovat tyhjt;
 - Vääriä painikkeita painettiin aloitettaessa prosessi;
 - Ohjain on rikki.



3. ClearView C Menu /Valikko

Säädä kirkkautta.



Vaihda kontrastivärejä tai poista käytöstä kontrastikatselutiloja.



Valo päälle / pois.



Lukitse ohjaimen lisätoimintapainikkeet.



Säädä automaattisesti virrankatkaisuaikaa.



Säädä virransäästötilan aikaa.



Palauta tehdasasetukset.



Ohjelmistoversio ja laitteiston tiedot.



Poistu menusta.



Aktivoi valikko



Paina Menu-näppäintä päästäksesi valikkoon ja paina näppäintä uudelleen poistuaksesi valikosta.

Liikkuminen valikossa



Käytä suurennussäädintä valikossa liikkumiseen. Katselutilanäppäin keskellä aktivoi tai vahvistaa valinnan.

Poistu valikosta



Poistu valikosta, palaa edelliseen kohtaan tai peruuta valintasi painamalla Menu-näppäintä.

Menu: Brightness/Kirkkaus



Säädä näytön kirkkautta.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Käytä suurennussäädintä valikon selaamiseen. Valitse vaihtoehto Kirkkaus ja vahvista valinta Katselutilanäppäimellä.
- Valitse sopiva kirkkaus suurennussäätimellä. Kirkkaustasoja on viisi. Oletusarvo on 5.
- Paina Katselutilanäppäintä vahvistaaksesi valinta ja poistuaksesi valikosta.

Menu: Color/Väri



ClearView C :ssä on neljä korkeakontrastista katselutilaa ja väritila. Voit valita itse kaikkien kontrastitilojen värit. Kolme kontrastitilaa voi poistaa käytöstä, jos haluat työskennellä vain yhdellä kontrastitilalla. Oletuksena kolme katselutilaa on käytössä: Väritila, musta teksti valkoisella pohjalla ja valkoinen teksti mustalla pohjalla. Väriyhdistelmien lisäksi voit valita harmaasävyä.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Color /Väri, vahvista katselutilanäppäimellä.
- Valitse yksi kontrastitiloista suurennussäätimellä ja vahvista katselutilanäppäimellä.
- Käytä suurennussäädintä värivaihtoehtojen selaamiseen. Valitse ja vahvista sopiva vaihtoehto katselutilanäppäimellä.
- Voit poistaa käytöstä tilat 2, 3 ja 4 valitsemalla 'off'.
- Vahvista katselutilanäppäimellä ja poistu valikosta.

Voit valita seuraavista väriyhdistelmistä:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Musta – valkoinen | - Musta - vihreä |
| - Valkoinen - musta | - Vihreä - musta |
| - Keltainen - musta | - Musta - purppura |
| - Musta - keltainen | - Purppura - musta |
| - Keltainen - sininen | - Sininen - valkoinen |
| - Sininen - keltainen | - Valkoinen - sininen |
| - Musta - punainen | - Musta – meripihka
(ruskeankeltainen) |
| - Punainen - musta | - Meripihka - musta |
| | - Harmaasävy |

Menu: Light/Valo



Voit poistaa lukupöydälle tulevan valon. Kun valitset 'off', valo on pois päältä. Oletuksena valo on päällä.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Light/Valo ja vahvista katselutilanäppäimellä.
- Valo päällä 'on' ja valo pois 'off'. Vahvista valinta katselutilanäppäimellä ja poistu valikosta.

Menu: Keylock/Näppäinlukko

Lukitse ohjaimen lisätoimintonäppäimet (Menu-näppäintä ei voi lukita).

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Lock/Lukitse ja vahvasta katselutilanäppäimellä.
- Lukitaksesi valitse 'on', poista lukitus valitsemalla 'off'.
- Vahvista valinta katselutilanäppäimellä ja poistu valikosta.

Menu: Power off/Virrankatkaisu

Säädä aika, jonka jälkeen virta katkaistaan automaattisesti. Oletuksena on 5 minuuttia. Nämä 5 minuuttia alkavat oletuksena olevan 15 minuutin virransäästötilan jälkeen. Oletuksena, laite sammuu siis 20 minuutin käyttämättä olemisen jälkeen. Virrankatkaisu voidaan säätää: 5, 15, 30 minuuttia 'never'/ei koskaan.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Power off /Virrankatkaisu ja vahvasta katselutilanäppäimellä.
- Valitse sopiva aika.
- Vahvista valinta katselutilanäppäimellä ja poistu valikosta.

Menu: Standby/Virransäästötila

Säädä aika, jonka jälkeen ClearView C menee virransäästötilaan. Mikä tahansa näppäinpainallus palauttaa laitteen pois virransäästötilasta. Oletuksena on 15 minuuttia. Voit valita 5, 15, 30 minuuttia tai 'never'/ei koskaan.

Painamalla On / Off näppäintä laite menee aina ensin virransäästötilaan ennen kuin sammuttaa virran säädetyn ajan kuluttua.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Standby/Virransäästötila ja vahvasta katselutilanäppäimellä.
- Valitse sopiva aika.
- Vahvista valinta katselutilanäppäimellä ja poistu valikosta.

Menu: Reset/Palauta tehdasasetukset

Palauta tehtaan oletusasetukset.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Reset/Palauta tehdasasetukset ja vahvista katselutilanäppäimellä.
- Palauta tehdasasetukset valitsemalla 'yes'. Jätä asetukset ennalleen valitsemalla 'no'.
- Vahvista valinta katselutilanäppäimellä ja poistu valikosta.

Vaihtoehtoisesti:

- Paina ja pidä pohjassa Virtanäppäintä viisi sekuntia.

Menu: Information/Tiedot

Näyttää ohjelmaversion ja laitetiedot. Tässä ei voi tehdä muutoksia.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Information/Tiedot ja vahvista katselutilanäppäimellä.
- Poistu valikosta Menu-näppäimellä.

Menu: Exit/Poistu

Poistu valikosta.

- Aktivoi valikko Menu-näppäimellä.
- Valitse Exit/Poistu ja vahvista katselutilanäppäimellä.
Tai
- Paina Menu-näppäintä.

5. Näytön säätäminen

Voit säätää näytön korkeutta sekä kallistusta saadaksesi mahdollisimman mukavan katseluasennon.

Ota kiinni näytön kehyksestä molemmista reunoista ja siirrä näyttöä ylös tai alas, tai säädä sopiva katselukulma kallistamalla näyttöä.

ClearView C :n jalusta on erityistä pehmeää materiaalia, jotta voit kevyesti ja helposti kääntää koko laitetta pöydällä sopivaan asentoon. Ota kiinni jalustasta ja käännä laitetta.

Varoitus:

ennen kuin käännet laitetta, varmista että pöydällä on tarpeeksi tilaa laitteen kääntämiseen eikä ylimääräisiä esineitä tai esteitä ole pöydällä ja että virtajohto on tarpeeksi pitkä laitteen kääntämiseksi. Älä siirrä laitetta pois pöydältä sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen.

6. Kantokahva

Laitteessa on kantokahva näytön takana. Ennen nostamista varmista että kahva on lukittu paikalleen ja että lukupöytä on lukittuna.

Lukitse kahva:

- Siirrä näyttö alimpaan asentoon;
- Nosta näytön takana oleva kahva. Kun näyttö on ala-asennossa, kahva lukittautuu paikalleen.
- Lukitse lukupöytä paikalleen siirtämällä liukukytkimet lukitusasentoon.
- Nyt voit turvallisesti nostaa ClearView C :n.

Poista kahvan lukitus:

- Tartu varovasti näyttöön ja nosta se yläasentoon.

Liite A: Ongelmanratkaisu

Tehdasaetukset

- Mikäli laitteen käytössä on vaikeuksia, voit aina palauttaa laitteen oletusasetukset. Laita virta pois Päävirtakytkimestä ja odota 3 sekuntia. Laita virta takaisin päälle. Paina ja pidä pohjassa ohjaimen oranssia virtakytkintä 5 sekuntia. Vaihtoehtoisesti palauta oletusasetukset valikon kautta

Näyttöön ei tule kuvaa, kun laittaa virran päälle

- Varmista, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinnitetty.
- Varmista, että päävirtakytkin kamerakotelon sivussa on päällä On-asennossa.

Ohjaimen näppäimet eivät toimi

- Varmista, että paristoissa on virtaa. Paristot kestävät kaksi tai kolme vuotta.
- Varmista, että ohjain on paritettu laitteen kanssa.

Kuva ei ole tarkka

- Mikäli kynä-kuvake näkyy oikeassa yläkulmassa, paina Auto-focus näppäintä palauttaakseen automaattitarkennuksen.
- Puhdista näyttö pehmeällä liinalla.

Kuvat ja teksti näyttävät harmaalta tai kontrasti huonolta

- Valitse kontrastitila.
- Säädä kuvaa ohjaimen kuvansäätönäppäimellä.
- Säädä kirkkautta valikossa.

Tietokoneen kuva ei näy

- Varmista tietokoneen HDMI liitäntä ClearView C :n kamerakoteloon (älä liitä PC:tä suoraan näyttöön).
- Varmista PC:n resoluutio 1920x1080.

Lukupöytä ei liiku sujuvasti

- Varmista, että liukukytkimet ovat uloimmassa asennossa.
- Tarkista, ettei kiskoissa ole pölyä tai muita esteitä.

Liite B: Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje.

- Käytä ClearView C :tä sisätiloissa. Älä altista laitetta kosteudelle tai nopeille lämpötilan vaihteluille. Älä aseta laitetta lämmittimen lähelle tai altista suoralle auringonpaisteelle. Nämä olosuhteet saattavat vahingoittaa elektronisia tai optisia osia.
- Älä aseta laitetta epävakaa alle aslustoille. Se saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa laitteelle tai aiheuttaa käyttäjän loukkaantumisen.
- Tartu varovasti näytön kehyksistä, kun muutat sen sentoa, jotta laite säilyttää vakauden.
- Lukupöydässä, kahvassa sekä näytön säädössä on liikkuvia osia, Ole vrovainen säätäessäsi näitä. Mikäli sinun on vaikea säätää näitä osia turvallisesti itse, pyydä apua tai ota yhteys myyjääsi.
- Kun kannat laitetta kahvasta, tarkista, että näyttö on ala-asennossa, lukupöytä on lukittuna ja kahva on lukittuna estääksesi sormien tai vaatteiden jäämisen osien väliin.
- Huoltoasioissa ota yhteys jälleenmyyjään. Älä avaa laitetta, se voi aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Kun siirrät laitetta toiseen paikkaan, kanna ottamalla kiinni varresta tai kantokahvasta.
- Sammuta virta, kun et käytä laitetta.
- Irrota virtajohto seinästä, kun puhdistat laitetta. Käytä pehmeää liinaa puhdistamiseen. Älä käytä pesuaineita tai hankaavia materiaaleja sillä nämä voivat vahingoittaa laitetta.
- Käytä vain laitteen mukana tulleita johtoja.

Laitetuki

Mikäli sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä tai asennuksesta, ota yhteys jälleenmyyjään.

Takuuehdot

Optelec antaa takuun ClearView C :lle, alkaen toimituspäivästä. Takuu kattaa virheeliset materiaalit sekä työn laadun.

Takuu ei ole siirrettävissä eikä koske usean käyttäjän ryhmiä. ClearView C on tarkoitettu yksityiselle käyttäjälle käytettäväksi kotona, koulussa tai työssä. Optelec pidättää oikeuden korjata laite tai korvata laite samanlaisella tai parannetulla laitteella.

Optelec ei ole vastuussa epäsuorista vahingoista. Käyttäjän tekemät salitut huoltotyöt ovat rajoitettu ClearView C :n moduulien vaihtamiseen. Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai takuu raukeaa.

Optelec ei ole vastuussa tämän laitteen muunlaisesta käytöstä kuin mitä käyttöohjeessa mainitaan.

Compliance

This product is in conformity with the following directives:

Council directive 93/42/EEC of 14th June 1993 concerning medical devices Class I / Annexe VII.

Electrical medical equipment requires special precaution with regard to EMC (Electro Magnetic Compatibility) and must be installed and put into service according to EMC guidelines.

WARNING: The use of accessories and cables other than those specified and sold by the manufacturer of the ClearView C, as replacement parts for components, may result in increased emissions or decreased functioning of the ClearView C.



This device bears the CE, FCC and UL approval mark.

Liite C: Tekniset tiedot

Tarkennus	Automaattitarkennus, lukitus
Suurennus ClearView C One	2.4X – 27X tai 6X – 55X 21,5 “ näytöllä
Suurennus ClearView C HD	1.5 X – 75 X 24” näytöllä Vaihtoehtona max: 170 X
Resoluutio	1920x1080
Mitat, laitteen koko pöydällä	42 x 51 cm (kompakti asento) 42 x 62 cm (laajempi asento)
Lukupöydän mitiat	42 x 32 cm (standardipöytä) 42 x 42 cm (isompi pöytä)
Paino	alk. 15.7 kg
Virta	Integroitu 110 - 240 Volt AC.
Taajuus	50 - 60 Hz

Työskentelyolosuhteet

Temperature	+10°C - +35°C
Humidity	< 70%, ei kondensaatiota

Varastointi- ja kuljetusolosuhteet

Temperature	-10°C - +40°C
Humidity	< 95%, ei kondensaatiota

Optelec headquarters

Optelec BV
Breslau 4
2993 LT Barendrecht,
The Netherlands
T: +31 (0)88 6783 444
www.optelec.com



UDC-02141
Rev: A