

Pikaohje

Victor Reader Stream 2



Victor Reader Streamin käyttöönotto

Victor Reader Stream 2 on tarkoitettu Daisykirjojen kuunteluun. Paina ja pidä **näppäin 1** painettuna niin voit kuunnella käyttöohjeen.



Laite käynnistetään ja sammutetaan tästä painikkeesta

Paina tätä painiketta kunnes kuulet äänimerkin. Laite sammutetaan samalla tavalla pitämällä painike painettuna.



**Liitä ulkoinen
mikrofoni**



Akun latausliitin
Liitä laturin johto tähän ja
työnnä laturi seinärasiaan.

Äänen voimakkuuden muuttaminen



Muistikortti

Äänikirjojen täytyy olla muistikortilla.

Muistikortti asetetaan laitteen yläpäässä olevaan aukkoon.

Paina muistikorttia kevyesti sisäänpäin poistaaksesi kortin.



Jos laitteessa ei ole muistikorttia laite kertoo painikkeiden ja näppäimien toiminnan kun painat niitä.

Muistikortin aukon vieressä on kuulokeliitin.

Kirjan kuuntelu

Paina Käynnistä/Pysäytä näppäintä aloittaaksesi kirjan kuuntelemisen. Samalla näppäimellä voit pysäyttää kuuntelun.



Oikean kirjan löytäminen

1. Paina näppäintä 1 siirtyäksesi muistikortilla olevien kirjaluetteloiden välillä. Joka painalluksella luettelo vaihtuu. Paina kunnes kuulet "Äänikirja"
2. Paina näppäimiä 4 ja 6 siirtyäksesi kirjaluettelossa olevien kirjojen välillä.
3. Valitse kirja painamalla #.



Äänikirjassa liikuminen

1. Painamalla näppäimiä 2 ja 8 valitset kuinka suuria hyppyjä haluat tehdä kirjassa.
2. Paina nyt näppäintä 6 liikkuaaksesi eteenpäin ja näppäintä 4 liikkuaaksesi taaksepäin.



Äänittäminen



Paina punaista äänitysnäppäintä kerran.

Äänitys käynnistyy.

Paina uudestaan lopettaaksesi äänittämisen.

Jokainen äänite saa oman numeron.

Äänityksen toistaminen

4. Paina näppäintä 1 liikkeaksesi muistikortilla olevien luetteloiden välillä.

Paina näppäintä kunnes kuulet ”Muistiinpanot”.

5. Paina näppäintä 4 ja 6 liikkeaksesi kortilla olevien äänityksien välillä.
6. Valitse haluamasi äänite näppäimellä #.



Äänikirjojen siirtäminen laitteeseen

Usein äänikirjat tulevat CD-levyllä.
Ne täytyy siirtää muistikortille.
Siihen tarvitaan tietokone.

Tähän on kaksi tapaa.

Yksinkertainen tapa:

1. Sammuta Stream.
2. Liitä välijohto USB-liittimeen.
3. Liitä kaapelin toinen pää tietokoneeseen.
4. Käynnistä Stream.
5. Aseta CD tietokoneen CD-asemaan.
6. Käynnistä "Companion" –niminen ohjelma. Ohjelma on englanninkielinen.
7. Valitse minkä kirjan haluat siirtää.
8. Käytä painiketta "Siirä/Poista valitut äänikirjat".
9. Odota kunnes siirtäminen on suoritettu. Kuulet lyhyitä äänimerkkejä siirron aikana.
10. Sulje Stream ja irrota välijohto.



Nopeampi mutta hankalampi tapa:

1. Poista muistikortti laitteesta.
2. Laita muistikortti tietokoneen muistikorttipaikkaan.
3. Aseta CD tietokoneen CD -asemaan.
4. Kopioi kaikki tiedostot CD:ltä uuteen kirjan nimen mukaan nimettyyn alikansioon kansiossa \$VRDTB.

