

SmartVision3

Pikaohje

www.kapsys.com

HUOMAA:

Suosittellemme varsinaisen käyttöohjeen lukemista ennen laitteen käyttöä.

Sähköinen versio tästä ohjeesta on saatavilla sivuston www.kapsys.com tukiosion kautta.

Pakkauksen sisältö

SmartVision3:n mukana tulee:

220/110 voltin virta-adapteri - 5 voltia USB

USB-kaapeli (tyyppi C)

Stereokuulokkeet mikrofonilla

5 NFC-tagia

SIM-kelkan irrotustyökalu

Pikaohje

Esittely

Kohde: Kuvaus

3,5 mm:n kuulokeliitäntä: Yhdistä stereokuulokkeet

Virtapainike: Pidä painettuna käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen, lukitse tai avaa näyttö painamalla lyhyesti (valmiustila)

SIM-kelkka: SIM- ja SD-kortteja varten

Etukamera: Käytä selfiekuviin ja videoyhteyksiin

Puhelinkuuloke: Puheluiden pää-äänireitti

Näyttö: Näytä tietoa ja hallitse laitetta (toimii myös kosketusnäyttönä)

Navigointinäppäimet: Liiku näytöllä neljällä näppäimellä (ylös, alas, oikea ja vasen) ja aktivoi kohteita OK-näppäimellä

Koti: Siirry kotinäyttöön

Valikko: Avaa nykyisen kohdan valikko

Takaisin: Edellinen näyttö

Poista: Poista kirjoitettua tekstiä

Aakkosnumeerinen näppäimistö: Käytä tekstin syöttämiseen

Äänikomentopainike: Käytä komentojen saneluun ja erityisten toimintojen käynnistämiseen

Äänenvoimakkuuspainikkeet: Muuta äänenvoimakkuutta

Takakamerat: 16 megapixeliä ja 2 megapixeliä

Sormenjälkitunnistin: Avaa puhelimen lukitus tai suorita turvallisia maksuja

Mikrofoni: Puheluiden ja äänentunnistuksen päämikrofoni

USB-C-paikka: Akun lataus ja tiedonsiirto

Kaiutin: Pääkaiutin

Aloitus

NanoSIM- ja MicroSD-korttien asettaminen

SmartVision3:ssa on paikka kahdelle SIM-kortille tai yhdelle SIM-kortille ja microSD-kortille.- Jos laitteessa on microSD-kortti, siihen mahtuu vain yksi SIM-kortti. SmartVision3:een eivät sovi ns. muokatut SIM-kortit, jotka ovat paksumpia kuin alkuperäiset nanoSIM-kortit, koska ne saattavat vahingoittaa SIM-kelkkaa. MicroSD-korttia ei toimiteta laitteen mukana. SmartVision3 tukee muistikortteja 128 GT:hen asti.

1. Avaa SIM-kelkka:

Aseta puhelin eteesi näyttö ylöspäin. Aseta mukana toimitetun SIM-kelkan irrotustyökalun terävä pää puhelimen vasemmassa sivussa olevaan reikään. Varmista, että työkalu on suorassa linjassa reikään nähden, muutoin kelkka tai laite saattaa vahingoittua. Työnnä työkalua, kunnes SIM-kelkka pompahtaa ulos, vedä työkalu sitten ulos. SIM-kelkassa on kaksi paikkaa. Ensimmäiseen paikkaan voit asettaa joko SIM- tai microSD-kortin, toiseen vain SIM-kortin.

2. Sekä SIM- että SD-kortti (valinnainen):

Aseta SD-kortti ensimmäiseen paikkaan metallipuoli alaspäin ja lovettu kulma alaspäin. Aseta sitten SIM-kortti toiseen paikkaan metallipuoli alaspäin ja lovettu kulma alaoikealle. Aseta sitten SIM-kelkka varovasti takaisin puhelimeen. Varmista, että kelkka asettuu kokonaan puhelimen sisään, eikä jää irttonaiseksi.

3. Kaksi SIM-korttia:

Aseta molemmat SIM-kortit paikkoihin metallipuoli alaspäin ja lovettu kulma alaoikealle.

Aseta sitten SIM-kelkka varovasti takaisin puhelimeen. Varmista, että kelkka asettuu kokonaan puhelimen sisään, eikä jää irtonaiseksi.

SIM-korttien järjestyksellä ei ole väliä, sillä niitä hallitaan puhelimen asetuksista.

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos et ole käyttänyt laitetta vähään aikaan. Käytä vain yhteensopivaa laturia ja kaapelia. Sopimattomien osien käyttö voi aiheuttaa vahinkoja tai vahingoittaa laitetta. Yhdistä USB-C-johto laitteen ja virta-adapterin välille. Yhdistä sitten virta-adapteri seinäkoskettimeen. Kun akku on täyteen ladattu, irrota laturi laitteesta.

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä SmartVision3 pitämällä virtapainiketta painettuna. Päästä painikkeesta irti laitteen värähtäessä. Jos laite ei käynnisty, varmista, että akku on ladattu.

Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna. Valitse sitten näytöltä kohta "Katkaise virta".

Laitteen uudelleenkäynnistys

Pitä virtapainiketta painettuna ja valitse "Käynnistä uudelleen". Jos laite ei reagoi, pidä virtapainiketta painettuna kymmenen sekunnin ajan. Tämä on pakotettu uudelleenkäynnistys.

Valmiustila

Kun SmartVision3 on päällä, virtapainikkeen lyhyt painallus joko avaa näytön (normaalitila) tai sammuttaa sen (valmiustila). Valmiustila otetaan käyttöön tietyn ajanjakson kuluttua akun säästämiseksi.

Valmiustilassa näyttö on sammutettuna ja näppäimistö poissa käytöstä, mutta toiminnot ovat edelleen käytössä. Näin ollen esim. puhelut ja viestit tulevat sinulle normaalisti.

Laki- ja takuutiedot

1. Käyttövaroituksia ja -suosituksia

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi.

Käsittele laitetta ja sen lisävarusteita varoen, älä kolhi tai pudottele niitä.

Älä avaa laitetta, sillä tämä johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa laitteen käyttökelvottomuuden.

Käytä vain valmistajan hyväksymiä kaapeleita, latureita, ja muita lisävarusteita estääksesi mahdollisen sähköiskun, tulen, räjähdysten tai muun vahingon.

Älä muuntele laitetta, sillä tämä johtaa takuun raukeamiseen. Takakuorta ei voi poistaa.

Puhdista tuotetta vain pehmeällä, hieman kostutetulla liinalla. Älä käytä kemikaaleja, siivousaineita tai muita yhdisteitä.

Tämä tuote ei ole vedenkestävä. Suojaa se kosteudelta ja roiskeilta.

Älä säilytä laitetta äärimmäisissä lämpötiloissa. Säilytyslämpötila on välillä -20 celsiusastetta - +45 celsiusastetta.

Älä altista laitetta pitkäaikaiselle suoralle auringonvalolle. Käyttölämpötila on välillä -5 celsiusastetta - +40 celsiusastetta.

Pidä laite ladattaessa hyvin ilmastoidussa tilassa. Lataa laitetta vain lämpötilassa +5 celsiusastetta - +35 celsiusastetta.

Älä käytä tuotetta magneettikenttien läheisyydessä.

Älä käytä tuotetta, jos näyttö on rikkoutunut, sillä tämä saattaa aiheuttaa vahinkoja. Jos jokin osa on rikkoutunut, ota yhteys maahantuojaan.

Älä käytä tuotteita alueilla, joilla on mahdollisesti räjähdyksiä.

Pitkäaikainen käyttö saattaa kuumentaa laitetta. Jos laite kuumenee yli tietyn lämpötilan, toimintoja saatetaan rajoittaa tai laite sammuttaa laitteen viilentämiseksi.

Älä altista kameran linssiä voimakkaalle valolle, kuten suoralle auringonvalolle. Mikäli linssi altistuu voimakkaalle valolle, se saattaa vahingoittua. Tämä puolestaan aiheuttaa erilaisia virheitä kuviin.

Jos pölyä tai tuntemattomia esineitä pääsee mikrofoniin tai kaiuttimiin, laitteen ääni saattaa häiriintyä tai jotkin toiminnot lakata toimimasta. Jos yrität poistaa tällaisia esineitä terävällä esineellä, saatat vahingoittaa laitetta.

Yhteysongelmia ja akun nopeaa kulumista saattaa esiintyä seuraavissa tilanteissa:

Jos kiinnität metallisia tarroja laitteen antenniosiin

Jos asennat laitteeseen metallisia materiaaleja sisältävän suojakuoren

Jos peität antennin käsilläsi tai muilla esineillä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten puheluita.

Suosittelemme, että sammutat laitteen aika-ajoin optimaalisen toimintakunnon varmistamiseksi.

Käytä vain hyväksyttyä KAPSYS-suojakuorta. Muiden suojakuorten käyttö saattaa aiheuttaa sensorien toimintahäiriöitä.

Älä käytä eristeettömiä tai vahingoittuneita kaapeleita, äläkä vahingoittunutta laturia.

2. Turvallisuus ja terveys

Pidä tuote pienten lasten ulottumattomissa.

Älä käytä puhelinta ajaessasi.

Suojaa kuulosi: Vältä pitkittynyttä kuuntelua suurilla äänenvoimakkuuksilla.

Älä käytä tuotetta sairaaloissa, pyydä lupa ennen käyttöä lääkinnällisten laitteiden lähellä.

Henkilöille, joilla on sähköisiä implantteja (sydämentahdistin, insuliinipumppu, stimulaattorit) suositellaan käyttöä 15 cm:n päässä implantista tai vastakkaisella puolella siihen nähden.

3. Takuu

Takuu on voimassa vain laitteen normaalin käytön aikana. Kaikki ihmisen aiheuttamat vahingot ja seuraavat olosuhteet eivät kuulu takuun piiriin:

Takuuaika on umpeutunut.

Normaali laitteen kuluminen (näppäimet, kuori, näyttö, lisävarusteet).

Vahinko, jonka on aiheuttanut vääränlainen käyttö, altistus kosteudelle tai nesteelle tai lämmönlähteen läheisyys.

Rikkoutuneet tai säröytyneet laitteet tai laitteet, joissa on näkyviä sähköiskun jälkiä.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen, onnettomuudet, vääränlainen käyttö tai sellainen käyttö, johon laite ei ole tarkoitettu tai kaupallinen käyttö.

Hyväksymättömien varaosien käyttö.

Korjaus, joka on suoritettu ilman KAPSYSin valtuutusta, joko itse tai korjausliikkeessä.

Ylittämättömän esteen, kuten salamaniskun, maanjäristyksen, tulipalon tai tulvan aiheuttamat vahingot.

Toimimattomuudet, jotka johtuvat operaattorista tai palveluntarjoajasta, eivät kuulu takuun piiriin. Ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä palveluntarjoajaan.

Laitteen akun kapasiteetin väheneminen. Takuuaikana kapasiteetin pitäisi vähentyä vain hieman. Tämän jälkeisiä akkutehon laskuja kutsutaan normaaliksi kulumaksi.

Joissain tapauksissa korjaus on mahdollinen asiakkaan itse kustantamana. Jos laite rikkoutuu, ota yhteys maahantuojaan.

Suosittelaa varmuuskopioiden ottamista säännöllisesti. KAPSYSiä ei voida pitää vastuussa laitteen tietojen katoamisesta toimintavirheen, korjauksen tai korvaavan laitteen tapauksessa.

4. SAR

SmartVision3 on radiovastaanotin ja -lähetin. Se on valmistettu täyttämään Euroopan Unionin suosittelemat radiotaajuuksien (RF) altistuksen rajat.

Tämä laite täyttää kansainvälisen kommission standardin ei-ionisoivasta säteilystä ((ICNIRP) sekä eurooppalaisen standardin kannettavista radiolaitteista.

Ohjeet käyttävät yksikköä ominaisabsorptionopeus (SAR). SAR-rajat mobiililaitteille on 2,0W/kg pään tai vartalon alueella käytettynä ja 4,0W/kg raajoilla käytettynä.

Tämä puhelin on testattu sellaisten lisävarusteiden varalta, jotka eivät sisällä metallia ja joiden vähimmäisyysetäisyys kehosta on 1,5 cm. Muiden lisävarusteiden käyttö ei välttämättä takaa RF-

standardien täyttymistä. Jos et käytä puhelinta korvalla, on suositeltava etäisyys kehosta 1,5 cm puhelimen ollessa päällä.

Käytönaikainen SAR-taso on usein paljon pienempi kuin maksimiarvo. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimesi säteilemä energia. Voit vähentää RF-energialle altistumista käyttämällä esim. handsfree-laitetta ja käyttämällä laitetta siten, ettei se ole pään tai kehon lähellä.

Tämän laitteen suurimmat SAR-arvot kymmentä laitteen grammaa kohti on lueteltu alla:

Pää: 0,498 W/kg

Keho: 0,765 W/kg

Raajat: 1,485 W/kg

5. Rajoitukset 5GHz-taajuudessa

Kuten direktiivin 2104/53/EU artiklassa 10 säädetään, tämän laitteen WLAN-toiminto on rajoitettu vain sisäkäyttöön, kun käytetään taajuusaluetta 5,15-5,35 GHz. Tämä pätee seuraavissa maissa:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, IS, LV, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK.

5. Asiakaspalvelu

Saat lisätietoja maahantuojan asiakaspalvelusta. Voit myös lähettää meille postia osoitteella:

Service Clients KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France.

Tietoa saa myös sivustolta www.kapsys.com

5.1. Maahantuojan yhteystiedot

Näköpiste Polar Print Oy

Nuijamiestentie 5 A

00400 Helsinki

Puh.: 09 6150 0124

www.polarprint.fi

info@polarprint.fi

6. Tavaramerkit

Tässä dokumentissa viitatus yritykset ja tuotteet ovat omistajiensa tavaramerkkejä, joko rekisteröityjä tai ei, seuraavasti:

KAPSYS-sanat, logot ja brändit ovat KAPSYS SAS:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android, Google, Google Play, Chromecast built-in, YouTube ja muut logot ja merkinnät ovat Google LLC.:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Bluetooth-nimet, logot ja brändit ovat Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.

7. Tästä ohjeesta

Tämän ohjeen tiedot voivat muuttua ilman erillisilmoitusta. KAPSYS pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä dokumenttia tai mitä tahansa sen osaa ilman ilmoitusvelvollisuutta millekään yhdistykselle tai yksittäiselle henkilölle. KAPSYSiä ei voida pitää vastuussa teknisen tai julkaisuvirheen tapahtuessa tai suorasta tai epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu tämän ohjeen tai tuotteen käytöstä. KAPSYS haluaa parantaa tuotteitaan ja niiden toimintoja sekä toiminnallisuutta jatkuvasti. Näinollen KAPSYS pyytää sinua vierailemaan verkkosivullaan www.kapsys.com.

RoHS

Tämä tuote on yhteensopiva Euroopan parlamentin direktiivin 2015/863/EY kanssa, jolla muutetaan ROHS-direktiiviä 2011/65/EU, joka koskee tiettyjen vaarallisten aineiden (RoHS) käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ja sen muutoksia.

CE-merkintä

Tämä tuote täyttää CE-merkintävaatimukset, jotka koskevat käyttöä asuin-, kaupallisissa tai kevyen teollisuuden asennuksissa, ja R&TTE-direktiivin (2014/53/EU/RED) vaatimukset. Lisätietoja CE-merkinnästä saat myös verkkosivuiltamme osoitteessa www.kapsys.com.

WEEE

Tämä tuote tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti sähkötuotteita ei saa missään olosuhteissa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Hävitä tämä tuote palauttamalla se myyntipisteeseensä tai paikalliseen keräyspisteeseen kierrätystä varten.

VAROITUS:

Kuulo voi heiketä pysyvästi, jos kuuntelet pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella.