

VictorReader® Stratus⁴ M



Käyttöohje

Käyttöohje

Victor Reader Stratus⁴ M

©Copyright 2011. Kaikki oikeudet pidätetään. HumanWare, Kanada

Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain nojalla HumanWaren omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslain nojalla tätä käyttöohjetta ei saa kopioida kokonaisuudessaan eikä osia siitä ilman HumanWaren kirjallista suostumusta.

On varmistettu, että tämän julkaisun tiedot ovat oikeita julkaisemisajankohtana. HumanWare Limited ja sen edustajat eivät ota vastuuta julkaisun virheistä tai puutteista. Vastuuta ei myöskään oteta tämän tekstin tietojen hyödyntämisen seurauksena laitteelle syntyneistä vaurioista.

Victor Reader Stratus⁴ M Daisysoittimen pikaohje

Tervetuloa käyttämään uutta Victor Reader Stratus 4 M Daisysoitintasi. Kytke laite pistorasiaan kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. Toimiakseen laite tarvitsee sähkövirtaa. Kytke virtajohdon toinen pää Daisysoittimen liittimeen, joka löytyy laitteen takapuolelta, läheltä oikeaa kulmaa. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan. Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, laitteen oltua pitkään käyttämättömänä tai akun vaihdon jälkeen jätä laite yöksi pistorasiaan. Näin akku on varmasti täynnä.

Daisysoittimen virtanäppäin vilkkuu kullanuskeana tai vihreänä. Virtanäppäin vilkkuu kullanuskeana, kun laite on pois päältä ja kytketty pistorasiaan. Vilkkuminen kertoo akun latautuvan. Kun vilkkuminen loppuu, akku on täynnä.

Virtanäppäin vilkkuu vihreänä, kun Daisysoitin on kytketty päälle, olipa se kytketty verkkovirtaan tai ei. Normaalisti akun latautuminen kestää neljä tuntia. Useimpia Daisykirjoja kuunneltaessa akun lataus kestää kymmenen tuntia. Huomioithan, että voit käyttää laitetta akun latautuessa.

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää Victor Reader Stratus⁴ M Daisysoittimen. Lisäksi pakkauksessa on virtajohto sekä muovipussissa laitteen asiakirjat ja tämä CD-levy. CD-levyllä on lyhyet ohjeet päästäksesi alkuun Daisysoittimen käytössä sekä käyttöohje.

Painamalla Toista/Pysäytä -näppäintä voit keskeyttää kuuntelun tai jatkaa sitä uudelleen. Näppäin on Daisysoittimessa alhaalla keskellä, eteenpäin- ja taaksepäinkelausnäppäinten välissä.

Aseta Daisysoitin eteesi niin, että sen kantokahva on vasemmalla. Kahvan yläpuolella, vasemmassa yläkulmassa on sisäänrakennettu kaiutin. Ylhäällä keskellä on kolme vierekkäin olevaa näppäinparia, jotka ovat vasemmalta oikealle lueteltuina äänen sävy, äänen voimakkuus ja puhenopeus.

Näppäinparien alapuolella, suunnilleen keskellä Daisysoitinta ovat nuolinäppäimet osoittaen ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Nuolinäppäimillä voit liikkua kirjan sisällä ja selata sitä.

Nuolinäppäinten keskellä on info-näppäin, jolla saat tietää sen hetkisen lukemissijainnin lukemastasi kirjasta, yleistä tietoa kirjasta sekä akun varaustilasta.

Vasemmalle nuolinäppäimistä noin puolivälissä laitetta alaspäin mentäessä on kolme näppäintä pystysuuntaisessa rivissä. Ensimmäinen näppäin on kirjahylly-näppäin, jota käytetään nuolinäppäinten kanssa. Näppäimillä pääset tutkimaan kirjoja, jotka voi järjestää erilaisiin kirjahyllyihin. Heti kirjahylly-näppäimen alapuolella on kirjanmerkki-näppäin, jota käytetään kirjanmerkkien lisäämiseen voidaksesi tallentaa tärkeitä sivuja tai kappaleita myöhempää tarvetta varten. Kolmas, alimmainen näppäin on levyn poisto -näppäin, jota käytetään CD-levyjen poistamiseen levyasemasta.

Nuolinäppäinten oikealla puolella on virtanäppäin. Se on syvennyksessä vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Virtanäppäintä käytetään Stratuksen käynnistämiseen ja sammuttamiseen.

Huomioithan: Kun Stratus on sammutettu ja kytket sen verkkovirtaan, kuluu hiukan aikaa ennen kuin virtanäppäin alkaa toimia.

Nuolinäppäinten alapuolella on neljän näppäimen ryhmä. Kolme niistä ovat Daisysoittimen alareunan suuntaisesti. Vasemmalta oikealle lueteltuna näppäimet ovat pikakelaus taaksepäin, Toista/Pysäytä -näppäin ja pikakelaus eteenpäin.

Toista/Pysäytä -näppäimen yläpuolella on unitoiminto-näppäin. Se on puolikuun muotoinen ja sen vasemmalla puolella on oranssi LED-valo. Eri aikajaksot asetetaan painamalla toistuvasti unitoiminto-näppäintä. Asettamasi aikajakson jälkeen Stratus kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Daisy-soittimen oikealta sivulta löytyy ylhäältä alas lueteltuina aukko SD-kortille, USB-portti ja kuulokeliitin, joka sopii myös ulkoiselle kaiuttimelle.

Daisysoittimen takaosassa, hiukan keskikohdan oikealla puolella on virtaliitin, jolla laite yhdistetään pistorasiaan.

Daisysoittimen etuosassa on CD-levyaseman aukko.

Äänikirjan asettaminen Daisysoittimeen ja kuuntelu

Käynnistä Victor Reader Stratus⁴ M painamalla pitkään virtanäppäintä. Kuulet merkkiäänen ja tervetuloilmoituksen. Aseta CD-levy levyasemaan tai SD-kortti kortin aukkoon. Työnnä CD-levyä kevyesti aukkoon jolloin levyasema ottaa levyn vastaan. Muutaman sekunnin kuluttua Victor Reader Stratus kertoo kirjan nimen ja kirja alkaa kuulua Daisysoittimesta.

Huomioithan: Jos vahingossa laitat levyn väärinpäin asemaan, levy poistetaan automaattisesti 15 sekunnissa vaurioitumatta.

Voit säätää Daisysoittimen äänen sävyä ja voimakkuutta sekä puhenopeutta painamalla näppäinparien ylintä ja alinta näppäintä. Äänen sävyn ja voimakkuuden sekä puhenopeuden näppäinparit ovat ylhäällä keskellä Daisysoittimen etupuolella.

Halutessasi pikakelata kirjaa paina pitkään eteenpäin- tai taaksepäinkelausnäppäintä, kunnes olet haluamassasi kohdassa ja irrota näppäimestä. Lukeminen jatkuu tavallisella nopeudella.

Keskeyttääksesi lukemisen paina Toista/Pysäytä -näppäintä. Halutessasi jatkaa lukemista paina jälleen Toista/Pysäytä -näppäintä.

Huomioithan: Jos Daisy-soitinta ei ole kytketty pistorasiaan ja lukeminen on keskeytetty yli puoleksi tunniksi, laite kytketty automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.

Halutessasi kokonaan lopettaa lukemisen sammuta Daisy-soitin painamalla pitkään virtanäppäintä, kunnes laite kertoo että se suljetaan. Victor Reader Stratus muistaa kohdan, johon jäit edellisellä lukemiskerralla. Kun haluat jälleen jatkaa saman kirjan lukemista, käynnistä Victor Reader Stratus painamalla pitkään virtanäppäintä. Muutaman sekunnin kuluttua kuulet kirjan nimen, merkkiäänen ja lukeminen jatkuu siitä, mihin viimeksi jäit.

CD-levyn poistaminen

Poistaaksesi levyn Daisy-soittimesta paina levyn poisto -näppäintä. Victor Reader Stratus kertoo levyn poistamisesta ja levy liukuu kevyesti ulos levyasemasta.

Painikekuvaustoiminto

Kun Stratuksessa ei ole kirjaa se on automaattisesti painikekuvaustoiminto-tilassa. Painikekuvaustoiminto-tilassa Daisy-soitin kertoo näppäimen toiminnon sitä painettaessa. Tämä auttaa Daisy-soittimen käytön opettelussa.

Näin pääset alkuun Daisy-soittimen käytössä. Käyttöohjetta lukemalla saat lisätietoa milloin tahansa. Seuraavana on käyttöohje kokonaisuudessaan.

DAISY-SOITTIMEN KÄYTTÖOHJE

VICTOR READER STRATUS⁴ M

HumanWare esittelee ylpeänä Victor Reader Stratus⁴ M, yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen Daisy-soittimen. Victor Reader Stratus⁴ M on suunniteltu vapaa-ajalle, kuten bestsellereiden, romaanien ja lehtien lukemiseen. Voit helposti liikkua kirjan sisällä selaillessi sitä ja löytää haluamasi tiedot. Helppokäyttöisten toimintojen lisäksi voit käyttää apuna sisällysluetteloja, siirtyä haluamiisi kappaleisiin ja lisätä ja löytää kirjanmerkkejä. Toivomme miellyttäviä hetkiä tutustuessasi Daisy-soittimeesi.

Tietoja valmistajasta

HumanWare (<http://www.humanware.com>) on maailmanlaajuinen johtava lukemisesteisten apuvälineiden valmistaja. HumanWare valmistaa apuvälineitä sokeille, heikkonäköisille ja henkilöille joilla on oppimisvaikeuksia.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä ohjeita, huomautuksia ja varoituksia. Lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti ennen Stratuksen käytön aloittamista.

Säilytä ja käytä Stratusta vain kovalla, tukevalla alustalla.

Pidä laite veden ja kosteuden ulottumattomissa. Älä upota laitetta veteen.

Käytä vain Stratuksen omia johtoja käyttäessäsi laitetta.

Stratuksen virtajohto liitetään laitteeseen ja pistorasiaan.

Käytä laitetta vain merkintätarran mukaisella verkkojännitteellä. Ellet ole varma verkon jännitteestä, kysy neuvoa laitteen toimittajalta tai paikallisesta sähköyhtiöstä.

Jos tuote rikkoutuu, toimita se myyjälle tai maahantuojalle. Älä yritä korjata tuotetta itse. Laitteen kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille sähköiskuille tai muille vaaroille.

Akun turvallisesta käytöstä

Älä käytä äläkä säilytä akkua lämpölähteiden tai avotulen lähellä

Käytä vain Stratuksen verkkolaitetta akkua ladataksesi.

Älä pura akkua tai muuta sen muotoa.

Älä oikosulje akun napoja.

Älä upota akkua veteen, äläkä kastele sitä.

Älä hakkaa, kolauttele tai heittele akkua.

Älä puhkaise tai hakkaa akkua terävillä esineillä tai vasaralla.

Älä juota akkua.

Käytä akkua vain valmistajan tarkoittamalla tavalla.

Varoitus! Väärän tyyppisen akun käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran

Akkujen hävittäminen, palauta myyjälle tai akkujen kierrätyspisteeseen

Älä käytä akkua muiden akkujen äläkä erimerkkisten tai erilaisella varautumiskyvyllä toimivien akkujen kanssa.

Jos akku vuotaa ja silmiisi joutuu nestettä, älä hiero silmiäsi. Sen sijaan huuhtelee silmäsi puhtaalla juoksevalla vedellä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon välttyäksesi vammoilta.

Jos akku vuotaa ja joutuu ihokontaktiin, huuhtelee kyseinen ihon kohta heti puhtaalla juoksevalla vedellä välttyäksesi vammoilta.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Muiden kuin HumanWaren laitteiden ja johtojen käyttö saattaa lisätä säteilyä ja vähentää Stratuksen turvallisuutta.

Laitteen sijoittaminen

Stratusta ei saa käyttää vierekkäin eikä päällekkäin muiden sähkölaitteiden kanssa.

Kuulokeliitäntä

Laitteen kuulokeliitääntään saa kytkeä vain sähköisesti eristettyjä matalajännitelaitteita.

Hävittäminen

Victor Reader Stratuksesta luopuessa sen sisäiset komponentit on hävitettävä paikallisten jätteenkäsittelysäädösten mukaisesti. Victor Reader Stratus ei sisällä vaarallisia materiaaleja. Hävittääksesi laitteen palauta se myyjälle tai noudata paikallisia jätteenkäsittelysääntöjä

SISÄLLYSLUETTELO

Pikaohje.....	3
Victor Reader Stratus ⁴ M Daisyoittimesta.....	15
1. Yleiskatsaus Victor Reader Stratus⁴ M Daisyoittimeen.....	15
1.1 Daisy-soittimen purkaminen pakkauksesta	15
1.2 Stratus ⁴ M vaihtoehdot.....	15
1.3 Peitekansi.....	15
1.4 Victor Reader Stratus ⁴ M -daisyoittimen kuvaus	16
1.4.1 Daisy-soittimen yläpinta	17
1.4.2 Daisy-soittimen vasen puoli.....	18
1.4.3 Daisy-soittimen oikea puoli.....	18
1.4.4 Daisy-soittimen etupuoli.....	18
1.4.5 Daisy-soittimen takapuoli	18
1.5 Akun lataaminen	18
1.6 Käynnistäminen ja sammuttaminen	19
1.7 CD-levyn asettaminen Daisy-soittimeen tai poistaminen soittimesta.....	19
1.8 SD-kortin asettaminen ja poistaminen	19
1.8.1 SD-kortin äänitunniste	20
1.9 Kirjan löytäminen	20
1.10 Kirjahyllyn rakenne	20
1.11 Muut varatut tiedostonimet	22
2. Perustoiminnot.....	22
2.1 Kuuntelutoiminnot.....	22
2.2 Toista/Pysäytä –näppäin.....	23
2.3 Kelaus eteen- ja taaksepäin	23
2.4 Painikekuvaustoiminto.....	23

3 Navigointinäppäimet	23
3.1 Nuolinäppäimet	23
3.2 Kirjahylly-näppäin	24
3.3 Aikahyppy.....	24
3.4 Kymmenen sivun hyppy	24
3.5 Tekstin luvun navigointitasot.....	24
3.6 Teksti kirjahyllyn tavaustila.....	25
3.7 Ylihyppättävät kohteet.....	25
3.8 Käyttöopas-kirjahylly-näppäin	25
3.9 Kirjahyllyssä liikkuminen-kirjahylly-näppäin	25
3.9.1 Monitasoisessa kirjahyllyssä liikkuminen.....	25
3.10 Kirjojen poistaminen-poista-näppäin	26
3.11 Info-näppäin.....	26
3.11.1 Käytettävissä olevat tiedot	26
4. Edistyneet toiminnot	27
4.1 Unitoiminto ja aikailmoitus.....	27
4.2 Kelloajan ja päivämäärän asettaminen.....	27
4.3 Kirjanmerkit.....	28
4.3.1 Kirjanmerkin lisääminen	28
4.3.2 Siirtyminen kirjanmerkkiin	28
4.3.3 Kirjanmerkin poistaminen.....	28
5. Kirjahyllyn rakenne ja ominaisuudet	29
5.1 Äänikirjat	29
5.1.1 Äänikirjojen rakenne	29
5.1.2 Äänikirjojen ominaisuudet.....	30
5.2 Muut kirjat	30
5.2.1 Muiden kirjojen rakenne.....	30
5.2.2 Muiden kirjojen ominaisuudet.....	31

5.3 Musiikki kirjahylly.....	31
5.3.1 Musiikki rakenne.....	31
5.3.2 Musiikki ominaisuudet.....	32
5.3.3 Soittolistat.....	32
5.3.4 Kansio-tiedostonimi-ilmoitus.....	32
5.4 Podcast kirjahylly.....	33
5.4.1 Podcastien rakenne.....	33
5.4.2 Podcastien ominaisuudet.....	33
5.5 Tekstikirjahylly.....	33
5.5.1 Tekstitiedoston rakenne.....	34
5.5.2 Tekstitiedoston ominaisuudet.....	34
5.5.3 Liikkuminen HTML/XML/DOCX otsikoissa.....	34
6. Asetusvalikko.....	35
6.1 Luettelo valikoista ja valikkojen kohteista.....	35
6.1.1 Toisto.....	36
6.1.2 Hyppy.....	37
7. Akun vaihtaminen.....	37
7.1 Vanhan akun poistaminen.....	38
7.2 Uuden akun asettaminen paikalleen.....	38
8 Stratuksen ohjelmiston päivittäminen.....	38
9. Kysymyksiä laitteen käytöstä.....	39
9.1 Liikkuminen kirjan sisällä.....	39
9.2 Akku ja lataaminen.....	40
9.3 CD-levyt.....	40
9.4 Yleistä.....	42
10. Tekniset tiedot.....	43
11. Asiakastuki.....	44
12. Valmistajan takuutodistus.....	45
13. Loppukäyttäjän käyttö sopimus.....	45

14. Liite 1- Virheilmoituksia46

Victor Reader Stratus⁴ M Daisy-soittimesta

1. Victor Reader Stratus⁴ M –Daisysoittimen yleiskatsaus

1.1 Daisy-soittimen purkaminen pakkauksesta

Pakkaus sisältää Victor Reader Stratus⁴ M soittimen. Lisäksi pakkauksessa on virtajohto sekä muovipussissa laitteen asiakirjat ja tämä CD-levy. CD-levyllä on lyhyet pikaohjeet pääset alkuun Daisy-soittimen käytössä sekä käyttöohje. Voit halutessasi tulostaa käyttöohjeen sekä pikaohjeen.

Ennen kuin käytät Stratusta ensimmäistä kertaa, kytke soitin pistorasiaan. Näin akku latautuu. Voit käyttää laitetta akun latautuessa. Jos jokin yllämainituista pakkauksen tavaroista puuttuu, ota yhteyttä laitteen toimittajaan.

1.2 Stratus⁴ M Vaihtoehdot

Stratus⁴ M (multimedia) -soitin voi soittaa CD-levyjen, SD-korttien ja USB-median sisältöjä. Stratus⁴ M -soittimeen on myös mahdollista saada lisäksi pääsy Internetissä oleviin kirjoihin joko Wi-fi- tai 3G yhteyksillä. Joissakin Stratus⁴ M -soitinmalleissa ei ole CD-levyasemaa, joten on mahdollista, ettei Stratus⁴ M -soittimessasi ole mitään CD-levyjä koskevia huomautuksia tai CD-levyasemaa. Tässä käyttöoppaassa kutsutaan kaikkia Stratus⁴ M -soitinmalleja vain Stratukseksi, ellei toisin ole mainittu

1.3 Peitekansi

Laitteeseen on saatavana peitekansi. Peitekansi estää navigointinäppäinten käytön käyttäjiltä, jotka eivät halua käyttää niitä. Jos haluat täyden hyödyn kirjan eri tasoilla liikkumisesta Victor Reader Stratus⁴ -Daisysoittimella, irrota peitekansi. Peitekansi on neljästä kulmastaan kiinni Daisy-soittimessa. Jokaisessa kulmassa peitekantta pitää paikoillaan läppä. Peitekansi estää seuraavien näppäinten käytön: kirjajhyly-näppäin, kirjanmerkki-näppäin, neljä nuolinäppäintä ja info-näppäin.

Peitekannen poistaminen

Pidä vasemmalla kädellä kiinni Daisy-soittimen kantokahvasta.

Etsi oikealla kädellä peitekannen oikea yläkulma. Läppä on kulman keskellä.

Aseta oikean etusormesi sivu läpän alle. Nosta Daisy-soitinta sivulta peukalollasi. Paina hiukan nostaaksesi läppä ylös Daisy-soittimen sivulta.


Nosta samalla tavoin läppä peitekannen oikeasta alakulmasta.

Kun peitekansi on nostettu pois oikealta puolelta, sen saa poistettua kokonaan. Jos on tarpeellista, nosta läppä vielä vasemmasta yläkulmasta ja poista peitekansi.

Jos haluat asettaa peitekannen paikoilleen, aseta se suoraan Stratuksen päälle varmistaen, että Stratuksen kantokahva ja peitekansi ovat päällekkäin. Paina kantta, kunnes kaikki neljä kannen kulmaa napsahtavat paikoilleen.

1.4 Victor Reader Stratus⁴ M -daisysoittimen kuvaus

1.4.1 Daisy-soittimen yläpinta

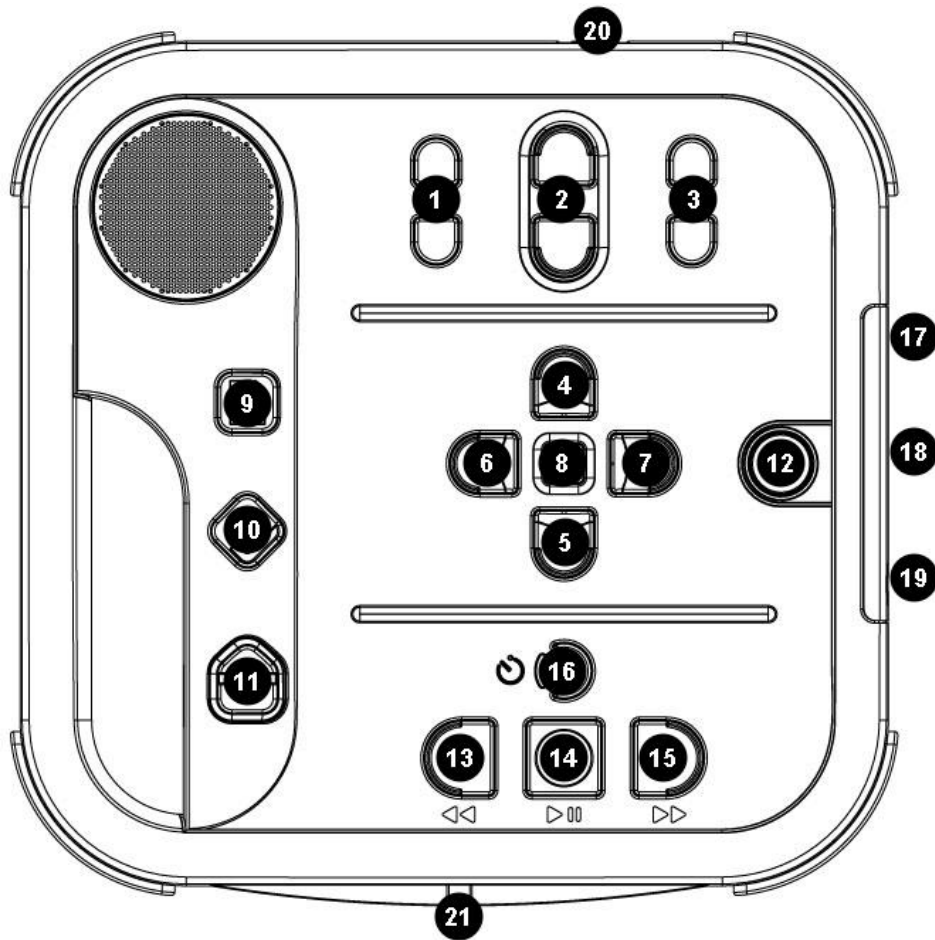

Kuva 1: Stratuksen näppäimet

Stratuksen näppäimet ja ominaisuudet

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Äänensävyn säätimet | 11. Levyn poisto –näppäin | 21. CD-levyn syöttöaukko |
| 2. Äänenvoimakkuuden säätimet | 12. Virtanäppäin | |
| 3. Puhenopeuden säätimet | 13. Taaksepäinkelaus | |
| 4. Liikkuminen: YLÖS | 14. Toista/Pysäytä | |
| 5. Liikkuminen: ALAS | 15. Eteenpäinkelaus | |
| 6. Liikkuminen: VASEMMALLE | 16. Unitoiminto | |
| 7. Liikkuminen: OIKEALLE | 17. SD-kortin syöttöaukko | |
| 8. Info-näppäin | 18. USB-portti | |
| 9. Kirjahylly-näppäin | 19. Kuuloke-liitin | |
| 10. Kirjanmerkki –näppäin | 20. Virta-näppäin | |

1.4.1 Daisy-soittimen yläpinta

Sisäänrakennettu kaiutin on laitteen vasemmassa yläkulmassa.

Ylhäällä keskellä on kolme näppäinparia. Vasemmalta oikealle lueteltuna ne ovat äänensävyyn, äänen-voimakkuuden ja puhenopeuden säätimet.

Yllä mainittujen säätimien alapuolelta löytyy neljä nuolinäppäintä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle, joilla voit liikkua kirjan sisällä.

Nuolinäppäinten keskellä on info-näppäin, jolla saat tietää sen hetkisen lukemissijainnin lukemastasi kirjasta sekä yleistä tietoa kirjasta.

Nuolinäppäimistä vasemmalle noin puolivälissä laitetta alaspäin mentäessä on kolme näppäintä pystysuuntaisessa rivissä. Ylin näppäin on kirjahylly-näppäin. Jos CD-levyllä on useita kirjoja, voit käyttää kirjahylly-näppäintä yhdessä joko vasemman tai oikean nuolinäppäimen kanssa valitaksesi haluamasi kirjan.

Heti kirjahylly-näppäimen alapuolella on kirjanmerkki-näppäin, jota käytetään kirjanmerkkien lisäämiseen. Näin voit tallentaa tärkeitä kohtia myöhempää tarvetta varten. Paina kirjanmerkki-näppäintä useita kertoja. Näin voit valita kirjanmerkin lisäämisen, siirtymisen kirjanmerkkiin tai kirjanmerkin poistamisen.

Kolmas, alimmainen näppäin on levyn poisto -näppäin, jota käytetään CD-levyjen poistamiseen levyasemasta.

Nuolinäppäinten oikealla puolella on virtanäppäin. Se on syvennyksessä vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Virtanäppäintä käytetään Stratuksen käynnistämiseen ja sammuttamiseen.

Nuolinäppäinten alapuolella on neljän näppäimen ryhmä. Kolme niistä ovat Daisy-soittimen alareunan suuntaisesti. Vasemmalta oikealle lueteltuna näppäimet ovat taaksepäin kelaus, Toista/Pysäytä -näppäin ja eteenpäin kelaus.

Toista/Pysäytä -näppäimen yläpuolella on unitoiminto-näppäin. Se on puolikuun muotoinen ja sen vasemmalla puolella on oranssi LED-valo. Unitoiminto-näppäintä käytetään uniajastimen aktivoimiseen ja aikailmoitusten kuuluville saamiseen.

1.4.2 Daisy-soittimen vasen puoli

Daisy-soittimen vasemmalla puolella on sisäänrakennettu kahva ja kaiutin.

1.4.3 Daisy-soittimen oikea puoli

Daisy-soittimen oikealta sivulta löytyy ylhäältä alas lueteltuina aukko SD-kortille, USB-portti ja kuulokeliitin, joka sopii myös ulkoiselle kaiuttimelle.

1.4.4 Daisy-soittimen etupuoli

Daisy-soittimen etupuolella on CD-levyaseman aukko.

1.4.5 Daisy-soittimen takapuoli

Daisy-soittimen takaosassa, oikeassa kulmassa on virtaliitinaukko, jolla soitin yhdistetään pistorasiaan akkujen lataamiseksi.

1.5 Akun lataaminen

Akun arvioidaan latautuvan keskimäärin 300 kertaa. Normaalisti täyteen ladattu akku voi kestää kymmenen tuntia jatkuvaa Daisy-kirjojen kuuntelua. Akun kestävyyttä voivat kuitenkin vähentää:

- Akkua on ladattu vähemmän kuin neljä tuntia
- Runsas navigointi-näppäinten käyttö
- Muut kuin Daisy-levyt kuluttavat enemmän virtaa ja akun kesto niillä on kolme tuntia.
- Suuri äänen voimakkuus tai puhenopeus.

Akku latautuu automaattisesti aina kun Daisy-soitin on kytketty verkkovirtaan. Daisy-soitinta voi käyttää latauksen aikana. Ladataksesi akun kytke laite verkkovirtaan. Jos Daisy-soitin on käynnissä kytkiessäsi sen verkkovirtaan, kuulet lyhyen, helähtävän merkkiään, joka varmistaa laitteen saavan sähkövirtaa. Kuulet jälleen helähtävän merkkiään irrottaessasi laitteen pistorasiasta. Daisy-soittimen akku latautuu kuitenkin aina laitteen ollessa kytkettynä pistorasiaan, olipa se käynnissä tai ei. Jos tarvitset ohjeita akun vaihtamiseen, katso tämän käyttöohjeen kohta Akun vaihtaminen.

Huomioithan: Jos Daisy-soitinta ei ole kytketty pistorasiaan ja lukeminen on keskeytetty yli puoleksi tunniksi, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi.

1.6 Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistääksesi Daisy-soittimen paina pitkään virtanäppäintä. Kuulet merkkiäänän ja tervetuloitovotuksen.

Sammuttaaksesi Daisy-soittimen paina jälleen pitkään virtanäppäintä. Kuulet kaksi lyhyttä merkkiääntä, jotka kertovat laitteen sulkeutuvan.

Huomioithan, että kun Stratus on sammutettu ja kytket sen verkkovirtaan, kuluu hiukan aikaa ennen kuin virtanäppäin alkaa toimia. Virtanäppäimellä on seuraavia ominaisuuksia:

- Kun Daisy-soitin on käynnissä, virtanäppäin näyttää vihreää valoa riippumatta siitä, ladataanko akkua vai ei.
- Kun Daisy-soitin on käynnissä, kytketty verkkovirtaan ja akkua ladataan, virtanäppäin vilkkuu kullanuskeana.
- Kun Daisy-soitin on kytketty pois päältä, kytketty sähkövirtaan eikä akkua ladata, virtanäppäin on kullanuskea eikä vilku.
- Kun Daisy-soitin on kytketty pois päältä eikä sitä ole kytketty verkkovirtaan, virtanäppäimessä ei ole valoa.

1.7 CD-levyn asettaminen Daisy-soittimeen tai CD-levyn poistaminen soittimesta

Aseta CD-levy Daisy-soittimen etupuolella olevaan aukkoon. Työnnä CD-levyä kevyesti eteenpäin. CD-levyasema ottaa levyn vastaan. Muutaman sekunnin kuluttua Stratus kertoo kirjan nimen ja merkkiäänän jälkeen kirja alkaa kuulua Daisy-soittimesta. Jos vahingossa laitat CD-levyn väärinpäin levyasemaan, levy poistetaan automaattisesti lyhyessä ajassa vaurioitumatta.

Poistaaksesi CD-levyn Daisy-soittimesta paina levyn poisto -näppäintä, joka on Daisy-soittimen vasemmassa alakulmassa. Levy liukuu kevyesti ulos levyasemasta.

Huomioithan: Levyn poisto -näppäin toimii vain kun Stratus on kytketty päälle.

1.8 SD-kortin asettaminen ja poistaminen

Asettaaksesi ja poistaaksesi SD-kortin toimi näin:

Aseta soitin eteesi tukevalle pinnalle niin, että sen kantokahva on vasemmalla.

SD-kortin aukko on lähellä oikean sivun keskustaa.

Pidä SD-korttia oikeassa kädessäsi.

Yksi SD-kortin kulmista on viistetty 45 asteen kulmaan. Tämän viistetyn kulman pitäisi olla vasemmassa yläkulmassa. SD-kortin liittimien eli lukuisten pienten kohoumien pitäisi olla vasemman reunan myötäisesti kortin alapuolella. Tämän puolen asetat soittimesi SD-kortin aukkoon. Jos korttia ei ole asetettu oikein, se ei

mene sille kuuluvaan aukkoon. Paina korttia kevyesti aukkoon, kunnes se luiskahtaa paikalleen. Älä käytä liiallista voimaa. Tarvitaan vain kevyt painallus niin, että SD-kortti lukkiutuu paikalleen.

Poistaaksesi SD-kortin työnnä sitä sisäänpäin ja päästä irti, jolloin se liikahtaa ulospäin ja voit vetää kortin ulos.

Huomioithan: SD-korteissa on kirjoitussuojaläppä, joka estää kortin sisällön poiston vahingossa. Kun kirjoitussuojaläppää työnnetään kortin liittimiä kohti, SD-kortti ei ole kirjoitussuojattu, eli SD-kortin sisältöä voi lisätä ja poistaa. Kun kirjoitussuojaläppää työnnetään pois SD-kortin liittimistä, SD-kortti on kirjoitussuojattu, eli kortille ei voi lisätä eikä sieltä voi poistaa sisältöä.

1.8.1 SD-kortin äänitunniste

SD-korttiin ei ole mahdollista liimata pistekirjoitus- tai mustavalkotekstitarroja, koska se voi vahingoittaa Stratusta. Auttaakseen sinua tunnistamaan SD-kortit Stratus tarjoaa mahdollisuutta äänitunnistukseen. Tunniste on tallennettu sille varattuun tekstitiedostoon nimeltä \$VRtunniste.txt, joka löytyy SD-kortin juuresta. Voit käyttää Windowsin Notepadia tiedoston tekstin luomiseen. Kun asetat SD-kortin Stratukseen tai käynnistät Stratuksen, se etsii tätä tunnistetiedostoa. Jos tiedosto löytyy, Stratus kertoo sen sisällön.

Huomioithan: Tunnisteeseen mahtuu vain 50 kirjainta. Stratus hylkää tunnistetiedoston kirjaimet, jos niitä on yli 50. Tämä tunnistetiedosto on valinnainen. Jos et halua SD-kortillesi itsestään tapahtuvaa ilmoitusta tunnistetiedostosta, sitä ei tarvitse luoda. Tällä tunnisteella ei ole mitään tekemistä tunnisteiden kanssa, jonka näet tarkastellessasi SD-kortin sisältöä Windowsissa.

1.9 Kirjan löytäminen

Kun Stratus on kytketty päälle, se etsii viimeistä luettua kirjaa. Jos kirjaa ei löydy, Stratus avaa ensimmäisen mahdollisen mediasta löytyvän kirjan järjestyksessä SD-kortti, USB, sisäinen muisti ja CD.

1.10 Kirjahyllyn rakenne

Stratus tunnistaa lukuisia kirjatyyppisiä, jotka on tallennettu erillisiin kansiorakenteisiin, joita kutsutaan kirjahyllyiksi. Paina useita kertoja kirjahylly-näppäintä (numeronäppäin 1) valitaksesi haluamasi kirjahyllyn. Liikut eteen- ja taaksepäin kussakin kirjahyllyssä käyttäen nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle. Luettelo kirjahyllyistä on kiertävä. SD- ja USB- lähteissä jokainen kirjahylly on tallennettu sille varattuun kansioon, jonka nimi alkaa \$VR". Jokaisessa varatussa kansiossa eli kirjahyllyssä voi olla käyttäjän määrittelemiä alikansioita sisältäen erillisiä kirjoja tai tiedostoluokkia. Voit laittaa muita kansioita ja tiedostoja SD-kortille, mutta vain \$VR-sisältöiset varatut kansiot on määritelty Stratuksen kirjahyllyiksi.

Huomioithan: Kun asetat soittimeen kortin, joka ei ole kirjoitussuojattu, Stratus luo automaattisesti varattuja \$Vr -kansioita.

Kirjahyllyn rakenne ja käyttö:

Kirjahylly: äänikirjoja (\$VRDTB kansio).

Kirjatyypit: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 EPUB

Käyttö: Tiedostot, joissa ovat kaikki Daisy- ja Niso-kirjasi, on tallennettava tämän kansion alle erillisiin alikansioihin. Käytä nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kansio- tai kirjatason ja nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle liikkuaksesi valitulla tasolla. Valitaksesi kirjan paina Toista/Pysäytä -näppäintä. Kirjahyllyssä jokaisen kirjan sen hetkinen lukukohta ja kirjanmerkit on tallennettu erikseen.

Kirjahylly: muita kirjoja (\$VRmuitakirjoja-kansio).

Kirjatyypit: Ei DAISY tai NISO -muotoon äänitettyjä kirjoja, jotka koostuvat Stratuksen tukemista äänitiedostotyypeistä.

Käyttö: Kaikkien kirjojen tiedostot on tallennettava tämän kansion alle erillisiin alikansioihin. Vaihtoehtoisesti yhden tiedoston sisältävät kirjat voi sijoittaa suoraan juureen. Käytä nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kansio- tai kirjataso ja nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle liikkuaksesi valitulla tasolla. Valitaksesi kirjan paina Toista/Pysäytä -näppäintä. Kirjahyllyssä jokaisen kirjan sen hetkinen lukukohta ja kirjanmerkit on tallennettu erikseen. Kuuntelu loppuu jokaisen kirjan viimeisen tiedoston lopussa.

Kirjahylly: musiikki (\$VRmusiikki -kansio).

Kirjatyypit: soittolistat (M3U -tyyppi) ja äänitetyt tiedostot jotka sisältävät Stratuksen tukemia äänitiedostotyyppejä.

Käyttö: Musiikkikirja on joko soittolista tai kokonainen musiikkirakenne, mikä tarkoittaa kaikkea Stratuksella olevaa musiikkia. Jokaisen kirjan sen hetkinen lukukohta ja kirjanmerkit on tallennettu erikseen. Liikut kirjahyllyssä musiikkikirjojen välillä käyttäen nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle. Kaikki Stratuksella oleva musiikki koostuu audiotiedostoja sisältävistä sisäkkäisistä kansioista. Rakenne voi olla esimerkiksi genre, artisti, albumi tai raidat. Liikut koko musiikkirakenteessa käyttäen nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kansion tai tiedoston ja liikut kansio- tai tiedostotasolla käyttäen nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle. Toisto jatkuu kansion viimeisestä tiedostosta seuraavan kansion ensimmäiseen tiedostoon.

Kirjahylly: Podcastit (\$VRPodcastit)

Kirjatyypit: Kaikki Stratuksen tukemat audiotiedostotyypit.

Käyttö: Kaikki podcast-tiedostot on määritelty erillisiksi kirjoiksi. Sinun on liikuttava kirjahyllyssä tiedostosta toiseen käyttäen nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle. Jos tiedostot ovat alikansioissa, käytät nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kansio- tai kirjatason. Jokaisen kirjan sen hetkinen lukukohta ja kirjanmerkit on tallennettu erikseen (tiedosto). Kuuntelu loppuu jokaisen kirjan lopussa (tiedosto).

Kirjahylly: muu äänite

Kirjatyypit: Audio (CDAtiedostot) tai Data (Kaikki Stratuksen tukemat äänitiedostotyypit.)

Käyttö: Kaupalliset äänikirjat tai MP3 CD. Liikut tiedostosta toiseen nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Liikut nuolinäppäimillä ylös ja alas valitaksesi kansio- tai tiedostotason. Tällä tasolla liikutaan nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle.

Kirjahylly: teksti (\$VRtekstikansio).

Kirjatyypit: tekstitiedostot (bra, brf, docx, html, rtf, ses3, txt, xml)

Käyttö: Jokainen tekstitiedosto on erillinen kirja. Liikut kirjahyllyssä tiedostosta toiseen nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Jos tiedostot ovat alikansioissa, käytät nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kansio- tai kirjatason. Jokaisen kirjan sen hetkinen lukukohta ja kirjanmerkit on tallennettu erikseen (tiedosto). Kuuntelu loppuu jokaisen kirjan lopussa (tiedosto).

Huomioithan: Jos pistekirjoitustiedostosi (.brf) ei toimi oikein, varmista että olet valinnut oikean pistekirjoituksen käännöstaulukon asetusvalikosta.

Huomioithan: Kansioden nimet näytetään isoilla ja pienillä alkukirjaimilla, mutta Stratus ei vaadi niitä.

1.11 Muut varatut tiedostonimet

Stratus voi luoda SD-kortille muita tiedostonimiä, jotka alkavat \$VR". Näiden tiedostojen poistaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa ennalta arvaamattomia seurauksia.

2. Perustoiminnot

2.1 Kuuntelutoiminnot

Äänen sävyn ja voimakkuuden sekä puhenopeuden säätämisen näppäinpareissa on kaksi näppäintä allekkain. Merkkiäänäni kertoo, kun jotakin näistä toiminnoista säädetään ylemmästä tai alemmasta näppäimestä painaen. Jos kirjaa ei kuunnella, Stratus kertoo mihin kohtaan toiminto on säädetty. Äänen sävyn ja puhenopeuden säätämisessä kuulet normaalin nollapaikan kohdalla piippaavan merkkiäänän. Nollapaikka tarkoittaa soinnitonta, väritöntä äänen sävyä ja normaalia puhenopeutta.

Äänikirjan tuottaja määrittelee kirjan tasot. Tasot eivät siis ole samanlaisia kaikissa äänikirjoissa.

Valitse ensin haluamasi äänikirjan taso painamalla toistuvasti nuoli alas- tai nuoli ylös -näppäintä, kunnes kuulet haluamasi äänikirjan tason. Valitse haluamasi kohta käyttäen joko oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. Oikealla nuolinäppäimellä pääset eteenpäin kirjassa, vasemmalla nuolinäppäimellä taaksepäin, kunnes olet haluamassasi kohdassa. Kirja alkaa kuulua valitusta kohdasta.

3.2 Kirjahylly-näppäin

Jos CD-levyllä on useita äänikirjoja, pääset tutkimaan äänikirjaluetteloa painamalla kirjahylly-näppäintä. Voit liikkua kirjasta toiseen käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä. Vahvista kirjavalintasi painamalla Toista/Pysäytä -näppäintä. Valittu kirja alkaa kuulua Stratuksesta.

3.3 Aikahyppy

Pääset aikahyppy-tilaan alemmalla ja ylemmällä nuolinäppäimellä. Paina joko nuoli alas- tai nuoli ylös -näppäintä, kunnes Stratus sanoo: "aikahyppy" ja kertoo aikahyppyvälin. Voit liikkua aikahypyn sisällä käyttäen vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. Vasen nuolinäppäin vie taaksepäin, oikea eteenpäin.

3.4 Kymmenen sivun hyppy

Löydät nopeasti haluamasi sivun käyttämällä vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä. Näillä pääset liikkumaan kirjassa kymmenen sivun välein. Valitse äänikirjan tasoista sivu painamalla nuoli ylös- tai nuoli alas-näppäintä kunnes kuulet "sivu". Paina sitten pitkään eteenpäin- tai taaksepäin kelausnäppäintä. Kuulet kuinka Victor Reader Stratus hyppää kymmenen sivua eteen- tai taaksepäin. Kun olet lähellä haluamaasi sivua, irrota kelausnäppäimestä. Kela nyt jonkin aikaa kirjaa painamalla toistuvasti eteenpäin- tai taaksepäinkelausnäppäintä, kunnes löydät haluamasi sivun. Jos äänikirjassa ei ole sivutasoa, Daisy-soitin ei sano "Sivu" painaessasi nuoli alas- tai nuoli ylös-näppäintä.

3.5 Tekstin luvun navigointitasot

Stratuksen ollessa tekstinluku-tilassa nuolinäppäinten ylös ja alas toimintoihin on lisätty tekstitasoja. Tekstitasot ovat näyttö, kappale, rivi, lause, sana, tavaus ja kirjain.

Huomioithan: Etsiessäsi jotain tekstistä, etsinnän tasoja on lisätty mahdollistamaan seuraavan ja edellisen etsintätermin haku.

Näyttö ja rivi on määritelty umpimähkäisesti 25 riviin näytöllä ja korkeintaan 80 kirjaimeen rivillä.

Kuten muussakin tasoilla liikkumisessa liikut valituilla tasoilla käyttäen numeronäppäimiä (vasemmalle ja oikealle).

Huomioithan: Tekstitaso näyttö on mahdollinen vain silloin, kun kirjaan ei ole määritelty sivuja.

3.6 Tekstikirjahyllyn tavaustila

Tavaustila valitaan nuolinäppäimillä ylös ja alas. Tavaustila löytyy sana- ja kirjaintasojen välistä. Käytä nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle liikkuaksesi sana sanalta. Stratus kertoo sanan ja tavaa sen.

Huomioithan: Isot kirjaimet ilmaistaan ja sanat tavataan normaalilla nopeudella riippumatta puhesyntetisaattorin nopeusasetuksista.

3.7 Ylihypättävät kohteet

Stratus tukee seuraavia ylihypättäviä kohteita:

Alaviite, sivunumero, tuottajan viite ja reunahuomautus.

Ylihypättävät kohteet voi asettaa toimimaan kuunnellessa, hypyn aikana tai pyydettyäessä. Katso tämän käyttöoppaan kohta Asetusvalikko saadaksesi lisätietoja. Kun ylihypättävä kohta tulee vastaan kuunneltaessa, Stratus toimii näin:

Kuuntelu: Kohde soitetaan aina

Hyppy: Kohdetta ei koskaan soiteta.

3.8 Käyttöopas-kirjahylly-näppäin

Stratusessa on sisäänrakennettu käyttöopas, johon pääset painamalla pitkään kirjahylly-näppäintä, (numeronäppäin 1). Paina jälleen pitkään kirjahylly-näppäintä päästäksesi pois käyttöoppaasta.

3.9 Kirjahyllyssä liikkuminen-kirjahylly-näppäin

Paina kirjahylly-näppäintä useita kertoja mennäksesi ympäri kirjahyllyluetteloa. Tyhjiä kirjahyllyjä ei kerrota. Kirjahyllyissä on erityyppisiä kirjoja ja tiedostoja, kuten kerrottiin kohdassa Kirjahyllyn rakenne. Liiku kirjahyllyssä nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Löydettyäsi haluamasi kirjan paina Toista/Pysäytä -näppäintä avataksesi kirjan.

3.9.1 Monitasoisessa kirjahyllyssä liikkuminen

Voit myös luoda monitasoisen kansiorakenteen äänikirjojen, muiden kirjojen, podcastien ja tekstitiedostojen kirjahyllyille. Sen sijaan että selaisit vain yksitellen kirjojen nimikkeitä nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle, voit valita haluamasi tason nuolinäppäimillä ylös ja alas. Nyt painaessasi nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle, liikut kansioista toiseen valitulla tasolla ympyränmuotoisesti. Kun

löydät haluamasi kansion, paina jälleen nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kyseisen kansion kirjatason ja valitse haluamasi kirja. Kirjatasolla liikut myös kansioista kansioon. Stratus liikkuu \$VR -kansion alikansioiden kahdeksalla tasolla. Jos tasoja on enemmän kuin kahdeksan, Stratus mieltää lisätasot tasoksi kahdeksan. Jos luot tiedostoja \$VR -kansion juureen, tiedostot vain luetellaan kirjatasolla kierrettäessä ympyrää nuolinäppäimillä ylös ja alas.

Huomioithan: Monitasoiset kirjahyllyt eivät ole pakollisia. Jos et halua järjestää kirjoja moniin alikansiotasoihin, voit vain silmäillä kirjahyllyä nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle ja liikkua kirjatasolla.

3.10 Kirjojen poistaminen

Liikkuesssasi kirjahyllyssä voit poistaa kirjan SD-kortilta lukuun ottamatta kansiota Kaikki musiikki painamalla pitkään levyn poisto-näppäintä.

3.11 Info-näppäin

Info-näppäin kertoo kirjan nimen, kohdan missä olet kirjassa ja tiedot akusta.

3.11.1 Käytettävissä olevat tiedot

Kirjan nimi

Sen hetkinen sivunumero (jos äänikirjassa sivutaso)

Äänikirjan kulunut ja jäljellä oleva aika

CD-levyllä olevien äänikirjojen määrä

Kuunneltavan kirjan sivumäärä (jos äänikirjassa sivutaso)

Äänikirjan kokonaisaika

Jos painat pitkään info-näppäintä, saat lisätietoa:

Daisy-soittimen kieli

Käyttääkö Daisy-soitin verkkovirtaa vai akkuja

Akun latauksen taso

Daisy-soittimen ohjelmistoversio, malli ja sarjanumero

Käyttäjän hallintanumero

Huomioithan, että Daisy-soittimen sarjanumero löytyy myös akun lokerosta.

4. Edistyneet toiminnot

4.1 Unitoiminto ja aikailmoitus

Unitoiminto-näppäimellä voit ottaa käyttöön uniajastimen ja kuulla kellonajan ja päivämäärän.

Kun painat kerran näppäintä, kuulet kellonajan ja päivämäärän.

Unitoiminnolla voit säätää eripituisia aikoja, joiden loputtua Daisy-soitin sulkeutuu automaattisesti. Aika-arvot ovat:

15 minuuttia, 30 minuuttia, 45 minuuttia, 60 minuuttia tai pois käytöstä.

Paina unitoiminto-näppäintä useaan kertaan asettaaksesi haluamasi aika-arvon. Jos haluat unitoiminnon pois käytöstä, paina unitoiminto-näppäintä toistuvasti kunnes kuulet "pois käytöstä."

Unitoiminnon ollessa käytössä unitoiminto-näppäimen vasemmalla puolella näkyy oranssi valo. Minuuttia ennen kuin unitoiminto menee pois käytöstä ja Daisy-soitin sammuu, valo alkaa vilkkua ja kuulet

ilmoituksen siitä, että aikaa on minuutti jäljellä laitteen poiskytketymiseen. Kun aika on lopussa, Daisy-soitin ilmoittaa sulkeutuvansa ja kytkeytyy pois päältä ilman merkkiäntä

4.2 Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Halutessasi asettaa päivämäärän ja kellonajan paina pitkään unitoiminto-näppäintä. Voit liikkua päävalikossa nuoli ylös- ja nuoli alas -näppäimillä. Päävalikossa ovat kohdat

Aseta kellonaika

Aseta päivämäärä

Aseta edistyneet aika-asetukset.

Valitaksesi jonkun näistä kohdista, paina haluamassasi kohdassa nuoli oikealle -näppäintä. Näin pääset alavalikoihin. Voit liikkua alavalikosta toiseen oikealla ja vasemmalla nuolinäppäimellä. Nuoli ylös- ja nuoli alas -näppäimillä pääset alavalikoiden mahdollisiin asetuksiin. Oikealla nuolinäppäimellä vahvistat valitsemasi kohdan ja pääset jälleen alavalikoihin. Kun olet viimeisessä alavalikossa, paina nuolta oikealle. Näin vahvistat valitsemasi asetukset ja palaat päävalikkoon. Paina nyt unitoiminto-näppäintä poistuaksesi valikosta. Voit myös poistua valikoista muuttamatta asetuksia painamalla mitä tahansa näppäintä.

Valikot ja alavalikot

Aseta kellonaika: tunti, minuutti

Aseta päivämäärä: vuosi, kuukausi, päivä

Aseta edistyneet aika-asetukset: 12 h vai 24 h esitystapa, kesäaika-asetus

Esimerkki:

Jos haluat vaihtaa kuukautta, toimi näin:

Paina pitkään unitoiminto-näppäintä kunnes kuulet, että on siirrytty päävalikkoon.

Paina kerran nuoli alas -näppäintä päästäksesi aseta päivämäärä -valikkoon.

Paina kaksi kertaa oikeaa nuolinäppäintä päästäksesi kuukausi-alavalikkoon.

Paina nuoli ylös- tai nuoli alas-näppäimiä, kunnes löydät oikean kuukauden.

Paina oikeaa nuolinäppäintä päästäksesi seuraavaan alavalikkoon (päivä).

Jos et halua vaihtaa päivää, paina jälleen oikeaa nuolinäppäintä päästäksesi aseta päivämäärä -valikon loppuun. Näin kaikki aseta päivämäärä -valikossa tehdyt asetusten muutokset tallentuvat.

4.3 Kirjanmerkit

Kirjanmerkki-näppäimellä merkitään tärkeitä kohtia äänikirjassa niin, että löydät ne myöhemmin.

4.3.1 Kirjanmerkkien lisääminen

Paina pitkään kirjanmerkki-näppäintä lisätäksesi kirjanmerkin. Jokaisella kirjanmerkillä on numero, joka osoittaa kirjanmerkin. Kirjanmerkin lisääminen vahvistetaan ilmoituksella ja samalla kerrotaan kirjanmerkin numero.

4.3.2 Siirtyminen kirjanmerkkiin

Paina kirjanmerkki-näppäintä. Kun Daisy-soitin sanoo "kirjanmerkkiluettelo", paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä valitaksesi haluamasi kirjanmerkin. Paina sitten Toista/Pysäytä -näppäintä päästäksesi pois kirjanmerkkiluettelosta ja jatka kuuntelua tästä kohdasta.

Huomioithan, että Kirjanmerkkiluettelossa on aina kirjanmerkit kirjan alussa ja lopussa. Kirjanmerkit on järjestetty sen mukaan, missä ne sijaitsevat kirjassa, ei numeroidensa mukaaan.

4.3.3 Kirjanmerkkien poistaminen

Paina kaksi kertaa kirjanmerkki-näppäintä poistaaksesi kaikki kirjanmerkit sen hetkisestä kirjasta. Daisy-soitin pyytää vahvistusta kirjanmerkkien poistamiselle. Vahvistaaksesi poistamisen paina Toista/Pysäytä -näppäintä. Peruuttaaksesi vahvistuksen paina mitä tahansa muuta näppäintä.

Huomioithan, että kirjanmerkit ja sen hetkinen sijaintisi kirjassa on aina tallennettu erilleen kaikissa äänikirjoissa.

5. Kirjahyllyn rakenne ja ominaisuudet

Kaikkien kirjahyllyn tiedostojen nimien pituus tiedostopolkuineen on 512 kirjainta. Tähän sisältyy media/kirja polku. Kun skannaat muistikorttia tehdessäsi lisäystä kaikki kansiot ja tiedostot, joiden polkunimi on pidempi kuin 512 merkkiä, hylätään.

Seuraavana on yleisiä ohjeita ja tietoja liikkuessasi kirjahyllyissä.

5.1 Äänikirjat

5.1.1 Äänikirjan rakenne

Äänikirjoja ovat DAISY-, NISO- NIMAS ja EPUB -tyyppiset kirjat, jotka on tallennettu \$VRDTB -kirjahyllykansioon. DAISY ja NISO vaativat yhden kansion yhdelle kirjalle. EPUB -kirjat ovat yksittäisiä tiedostoja.

Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä, kuinka kirjat voi ryhmitellä kansioihin. Kansiotasoja voi olla korkeintaan kahdeksan.

Kansio: \ \$VRDTB.

Ohjeet: Kaikki EPUB -tiedostot tai DAISY -kansiot määritellään kirjoiksi, joilla on omat lukusijaintinsa ja kirjanmerkkinsä. Kirjoja voi poistaa numeronäppäimellä 3 kirjahyllyä silmäillessä.

Tiedosto: \ \$VRDTB\kirja1.EPUB

Ohjeet: Tämä on EPUB -kirja \$VRDTB -juuressa.

Kansio: \ \$VRDTB\kirja1

Ohjeet: Tämä on kansio, joka sisältää DAISY- tai NISO -kirjan tiedostoja. Se siis määrittää DAISY- tai NISO-kirjan \$VRDTB juureen.

Kansio: \ \$VRDTB\Drama.

Ohjeet: Tämä on vaihtoehtoinen kansio kirjatyyppien luokitteluun. Edelleen, se sisältää alikansioiden luokitteluja, EPUB-kirjoja tai DAISY/NISO -kirjakansioita.

Kansio: \ \$VRDTB\Drama\kirjaA..EPUB

Ohjeet: Tämä on EPUB -kirjatiedosto Dramaluokituksessa.

Kansio: \ \$VRDTB\Drama\kirjaB.

Ohjeet: DAISY- ja NISO kirjatiedostoja sisältävä kansio. Koko kansio määritellään kirjaksi.

Kansio: \SVRDTB\Mystery.

Ohjeet: Tämä on vaihtoehtoinen kansio kirjatyyppin luokitteluun.

Kansio: \SVRDTB\Mystery\kirjaC.

Ohjeet: Sama kuin kirja B.

5.1.2. Äänikirjojen ominaisuudet

Kirjahyllyssä liikkuminen: Liiku kansiotasojen välillä numeronäppäimillä ylös ja alas.

Huomioithan: Alin kansiotaso on myös kirjataso, koska kirja määritellään tiedostokokoelmaksi alimmalla kansiotasolla. Ylemmät kansiotasot ovat vaihtoehtoisia luokiteltaessa kirjatyyppisiä, kuten Drama -kansio ylempänä. Kansiotasoja voi olla korkeintaan kahdeksan. Käytä siirtymisnäppäintä kirjaan hypätäksesi johonkin kirjan numeroon. Levyn poisto-näppäimellä voit poistaa kirjan. Kirjan voi poistaa vain kirjatasolla.

Lukeminen: Liiku kirjassa nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Valitse kirjan taso nuolinäppäimillä ylös ja alas. Otsikko-, sivu-, lause- ja aikahyppytasot ovat mahdollisia. Siirry sivulle ja siirry otsikkoon ovat mahdollisia.

5.2 Muut kirjat

5.2.1. Muiden kirjojen rakenne

Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä, miten kirjatiedostot voi ryhmitellä kansioihin. Kansiot on numeroitu siinä järjestyksessä, jossa ne on löydettävissä, juuresta alkaen jos siellä on tiedostoja. Kansiotasoja voi olla korkeintaan kahdeksan.

Kansio: \SVRmuutkirjat.

Ohjeet: Kaikki juuren tiedostot määritellään kirjoiksi, joilla on omat lukusijainnit ja kirjanmerkit. Juuressa olevat yksittäiset kirjatiedostot voi poistaa levyn poisto-näppäimellä kirjahyllyä silmäillessä.

Kansio: \SVRmuutkirjat\Drama.

Ohjeet: Tämä on vaihtoehtoinen kansio kirjatyyppin luokitteluun.

Kansio: \SVRmuutkirjat\Drama\kirjaA.

Ohjeet: Tässä kansiossa on kirjatiedostoja. Koko kansio määritellään kirjaksi, jossa on yksi lukusijainti ja kirjanmerkkiasetus. Voit kirjahyllyä silmäillessä poistaa kirjan levynpoisto-näppäimellä. Tämä tarkoittaa, että koko kirjakansio poistetaan.

Kansio: \S\VRmuutkirjat\Drama\kirjaB.

Ohjeet: Sama kuin kirja A.

Kansio: \S\VRmuutkirjat\Mystery.

Ohjeet: Tämä on vaihtoehtoinen kansio kirjatyyppin luokitteluun.

Kansio: \S\VRmuutkirjat\Mystery\kirjaC.

Ohjeet: Sama kuin kirja A.

5.2.2 Muiden kirjojen ominaisuudet

Kirjahyllyssä liikkuminen: Liiku kansiotasojen välillä nuolinäppäimillä ylös ja alas.

Huomioithan: Alin kansiotaso on myös kirjataso, koska kirja määritellään tiedostokokoelmaksi alimmalla kansiotasolla. Ylemmät kansiotasot ovat vaihtoehtoisia luokiteltaessa kirjatyyppejä, kuten Drama -kansio ylempänä. Kansiotasoja voi olla korkeintaan kahdeksan. Käytä siirtymisnäppäintä kirjaan hypätäksesi johonkin kirjan numeroon. Levynpoisto-näppäimellä voit poistaa kirjan. Kirjan voi poistaa vain kirjatasolla.

Lukeminen: Toisto kiertää kansion tiedostojen välillä (kirja). Liiku tiedostojen välillä nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Tiedosto- ja aikahyppytasot ovat mahdollisia. Siirry tiedostoon ja siirry aikaan ovat mahdollisia.

5.3 Musiikkikirjahylly

Musiikkikirjahylly on sille varatussa kansiossa S\VRMusiikki. Se sisältää kansiorakenteen, jossa on audiotiedostoja. Koko tämä rakenne määritellään Kaikki musiikki-kirjaksi. Ellet luo soittolistaa, tämä on ainoa musiikkikirja. Jos lisäät soittolistan (M3U) -tiedostoja S\VRMusiikki juureen, kaikki soittolistat ovat lisättyjä musiikkikirjoja.

5.3.1 Musiikkirakenne

Voit liikkua kahdeksalla musiikkikansion tasolla. Nuolinäppäimillä ylös ja alas valitsetansion tai tiedoston tason. Voit liikkua valitulla tasolla eteen ja taaksepäin nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Jos sinulla on enemmän kuin kahdeksan kansiotasoa, lisätasot lisätään kahdeksannen tason kansioluetteluun.

Jos valitset tiedostotason, kuulet sen hetkisen tiedoston nimen. Jos valitset kansiotason, kuulet sillä tasolla olevan sen hetkisenansion nimen. Voit aina valita rakenteen alimman tason. Jos sen hetkinen kansio on ylempällä tasolla kuin alin tasosi,ansion nimeä ei kerrota.

Jos musiikkirakenteessasi on esimerkiksi

S\VRMusiikki\klassista\Mozart ja S\VRMusiikki\klassista\Beethoven\yhdeksäs_sinfonia ja olet juuri klassista\Mozart -kohdassa kuuntelun ollessa keskeytettynä, vaihtaessasi tasoa tiedostosta tasolle 1 Stratus

kertoo "klassista." Vaihtaessasi tasosta 1 tasoon 2 Stratus kertoo "Mozart." Tasolta 2 tasolle kolme vaihtaessasi Stratus ei sano mitään, koska tason 3 kansiollla klassista\Mozart ei ole määritelty nimeä. Jos sen sijaan olet klassista\Beethoven -kohdassa kuuntelun ollessa keskeytettynä tason vaihtaminen tasolta 2 tasolle 3 Stratus kertoo "Yhdeksäs sinfonia".

Jos sijoitat tiedostoja \$VRMusiikki juureen, ne luetellaan vain tiedostotasolla.

5.3.2 Musiikkiominaisuudet

Kirjahyllyssä liikkuminen: Nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle liikut musiikkikirjojen välillä tai siirry kirjaan hypätäksesi haluamaasi kirjan numeroon.

Huomioithan: Vain Kaikki musiikki-kirja on kirjahyllyssä, ellet luo lisäksi soittolistan kirjoja. Et voi käyttää levyn poisto-näppäintä kirjan poistamiseen.

Kuuntelu: Jos jatkuva toisto on valittuna, soitetaan musiikkikirjan tiedosto järjestyksessä. Soitto jatkuu kansion viimeisestä tiedostosta seuraavan kansion ensimmäiseen tiedostoon. Voit käyttää nuolinäppäimiä ylös ja alas valitaksesi kansio- tai tiedostotason.

INFO-näppäin kertoo sen hetkisen musiikkikirjan tiedot kuten kaikki kansiot ja tiedostot sekä kirjan kokonaisajan.

Nopeus: Stratuksen nopeus on normaali, eivätkä vaihtuvat nopeudet ole käytössä. Kun poistut musiikkikirjahyllystä, normaali nopeuden säätäminen on jälleen käytössä.

Huomioithan: Vain stereomusiikin kuuntelu on mahdollista normaalinopeudella. Jos nopeutat tai hidastat musiikkia, se kuuluu monona.

5.3.3. Soittolistat

Musiikkikirjahyllyssä voi olla soittolistoja. Soittolista on tekstitiedosto, jossa on luettelo tuetuista audiotiedostoista joita voi soittaa. Sillä on oltava "m3u"-tiedostotarkenne. Soittolistaa ei voi linkittää muihin soittolistoihin.

5.3.4 Kansio- ja tiedostonimi-ilmoitus

Selatessasi musiikkikirjahyllyäsi voit päättää, haluatko kuulla kerrottavan tiedosto- ja kansionimiä. Stratus kertoo nämä tiedot soittimen ollessa pysäytettynä, mutta jättää ne pois soittimen ollessa kuuntelutilassa. Jos siis liikut nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle edestakaisin musiikkitiedostojen välillä etkä halua kuulla kansioita ja tiedostoja, paina Toista/Pysäytä -näppäintä, koska musiikki alkaa silloin kuulua.

5.4 Podcastien kirjahylly

Podcastien kirjahyllyssä on audiotiedostokansiorakenne, jossa kaikki kansiot edustavat podcastsyöttöä ja kaikki tiedostot osaa näistä syötöistä. Kaikki tiedostot eli osat määritetään erilliseksi podcast-kirjaksi.

5.4.1 Podcastien rakenne

Seuraavassa luettelossa on esimerkki podcast-tiedostojen ryhmittelystä kansioihin. Kansiotasoja voi olla korkeintaan kahdeksan.

Kansio: \$VRPodcasts

Voi sisältää tiedostoja: Kyllä

Ohjeet: Kaikkien \$VRPodcasts juuressa olevien tiedostojen kerrotaan olevan yksittäisiä kirjoja.

Kansio: \ \$VRPodcasts\syöttöA.

Voi sisältää audiotiedostoja: Kyllä

Ohjeet: Tässä kansiossa podcastosatiedostot ryhmitellään syöttönimensä mukaan.

5.4.2 Podcastien ominaisuudet

Kirjahyllyssä liikkuminen: Liiku nuolinäppäimillä ylös ja alas podcastrakenteen kansiotasojen välillä. Alin taso on kirja(tiedosto)taso. \$VRPodcasts -juuren tiedostot kerrotaan vain kirjatasolla. Liiku numeronäppäimillä vasemmalle ja oikealle podcastkirjojen tiedostojen välillä tai siirry kirjaan hypätäksesi haluamaasi kirjan numeroon. Levyn poisto-näppäimellä voit poistaa kirjatiedoston. Kirjan poistaminen on mahdollista vain kirjatasolla.

Kuunteleminen: Kuuntelu loppuu kunkin tiedoston lopussa. Vain aikahyppytaso on mahdollinen nuolinäppäimillä ylös ja alas.

INFO-näppäin kertoo sen hetkisen podcastkirjan (tiedosto) tiedot. Tietojen lukemisen voi keskeyttää Toista/Pysäytä näppäimellä.

5.5 Tekstikirjahylly

Stratus voi myös tallentaa tekstitiedostoja, jotka ryhmitellään kansioihin varatun \$VRTeksti -kansion alle. Ne toistetaan Stratuksen tekstinluku-tilassa. Kaikkien tekstitiedostojen \$VRTeksti -kansiossa katsotaan olevan kirjoja.

Tuetut muodot: txt, html, xml, rtf brf, bra ses3 and DOCX.

Huomioithan: Kun nämä formaatit ovat käytössä, kuvat selitetään html ja xml asiakirjoissa.

5.5.1 Tekstiedoston rakenne

Tekstiedostot voivat olla joko \$VRTekstin juuressa tai järjestetty alikansioihin. Kansiotasoja voi olla korkeintaan kahdeksan.

5.5.2 Tekstiedoston ominaisuudet

Kirjahyllyssä liikkuminen: Liiku tekstiedostojen rakenteen kansiotasolla nuolinäppäimillä ylös ja alas. Alin taso on kirja(tiedosto)taso. Tiedostot \$VRTeksti juuressa kerrotaan vain kirjatasolla. Liiku tekstiedostojen välillä nuolinäppäimillä vasemmalle ja oikealle. Tekstiedosto poistetaan levynpoisto-näppäimellä. Se on mahdollista vain kirjatasolla.

Kuunteleminen: Kuuntelu loppuu jokaisen tiedoston lopussa. Tasoa vaihdetaan nuolinäppäimillä ylös ja alas. Tasot ovat:

Sivu (jos merkitty)

Näyttö (jos ei ole sivumerkkejä)

Kappale

Rivi

Lause

Sana

Tavaaminen

Kirjain

Jos etsit kohteita tekstissä, etsintätaso lisätään alimmaksi tasoksi voidaksesi löytää seuraavan ja edellisen etsittävän kohteen.

INFO-näppäin kertoo sen hetkisen tekstiedoston tiedot, kuten tiedoston koon.

5.5.3 Liikkuminen HTML-, XML- tai DOCX-otsikoissa

Otsikkotunnisteita sisältävissä html tai xml -tiedostoissa (<H1> - <H6>) otsikoilla on niiden numeroita vastaavat tasot liikuttaessa eri tasoilla nuolinäppäimillä ylös ja alas.

Muistathan että näitä tunnisteita ei käytetä johdonmukaisesti kaikissa html tai xml -tiedostoissa. Tiedostossa voi olla esimerkiksi H1 ja H3 -otsikot mutta ei H2 -otsikkoa. Tällöin Stratus näyttää vain tasot 1 ja 3 mutta ei tasoa 2 liikuttaessa numeronäppäimillä 2 ja 8. Html tai xml-tiedostossa ei myöskään voi olla yksittäistä H1 -otsikkoa nimikkeelle, jossa ei ole muita H1 -otsikoita. Tällöin Stratus hyppää tiedoston loppuun painaessasi nuolinäppäintä (oikealle) kun olet tasolla 1.

6. Asetusvalikko

Stratuksen asetuksia voi muuttaa asetusvalikossa. Avataksesi valikon pidä info-näppäin painettuna. Painaessasi jälleen info-näppäintä pääset seuraavaan valikkoon. Liiku valikkokohteissa nuolinäppäimillä ylös ja alas. Käytä nuolinäppäimiä vasemmalle ja oikealle valitaksesi kohteen toiminnon ja paina sitten Toista/Pysäytä-näppäintä. Poistu valikosta painamalla info-näppäintä

6.1 Luettelo valikoista ja valikkojen kohteista

Stratuksen valikot, valikkojen kohteet ja toiminnot on lueteltu alla valikkojärjestyksessä.

Huomioithan: Luettelossa ensimmäisenä olevat toiminnot ovat valmistajan oletusasetuksia.

Valikko: Siirtyminen & toisto

Kohde: Toisto

Toiminnot: Jatkuva toisto (ei käytössä / käytössä).

Kohde: aikasiirtymä

Toiminnot: 1, 5, 10,30 minuuttia tai pois käytöstä

Kohde: Näppäinäänet

Toiminnot: käytössä / ei käytössä

Kohde: Unitoimintoviestit

Toiminnot: käytössä / ei käytössä

Kohde: Kirjanmerkkihälytys

Toiminnot: käytössä / ei käytössä

Valikko: Ohita

Kohde: kaikki

Toiminnot: kuunneltaessa / hypyn aikana / pyydettäessä / Erikois

Kohde: alaviite

Toiminnot: kuunneltaessa / hypyn aikana / pyydettäessä

Kohde: Sivunumero

Toiminnot: kuunneltaessa / hypyn aikana

Kohde: Tuottajan viite

Toiminnot: kuunneltaessa / hypyn aikana / pyydettäessä

Kohde: Reunahuomautus

Toiminnot: kuunneltaessa / hypyn aikana / pyydettyäessä

Valikko: kieli

Kohde: Puhesyntetisaattorin kieli

Toiminnot: Vuorottelu käytettävissä olevien kielten välillä

Kohde: Pistekirjoitustaulukko

Toiminnot: Vuorottelu käytettävissä olevien pistekirjoitustaulukoiden välillä

Kohde: Koodisivu (jos sopiva kielelle)

Toiminnot: Vuorottelu käytettävissä olevien koodisivutaulukoiden välillä

6.1.1 Toisto

Jatkuva toisto

Kun valitaan jatkuva toisto kirjan lukeminen alkaa automaattisesti alusta, kun ollaan tultu kirjan loppuun.

Aikahyppy

Voit määrittää pituuden aikahypylle. Kirjaa kuunnellessasi voit valita aikahypyn nuolinäppäimillä ylös ja alas. Voit liikkua aikahypyn verran eteenpäin oikealla ja taaksepäin vasemmalla nuolinäppäimellä.

Näppäinäänet

Voit ottaa näppäinäänet käyttöön tai asettaa ne pois käytöstä. Näppäinäänten ollessa käytössä näppäimestä kuuluu piippaava merkkiääni painaessasi sitä. Kun näppäinäänet on asetettu pois käytöstä, myöskään toinen piippaus ei kuulu, kun aletaan kuunnella kirjaa. Oletusarvo on, että näppäinäänet ovat käytössä. Äänen sävy- ja voimakkuus- sekä puhenopeusnäppäimet piippaavat vain hiljaa, normaalisti ja kovaa riippumatta tämän valikon asetuksista.

Unitoiminto

Uniajastimen viestit "yksi minuutti jäljellä" ja "pois käytöstä" voi ottaa käyttöön tai asettaa pois käytöstä. Oletusasetus on, että ne ovat käytössä.

Kirjanmerkkihälytys

Toiminnon ollessa käytössä kuuluu viesti tultaessa kirjanmerkin kohdalle. Viestin jälkeen kuuluu kirjanmerkin numero.

6.2.1 Hyppy

Hyppyvalikossa on vahvistustoimintoja ylihypättäville kohteille. Oletustoiminto on toisto. Tässä on lista valikon kohteista ja niiden toiminnoista:

Kaikki

Toiminnot: Toista, älä toista, pyydettäessä, erikois

Huomioithan: Et voi valita erikois-toimintoa. Se asetetaan automaattisesti muuttaessasi mitä tahansa ylihypättävää kohdetta.

Alaviite

Toiminnot: Toista, älä toista, pyydettäessä

Sivunumero

Toiminnot: Toista, älä toista

Tuottajan viite:

Toiminnot: Toista, älä toista, pyydettäessä

Reunahuomautus:

Toiminnot: Toista, älä toista, pyydettäessä

7. Akun vaihtaminen

Uuden akun voit atrvittaessa hankkia Stratuksen myyneestä liikkeestä.

7.1 Vanhan akun poistaminen

Aseta Victor Reader Stratus eteesi pöydälle tai tasaiselle pinnalle.

Käännä laite ylösalaisin.

Aseta laite niin, että kantokahva on poispäin sinusta.

Etsi akun kotelon kansi. Se on lähellä kantokahvan aukkoa.

Löydät kaksi liukuvaa läppää, joissa on kolme kohoviivaa. Akun lokeron kansi on juuri näiden läppien alapuolella. Avaa akun lokeron kansi työntäen samanaikaisesti läppiä erilleen toisistaan peukaloilla. Akun kannen pitäisi aueta jolloin voit ottaa akun pois.

7.2 Uuden akun asettaminen paikalleen

Victor Reader Stratuksen akut on suunniteltu niin, että ne voi asettaa paikalleen vain yhdellä tavalla, eikä mitään virhettä voi tapahtua.

Aseta akku lokeroon oikein laittamalla akku ensin makaamaan eteesi pöydälle.

Akku on suorakulmainen. Toisella suurista pinnoista on tarra. Se on akun pohjalla.

Kaksi neljästä pystysivusta ovat täysin tasaisia. Kahdessa muussa pystysivussa on liuskat ja kosketusliittimet. Yhdessä on keskellä yksittäinen uloke akun yläpinnan suuntaisesti.

Vastakkaisella puolella on keskellä kosketusliitin ja sivuilla kaksi liuskaa.

Aseta akku paikalleen laittamalla paikalleen puoli jossa on kosketusliitin ja kaksi liuskaa. Liuskojen ja kosketusliittimen pitäisi sopia niitä vastaaviin aukkoihin.

Lukitse akku paikalleen painamalla alaspäin.

Huomioithan että uusi akku on tavallisesti ladattu vain 50 prosenttiin sen täydestä varautumiskyvystä.

8. Stratuksen ohjelmiston päivittäminen

HumanWarelta ilmestyy aika ajoin Stratuksen uusi ohjelmistoversio. Se on .UPG -tiedosto, joka ladataan HumanWaren verkkosivuilta.

Näin päivität Stratuksen:

- Polta .UPG -tiedosto CD-levylle tai kopioi tiedosto SD-kortille tai USB-muistitikulle.
- Liitä Stratus pistorasiaan.
- Käynnistä Daisy-soitin ja aseta CD-levy CD-levyasemaan tai liitä SD-kortti tai muistitikku.
- Päivitys alkaa ja kertoo uuden, asennettavan version numeron.

- Ilmoitus asennuksen edistymisestä kuuluu joka kymmenes sekunti.
- Kun päivitys on valmis, Daisy-soitin sammuu.
- Kun Daisy-laite käynnistetään uudelleen, CD-levy tulee pois automaattisesti.

9. Kysymyksiä liittyen Victor Reader Stratus⁴ M -Daisysoittimen käyttöön

9.1 Liikkuminen kirjan sisällä

1. Miksi Victor Reader Stratus ei aina kerro samoja äänikirjan tasoja painaessani nuoli ylös- ja nuoli alas -näppäimiä?

Nuoli ylös- ja alas -näppäimet kiertävät äänikirjan tasoja sen mukaisesti, mitä tasoja kyseisen äänikirjan tuottaja on määritellyt äänikirjaan. Kaikissa Daisy-kirjoissa ei ole samoja tasoja. Jos äänikirjan tuottaja on määritellyt äänikirjaan esimerkiksi vain tason yksi, jota usein käytetään luvuissa, Daisy-soitin kertoo vain "taso yksi" sekä "virke" painettaessa nuoli alas- ja ylöspäin -näppäimiä. Kaikkiin äänikirjoihin on määritetty taso virkkeille, joka kuuluu myös painettaessa nuoli ylös- ja alas -näppäimiä. Stratuksella voi liikkua vain niillä tasoilla, jotka äänikirjan tuottaja on määritellyt. Kaikki virkkeet eivät myöskään ole samanlaisia kaikissa äänikirjoissa. Jotkut tuottajat määrittelevät virkkeen vain yhdeksi lauseeksi, kun taas joillakin tuottajilla virke on umpimähkäinen aikahyppy. Jotkut tuottajat ovat digitalisoineet vanhoja c-kasettiäänikirjoja Daisy-muotoon. Näissä Daisy-kirjoissa virke voi olla kokonainen kasetin puoli. Kirjoissa, joissa ei ole ollenkaan tai on vain vähän tasoja, sinun on liikuttava kelaamalla eteen- ja taaksepäin. Taaksepäinkelaus on Toista/Pysäytä -näppäimen vasemmalla puolella oleva näppäin ja eteenpäinkelaus Toista/Pysäytä -näppäimen oikealla puolella oleva näppäin.

2. Mistä tiedän mitä tasoja Daisy-äänikirjassa on?

Victor Reader Stratuksen nuoli ylös- ja nuoli alas -näppäimet kiertävät kaikki tasot, jotka äänikirjaan on määritetty. Monet äänikirjan tuottajat liittävät kirjan alkuun kappaleen, missä kerrotaan mitä tasoja Daisy-kirjassa on. Kysy äänikirjojesi tuottajalta kirjan tasoista, jos olet epävarma.

3. Kuinka pääsen nopeasti kirjan alkuun ja loppuun?

Stratus on automaattisesti asettanut kirjanmerkit kirjan alkuun ja loppuun. Paina kirjanmerkki-näppäintä, kunnes kuulet Stratuksen sanovan "kirjanmerkkiluettelo". Paina sitten nuoli vasemmalle -näppäintä, kunnes kuulet "kirjan alku." Kirjan alkuun mennään aina vasemmalle ensimmäisestä kirjanmerkistä. Samoin päästäksesi kirjan loppuun paina kirjanmerkkiluettelossa oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet "kirjan loppu." Kirjan loppuun mennään aina oikealle viimeisestä kirjanmerkistä. Jos et ole lisännyt kirjanmerkkejä,

pääset kirjan alkuun painamalla vain kerran nuoli vasemmalle -näppäintä tai kirjan loppuun painamalla vain kerran nuoli oikealle -näppäintä kirjanmerkkiluettelossa.

9.2 Akku ja lataaminen

1. Voiko akku vahingoittua, jos jätän Daisy-soittimen pitkäksi ajaksi kytkettynä pistorasiaan?

Ei. Jos et kuitenkaan aio käyttää Stratusia pitkään aikaan, kuten ollessasi poissa kotoa lomalla, on hyvä irrottaa verkkolaite pistorasiasta ja sähkönjakeluverkosta välttääksesi mahdollisia vaurioita sähköpiikeistä johtuen.

2. Voinko vaihtaa Stratuksen akun?

Kyllä. Vaihtoakkuja voi ostaa Stratuksen myyneestä liikkeestä.

3. Kuinka monta kertaa voin ladata akun ennen kuin se on vaihdettava?

Akun arvioidaan kestävän 300 latauskertaa ja tyhjennystä. Tämän jälkeen akku lataa vielä, mutta sen latauskyky ja varautumiskyky vähenevät. Kun akku ei enää lataudu, se on vaihdettava.

4. Miten minun on varauduttava, jos en aio käyttää Daisy-soitinta todella pitkään aikaan?

Jos aika on yli kolme kuukautta, akku on hyvä irrottaa Daisy-soittimesta. Akku ja Daisy-soitin on hyvä säilyttää lämpötilassa, joka on -20 ja 35 Celsiusasteen välillä sekä kosteustasolla, joka on 5 ja 90% välillä.

9.3 CD-levyt

1. Mitä teen, jos CD-levy on juuttunut asemaan enkä saa sitä pois?

Yritä ensin katkaista Victor Reader Stratuksen virta sammuttamalla laite. Käynnistä sitten laite uudelleen ja paina levyn poisto -näppäintä. Jos virtanäppäin ei tunnu toimivan, eli et kuule merkkiääntä painaessasi virtanäppäintä, pidä virtanäppäintä pohjassa kymmenen sekuntia ja päästä siitä irti. Paina sitten levyn poisto -näppäintä ja virtanäppäintä yhtäaikaan. Jatka levyn poisto -näppäimen painamista, kunnes kuulet "Tervetuloa Victor Readeriin". Nyt Victor Reader Stratuksen pitäisi poistaa CD-levy.

2. Voinko vaurioittaa Stratusta, jos laitan CD-levyn väärinpäin Daisy-soittimeen?

Et. Stratus poistaa levyn automaattisesti.

3. Miksi Stratuksestani kuuluu usein vinkunaa ja vikinää parin minuutin ajan?

Se on normaali CD-aseman ääni, kun Daisy-soitin lukee tietoa CD-levyltä. Daisy-kirjoissa levy pyörähtää virran säästämiseksi, kun levy on luettu. Sitten se hiljenee useiksi minuuteiksi, kunnes levyä on jälleen luettava. Navigointinäppäimien painaminen tai siirtyminen kirjanmerkkiin aiheuttaa myös levyn pyörähdysten. Se pyörähtää löytääkseen uuden paikan.

4. Mitä teen jos CD-levy pysähtyy tai hypähtää?

Huonolaatuiset CD-levyt tai levyt, joissa on sormenjälkiä tai naarmuja, eivät usein soi hyvin tai eivät soita ollenkaan. Poista levy ja yritä puhdistaa sitä käyttäen pehmeää, nukatonta kangasta tai cd-levyn puhdistusliinaa, joita voi ostaa useista CD-levyjä myyvistä liikkeistä. Älä käytä puhdistukseen paperipyyhkeitä tai nenäliinoja. Puhdista CD-levyn pinta keskeltä ulospäin suorilla liikkeillä. Älä tee pyöriviä liikkeitä. Jos levy ei vielä kukaan soi, on tutkittava huolellisesti onko siinä naarmuja. Naarmuuntunut CD-levy on vaihdettava toiseen.

5. Onko minun puhdistettava CD-levyasema tai laserlukijan linssi

Ei. Stratus-soittimissa käytettävä levyasematyyppi ei tarvitse puhdistusta.

6. Voinko kiinnittää pistekirjoitusetikettejä tai muita tarroja CD-levyyn?

Ei. Tarra ja etiketti voivat vaikuttaa epäsuotuisasti CD-levyn tasapainoon, koska levy pyörähtää nopealla vauhdilla. Lisäksi, jos tarra tai etiketti irtoaa Daisy-soittimen sisällä, se erittäin todennäköisesti vaurioittaa levyasemaa. Jos saat pistekirjoitusetiketillä tai muulla ei-valmistajan tarralla varustetun CD-levyn, poista tarra tai etiketti.

7. Miksi joskus kuuluu ilmoitus "odota" painaessani jotain näppäintä, vaikka Daisy-soittimessa on CD-levy?

Tämä voi tapahtua, jos painat näppäimiä liian pian CD-levyn Daisy-soittimeen asettamisen tai Daisy-soittimen virran käynnistämisen jälkeen. Victor Reader Stratus vaatii jonkin aikaa skannatakseen levyn ja ladatakseen Daisy-levyn tasotiedot. Kun olet käynnistänyt Daisy-soittimen tai asettanut CD-levyn Daisy-soittimeen, odota kunnes Victor Reader Stratus kertoo kirjan nimen. Sitten voit painaa näppäimiä.

8. Mitä ilmoitus "Ei levyä" tarkoittaa?

Tämän ilmoituksen Stratus kertoo, jos se ei tunnista CD-levyn tyyppiä. Stratuksella voi kuunnella vain Daisy-muotoisia ja mp3-muotoisia levyjä sekä tavallisia audio CD-levyjä.

9. Mitä ilmoitus "Audio-muotoa ei tueta" tarkoittaa?

CD-levyllä on audio-muotoisia tiedostoja, jotka Stratus tunnistaa. Tiedostot on kuitenkin formatoitu tavalla, joka ei sovi yhteen Stratuksen ohjelmiston kanssa. Sinun pitäisi ilmoittaa asiasta HumanWaren tekniseen tukeen.

10. Voinko vaurioittaa Stratusia kuuntelemalla naarmuuntunutta CD-levyä?

Ei. CD-levyn lukijan linssi ei joudu kontaktiin levyn pinnan kanssa, eli se ei vaurioidu vaikka CD-levy olisi naarmuuntunut. Se ei myöskään kulu toistuvista soittokerroista, kuten kasettisoittimet tekevät.

9.4 Yleistä

1. Mitä teen, jos virtanäppäin ei toimi?

Jos et kuule merkkiäntä painaessasi virtanäppäintä varmista ensin, että Daisy-soitin on kytketty verkkovirtaan. Jos virtanäppäin ei vielääkään toimi, paina näppäintä kymmenen sekuntia. Tämä palauttaa laitteen tehdasasetukset. Paina sitten jälleen virtanäppäintä ja nyt Victor Readerin pitäisi piipata ja käynnistyä normaalisti.

2. Voiko Stratuksen sisäisen ohjelmiston päivittää?

Kyllä. Kun HumanWare kehittää Stratuksen ohjelmistoa, asiakkaat voivat asentaa uuden ohjelmiston laittamalla erityisen päivityslevyn Daisy-soittimeen. Levy päivittää automaattisesti Daisy-soittimen sisäisen ohjelmiston. Päivityslevyn saa HumanWaren asiakastuesta tai Stratuksen toimittajilta tai sen voi ladata suoraan HumanWaren verkkosivuilta.

3. Pitäisikö minun poistaa kirjanmerkkejä säästääkseni Daisy-soittimen muistia?

Ei. Stratus voi muistaa monen kirjan kirjanmerkit, yhteensä yli 1500 kirjanmerkkiä. Vaikka ylittäisit tämän suuren määrän, Stratus korvaa vähiten käytetyt kirjanmerkit. Sinun on siis poistettava kirjanmerkkejä vain jos et halua säilyttää niitä.

10. Tekniset tiedot

Mitat ilman kantta:	22. X 21.6 X 4.8. cm
Mitat kannen kanssa:	22.8 X 22.2 X 5.1 cm
Paino:	0.95 kg akkuineen
Tuetut Daisymuodot:	DAISY 2.0 ja 2.0.2 DAISY NISO Z39.86 2002 ja Z39.86 2005
Akkutyypä:	Ladattava Li-Polymer akku. 8.4 voltia 1650 mAh
Latausaika:	4 tuntia
Toiminta-aika:	10 tuntia DAISY MP3 -kirjan jatkuvaa kuuntelua
Virran saanti:	Verkkolaite täyttää vain myyntimaan sähkövaatimukset. Tarvittaessa kysy Daisy-soittimesi toimittajalta vaihtoehtoisia, muissa maissa käytettäviä verkkolaitteita.
Koodausalgoritmit:	AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
Virtaliitinaukko:	2.5 mm (sisäinen)/ 5.5 mm (ulkoinen)
Kuulokeliitinaukko:	3.5 mm
Laiteluokitus:	(IEC 601-1)
Suojausluokka:	Class 1
Lisäosat:	Ei ole
Sterilointi:	Ei sterilointia
Kotelon suojaus:	IP20
Laite ei ole AP tai APG -kategoriassa	
Käyttötapa:	jatkuva

Ympäristö

Toimintalämpötila:	10 - 40° C
Kuljetus- ja säilytyslämpötila:	-20 - 60° C
Ilman kosteus käytössä:	20% - 80% (suhteellinen kosteus)
Ilman kosteus kuljetuksessa ja säilytyksessä:	10% - 95% (suhteellinen kosteus)

Korkeus merenpinnasta käytössä: -200 to 2000 m

Korkeus merenpinnasta kuljetuksessa ja säilytyksessä? -200 to 12 000 m

Ilmanpaine säilytyksessä ja kuljetuksessa 70-103 kPa

Saadaksesi lisätietoja ota yhteyttä maahantuojaan:

Myynti ja huolto :

Näköpiste Polar Print Oy

Itälahdenkatu 23 A

00210 HELSINKI

09 6150 0124

Sähköposti : info@polarprint.fi

Verkkosivu: www.polarprint.fi

11 Asiakastuki

Saadaksesi asiakastukea ota yhteyttä laitteen toimittajaan tai maahantuojaan:

Näköpiste Polar Print Oy

Nuijamiestentie 5 A

00400 Helsinki

puh. 09 6150 0124

info@polarprint.fi

www.polarprint.fi



12. Valmistajan takuutodistus

Tämä korkealaatuinen tuote on huolella valmistettu ja pakattu. Takaamme, ettei missään tuotteen osissa ja komponenteissa ole toiminnallisia virheitä.

Takuuaika

Mannereurooppa ja Iso-Britannia: Kaksi (2) vuotta

Takuu kattaa kaikki tuotteen osat akkua lukuunottamatta sekä huoltotyöt. Jos tuotteessa ilmenee virhe, ota yhteyttä paikalliseen Victor Reader Stratuksen toimittajaan tai valmistajan tekniseen tukeen.

Huomioithan: Takuuehdot saattavat määräaikaaisesti muuttua. Käy verkkosivuillamme saadaksesi uusimman tiedon.

Ehdot ja rajoitukset:

Mitään takuun kattavia vaihtoja tai korjauksia ei tehdä, ellei tuotteen mukana ole alkuperäistä kuittia ostosta. Säilytä alkuperäinen kuittisi. Jos palautat laitteen, käytä alkuperäistä pakkausta.

Tämä takuu kattaa kaikki tapaukset, joissa aiheutunut vaurio ei ole seurausta väärästä käytöstä, huonosta käsittelystä tai huolimattomuudesta.

13. Loppukäyttäjän käyttösopimus

Käyttäessäsi tätä tuotetta (Victor Reader Stratus) hyväksyt ja seuraavat ehdot.

1. Luvan myöntäminen

HumanWare myöntää loppukäyttäjälle oikeuden käyttää tässä tuotteessa olevaa ohjelmistoa ilman yksinoikeutta ja siirto-oikeutta.

2. Ohjelmiston omistusoikeus

Loppukäyttäjä vahvistaa oikeaksi, että HumanWare säilyttää kaikki tähän tuotteeseen liittyvät oikeudet, omistusoikeuden ja sopimusedun alkuperäisessä ohjelmistossa ja alkuperäiseen ohjelmistoon sekä kaikissa ohjelmiston kopioissa ja kaikkiin ohjelmiston kopioihin. Loppukäyttäjä hyväksyy ettei: muuta, muokkaa,

käännä toiselle kielelle, käännä ohjelmiston ohjelmakoodia tietokoneen ymmärtämäksi ohjelmaksi, pura osiin tai julkaise tämän tuotteen ohjelmistoa millään tavalla.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projektin kehittämän ohjelmiston käytettäväksi OpenSSL Toolkitin kanssa (<http://www.openssl.org/>)

14 Liite 1 - Virheilmoituksia

Virheilmoituksia

Järjestelmävirhe 1: CDROM, Virhe CDROM asemaa

Järjestelmävirhe 2: MEMORY, Muistin allokatio-ongelma

Järjestelmävirhe 3: BATTERY, Virhe akun tunnistamisessa.

Järjestelmävirhe 4: INT_STOR_FAIL, Virhe sisällön tunnistamisessa.

Järjestelmävirhe 5: INT_STOR_CORRUPT, Vioittunut sisältö.

Mediavirhe 1: READ, Sektorin lukuvirhe levyllä.

Mediavirhe 2: FORMAT, Tukematon tiedostojärjestelmä

Mediavirhe 3: MOUNT, virhe laitteen alustuksessa

Mediavirhe 4: AUDIO, Sopimaton Audio.

Mediavirhe 5: FILE, Virhe audiotiedoston haussa.

Mediavirhe 6: WAV, Virhe uuden wav-rakenteen luomisessa.

Mediavirhe 7: MPEG, Virhe MPEG-tiedoston käsittelyssä.

Media virhe 8: VORBIS, Virhe VORBIS-tiedoston käsittelyssä.

Mediavirhe 9: NO AUDIO, Ei äänilähdettä.

Mediavirhe 10: AMR-WB+, Virhe AMR-WB+ -tiedoston käsittelyssä.

Mediavirhe 11: MP4-AAC, Virhe MP4-AAC -tiedoston käsittelyssä.

Mediavirhe 12: WRITE, Kirjoitustiedosto ei aukea.

Mediavirhe 13: SDLOST, SD-kortti poistettu kirjoituksen aikana.

Mediavirhe 14: USBLOST, USB-laite poistettu kirjoituksen aikana.

Kirjavirhe 1: GENERIC, määrittelemätön.

Kirjavirhe 2: MP3, Virhe mp3 dekooderissa.

Kirjavirhe 3: VORBIS, Virhe ogg vorbis dekooderissa.

Kirjavirhe 4: WAV, Virhe wav dekooderissa.

Kirjavirhe 5: NO FILE NAME, Ei tiedostonimeä käytettävissä.

Kirjavirhe 6: NO CUR POS, Ei sijaintia

Kirjavirhe 7: FILE NOT FOUND, Tiedostoa ei löydetä MCART:lta.

Kirjavirhe 8: AMR-WB+, Virhe AMR-WB+ dekooderissa.

Kirjavirhe 9: Audible.com DRM, Laitteella ei voi soittaa DRM-suojattuja kirjoja.

Kirjavirhe 10: VRTEXT, Tekstitiedoston jäsentelyvirhe

Kirjavirhe 11: TEXT SIZE, Tekstitiedosto on liian iso.

Kirjavirhe 12: Pistekirjoituksen tulkintavirhe

Kirjavirhe 13: MP4-AAC, EVirhe MP4-AAC dekooderissa.

Kirjavirhe 14: Tekstin uudelleenjäsentely, Virhe tekstin uudelleenjäsentelyssä

Kirjavirhe 15: STRUCT_SIZE, Liian iso kirjan rakenne

Huomioithan: Jotkut virheilmoitukset eivät tule esiin kaikissa Daisysoitinmalleissa.