

CELLER[®]

BRUKERHÅNDBOK



Definisjoner

ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan medføre mindre eller moderate skader.

FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på enheten.

MERK: Brukes til å gjøre oppmerksom på viktige opplysninger som bør følges under bruk.

Innhold

Definisjoner	1
Viktig sikkerhetsinformasjon	2
Tiltenkt bruk	4
Pakkens innhold	4
Lade CELLER8®	5
Konfigurere CELLER8®	6
Opprette et tilpasset CELLER8®-program	14
Innstillingsmenyen	15
Om CELLER8®-programmer	17
Enhetsvedlikehold	18
Teknisk informasjon om CELLER8®	20
Tekniske spesifikasjoner for CELLER8® + CELLER8®-matten	21
Liste over CELLER8®-symboler	23
Informasjon om garanti og retur	25
Ansvarlig produsent og kontakter	26

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL: Mangelfull etterlevelse av disse instruksene kan føre til personskade eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten, eller annen eiendom. Les all informasjonen nedenfor før du bruker CELLER8® eller CELLER8®-matten.

ADVARSEL: Ikke bruk CELLER8®-produkter hvis du har pacemaker, implanterbar hjertestarter (ICD) eller andre elektriske implantater.

ADVARSEL: Denne enheten må ikke brukes av barn under 12 år.

ADVARSEL: For å unngå mulige skader som følger av sammenfloking, må ledningene holdes ryddige under bruk.

ADVARSEL: For å forebygge mulig skade grunnet dårlig blodsirkulasjon, må du påse at stroppene ikke er for stramme.

ADVARSEL: Bruk kun den forhåndsgodkjente AC-ladeadapteren som leveres med CELLER8®-produkter, og påse at den er koblet til en nettstrømkontakt som er trygg og lett tilgjengelig. Vær oppmerksom på at bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til personskade, ytelsestap eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten. Produktgarantiene dekker ikke produktfeil eller skade som følge av bruk med ikke-godkjent tilbehør.

ADVARSEL: Ikke åpne CELLER8® eller CELLER8®-matten eller forsøk å reparere produktene. Demontering av produktene kan skade dem, og kan føre til personskade.

ADVARSEL: Ikke bruk CELLER8® eller CELLER8®-matten i nærheten av varmekilder som åpen ild, radiatorer, varmeovner eller varmeteppe. Kan føre til personskade eller skade produktet. Se de tekniske spesifikasjonene for å finne driftstemperaturer.

ADVARSEL: Ved en negativ reaksjon som mistenkes å skyldes bruk av CELLER8®-produkter, må du slutte å bruke det og ta kontakt med lege.

ADVARSEL: Ikke bruk CELLER8® og/eller tilbehør hvis du ser tydelige tegn til skade.

ADVARSEL: Opplæring angående sikker bruk eller oppsyn kreves for brukere som er klassifisert som sårbare personer. Dette innebærer, men er ikke begrenset til, personer med reduserte fysiske, sansemessige eller psykiske evner.

FORSIKTIG: CELLER8® eller CELLER8®-matten skal ikke under noen omstendigheter senkes ned i eller sprutes med væske.

FORSIKTIG: Bruk kun CELLER8®-tilbehør med CELLER8®-produkter. Vær oppmerksom på at bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til ytelsestap eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten. Produktgarantiene dekker ikke produktfeil eller skade som følge av bruk med ikke-godkjent tilbehør.

FORSIKTIG: CELLER8®-produktene skal bare tørkes med en ikke-slitende klut. Bruk av rengjøringsmetoder eller -produkter som ikke er godkjent av produsenten kan føre til ytelsestap eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten.

FORSIKTIG: CELLER8® eller CELLER8®-matten skal ikke oppbevares i et kjøretøy i kaldt eller varmt vær. Se de tekniske spesifikasjonene for å finne temperatur- og fuktighetsområdene for oppbevaring.

FORSIKTIG: Ikke oppbevar CELLER8®-over lang tid med tomt batteri.

MERK: CELLER8®-produktene er ikke medisinsk utstyr og skal ikke brukes som erstatning for profesjonell medisinsk diagnostisering og behandling. CELLER8®-produktene er ikke designet eller tiltenkt til å kurere, mildne, behandle eller forebygge tilstander eller sykdommer. Ta kontakt med helsepersonell før du tar avgjørelser knyttet til din egen helse.

MERK: Pass på at CELLER8® brukes innenfor de angitte driftstemperatur- og fuktighetsområdene. Se de tekniske spesifikasjonene for å finne temperatur- og fuktighetsområdene for bruk.

MERK: Hvis frekvensen er over 40 Hz på et tilpasset program, må du sørge for at CELLER8® er koblet til nettstrøm fordi batteriet ikke støtter høyere frekvenser.

MERK: Endringer som gjøres til forhånds konfigurerte programmer blir ikke husket når enheten slås av.

MERK: For å unngå å forstyrre brukeren, spilles ikke lydvarselet ved slutten av en økt når Natt-programmet brukes.

MERK: Hvis du velger en applikasjon som bruker CELLER8®-matten før du kobler CELLER8®-matten til CELLER8®, vises skjermbildet Mat Not Connected (Matten er ikke tilkoblet).

Tiltenkt bruk

CELLER8® er en noninvasiv PEMF-enhet (Pulserende elektromagnetisk felt) som skal brukes som en lokalisert PEMF-applikasjon eller til å brukes sammen med CELLER8®-matten for å bruke PEMF på hele kroppen.

CELLER8® og CELLER8®-matten tilbyr magnetisk terapi gjennom elektromagnetiske felt som genereres av kobberspoler og brukes til å forbedre brukerens generelle velvære som en del av en sunn livsstil.

CELLER8® er designet til bruk av enkeltpersoner og skal ikke brukes av barn under 12 år.

Pakkens innhold



CELLER8®-settet kan inneholde følgende elementer:

1. CELLER8®
2. CELLER8®-matten (*selges separat*)
3. AC-strømadapter
4. Elastisk stropp
5. Hurtigstartveiledning
6. CELLER8®-pose
7. CELLER8®-mattepose (*inkludert med CELLER8®-matten*)

Lade CELLER8®


1. Ladeport
2. Port til CELLER8®-matte



For å lade CELLER8®, kobler du til den forhåndsgodkjente AC-strømadapteren i ladeporten (1) til CELLER8®.



Deretter kobler du strømadapteren til strømmnettet.

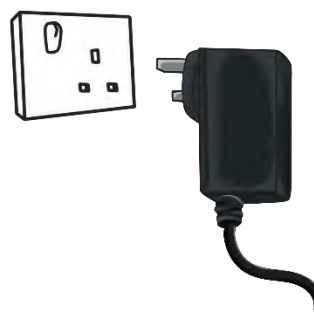


ADVARSEL: Bruk kun den forhåndsgodkjente AC-ladeadapteren som leveres med CELLER8®-produkter, og påse at den er koblet til en nettstrømkontakt som er trygg og lett tilgjengelig. Vær oppmerksom på at bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til personskade, ytelsestap eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten. Produktgarantiene dekker ikke produktfeil eller skade som følger av bruk med ikke-godkjent tilbehør.

ADVARSEL: For å unngå mulige skader som følger av sammenfloking, må ledningene holdes ryddige under bruk.


CELLER8® er slått av

Når CELLER8® er slått av og koblet til nettstrømmen, lades CELLER8®, og et animert batteri vises på skjermen.

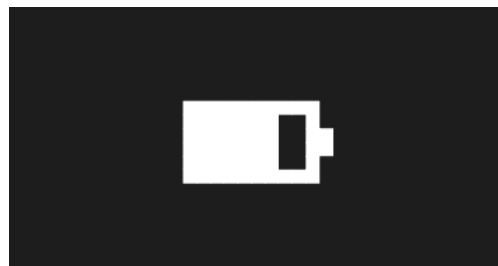

CELLER8® er slått på

Når CELLER8® er slått på og koblet til nettstrømmen, lades CELLER8®, og du kan se batteristatus øverst til høyre.

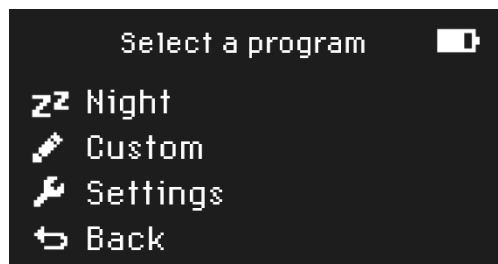

Konfigurere CELLER8®


CELLER8®-layout

1. CELLER8®-skjerm
2. Kontrollskive



Layout for CELLER8® + CELLER8®-matte

1. CELLER8®
2. Stropp
3. AC-strømadapter
4. Kabel til CELLER8®-matte
5. CELLER8®-matte

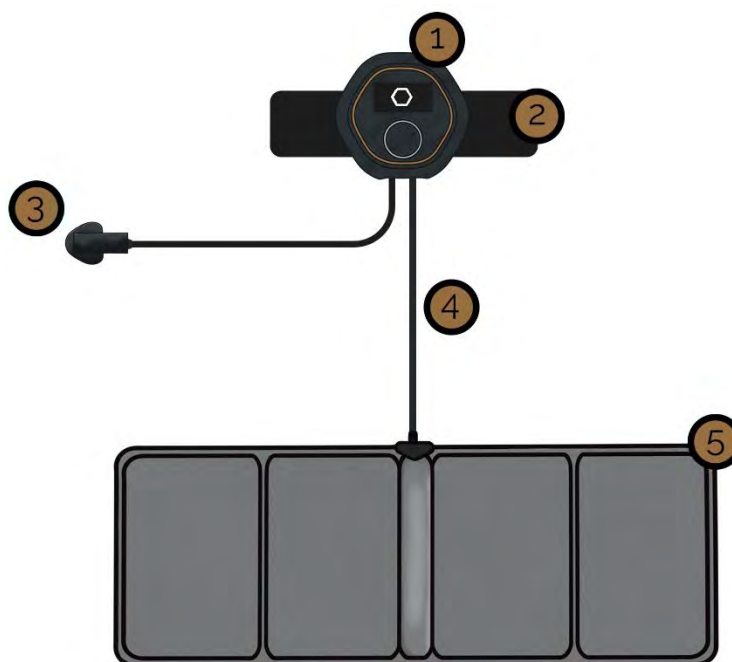

Slå CELLER8® på/av

For å slå på CELLER8®, trykk ned kontrollskiven i 2 sekunder. Dette viser en animasjon på skjermen, etterfulgt av Meny-skjermen, og kontrollskiven lyser opp for å indikere at CELLER8® er slått på.

For å slå av CELLER8®, holder du nede kontrollskiven i 3 sekunder til lyset og skjermen slås av for å indikere at enheten er slått av.

Enheden har også en funksjon for å slås av automatisk. Hvis enheten er på Meny-skjermen og det ikke har skjedd noen aktivitet på 60 sekunder, slås den av automatisk. Enheten slås også av automatisk når et program er fullført.

Navigere i CELLER8®

CELLER8® har en kontrollskive (2) som gjør det lett og raskt å navigere i CELLER8®. For å navigere i CELLER8®-menyene kan du vende kontrollskiven med eller mot klokken for å gå henholdsvis opp og ned. Kontrollskiven er også knappen du trenger for å gjøre og bekrefte utvalg. For å bruke knappen, trykk ned på midten av kontrollskiven til du hører et klikk.

Stille inn stroppen

CELLER8® kommer med en dedikert elastisk stropp som hjelper deg med å holde CELLER8® på plass når den brukes på lokaliserte punkter.




For å stille den inn, trer du stroppen gjennom festet bak på CELLER8®.

Hold CELLER8® på plass og snurr den elastiske stroppen rundt den aktuelle kroppsdelen. Fest stroppen med borrelåsen. CELLER8® og stroppen skal sitte fast, men komfortabelt.

ADVARSEL: For å forebygge mulig skade grunnet dårlig blodsirkulasjon, må du påse at stroppene ikke er for stramme.


Eksempler på CELLER8® og stropp

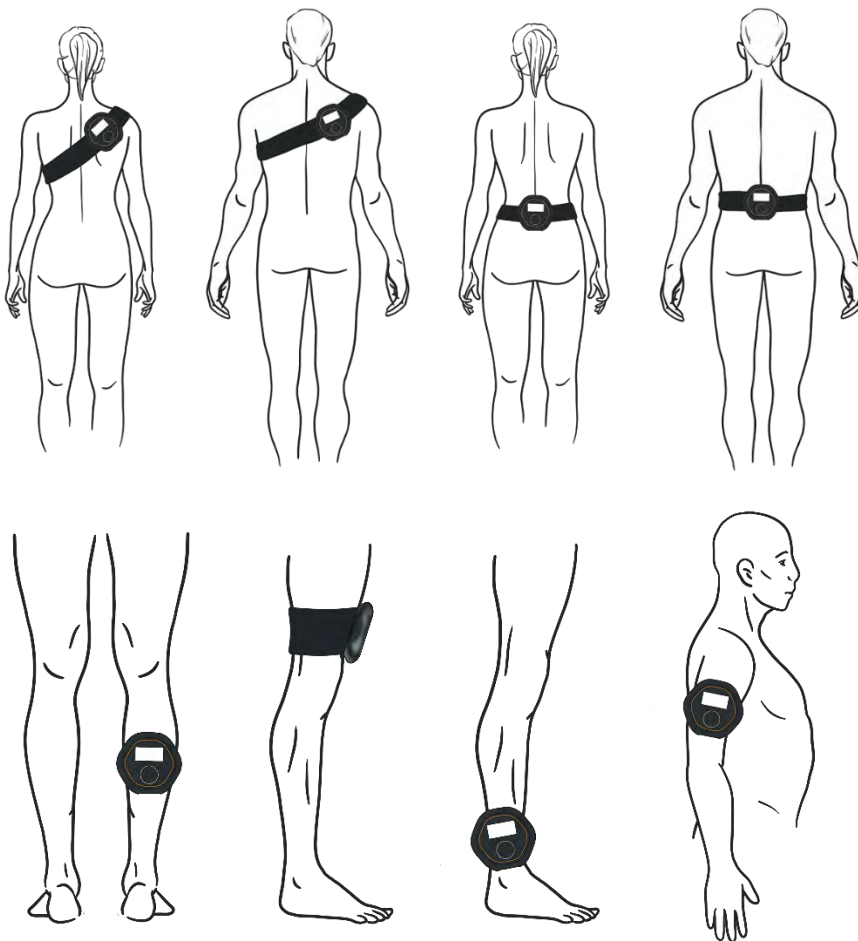

Gjøre klar CELLER8®-matten

CELLER8® kan brukes sammen med CELLER8®-matten for å gi hele kroppen PEMF-behandling.

CELLER8® kan brukes som kontroller for CELLER8®-matten, eller den kan brukes samtidig for både fullkropps- og lokalisert PEMF, som vist under.

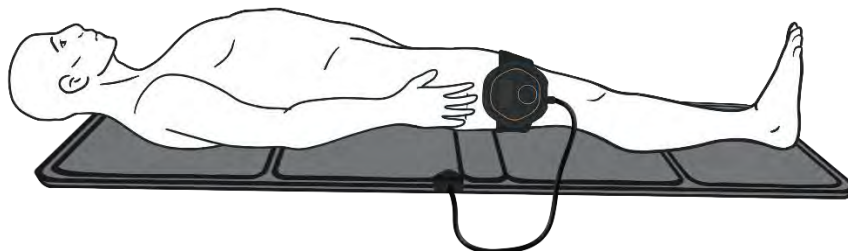

CELLER8® kan brukes med CELLER8®-matten på både batteri- og nettstrøm. Når CELLER8®-matten er i bruk, skal den være brettet helt ut.

MERK: Hvis frekvensen er over 40 Hz på et tilpasset program, må du sørge for at CELLER8® er koblet til nettstrøm fordi batteriet ikke støtter høyere frekvenser.

ADVARSEL: Bruk kun den forhåndsgodkjente AC-ladeadapteren som leveres med CELLER8®-produkter, og påse at den er koblet til en nettstrømkontakt som er trygg og lett tilgjengelig. Vær oppmerksom på at bruk av tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til personskaade, ytelsestap eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten. Produktgarantiene dekker ikke produktfeil eller skade som følge av bruk med ikke-godkjent tilbehør.

ADVARSEL: For å unngå mulige skader som følger av sammenfloking, må ledningene holdes ryddige under bruk.

For å bruke CELLER8®-matten med CELLER8®, koble CELLER8®-mattekabelen til CELLER8®-matteporten (2).




Velge en CELLER8®-applikasjon

Når CELLER8® er slått på, viser skjermen applikasjonsmenyen. Her finner du tre applikasjonsalternativer:


CELLER8® (Kontroller)

CELLER8®-applikasjonen leverer lokalisert PEMF.

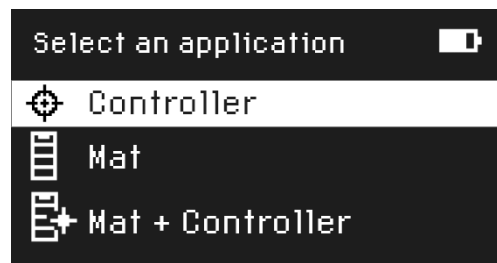

CELLER8®-matten

Applikasjonen for CELLER8®-matten bruker kun CELLER8®-matten til å gi PEMF til hele kroppen, og må være koblet til CELLER8® for å kunne brukes. Kun CELLER8®-matten avgir PEMF i denne modusen. Sørg for at CELLER8®-matten er koblet til CELLER8® før du velger dette alternativet.

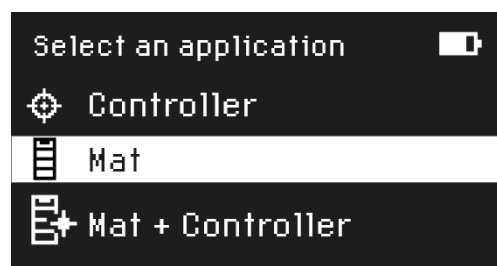

CELLER8®-matten + CELLER8® (Kontroller)

Applikasjonen for CELLER8®-matten+ CELLER8® lar CELLER8®-matten levere PEMF til hele kroppen, men bruker også CELLER8® til å samtidig levere lokalisert PEMF. Både CELLER8®-matten og CELLER8® avgir PEMF i denne modusen. Sørg for at CELLER8®-matten er koblet til CELLER8® før du velger dette alternativet.



MERK: Hvis du velger en applikasjon som bruker CELLER8®-matten før du kobler CELLER8®-matten til CELLER8®, vises skjermbildet Mat Not Connected (Matten er ikke tilkoblet).

Hvis feilen vedvarer, sjekk Feilsøking-delen i denne håndboken.





Velg ønsket applikasjon med kontrollskiven og trykk på kontrollskiven for å velge.

Velge et CELLER8®-program

Når du har valgt ønsket applikasjon, vises programmenyen. Du kan velge mellom fire forhåndsinnstilte programmer:

- Morgen
- Kveld
- Meditasjon
- Natt

Eventuelt kan du velge å stille inn et tilpasset program. Du finner mer informasjon om programmene i avsnittet Om CELLER8®-programmer i denne håndboken.

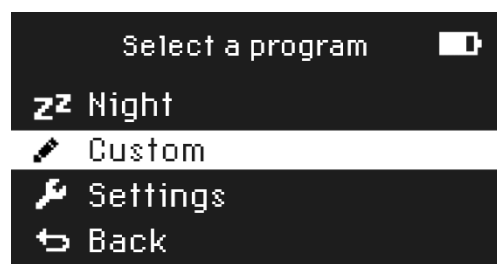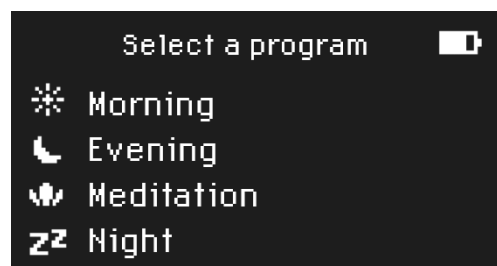


For å gå tilbake til applikasjonsmenyen, bruker du kontrollskiven til å bla til *Back* (Tilbake), og trykker på kontrollskiven for å gå tilbake.

Velg intensitet og tid


Når du har valgt et forhåndsinnstilt program, kan du endre feltene Intensity (Intensitet – styrken til magnetfeltet) og Time (Tid – hvor lenge økten skal vare).

De forhåndsinnstilte programmene kommer med anbefalte innstillinger for Intensity og Time. Disse vises hver gang enheten brukes. De kan endres om ønskelig.

For å endre den forhåndsinnstilte intensiteten, bruker du kontrollskiven til å gå til *Intensity* (Intensitet). Trykk på kontrollskiven for å åpne justerings skjermen.

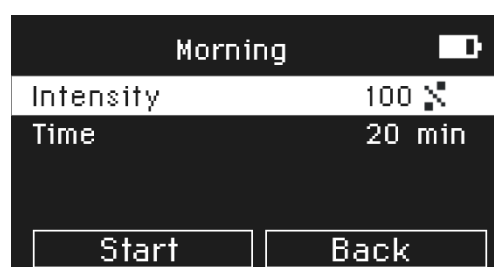

Vend kontrollskiven for å justere intensiteten etter behov. Trykk på kontrollskiven for å bekrefte.

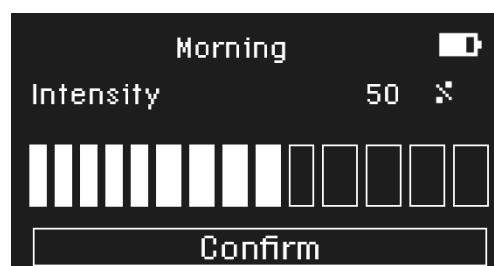

Innstilling	CELLER8® Matte	CELLER8®
2%	1 Gauss/ 100 µT	2 Gauss/ 200 µT
4%	2 Gauss/ 200 µT	4 Gauss/ 400 µT
10%	5 Gauss/ 500 µT	10 Gauss/ 1,000 µT
20%	10 Gauss/ 1,000 µT	20 Gauss/ 2,000 µT
40%	20 Gauss/ 2,000 µT	40 Gauss/ 4,000 µT
60%	30 Gauss/ 3,000 µT	60 Gauss/ 6,000 µT
80%	40 Gauss/ 4,000 µT	80 Gauss/ 8,000 µT
100%	50 Gauss/ 5,000 µT	100 Gauss/ 10,000 µT


Lokalisert CELLER8® når intensiteter på opptil 100 gauss (10 000 mikrotesla).

CELLER8®-matten for hele kroppen når intensiteter på opptil 50 gauss (5000 mikrotesla).

For å endre den forhåndsinnstilte tiden, bruker du kontrollskiven til å gå til *Time* (Tid). Trykk på kontrollskiven for å åpne justeringsskjermen.




Vend kontrollskiven for å justere tiden etter behov. Trykk på kontrollskiven for å bekrefte.

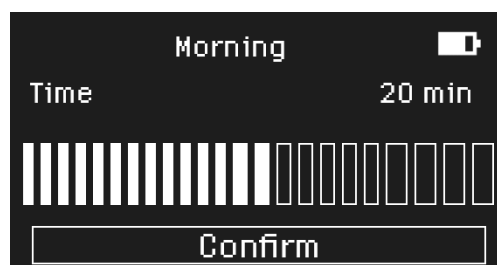

Hvis du har justert den forhåndsinnstilte *tiden* og/eller *intensiteten*, vises dette skjermbildet som viser de nye verdiene.

For å starte programmet må du påse at *Start* er valgt med kontrollskiven og trykke på kontrollskiven for å starte programmet.

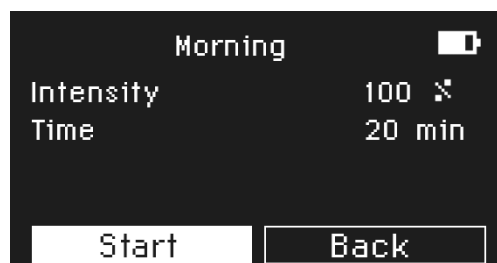


For å gjøre endringer, velg knappen *Back* (Tilbake) og trykk på kontrollskiven for å gå ett trinn tilbake.

MERK: Endringer som gjøres til forhåndskonfigurerte programmer blir ikke husket når enheten slås av.

Når programmet har startet, vises det informasjon om det pågående programmet på skjermen.

Det valgte programmet vises øverst på skjermen, og timeren begynner å telle ned. Til venstre på skjermen ser du en animasjon av en kropp som lades opp.


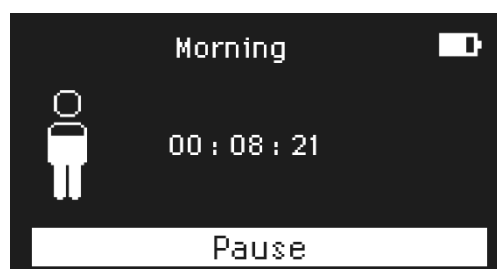


Skjermen dempes etter 15 sekunder for å spare strøm.

For å sette programmet på pause, trykker du på kontrollskive. Trykk én gang hvis skjermen er aktiv eller to ganger hvis skjermen er dempet. Det åpnes en melding som lar deg velge om du vil stoppe (Stop) eller fortsette (Resume) programmet.

Hvis programmet skal fortsettes etter pausen, bruker du kontrollskiven til å velge Resume (Fortsett) og trykker på kontrollskiven for å fortsette den pågående økten.

For å avbryte programmet tidlig, velger du Stop (Stopp) og trykker på kontrollskiven for å avslutte den pågående økten. Enheten går så tilbake til menyskjermen.

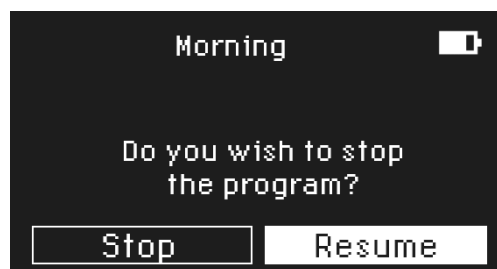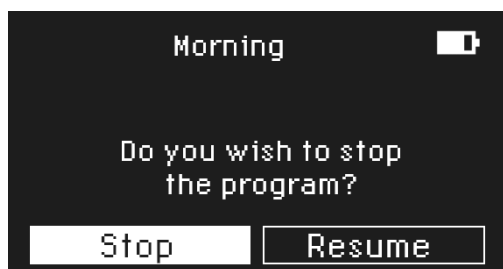

Når en PEMF-økt er fullført, avsluttes økten med en kort animasjon. Hvis lyden er aktivert i innstillingene, hører du også en summelyd. Deretter slås enheten av automatisk.


MERK: For å unngå å forstyrre brukeren, spilles ikke lydvarselet ved slutten av en økt når Natt-programmet brukes.

Opprette et tilpasset CELLER8®-program

Prosesen for å opprette et Custom (Tilpasset) program er ganske lik prosessen for å endre parametrene i forhåndsinnstilte programmer, men et tilpasset program bruker kun den ene frekvensen som ble valgt for hele økten.


MERK: Hvis frekvensen er over 40 Hz på et tilpasset program, må du sørge for at CELLER8® er koblet til nettstrøm fordi batteriet ikke støtter høyere frekvenser.

Etter at du har valgt en applikasjonsmodus fra applikasjonsmenyen, velger du *Custom* (Tilpasset) program fra programmenyen.

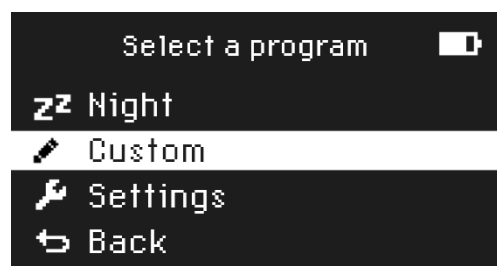


Med et *Custom (Tilpasset)* program kan du definere *Intensity (Intensitet)*, *Time (Tid)* og *Frequency (Frekvens)* selv.

For å endre en parameter, bruker du kontrollskiven til å velge det og åpne justeringsskjermen. Vend kontrollskiven for å justere tiden etter behov. Trykk på kontrollskiven for å bekrefte.

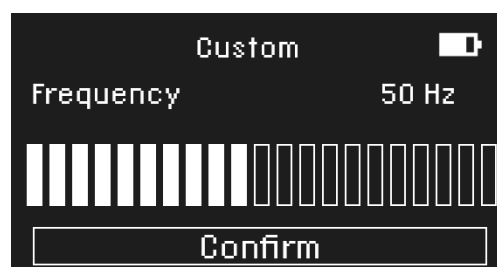

Når parametrene for det *tilpassede* programmet er stilt inn og bekreftet, vises et skjermbilde med de nye verdiene.

MERK: Endringer som gjøres til det *tilpassede* programmet huskes når enheten slås av og lagres i minnet som det siste brukte *tilpassede* programmet.

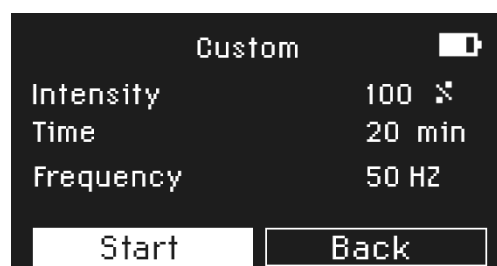

Som med forhåndsinnstilte programmer, vises det informasjon om det pågående programmet på skjermen.

Det valgte programmet vises øverst på skjermen, og timeren begynner å telle ned. Til venstre på skjermen ser du en animasjon av en kropp som lades opp. Skjermen dempes etter 15 sekunder for å spare strøm.

Når en PEMF-økt er fullført, avsluttes økten med en kort animasjon. Hvis lyden er aktivert i innstillingene, hører du også en summelyd. Deretter slås enheten av automatisk.



Innstillingsmenyen

Bruk kontrollskiven til å navigere til *Settings* (Innstillinger) i programmenyen.

Trykk på kontrollskiven for å åpne innstillingsmenyen.

I innstillingsmenyen kan du aktivere/deaktivere lydvarselet og endre polariteten til CELLER8®-produktene.

Innstillingsmenyen viser også nåværende fastvareversjon.

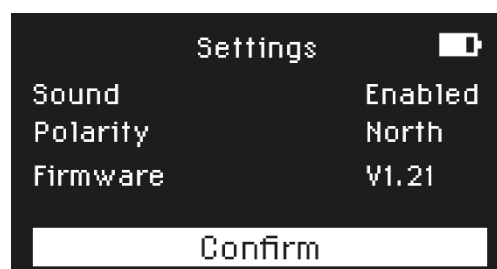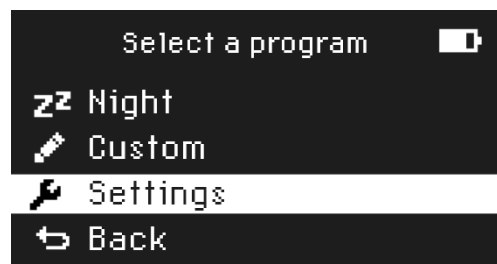

Aktivere/deaktivere lyd


Bruk kontrollskiven til å velge *Sound* (Lyd).

Trykk på kontrollskiven for å aktivere/deaktivere lyden.

Når lydvarselet er deaktivert, spilles det ingen lyd når PEMF-økten er over for å varsle brukeren.

Bruk kontrollskiven til å navigere til *Confirm* (Bekreft) og trykk på kontrollskiven for å lagre endringene.

Disse endringene blir husket.

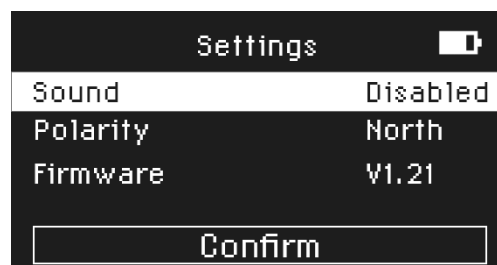


Endre polaritet

Hvis du endrer polariteten til magnetfeltene i innstillingsmenyen, endrer dette retningen til magnetfeltet rundt matten.

Som standard er baksiden av CELLER8® stilt inn mot nord.



Hvis du bruker CELLER8®-matten, er den grå siden av CELLER8®-matten som standard stilt inn mot nord.

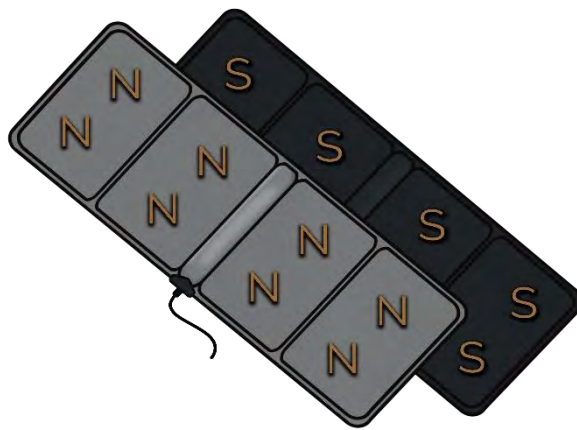

For å endre polariteten, bruker du kontrollskiven til å gå til *Polarity* (Polaritet) fra innstillingsmenyen.

Trykk på kontrollskiven for å endre polariteten.

Bruk kontrollskiven til å navigere til *Confirm* (Bekreft) og trykk på kontrollskiven for å lagre endringene.


Disse endringene blir husket.



Når polariteten er stilt inn mot sør, er forsiden til CELLER8® stilt inn mot nord.



Når polariteten er stilt inn mot sør, er den grå siden til CELLER8®-matten stilt inn mot sør.

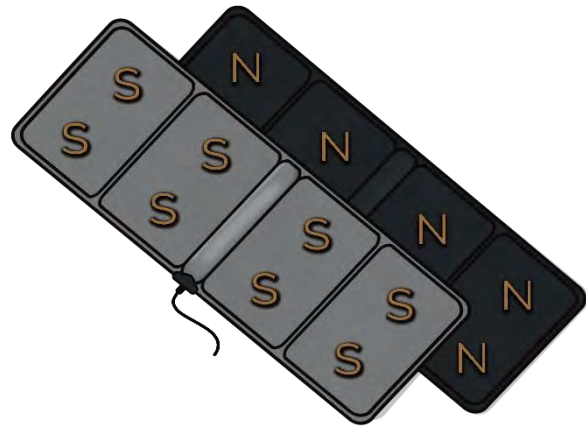

Om CELLER8®-programmer

CELLER8® har fire forhåndsinnstilte programmer du kan velge mellom:

- Morgen
- Kveld
- Meditasjon
- Nat

Eventuelt kan du velge å stille inn et tilpasset program..

Morgenprogram (Fra 12 Hz til 30 Hz, trapper opp hvert 5. sekund)

Morgenprogrammer bruker et frekvensområde som er spesielt innstilt for applikasjoner tidlig om dagen. Frekvensen trapper opp med 1 Hz hvert 5. sekund, og gir dermed et godt spenn med frekvenser i én og samme økt.

Morgenprogrammet er designet for å hjelpe med oppmerksomhet, konsentrasjon, fokus og restitusjon.

Kveldsprogram (8 Hz og 10 Hz hvert minutt)

Kveldsprogrammet bruker 8 Hz og 10 Hz, og veksler mellom disse hvert minutt.

Kveldsprogrammet er designet for avslapping, restitusjon og som et naturlig velværeprogram.

Meditasjonsprogram (Fra 8 Hz til 4 Hz, trapper ned hvert 30. sekund)

Meditasjonsprogrammet begynner på 8 Hz og trapper ned hvert 30. sekund til det når 4 Hz. Etter 30 sekunder returnerer frekvensen til 8 Hz, og prosessen gjentas til økten er ferdig.

Meditasjonsprogrammet er designet for å hjelpe brukeren med å finne en avslappet sinnstilstand, lik den som oppnås ved dyp meditasjon.

Nattprogram (fra 4 Hz til 1 Hz, over 10 minutter)

Nattprogrammet går fra 4 Hz og trapper ned til 1 Hz over 10 minutter. Etter 10 minutter returnerer frekvensen til 4Hz, og prosessen gjentas til økten er ferdig.

Nattprogrammet er designet til å brukes ved sengetid. I denne modusen kan det brukes i opptil 12 timer, men det er stilt inn som 2 timer som standard. Enhetslysene dempes i denne modusen og lydvarselet er deaktivert, selv om lyden er valgt som aktivert på CELLER8®. Hensikten med dette er å unngå at enheten vekker brukeren når programmet er ferdig.

Tilpasset program (1–100 Hz)

Et tilpasset program bruker kun valgt frekvens med valgt intensitet og tid. Frekvensområdet går fra 1 Hz til 100 Hz.

Enhetsvedlikehold

Rengjøre CELLER8®-produkter

FORSIKTIG: CELLER8®-produktene skal bare tørkes med en ikke-slitende klut. Bruk av rengjøringsmetoder eller -produkter som ikke er godkjent av produsenten kan føre til ytelsestap eller skade på CELLER8® eller CELLER8®-matten.

FORSIKTIG: CELLER8® eller CELLER8®-matten skal ikke under noen omstendigheter senkes ned i eller sprutes med væske.

Oppbevare CELLER8®-produkter

Oppbevar alltid CELLER8® på et kaldt, tørt sted.

FORSIKTIG: CELLER8® eller CELLER8®-matten skal ikke oppbevares i et kjøretøy i kaldt eller varmt vær. Se de tekniske spesifikasjonene for å finne temperatur- og fuktighetsområdene for oppbevaring.

FORSIKTIG: Ikke oppbevar CELLER8®-over lang tid med tomt batteri.

Feilsøking

Programmet går ikke som forventet

Hvis det oppstår et problem ved driften av CELLER8®, må du først prøve å slå enheten av og på igjen. Dette lar programmeringen starte på nytt og nullstille seg. Påse deretter at enheten er tilstrekkelig oppladet.

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med kundeserviceteamet til CELLER8®.

Advarselsskjermer

Battery Charging (Batteriet lader)

Når CELLER8® er slått av og koblet til nettstrømmen, vises et animert batteri på skjermen for å fortelle at batteriet lader.



Battery Low (Lavt batteri)

Skjermen Battery Low (Lavt batteri) vises når enheten ikke har nok batteri til å brukes. I så fall må enheten lades tilstrekkelig før det kan brukes.



Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med kundeserviceteamet til CELLER8®.

Mat Not Detected (Finner ikke matte)

Skjermen Mat Not Detected (Finner ikke matte) vises når en applikasjon som bruker CELLER8®-matten er valgt før CELLER8®-matten er koblet til. Sørg for at CELLER8®-matten er koblet til før du velger applikasjonen.



Denne skjermen kan også vises hvis kontakten er usikker. Koble ut CELLER8®-matten og koble den til igjen.


Hvis systemet fortsatt ikke finner CELLER8®-matten, kan du slå av CELLER8® og slå den på igjen for å nullstille systemet.

Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med kundeserviceteamet til CELLER8®.

Teknisk informasjon om CELLER8®

Spoleposisjoner i CELLER8® og CELLER8®-matten

CELLER8® og CELLER8®-matten består av kobberspoler som genererer et magnetfelt. En frekvensgenerator brukes til å gi energi til spolen og skape et pulserende elektromagnetisk felt. Det er én stor kobberspole i CELLER8®, og 12 kobberspoler i CELLER8®-matten for å gi best mulig dekning av magnetfeltene.

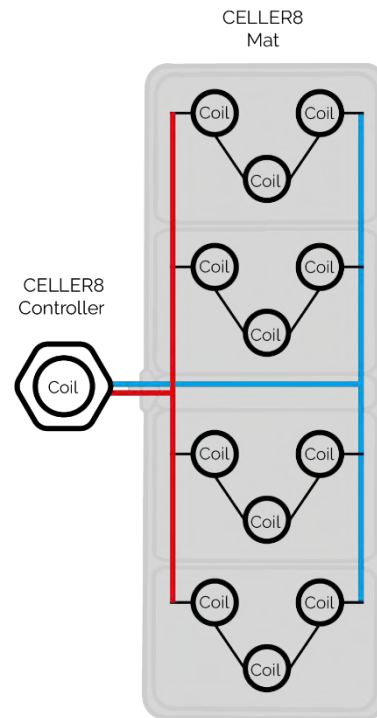

Tekniske spesifikasjoner for CELLER8® + CELLER8®-matten






















Intensitetsområde	1–100 G (gauss) 0,1–10 mT (millitesla) 100–10 000 µT (mikrotesla)
Frekvensområde	1-100Hz
Programmer	5 (inkludert <i>Custom</i>)
Applikasjon	CELLER8®-matten, CELLER8®, og CELLER8® + CELLER8®-matten
Antall spoler	CELLER8®: 1 CELLER8®-matten: 12
Polaritet	Nord og sør (velges av bruker)
Bølgeform	Firkantkurve
Garanti	CELLER8®: 3 år CELLER8®-matten: 1 år
Strømkilde	Batteri og nettstrøm
Mål	CELLER8®: 14 cm x 14 cm x 4 cm CELLER8®-matten: 49 cm x 173 cm x 2 cm
Modeller og delenummer	CELLER8
Driftstid	CELLER8® 420 minutter ved bruk av <i>morgenprogrammet</i> 44 timer ved bruk av <i>nattprogrammet</i> <small>(Ved bruk med fullt batteri og kjøring av programmet med begge CELLER8®-enhetene på standardintensitet).</small>
	CELLER8® og CELLER8®-matten 100 minutter ved bruk av <i>morgenprogrammet</i> 36 timer ved bruk av <i>nattprogrammet</i> <small>(Ved bruk med fullt batteri og kjøring av programmet med både CELLER8® og CELLER8®-matten på standardintensitet).</small>
Fullstendig oppladningstid for batteriet	<5 timer
CELLER8® Standby-tid når den ikke er i bruk	>1 år
Operatør	Sluttbruker
Driftstemperatur	15°C-35°C (59°F-95°F)
Driftsfuktighet	20-80% RH (ikke-kondenserende)
Oppbevarings- og transporttemperatur	0-50°C (32°F-122°F)
Oppbevarings- og fraktfuktighet	10-95% RH (ikke-kondenserende)

Vekt	CELLER8®: 240 g Strømforsyning: 160 g CELLER8®-matten: 3,75 kg
Oppladbart batteri	RRC1120 Li-ion 3,6 V 2,35 Ah
Ekstern strømforsyning	XP Power VEP24US24 Inngang: 100–240 V – 0,6 A, 50/60 Hz Ut: 24 V – 1,0 A








Tekniske spesifikasjoner for CELLER8®-stroppen

Materialer	Nylon Multi_lament 25% Nylon Mono_lament 50% Elastan 25%
Mål	100cm x 7,5cm
Vekt	65g

Liste over CELLER8®-symboler

Ikon	Beskrivelse	Ikon	Beskrivelse
	Tilbake		CELLER8®-program
	Batteri		Fullt batteri
	Tomt batteri		Tomt batteri
	CELLER8®-heksagon		Meditasjonsprogram
	Tilpasset program		Morgenprogram
	Kveldsprogram		Nattprogram
	CELLER8®-matte + CELLER8®-program		CELLER8®-matteprogram
	Finner ikke matte		Prosent
	Polaritet nord		Polaritet sør
	Program pågår		Program fullført
	Innstillinger		

Liste over symboler på emballasjen

Symbol	Beskrivelse
	Laget av
IPX0 – ikke beskyttet mot vanninntrengning	IPX0 – ikke beskyttet mot vanninntrengning
	Likestrøm
	CE-merket
	Må holdes tørr
	Se bruksanvisningen før bruk
	Serienummer
	UDI-nummer
	Avhendes i henhold til WEEE
	Klasse III apparat for bruk med ekstern strømforsyning med ekstra lav spenning
	Produsentens logo
	Distributørens logo
	Generelt symbol for gjenvinning/resirkulerbar
	UKCA
	Luftfuktighetsbegrensning
	Temperaturgrense

Informasjon om garanti og retur

CELLER8® er garantert fri for produsentfeil i materialer og utførelse i en periode på 3 år for CELLER8® og 1 år for CELLER8®-matten, fra kjøpsdato, underlagt forbehold om normal bruk av produktet. Denne garantien gjelder kun den opprinnelige kjøperen av produktet så lenge det ble kjøpt direkte gjennom CELLER8® eller en autorisert CELLER8®-partner, -distributør eller -forhandler. Hvis produktet mistenkes å være defekt innenfor garantiperioden, kan du ta kontakt med kundeserviceteamet til CELLER8®.

Du kan eventuelt ta kontakt med din lokale autoriserte distributør eller forhandleren CELLER8® ble kjøpt fra.

CELLER8® forbeholder seg retten til å avgjøre om produktet er defekt og kvalifisert for erstatning under garantien, og til å erstatte det defekte produktet med det best egnede sammenlignbare produktet som er tilgjengelig. Bevis på gyldig kjøp kreves for å være kvalifisert for garantien. Se gjennom vilkårene for bruk og den detaljerte garantiinformasjonen på nettsiden til CELLER8®, på www.celler8.com.

Ta kontakt med den autoriserte forhandleren du kjøpte CELLER8®-enheten fra for å få en gyldig returadresse. Enheter som returneres til produsentens adresse kan gå tapt og er kanskje ikke knyttet til kunden som sendte den inn, så ta kontakt med forhandleren der du kjøpte enheten først for å få riktig returadresse.



Avhend CELLER8® i henhold til WEEE-retningslinjene. Elektroniske instrumenter og batterier skal aldri kastes i husholdningsavfallet. Når produktets levetid er utgått må du kontakte kundeserviceteamet til CELLER8® eller deres distributør for avhendingsanvisninger.

Ansvarlig produsent og kontakter

Ta kontakt med lokal distributør for støtte og reparasjon av CELLER8®.

Kontaktinformasjon:

Telefon: +44 (0) 1622 854864

E-post: office@celler8.com

Nettside: www.celler8.com

Distribuert av: NewMed Ltd

Station Yard, Station Road,

Harrietsham,

Maidstone, Kent,

ME17 1JA

Storbritannia

www.newmedltd.co.uk

info@newmedltd.co.uk

0808 1689 282

Produsert av: Bedfont® Scientific Ltd.

Station Yard, Station Road,

Harrietsham,

Maidstone, Kent,

ME17 1JA

Storbritannia

www.bedfont.com

ask@bedfont.com

0044 (0)1622 851122

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i denne håndboken er kun ment til informasjon og opplysning, og er basert på våre egne erfaringer. Produktet hevder ikke å kunne diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge medisinske tilstander. Snakk alltid med lege.




Kontaktinformasjon:
Telefon: +44 (0) 1622 854864
E-post: office@celler8.com
Nettside: www.celler8.com



Produsert av Bedford® Scientific Ltd.

Station Yard, Station Road,
Harrietsham,
Maidstone, Kent,
ME17 1JA
Storbritannia

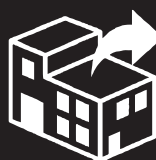

Distribuert av: NewMed Ltd

Station Yard, Station Road,
Harrietsham,
Maidstone, Kent,
ME17 1JA
Storbritannia
Telefon: +44 (0) 1622 854864
E-post: office@celler8.com
Nettside: www.celler8.com

© Bedford® Scientific Limited 2024

Nummer 2 – Januar 2024, delenr.: LAB875_NO

Bedford® Scientific Limited forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

Registrert i: England og Wales. Reg. nr.: 1289798

