

SE Instruktion för Adapter USB/Seriell
GB Instruction for Adapter USB/Serial



Innehåll/Contents

SE	INSTRUKTION FÖR ADAPTER USB/SERIELL	3
	INLEDNING	3
	KOMPATIBLA PRODUKTER.....	3
	INSTALLERA USB DRIVRUTINER	3
	BESKRIVNING ADAPTER USB/SERIELL	4
	RENGÖRING.....	4
	ANVÄNDNINGSMILJÖ.....	4
	ÅTERVINNING AV ELAVFALL	4
GB	INSTRUCTION FOR ADAPTER USB/SERIAL	5
	INTRODUCTION.....	5
	COMPATIBLE PRODUCTS	5
	INSTALLING USB DRIVERS	5
	DESCRIPTION ADAPTER USB/SERIAL	6
	CLEANING	6
	ENVIRONMENT CONDITIONS	6
	RECYCLING WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT	6

SE Instruktion för Adapter USB/Seriell

Inledning

Adapter USB/Seriell används för att kunna ansluta IR-sändare med seriell utgång till dator med USB-port.

Kompatibla produkter

Följande produkter kan anslutas till Adapter USB/Seriell:

425700	Control Prog
425718	Control 18
425710	Control 10
6600	Access Maxi
6610	Access Medi
425602	Access Gewa Prog
4256	Gewa Prog III
425613	Gewa Prog III Module


Installera USB drivrutiner

För att undvika problem vid igångkörning är det viktigt att man följer installationsanvisningen. OBS! Börja med att installera USB-drivrutiner innan Adapter USB/Seriell kopplas in. USB-drivrutiner är kompatibelt med Win 98 andra utgåvan, Win 2000 och Win XP.

Gör enligt följande för att installera USB-drivrutiner och hårdvara:

1. Sätt i CD-skivan VCP USB Drivers i datorns CD-enhet. Vänta tills en installationsguide visas på skärmen. Detta kan ta några sekunder. Om installationsguiden inte visas: Gå till *Start*-menyn, Välj *Kör* och skriv **D:\setup** (byt ut D om din CD-enhet har en annan beteckning). Klicka på **OK**.
2. Klicka på **Install USB driver**.
3. Anslut Adapter USB/seriell till datorns USB-port när instruktion ges. Drivrutin för USB Serial Converter installeras först och sedan drivrutin för USB Serial Port. Välj automatisk installation. Vid installation i Win 98 måste man även ange att drivrutiner skall hämtas från CD, sökvägen, D:\Drivers\w98_w2k_wxp.
4. Ta ur CD-skivan ur CD-enheten.

Beskrivning Adapter USB/Seriell

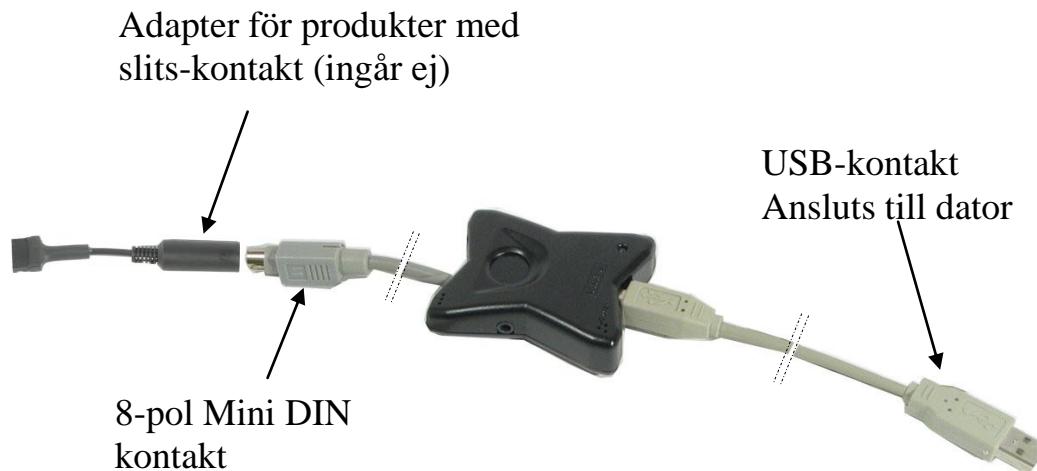

Rengöring

Innan rengöring skall Adapter USB/Seriell vara bortkopplad från datorn. Adapter USB/Seriell görs rent med en mycket hårt urvriden trasa som doppats i vatten med lite diskmedel i. Efter rengöring torkas den med en torr trasa.

Användningsmiljö

Adapter USB/Seriell är avsedd att användas inomhus i torr miljö.

Återvinning av elavfall

Adapter USB/Seriell innehåller elektronik som skall återvinnas när produkten kasseras. Lämnas till miljöstation för elavfall.



GB Instruction for Adapter USB/Serial

Introduction

Adapter USB/Serial is used to connect IR transmitters with serial output to computers with USB port.

Compatible products

The following products can be connected to Adapter USB/Serial:

425700	Control Prog
425718	Control 18
425710	Control 10
6600	Access Maxi
6610	Access Medi
425602	Access Gewa Prog
4256	Gewa Prog III
425613	Gewa Prog III Module


Installing USB drivers

To avoid problems when starting up software and hardware, it is important to follow the installation guide. Note! Start by installing the software before connecting Adapter USB/Serial. USB drivers are compatible with Win98 second edition, Win 2000 and Win XP.

Install software and hardware by the following procedure:

1. Insert the VCP USB Drivers in the CD unit on the computer. Wait until an installation guide is shown on the screen. It might take a few seconds. If the installation guide is not shown: Go to *Start*-menu, Select *Drive* and write **D:\setup** (exchange D if the CD unit has another designation). Click on **OK**.
2. Click on **Install USB driver**.
3. Connect the Adapter USB/Serial to the USB-port when an instruction is given. Begin by installing the Driver for the USB Serial Converter and then the driver for the USB Serial Port. Select automatic installation. When installing in Win98 it must be specified that you shall pick up drivers from the CD, path **D:\Drivers\w98_w2k_wxp**.
4. Remove the CD from the CD-unit.

Description Adapter USB/Serial

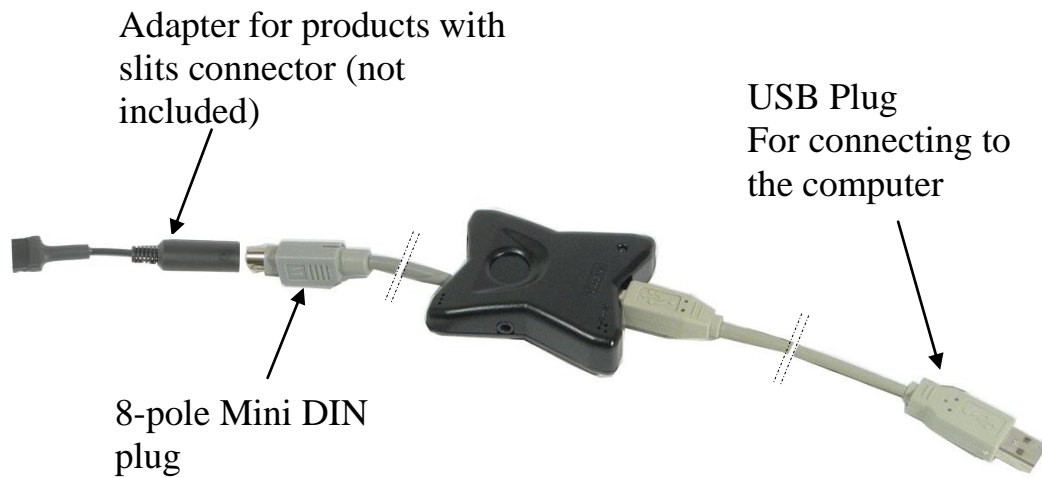

Cleaning

Before cleaning the Adapter USB/Serial must be disconnected from the computer. The Adapter USB/Serial can be cleaned with a damp cloth (weak solution of washing up liquid). After cleaning, wipe with a dry cloth.

Environment conditions

Adapter USB/Serial is to be used indoors in a dry environment.

Recycling Waste Electrical and Electronic Equipment

Adapter USB/Serial contains electronic components that must be recycled. When the product is of no use, hand it in to a recycling centre for waste of electrical and electronic equipment.





Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | Fax +46 (0)8-594 694 19 | info@abilia.se | www.abilia.se



Doc.no: 060810-1500. Doc: Instruction Adapter USB_Serial SE, GB. Ver:C. Date: 2011-03-07.