




Herr Dr. med. Bahtier Kurbanov
Facharzt für Laboratoriumsmedizin
Kliniklab Arztpraxis mit Schwerpunkt
Labordiagnostik bei funktionellen
Darmbeschwerden und Dyspepsie

 Zur Mesche 20 | 16816 Neuruppin
 info@kliniklab.de | www.kliniklab.de
 + 49 3391 3501-0

Anleitung zur Blutprobenentnahme und Versand

Inhalt der Versandbox:

- ☐ 1 x Untersuchungsauftrag
- ☐ 1 x Kanüle für Blutentnahme
- ☐ 1 x Braunes Blutröhrchen mit dem Barcode-Etikett
- ☐ 1 x Rotes Blutröhrchen mit dem Barcode-Etikett
- ☐ 1 x Transportcontainer für braunes Blutröhrchen
- ☐ 1 x Transportcontainer für rotes Blutröhrchen
- ☐ 1 x Isolierbeutel und 1 x Kühlelement

Vorbereitung von Blutprobenentnahme

Am Vortag der Blutentnahme muss bitte der **Kühlelement** (Kühlakku) eingefroren werden. Bitte denken Sie daran, zu Ihrem Arzttermin **alle mitgelieferte Komponente** (s. Inhaltsverzeichnis) zur Blutentnahme mitzunehmen.

Blutprobenentnahme

Die Blutprobenentnahme muss bei Ihrem Hausarzt oder Praxispersonal erfolgen!

Die Blutröhrchen sollen nach der Blutentnahme 2–3-mal leicht geschwenkt und danach in den Transportcontainer gepackt werden. Lassen Sie bitte nur den Transportcontainer mit braunem Blutröhrchen (Serum-Probe) für etwa **20 Minuten stehend gerinnen**.

Vorbereitung des Probenversandes

1. Kühlelement + Blutproben → Isolierbeutel:
Packen Sie das **Kühlelement** und **Transportcontainer** mit Blutröhrchen in den **Isolierbeutel** und verschließen Sie diesen gut.
2. Isolierbeutel + Transportcontainer → Versandbox:
Legen Sie den Isolierbeutel mit dem Kühlelement und Transportcontainer in die **Versandbox**.
3. **Untersuchungsauftrag** → Versandbox:
Fügen Sie den **Untersuchungsauftrag** hinzu und verschließen Sie die Versandbox gut. Sichern Sie bitte die Öffnung des Versandkartons zusätzlich. Bringen Sie anschließend die Versandbox zur nächsten Poststelle.

Bitte senden Sie Proben ausschließlich **montags und dienstags** zu. Es ist erforderlich, dass die Proben bis spätestens Freitag bei uns eingehen. Beachten Sie bitte auch, dass keine Probenlieferungen an gesetzlichen Feiertagen in Brandenburg erfolgen sollen.