

## Anleitung zur Stuhlprobenentnahme und Versand

### Inhalt der Versandbox:

- 1 x** Untersuchungsauftrag
- 1 x** Braunes Stuhlröhrchen mit dem Barcode-Etikett
- 1 x** Stuhlentnahmeset für iFOBT-Test: 1 x türkisenes Stuhlröhrchen mit dem Barcode-Etikett, 1 x Stuhlfänger; 1 x Anleitung.
- 1 x** Transportcontainer für braunes Röhrchen
- 1 x** Transportcontainer für türkisenen Röhrchen
- 1 x** Stuhlfänger für die Probenentnahme in das braunes Stuhlröhrchen
- 1 x** Isolierbeutel, **1 x** Kühlelement, **1 x** Schaumfolie

### Vorbereitung

Am Vortag der Stuhlprobenentnahme muss ein **Kühlelement** (Kühlakku) eingefroren werden.

### Stuhlprobenentnahme

Bitte befüllen Sie nur das **Probenröhrchen** – nicht den **Transportcontainer**. Bitte folgen Sie die Anweisung zur Probenentnahme in das braune Röhrchen, diese finden Sie im Stuhlfänger. Füllen Sie bitte das **braune** Probenröhrchen mithilfe des Stuhlöffels **bis zur Hälfte** (wichtig). Die Anleitung zur Stuhlprobenentnahme in das **türkisene** Röhrchen finden Sie im Set.

### Vorbereitung des Probenversandes

1. Kühlelement + Schaumfolie + Stuhlproben → Isolierbeutel:  
Packen Sie das Kühlelement und Transportcontainer mit dem braunen und ggf. türkisenen Stuhlröhrchen in den **Isolierbeutel** und verschließen Sie diesen gut.
2. Isolierbeutel → Versandbox: Legen Sie den Isolierbeutel mit dem Kühlelement und Transportcontainer in die **Versandbox**.
3. **Untersuchungsauftrag** → Versandbox:  
Fügen Sie den **Untersuchungsauftrag** hinzu und verschließen Sie die Versandbox gut. Sichern Sie bitte die Öffnung des Versandkartons zusätzlich. Bringen Sie anschließend die Versandbox zur nächsten Poststelle.

Bitte senden Sie Proben ausschließlich **montags und dienstags** zu. Es ist erforderlich, dass die Proben bis spätestens Freitag bei uns eingehen. Beachten Sie bitte auch, dass keine Probenlieferungen an gesetzlichen Feiertagen in Brandenburg erfolgen sollen.