

Davidson Marking System®

Notice d'utilisation des encres de marquage des tissus

Introduction

Le Davidson Marking System® pour marquage des tissus sont des marqueurs tissulaires permanents pour une utilisation sur excisions chirurgicales des échantillons de tissus. Lorsqu'ils sont observés au niveau macro et microscopique, les colorants identifient les limites des tissus avec une coloration distincte.

- Les colorants fournissent une orientation et un marquage précis du périmètre des échantillons de tissus.
- Les colorants peuvent être utilisés sur tissus frais ou fixés et sont également appropriés lors de la préparation des coupes congelées.
- Les colorants permettent le regroupement de plusieurs petits échantillons dans une seule cassette en colorant chacun avec une couleur différente.

Instructions

Méthode d'Utilisation

1. Agiter le flacon de colorant de tissu vigoureusement avant et tout au long de chaque utilisation.
2. Tamponnez délicatement les tissus pour enlever l'excès d'humidité.
3. Appliquer le colorant directement sur la partie désirée du tissu en utilisant un bâton applicateur ou une brosse. Des applicateurs avec embouts en coton sont efficaces pour les grandes surfaces, tandis qu'un bâton en bois peut être utilisé pour application plus spécifique et détaillée.
4. Ne pas appliquer le colorant en excès car cela prolongera le temps de séchage.
5. Refermer le flacon rapidement pour éviter l'évaporation.
6. Laisser sécher le colorant complètement (1-2 minutes). Une fois sec, le colorant est lié de manière permanente au tissu.
7. Si nécessaire, l'acide acétique est approprié et efficace comme traitement fixant.
8. Une fois sec, le traitement du tissu peut être effectué.

Important

⚠ Attention

Ne jamais utiliser ces colorants directement sur des patients vivants. Utiliser uniquement sur les tissus excisés car ces colorants sont permanents et non stériles.

Information et support

Visiter www.trajanscimed.com ou contacter techsupport@trajanscimed.com

Les spécifications peuvent changer sans préavis.

CE **IVD** **000577**



Distributeur:

Trajan Scientific and Medical
7 Argent Place Ringwood, VIC 3134, Australia

Sponsor:

Trajan Scientific Australia Pty Ltd
7 Argent Place Ringwood, VIC 3134, Australia

Bradley Products, Inc.
1700 W. 94th St. Bloomington, MN 55431 USA
Tel: 1-800-325-7785 Email: dms@bradleyproducts.com



Advena Ltd.
Tower Business Center, 2nd Fl.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta