

## SURFA'SAFE

### 1. INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

1.1 **Classe du DM :** IIb

1.2 **Descriptif du dispositif :**

Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus... dès 2 min.

Présentation en spray

**Propriétés microbiologiques :**

**Bactéricide :** EN 1040, EN 13727, EN 13697 : actif en 2 min

**Levuricide / fongicide :** EN 1275, EN 13697 : actif en 5 min, EN 13624 : actif en 2 min

**Moisissures :** EN 1275, EN 13624, EN 13697 : actif en 20 min

**Virucide :** EN 14476 : VIH, PRV, BVDV, Vaccine, HSV, Rotavirus : 1 min

EN 14476 : Polyomavirus SV 40, Coronavirus : 5 min

EN 14476 : Adénovirus, Norovirus murin : 30 min



1.3	<b>Références catalogue :</b> <b>UCD :</b> unité de commande ; <b>CDT :</b> multiple de l'UCD ; <b>QML :</b> Quantité minimale de livraison				
	Référence	Descriptif	CDT	UCD	QML
	AN842326.	FLACON PULVERISATEUR SURFA'SAFE 750 ML	1 boîte	1 unité	1 unité
1.4	<b>Composition du dispositif et accessoires :</b>  <b>Présence de latex :</b> Non <b>Présence de phtalates :</b> Non <b>Présence de produits d'origine animale ou biologique :</b> Non				
1.5	<b>Domaine – Indications :</b> Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces. Usage par essuyage humide sur les surfaces (paillasses, chariots, mobilier), les équipements (moniteurs)  <b>Usage unique :</b> Non				

## 2. PROCEDES DE STERILISATION

<b>Dispositif médical stérile :</b> Non <b>Mode de stérilisation du dispositif :</b> NA
--

## 3. CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

<b>Conditions normales de conservation et de stockage :</b> Stockage entre +5°C et +35°C.  <b>Précautions particulières :</b> NA  <b>Durée de validité du produit :</b> NA
--

#### 4. CONSEILS D'UTILISATION

4.1	<p><b>Mode d'emploi :</b> Retranscription des instructions d'utilisation du fabricant.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la surface ou de préférence sur un non-tissé.</li><li>2. Répartir la mousse sur la surface à traiter.</li><li>3. Laisser sécher.</li><li>4. Ne pas rincer (sauf si la surface est susceptible d'être en contact avec les denrées alimentaires ou les muqueuses).</li><li>5. Temps de contact minimum : 5 minutes.</li></ol>
4.2	<p><b>Précautions d'emploi :</b> Utiliser les biocides avec précaution, voir l'emballage.</p>
4.3	<p><b>Contre-indications :</b> NA</p>