


# Intelligente beheizbare Bandage Gebrauchsanweisung

# Produktbeschreibung


Die Vulpés Intelligente Beheizbare Bandage wurde zur Schmerzlinderung, Entspannung und Förderung der Heilung entwickelt. Die elektrische Bandage bietet präzise Heizunterstützung mit dem maßgeschneiderten Graphen-Heizpad, das für das Handgelenk, Gelenke, Knie, Ellbogen und andere muskelbezogene Bereiche angewendet werden kann

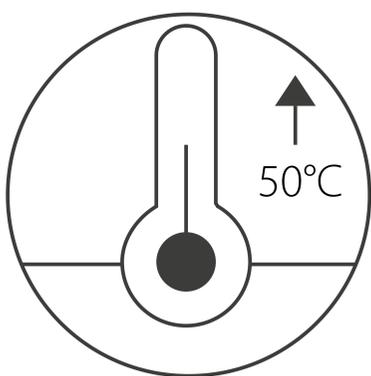


Elektrisch beheizbar




Graphen  
Technologie

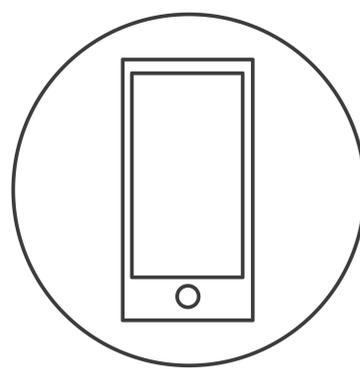


Smartphone  
gesteuert

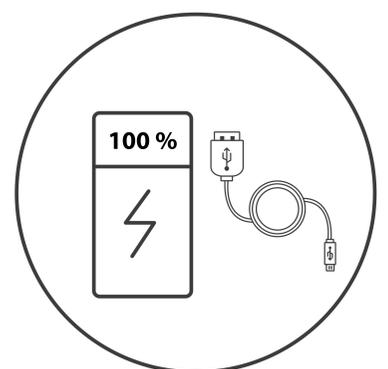


Mit Powerbank  
oder SD-Kabel  
betrieben

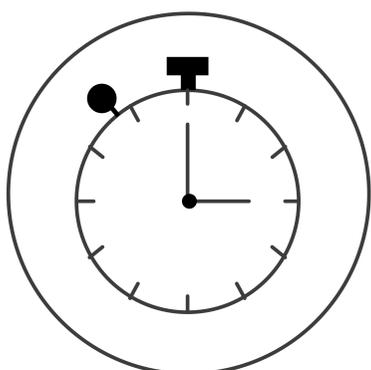


Automatische  
Zeitschaltuhr

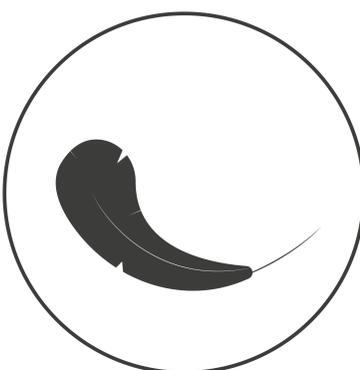

Hautfreundliches  
& weiches  
Material

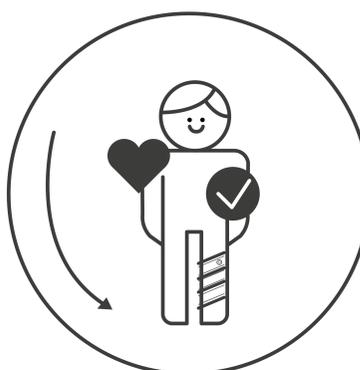


Ergonomisch

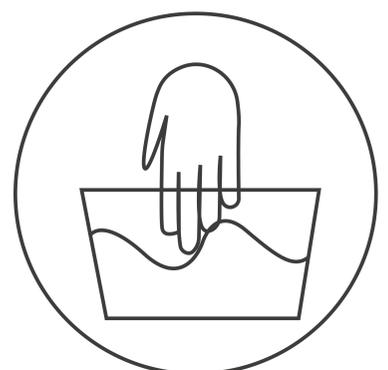

Handwäsche



Schmerzlinderung

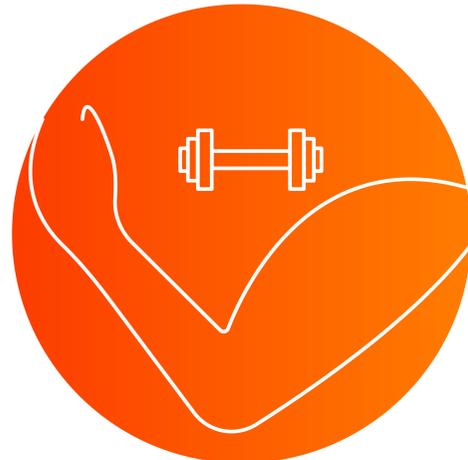

Erholung




Gelenksteifheit



Aufwärmen vor der Aktivität







Muskelentspannung

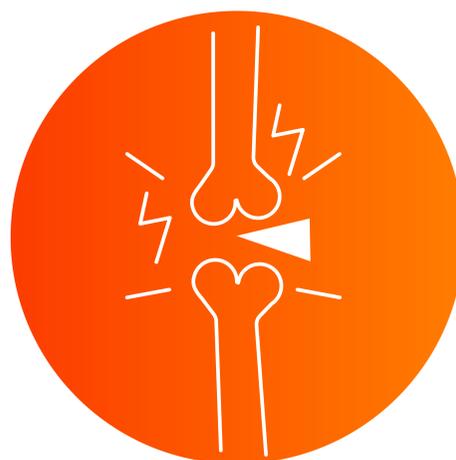

Arthritis-Symptome\*


**Die Vulpés Intelligente Beheizbare Bandage ist kein „medizinisches Produkt“. Es verspricht keine Heilung für Krankheiten oder Beschwerden. Bitte kontaktieren Sie das medizinische Personal für medizinische Beratung oder Behandlungsmöglichkeiten.**

# WAS IST IN DER BOX?

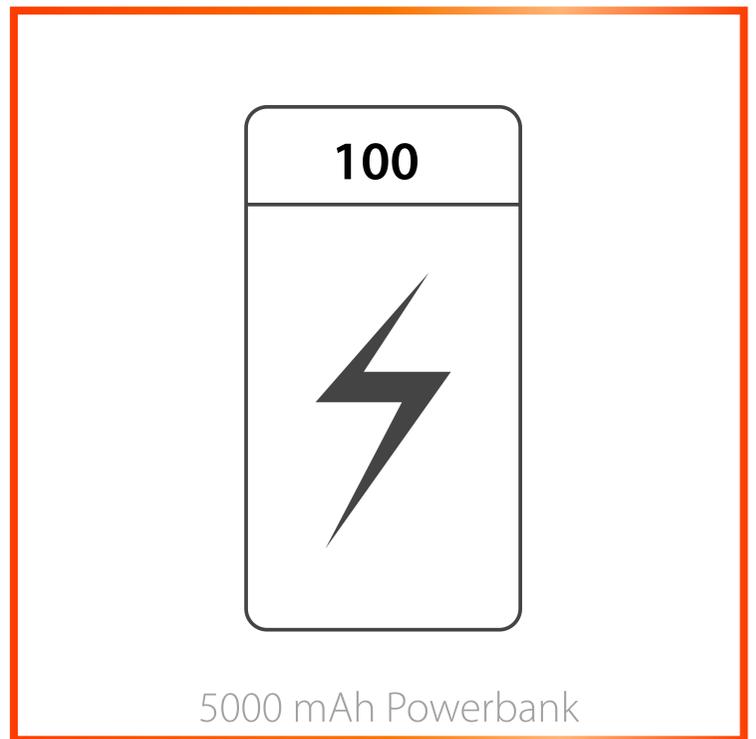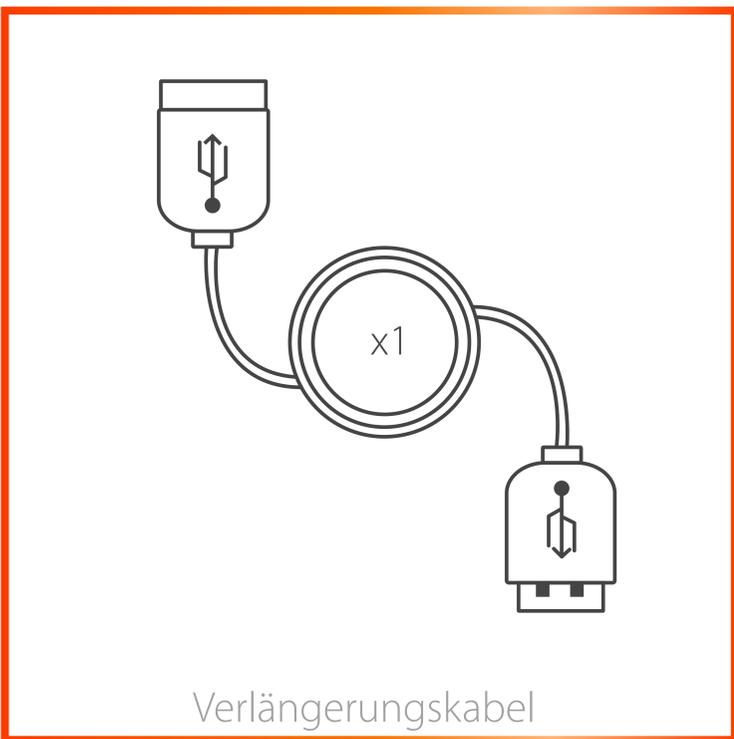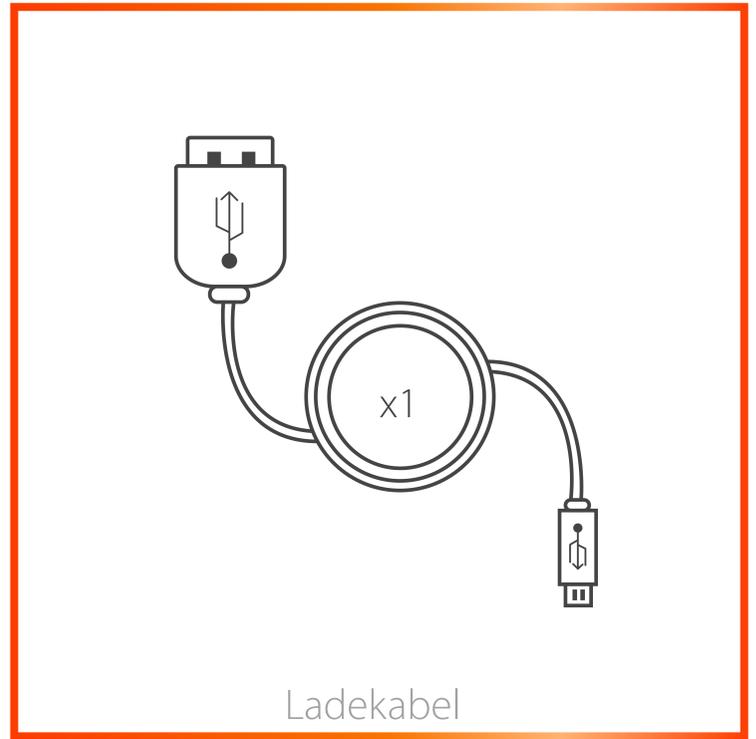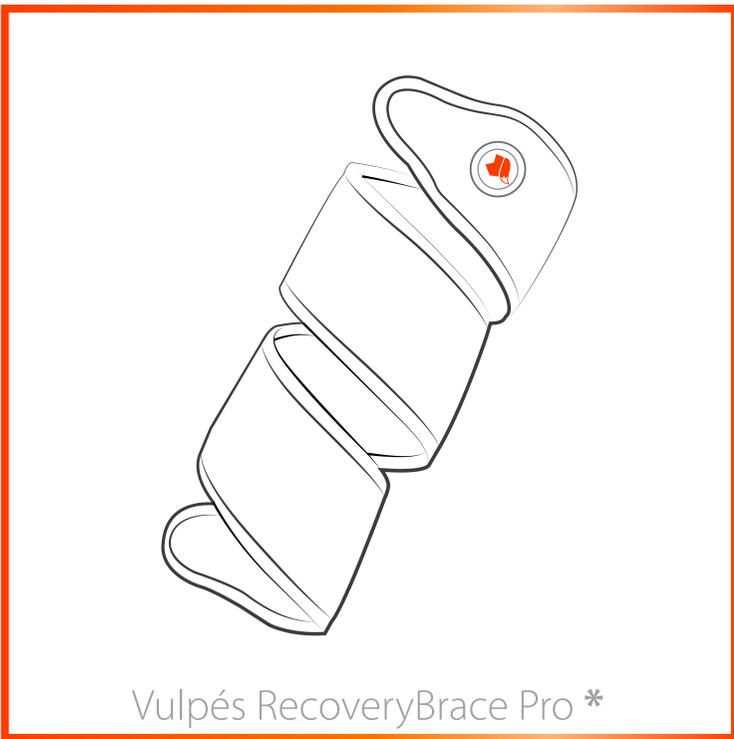

\* Vulpés Intelligente Beheizbare Bandage Größe : 103 cm

# PRODUKT

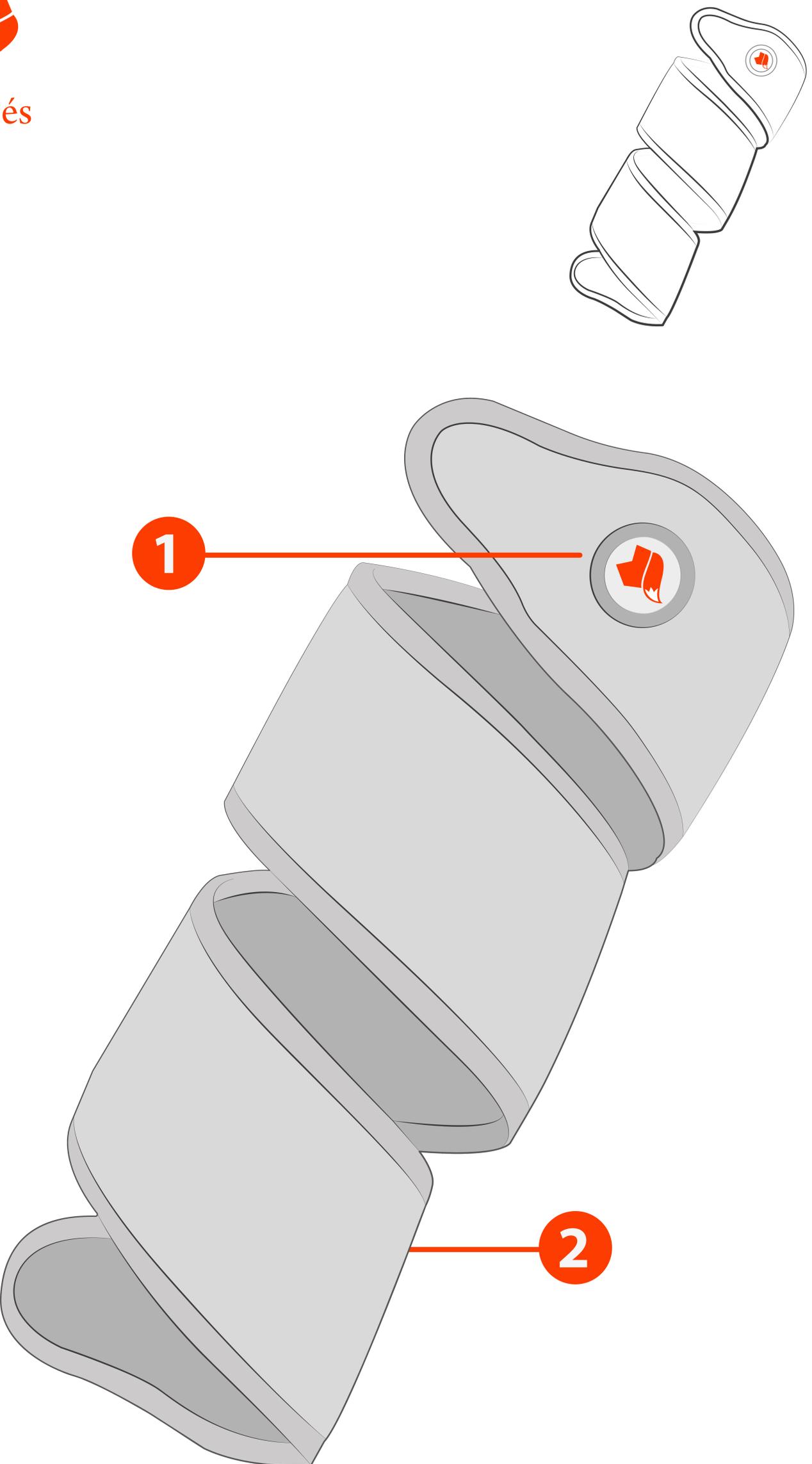


**1**

Kabellos, 3-Modus-Steuerung

**2**

Batterietasche mit integriertem USB-Kabel

# PRODUKT

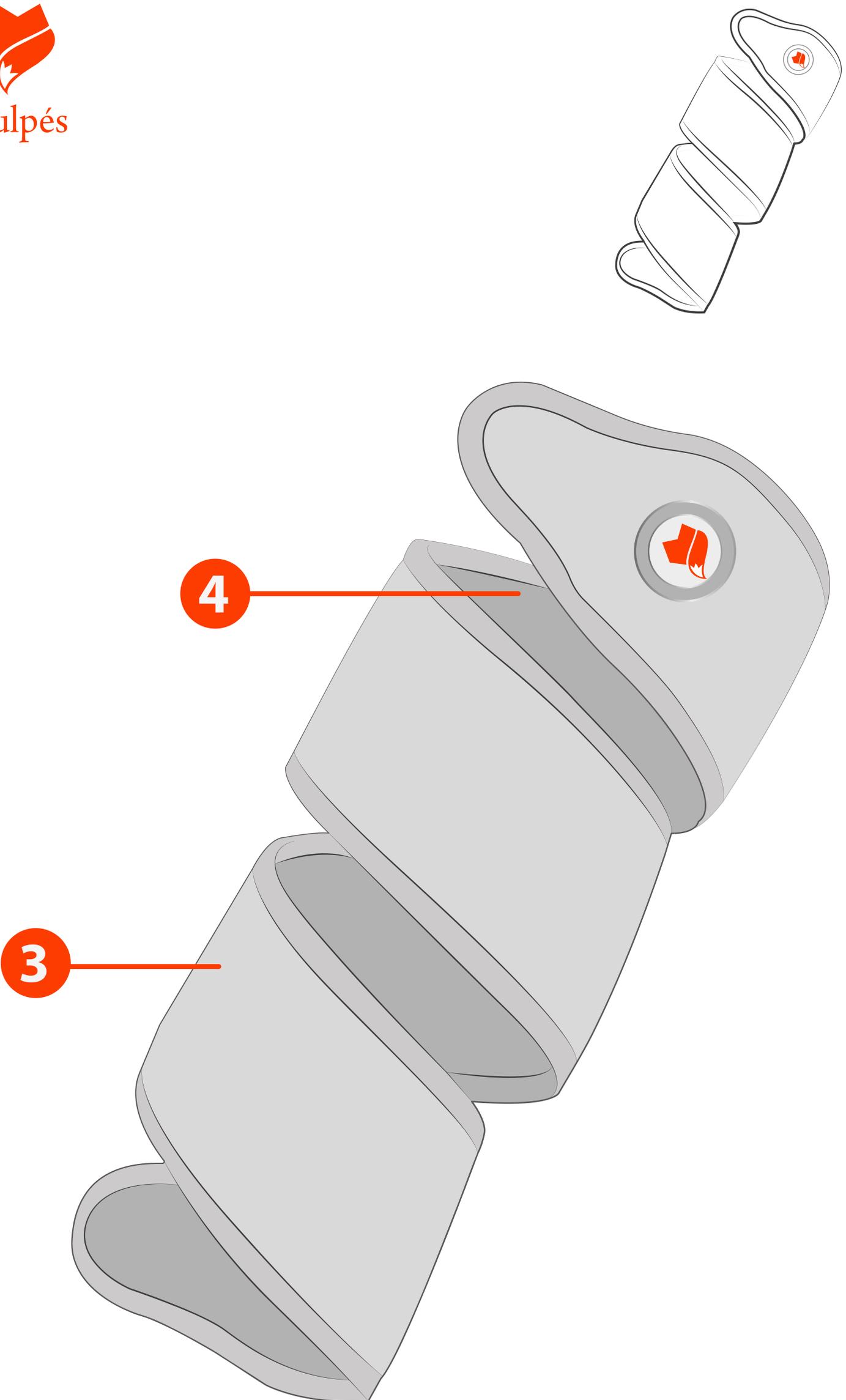


**3**

Hautfreundliches und weiches Material

**4**

Heizbereich

# EINRICHTUNG

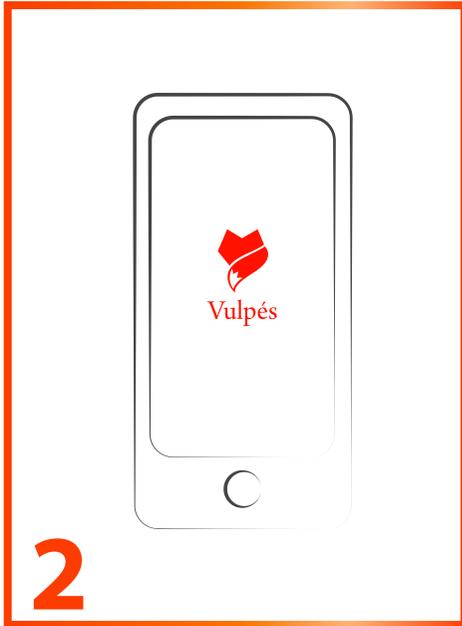

**1** Schließen Sie die 5V / 2A Powerbank an den USB-Stecker an, der sich in der Powerbank-Tasche oder am Verlängerungskabel befindet.  
**Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass die Powerbank eingeschaltet ist, bevor Sie das intelligente Heizband aktivieren. Einige Powerbanks schalten sich automatisch nach 30 Sekunden ab, falls das Band nicht aktiviert wurde.**

**2** Laden Sie die Vulpés Smartwear Mobile-App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter und installieren Sie sie.


**3** Koppeln Sie Ihre Stütze mit der mobilen Anwendung, indem Sie die Schritte in der App befolgen.  
**Hinweis: Sie haben die Option, die Heizeinstellungen über 3. Smartphone, 4. Knopf zu steuern.**

**4** Drücken Sie den Controller, um die Heizeinstellungen zu aktivieren. Drücken Sie den Controller-Knopf, um den gewünschten Heizzustand für **niedrig (gelb), mittel (orange) und hoch (rot) einzustellen.**




# VERWENDUNG


# PRODUKT

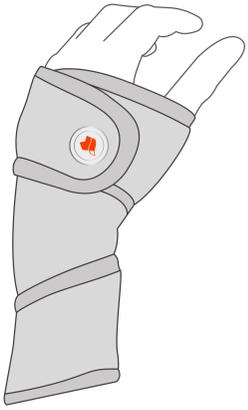


Handgelenk

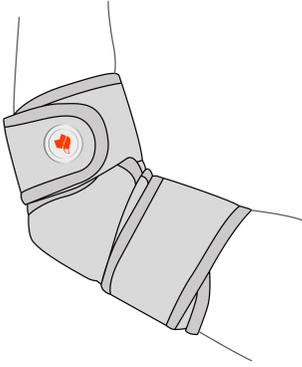


Ellenbogen

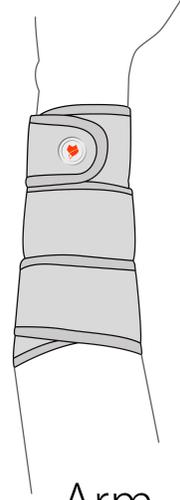

Arm

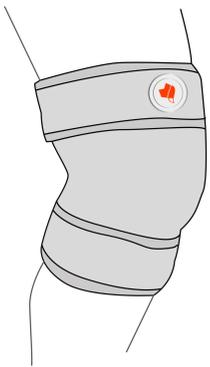


Knie

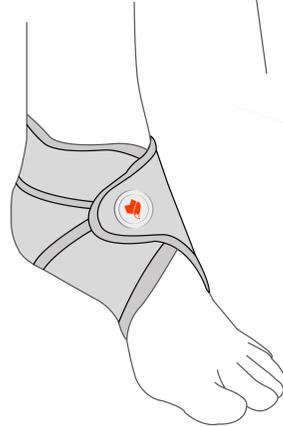



Fuß

Die Vulpés RecoveryBrace Pro kann am Handgelenk, Ellenbogen, Arm, Knie und Fuß verwendet werden

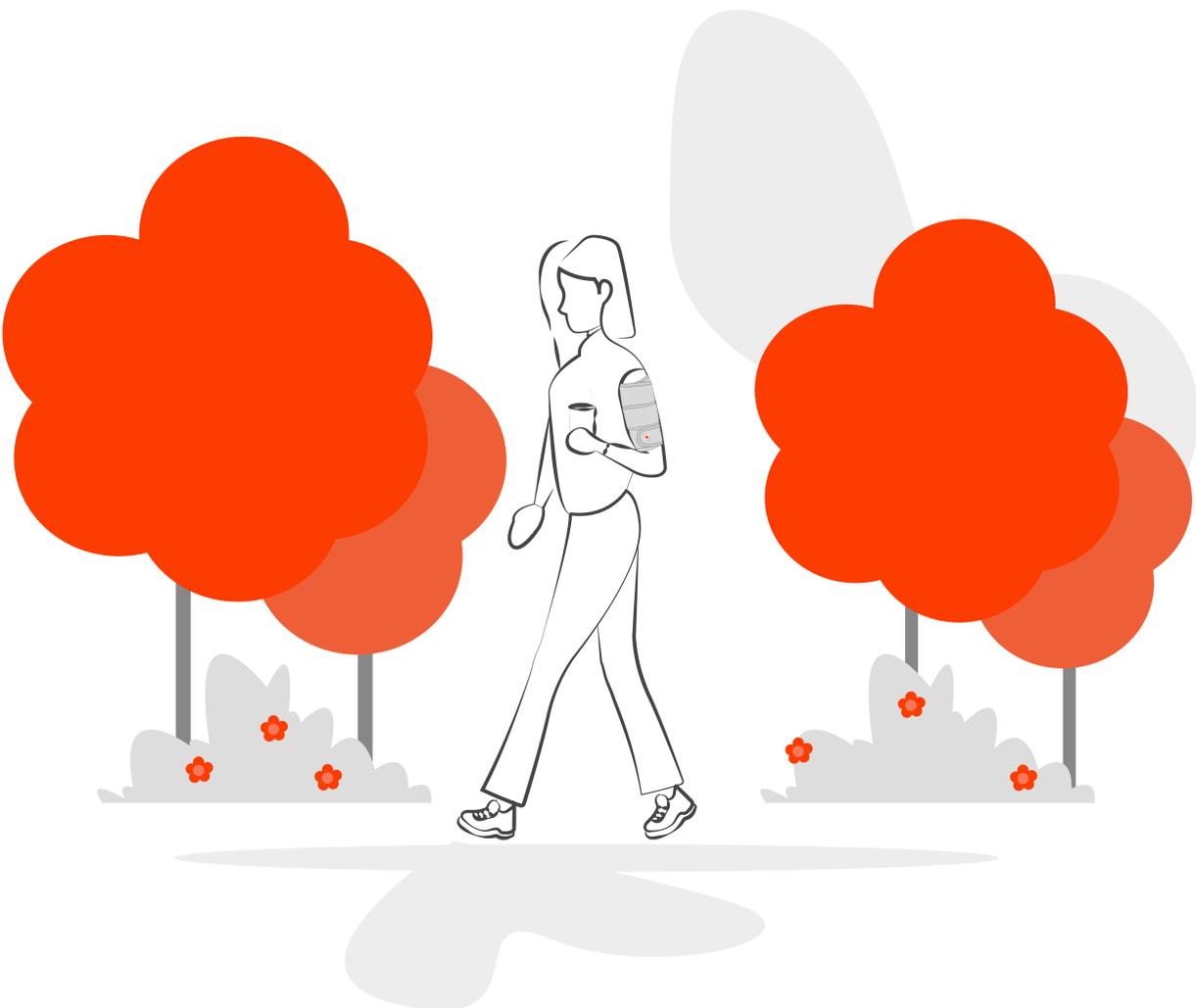

Die Vulpés Intelligente Beheizbare Bandage kann unterwegs mobil mit der USB-Powerbank verwendet werden

# VERWENDUNG

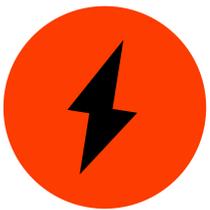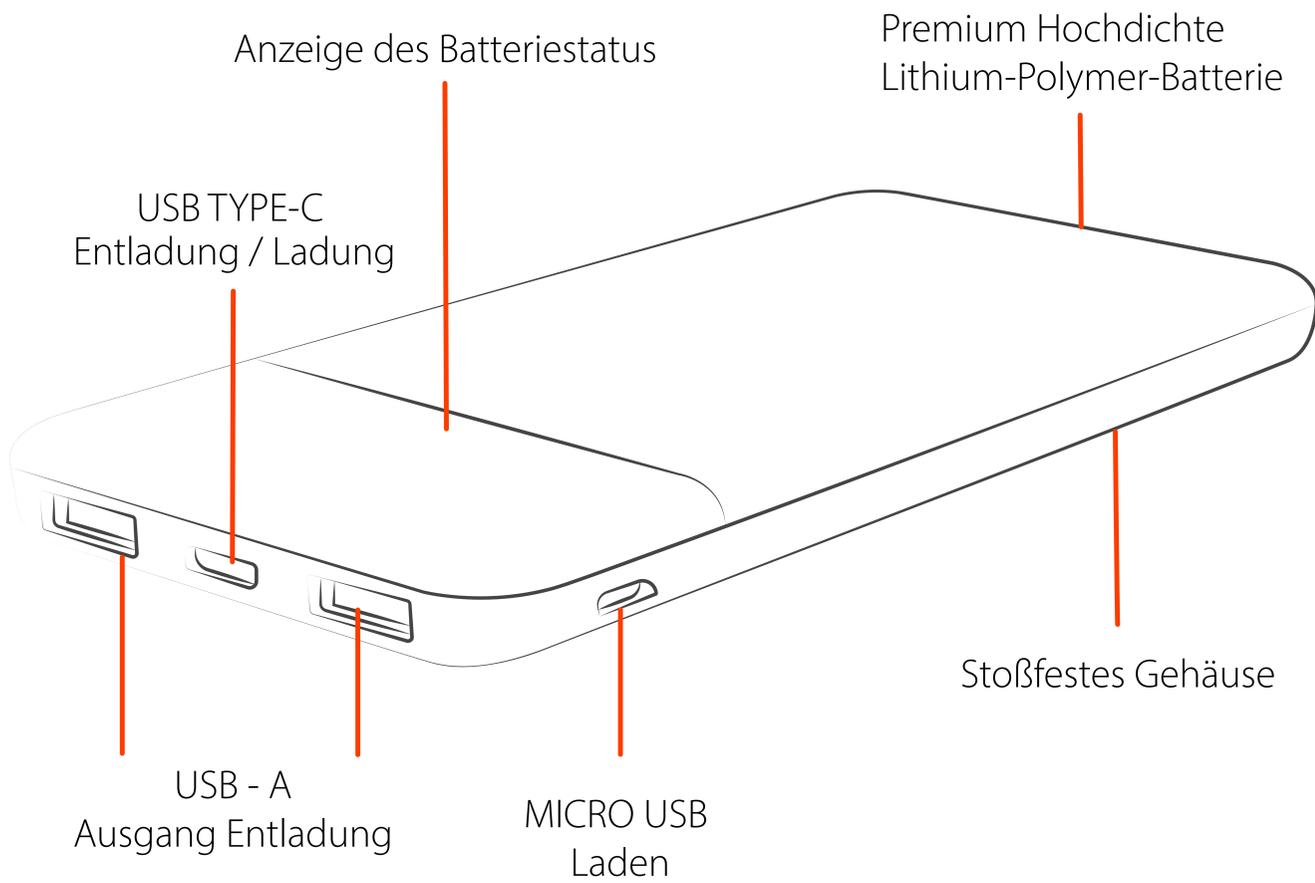


Anzeige des Batteriestatus



Leichtgewicht




Hochwirksam

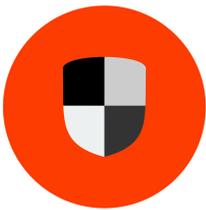

Hohe Sicherheit



Lithium-Polymer Akku

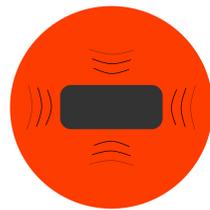

Stoßfest

## SICHERHEITSFUNKTIONEN



Temperaturschutz



Überlast- und Kurzschlusschutz



Eingangsspannungsschutz



Kurzschlusschutz



Überladungs- und Tiefentladungsschutz



Ausgangsstromschutz



Rückschutz



Eingangsverpolschutz



Ausgangsspannungsschutz

## SPEZIFIKATIONEN

Batterietyp	Lithium-Polymer	Eingang	Micro USB	DC 5.0V / 2.0	A
			USB Type C	DC 5.0V / 2.4	A
Kapazität	5000 mAh	Ausgang	USB Type A	DC 5.0V / 3	A
			USB Type C	DC 5.0V / 2.4	A
Nettogewicht	110 g	Maße	100 x 63.3 x 13.5 mm		

**Das Produkt darf nicht von Personen mit verminderter Hitzeempfindlichkeit verwendet werden, die anfällig für Verletzungen sein könnten.**

(z.B. Diabetiker, Personen mit krankheitsbedingten Hautveränderungen oder Personen mit vernarbter Haut in dem Bereich, in dem das Pad angelegt werden soll, nach der Einnahme von Schmerzmitteln oder Alkohol)

**Dieses Produkt ist kein „medizinisches Produkt“. Es verspricht keine Heilung von Krankheiten oder Leiden. Bitte kontaktieren Sie das medizinische Personal für medizinische Beratung oder Behandlungsoptionen.**

**Personen, die beim Tragen der Vulpés-Heizbandage Unbehagen empfinden, müssen die Stütze sofort abnehmen und vor der Wiederaufnahme der Verwendung medizinischen Rat einholen.**

**Personen mit Hautallergien gegen synthetische, gummi- oder plastikhaltige Materialien, die in die Stütze vorkommen können, sollten ihre Haut bei jedem Tragen die Stütze sorgfältig beobachten. Sollte es zu Hautreizungen kommen, setzen Sie die Stütze sofort ab und suchen Sie ärztlichen Rat.**



**Reinigung:** Bitte schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und entfernen Sie die Powerbank aus der Tasche. Reinigen Sie das Gerät bitte nur mit der Hand. Bevor Sie das Thermalsystem erneut versuchen zu verwenden, muss es vollständig getrocknet sein. Vermeiden Sie während des Trocknungsvorgangs jeglichen Kontakt mit Heizkörpern.

Bitte vermeiden Sie während des Betriebs jeglichen Kontakt mit Wasser.



**Kinder: Warnung!** Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit Geräten oder Zubehör spielen.



**Power Bank:** Bitte verwenden Sie immer den **5V/2A** Ausgangsport der **Powerbank**. Durch die Verwendung von Ausgangsports mit höherer Spannung beschädigen Sie das Steuersystem dauerhaft.

**Vulpés Powerbank Beschreibung, Funktion und vorgesehene Verwendung:**

Das Produkt ist zum Laden oder Betreiben von mobilen Geräten und Vulpés-spezifischen Produkten mit 5 V Gleichstrom konzipiert. Die Powerbank ist mit einem integrierten Lithium-Polymer-Akku ausgestattet, der als Energiespeicher dient.

Wir empfehlen die Verwendung von Vulpés Powerbanks oder Powerbanks von Markenherstellern. **Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Anweisungen von Powerbanks Dritter, bevor Sie diese in Verbindung mit dem Vulpés Heizbandage verwenden.**

**WICHTIG**

**Hinweis: Bei Problemen mit dem Produkt kontaktieren Sie bitte das Vulpés-Team oder Ihren lokalen Vertriebspartner.**



**Wartung und Pflege:** Im Falle einer Fehlfunktion lassen Sie bitte einen Fachmann die Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen. Verwenden Sie bitte nur ein trockenes und weiches Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.



**Sicherheitshinweise - Bitte beachten Sie folgende Aspekte nicht:**

**Verändern Sie nicht das Produkt, Produktteile oder Zubehör.**

**Öffnen Sie nicht das Gehäuse.**

**Vermeiden Sie extreme Bedingungen, wie starke Hitze, direktes Sonnenlicht sowie Mikrowellen, Vibrationen und mechanischen Druck.**

**Werfen Sie es nicht ins Feuer.**

**Lassen Sie das Produkt NIE unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist!**

**Verursachen Sie keinen Kurzschluss an Anschlüssen und Schaltkreisen.**

**Entsorgen Sie ausgelaufene, verformte oder korrodierte Produkte mit geeigneten Schutzmaßnahmen.**


**Verwenden Sie es nicht in explosiver Umgebung.**

**Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, laden Sie es alle 3 Monate, um die Kapazität zu erhalten.**



**Materialschäden durch unsachgemäßen Gebrauch:** Vergleichen Sie die Spezifikationen von Produkt, Stromversorgung und Peripheriegeräten. Diese müssen identisch sein. Verwenden Sie das Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.

**Lagerung:** Bitte gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf. **Setzen Sie es bitte keinen Flammen aus, lassen Sie es nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, das Produkt zu biegen oder zu schneiden.**

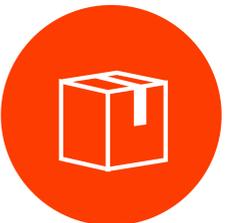

**Bitte versuchen Sie nicht, die Heizbandage oder Komponenten zu reparieren. Dies wird die Garantie aufheben und kann zu Temperaturkontrollstörungen führen, die leichte bis schwere Verbrennungen verursachen können.**

**Bitte schneiden oder verändern Sie das Produkt nicht. Dies wird die Garantie aufheben und kann die Funktion des Produkts beeinträchtigen.**

Bitte schneiden Sie die Stütze nicht und halten Sie sie fern von scharfen Gegenständen. Ein Schnitt in der Stütze kann das Produkt beschädigen. Falls die Stütze versehentlich geschnitten wurde, entfernen Sie das Produkt bitte vom Körper und verwenden Sie es nicht wieder.

# WICHTIG



**Ausschalten:** Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät über Nacht ausgeschaltet ist und schalten Sie es aus, bevor Sie einschlafen.

Die Benutzer sollten sich bewusst sein, dass verschiedene Umweltbedingungen einschließlich hoher oder niedriger Temperaturen die Eigenschaften der Stütze verändern und die Leistung sowie die Batterielaufzeit verringern können.

Bitte aktivieren Sie die Powerbank und die Vulpés-Stütze nicht im gefrorenen Zustand.



**Recycling:** Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie dürfen elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Ihre Komponenten müssen recycelt oder getrennt voneinander entsorgt werden. Andernfalls können Schadstoffe und gefährliche Substanzen unsere Umwelt verschmutzen. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer kostenlos an den Hersteller, den Händler oder öffentliche Sammelstellen zu übergeben. Einzelheiten werden durch nationales Recht geregelt. Das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Abfalltrennung, Anwendung und Entsorgung gebrauchter Geräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. **WEEE No. 28527803**



**Unsere Garantie:** Unter den Bedingungen dieser begrenzten Garantie gewährleistet Vulpés, dass dieses Produkt zum Zeitpunkt des ursprünglichen Kaufs durch einen Verbraucher frei von Mängeln in Design, Material und Verarbeitung ist. Diese begrenzte Garantie gilt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des physio-chemischen Zustands der Lithium-Polymer-Technologie die Batterielaufzeit nach einer bestimmten Nutzungsdauer abnehmen kann. Eine höhere Gebrauchsintensität beschleunigt den Batteriedegradationsprozess. **Für die Powerbank bietet Vulpés keine Firmengarantie.**

Für weitere Details besuchen Sie bitte die Vulpés-Website <https://www.vulpes-smartwear.com>