



Le damos vida al discurso™

# Consejos para posicionamiento de rastreo ocular

## Consideraciones y consejos para optimizar la disposición de la mirada

¡Visite [TalkToMeTechnologies.com](http://TalkToMeTechnologies.com) para obtener más recursos GRATUITOS!

# 1



### Escoja una configuración adecuada

para que el cliente sea capaz de concentrarse

- Ubicación silenciosa
- Contemple a familiares
- Busque un acuerdo entre los asistentes para respaldar una experiencia alegre y en calma
- Evite fuentes de luz brillante

# 2




### Posicione al cliente

para tener la mejor estabilidad cervical, control corporal y comodidad

- Alinee la cabeza con el tronco centralizado/equilibrado y con buen soporte.
- Inclinar hacia atrás o reclinarse puede ser beneficioso para algunos clientes
- La inclinación hacia adelante (mirando hacia abajo) por lo general tensa el cuello
- Consejo: No ponga en riesgo la comodidad del paciente para la ubicación del dispositivo.

# 3

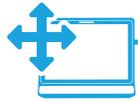

### Posicione el equipo

usando una montura para sostener el dispositivo en la distancia y orientación requeridas

- Un soporte de piso o una montura de silla de ruedas es ideal, aunque una montura de mesa puede funcionar en algunas situaciones
- Dispositivo centrado en frente del rostro
- Muestre la pantalla en paralelo al plano de la cara
- Borde superior de la pantalla en línea con la parte superior de la cabeza
- Use el monitor de la cámara para encontrar el punto óptimo

# 4



### Ajuste la configuración del dispositivo

para optimizar la utilización para el cliente

- Rastrear uno o ambos ojos (adaptar por ciertas condiciones oculares como el estrabismo)
- Calibración de color de fondo, tipo de objetivo o color, número y velocidad/movimiento
- Suavizar para adaptar a condiciones de nistagmo y distracción
- Activación mediante ajustes de Permanencia, Cambio o Parpadeo

# 5



### Comience simple

a desarrollar un éxito temprano

- Demuestre y modele para el cliente
- Comience con la menor cantidad de objetivos de calibración y seleccione elementos más grandes, para obtener un éxito temprano
- Comience con actividades simples que omitan el componente/exigencia de idioma
- Aumente la cantidad de objetivos de calibración para mayor precisión, en especial con mayor cantidad de elementos o elementos más pequeños en la pantalla



### ¡Consejos adicionales!

- Pida a los observadores u otros en la sala que reduzcan sus charlas al mínimo. ¡No hay espacio para la negatividad!
- Tenga previsto que los usuarios nuevos y clientes más jóvenes podrían asistir solamente por algunos minutos