



We bring speech to life™

# wego™ A Referencia Rápida

## Grid para wego



### Editar/cambiar categorías de vocabulario

1. Entre *Modo de Editar* con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Editar Cuadrículas** ✎
2. Seleccione botón que editar > **Editar Celda**.
3. Para cambiar la etiqueta del botón, seleccione la etiqueta en la celda > escriba la etiqueta nueva.
4. Para cambiar la imagen del botón, seleccione la imagen en la celda > seleccione un símbolo o **busque imagen** para más opciones > seleccione uno de los siguientes:
  - a. *Símbolo*: Escriba el nombre de etiqueta o palabra para buscar símbolos > seleccione el símbolo.
  - b. *Biblioteca de fotos*: Seleccione la capeta que contiene imágenes > seleccione la foto deseada.
  - c. *Búsqueda Web*: Escriba el nombre o palabra para buscar en la web > seleccione la imagen.
  - d. *Cámara*: Seleccione cámara frontal o trasera > presione **Capturas** para tomar foto.
5. Seleccione **Listo** > **Finalizar Edición** para grabar cambios y salir *Modo de Editar*.

### Grabar frases en páginas de categorías

Programa independientemente el vocabulario sin entrar *Modo de Editar*.

1. Seleccione **el Teclado** > escriba el mensaje que quiere grabar a un botón.
2. Seleccione **mis Frases** > seleccione la categoría bajo cual quiere su mensaje.
3. Seleccione **Guardar** > toque el botón nuevo que aparece.  
*Nota: Para **Borrar**, seleccione **Borrar** > toque dentro el botón que quiere **Borrar**.*

### Editar/añadir palabras a listas de palabras dentro categorías

Añadir varias palabras a una categoría al mismo tiempo.

1. Navegar a cuadrícula/página deseada.
2. Entre *Modo de Editar* con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Editar Lista de Palabras** ☰
3. Seleccione **+** para añadir la palabra nueva
4. Escriba la palabra nueva en la caja de texto.
5. Seleccione **Lista de Palabras** para regresar a la página de inicio > **Listo**.

### Conectar/saltar a cuadrícula/página de un botón nuevo

1. Entre *Modo de Editar* con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Editar Cuadrículas** ✎
2. Seleccione una celda en blanco > **Salta a Otra Cuadrícula** >
  - a. Seleccione la cuadrícula/página actual que usted quiere conectar/saltar a O...
  - b. Seleccione **Copiar Cuadrícula** > seleccione “.new page template” > renombra la nueva cuadrícula/página > **Listo**.  
*Nota: No es para páginas de Lista de Palabras.*

### Conectar/saltar a cuadrícula/página de un botón que existe

1. Entre *Modo de Editar* con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Editar Cuadrículas** ✎
2. Seleccione el botón de cual quiere conectar/saltar > **Editar Celda** > **Añadir Comando** > **Salto** > **Saltar A** >
  - a. Seleccione la cuadrícula/página existente que usted quiere conectar/saltar a O...
  - b. Seleccione **Copiar Cuadrícula** > seleccione “.new page template” > renombra la nueva cuadrícula/página > **Listo**.

### Cambiar pronunciación

1. Abra **Configuraciones** con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Configuración** ⚙️
2. **Voz** > **Pronunciación** > seleccione **+** para añadir palabra nueva.
3. En la caja de *Palabra*: escriba la palabra deletreada correcta (eje. fajita).
4. En la caja de *Pronunciación*: escriba la palabra como la quiere pronunciar (eje. faheeta).
5. Seleccione **Probar** para escuchar cómo suena la palabra.
6. Cuando termine, seleccione **Guardar** > **Listo**.

### Copiar/pegar botón

1. Entre *Modo de Editar* con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Editar Cuadrículas** ✎
2. Seleccione el botón deseado > **Seleccionar** > **Copiar** > seleccione lugar(es) nuevo > **Pegar** > **Listo**.  
*Nota: No es para páginas de Lista de Palabras.*  
*Consejo: También puede entrar al menú de selecciones del botón con presionar el botón deseado hasta que sea activado.*

### Ocultar/mostrar celdas

1. Entre *Modo de Editar* con seleccionar **Opciones** ⋮ > **Editar Cuadrículas** ✎
2. Seleccione el botón deseado > **Seleccionar** > seleccione más botones si desea.
3. Abra menú de *Estilo* con seleccionar > **Accesibilidad de la Celda** > **Ocultar** > **Listo**.
4. Seleccione **Finalizar edición** para guardar cambios y salir de *Modo de Editar*.  
*Nota: No es para páginas de Lista de Palabras.*

### Acceso Guiado

Todos los dispositivos dedicados vienen con *Acceso Guiado* iniciado.

1. Abra el menú de *Acceso Guiado* con presionar tres veces rápidamente el boto de Inicio. Si su dispositivo no tiene un botón de inicio, use el botón de Encender/prender.
2. Entre el código: código predeterminado contiene **1s (1111 o 111111)**.
3. Para continuar con *Acceso Guiado*: presione **Reanudar** (arriba a la derecha).
4. Para apagar *Acceso Guiado*: presione **Finalizar** (arriba a la izquierda).
5. *Bloque del Menú* (desactivar/restringir uso de botones/categorías específicas): Abra el menú de *Acceso Guiado* > use el dedo para rodear un círculo alrededor del área/botones de la pantalla que quiere desactivar/restringir > **Reanudar**.

*Note: Si estas instrucciones no combinan con su archivo de vocabulario actual, por favor contacte Apoyo Técnico para asistencia.*

¿Necesita ayuda?



877.392.2299 Option 3



support@talktometechnologies.com



talktometechnologies.com



We bring speech to life™

# Equipo, Botones y Características



## 1 Encender

Presione y sostenga este botón (también un botón de volumen en algunos modelos) para encender o apagar el dispositivo.

*Nota: Presione este botón una vez mientras que el wego A está encendido para ponerlo en modo de "No molestar". Esta característica conserva la vida de la batería en el wego A cuando no se está usando.*

## 2 Volumen

Presione botones para aumentar o reducir volumen.


## 3 Inicio

Toque para regresar a la pantalla de inicio. Si su modelo del wego A no tiene un botón de Inicio, deslice hacia arriba de la parte de debajo de la pantalla.

## 4 Carga del wego A

Cargar del dispositivo y la bocina TTMT (SPKR) por la noche o cuando no esté en uso. Por favor solo utilice el cargador de TTMT-aprobado para su dispositivo.

wego 7A-D, 10A-D & 13A-D

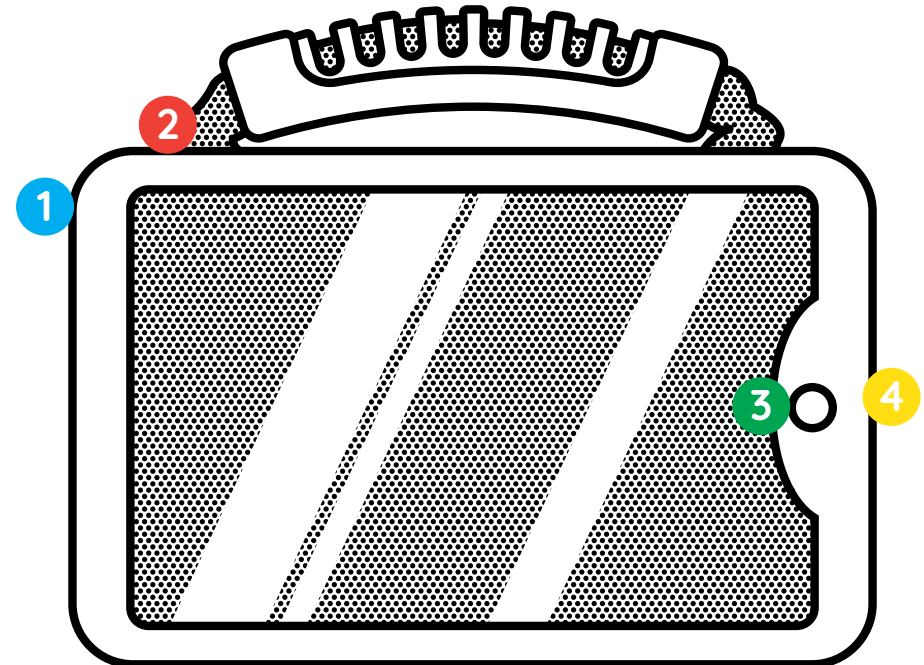

*Si su modelo del wego A no tiene un botón de Inicio, desplace hacia arriba de la parte de debajo de la pantalla.*

¿Necesita ayuda?

 877.392.2299 Option 3

 support@talktometechnologies.com

 talktometechnologies.com