




We bring speech to life™

wego™ A Referencia Rápida

Predictable



Teclas Rápidas y Botones de Personalizar

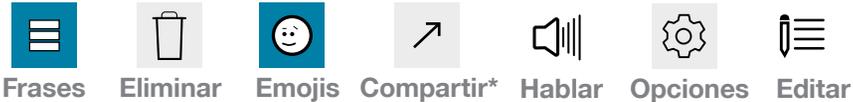

Añadir una frase de categoría

1. Seleccione **Frases** > seleccione **Editar** > toque **Añadir categoría**.
2. Escriba el nombre de la frase de categoría en el curso azul.
3. Seleccione la palomita azul en la esquina derecha de arriba, o seleccione uno de los siguiente para añadir una imagen:
 - Seleccione **Añadir Icono** > Seleccione **Cámara** > Tome foto y seleccione **Usar Foto** > Seleccione de galería > toque para seleccionar imagen de galería.
 - Seleccione **Añadir Icono** > Seleccione **Galería** > toque para seleccionar ge galería > Seleccione **Selección** > Seleccione el botón **Regresar** en la esquina izquierda de arriba.
 - **Añadir Icono** > **Selección de la biblioteca de imágenes predictable** > seleccione **Regresar**
4. Cuando termine, toque la palomita azul en la esquina derecha de arriba de la pantalla.

Guardar una frase

1. **Frases** > seleccione la categoría deseada > seleccione **Editar**.
2. Seleccione **Añadir Frase**.
3. En la línea de *Frases Habladas*: escriba el mensaje que se hablara cuando la frase es seleccionada.
4. En la línea de *Frase Mostrada*: escriba el texto (etiqueta) que mostrar en la pantalla de categorías de frases. Añadir un icono si desea.
5. Cuando termine, seleccione la palomita azul para guardar.

Nota: Si estas instrucciones no combinan con su archivo de vocabulario actual, por favor contacte Apoyo Técnico para asistencia *Algunas teclas de Uso de funciones están iniciadas para el -PLUS modelo solamente. Contáctenos por detalles.

Rápidamente-guardar una frase de la página de inicio

1. Escriba la frase utilizando el teclado en la pagina de inicio > seleccione **Frases**.
2. Seleccione categorías de frases para añadir frase > seleccione **Editar**. Las frases automáticamente aparecerán en *Frase Hablada* > Editar *la Frase Mostrada* e icono cuando sea necesario.
3. Cuando termine, seleccione la palomita azul para guardar.

Editar frases guardadas

1. **Frases** > seleccione una categoría > seleccione **Editar**. Seleccione frases para editar.
2. Siga pasos 3-6 de **Guardar una Frase** para terminar editando.

Cambiar pronunciación de una palabra

1. Seleccione **Opciones** > seleccione **Habla** del menú a la izquierda.
2. Deslice hacia debajo de opciones del Habla > Seleccione **Personalizar Pronunciación** > Seleccione **Añadir Nuevo**.
3. En la línea de *Personalizar Pronunciación*: escriba la palabra deletreada correcta (eje. fajita).
4. En la línea de *Pronunciación Fonética*: Escriba la palabra como le gustaría que sea pronunciada (eje. faheeta).
5. Presione *Probar Sonido* debajo para oír como se pronunciará la palabra.
6. Cuando termine, seleccione la palomita azul > Seleccione **Regresar**.

Acceso Guiado

Todos los dispositivos dedicados vienen con Acceso Guiado iniciado.

1. Abra el menú de *Acceso Guiado* con presionar tres veces rápidamente el boto de Inicio. Si su dispositivo no tiene un botón de inicio, use el botón de Encender/prender.
2. Entre el código: código predeterminado contiene **1s (1111 o 111111)**.
3. Para continuar con *Acceso Guiado*: presione **Reanudar** (arriba a la derecha).
4. Para apagar *Acceso Guiado*: presione **Finalizar** (arriba a la izquierda).
5. *Bloque del Menú* (desactivar/restringir uso de botones/categorías específicas): Abra el menú de Acceso Guiado > use el dedo para rodear un circulo alrededor del área/botones de la pantalla que quiere desactivar/restringir > **Reanudar**.

¿Necesita ayuda?

877.392.2299 Opción 3

support@talktometechnologies.com

talktometechnologies.com



We bring speech to life™

Equipo, Botones, y Características



1 Encender

Presione y sostenga este botón (también un botón de volumen en algunos modelos) para encender o apagar el dispositivo.

Nota: Presione este botón una vez mientras que el wego A este encendido para ponerlo en modo de "No molestar". Esta característica conserva la vida de la batería en el wego A cuando no se está usando.

2 Volumen


Use estos botones para aumenta o reducir el nivel del volumen.

3 Inicio

Toque y regrese a la pantalla de inicio. Si su modelo del wego A no tiene un botón de Inicio, deslice hacia arriba de la parte de debajo de la pantalla.

4 Carga al wego A

Cargue el dispositivo y la bocina TTMT (SPKR) por la noche o cuando no esté en uso. Por favor solo utilice el cargador aprobado por TTMT con su dispositivo.

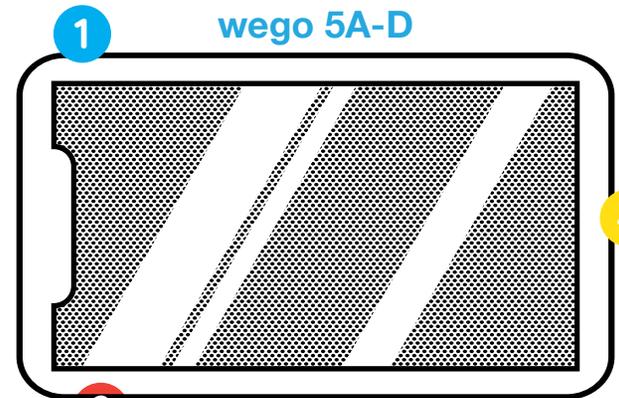


wego 5A-D

4

Hale la tapa hacia abajo para exponer el porte para cargar el dispositivo.

2
wego 7A-D, 10A-D & 13A-D

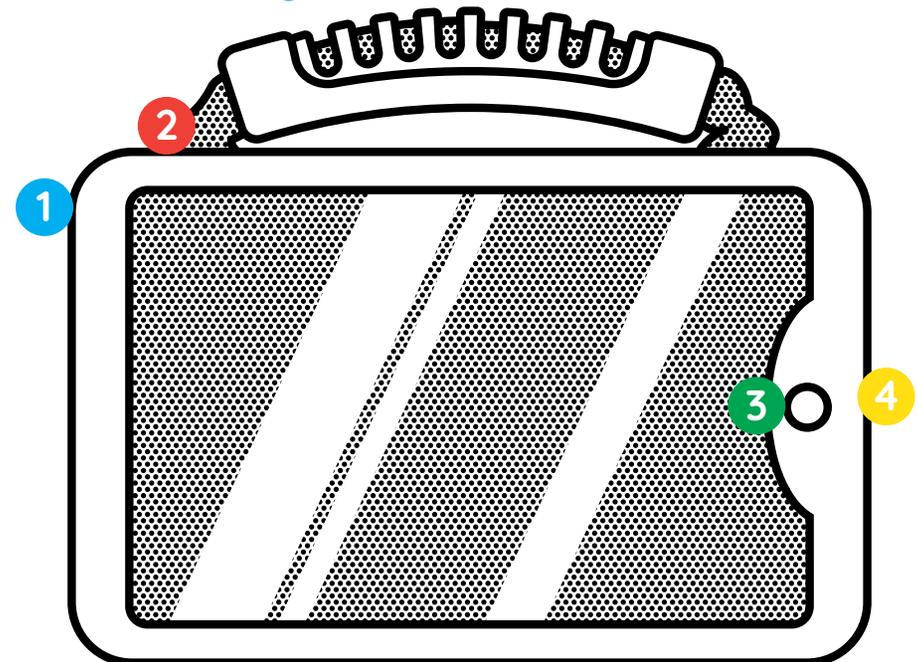

Si su modelo de wego A no tiene un boto de inicio, deslice hacia arriba de debajo de la pantalla.