


Editar un Mensaje de Botón e Imagen

1. **Menú > Editar Página** > Seleccionar botón para editar > **Editar este botón**.
2. *Etiqueta del Botón:* En la casilla de texto debajo de Etiqueta del botón, escriba el texto a mostrar en el botón > **Listo** (teclado).
3. *Mensaje del Botón:* En el texto debajo del *Mensaje del Botón*, escriba el mensaje del botón que debe decir cuando se presiona > **Listo** (teclado).
4. Seleccione, importar o tome una nueva imagen de botón:
Elija un Símbolo: **Seleccionar Imagen** > toque la lupa  > tipo de letra a buscar > **Buscar** > Seleccionar símbolo > **Guardar** > **Listo**.
Importar foto: **Importar imagen** > **Biblioteca de imágenes** > Seleccionar imagen de la biblioteca de fotos > **Usar** > **Guardar** > **Listo**.
Tomar una foto: **Importar imagen** > **Cámara** > Presione el círculo blanco en la pantalla para tomar una foto > **Usar foto** > **Guardar** > **Listo**.

Agregar una Acción de Botón > NAVEGAR

1. **Menú > Editar página** > Tocar botón para editar > **Editar este botón**.
2. Desplácese hacia abajo a *Acciones del Botón* > **Agregar** > **Navegar**.
3. Seleccione la página para navegar > Seleccione Sin animación o tipo de animación > **Guardar** > **Listo**.

Crear una Nueva Página a Partir de una Plantilla

1. **Menú > Editar página**.
2. **Menú > Cargar otra página** > seleccionar .plantilla > **Listo**.
3. **Menú > Import/Copy Pages** > **Duplicate this Page**.
4. **Menú > Cargar otra página** > seleccionar .plantilla (Copiar) > **Listo**.
5. **Menú > Editar Diseño de Página** > Debajo del *Nombre de Página*, escriba el nuevo nombre de página > **Guardar** > **Listo**.
6. Conecte la nueva página a un botón siguiendo *Agregar un Botón de Acción* > *NAVEGAR* pasos 1-3.

Botones Copiar y Pegar

1. **Menú > Editar página** > Seleccionar botón para copiar > **Botón Copiar**.
2. Tocar la ubicación para el botón pegar > **Botón Pegar**.
3. Para copiar el estilo del botón solamente: Siga las instrucciones anteriores pero seleccione **Pegar Estilo del Botón** en el paso 2.

Cambiar la Pronunciación de una Palabra

1. **Menú > Editar Pronunciaciones**.
2. Toque el signo **+**.
3. En la casilla de texto de la *Palabra*, escriba la palabra que desea editar (por ejemplo, fajita).
4. En la casilla de texto *Pronunciar Como*, escriba la pronunciación correcta de la palabra (por ejemplo, Fahheeta).
5. Seleccione **Pronunciar** para escuchar la pronunciación.
6. **Guardar** > **Listo**.

Modo Ocultar

1. **Menú > Editar página** > **Menú > Modo Ocultar**. La barra de tareas se pondrá verde.
2. Seleccionar botones para ocultar > **Listo**.
3. Para mostrar los botones: **Menú > Editar página** > **Menú > Modo Ocultar** > Seleccionar botones a mostrar > **Listo**.

Acceso Guiado

Todos los dispositivos especializados vienen con *Acceso Guiado* habilitado.

1. Para desactivar el Acceso Guiado: abra el Acceso Guiado haciendo triple clic rápidamente en el botón de inicio.
2. Ingrese la contraseña: la contraseña predeterminada es todo 1s (1111 ó 111111).
3. Para continuar con el Acceso guiado: presione **Reanudar** (arriba a la derecha).
4. Para finalizar el Acceso Guiado: presione **Finalizar** (arriba a la izquierda).
5. *Bloquear Menú* (restringir el uso de la barra de menú o botones/páginas específicos): Abrir *Acceso Guiado* > Usar el dedo para dibujar un círculo alrededor del área/botones a restringir.

Botones y Características del Hardware

1 Encendido

Mantenga presionado este botón para encender o apagar el dispositivo.
Nota: Presione este botón una vez mientras el wego™A está activado para ponerlo en el modo "Suspensión". Esta característica conservará la vida útil de la batería cuando el wego™A no esté en uso.

2 Volumen


Presione la parte izquierda del control de volumen para aumentar el volumen del altavoz o presione el botón derecho para alternar.

3 Inicio

Toque para regresar a la pantalla de inicio.

4 Cargando la wego™A

Tire hacia abajo la pestaña para revelar el puerto de carga del dispositivo.
Cargue el dispositivo y el altavoz por la noche o cuando no esté en uso.

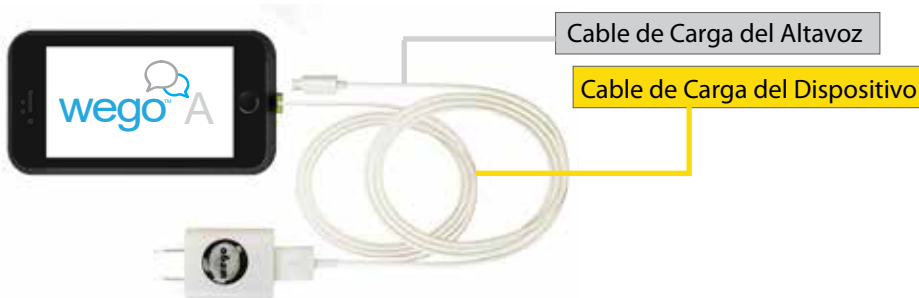

1 wego 5A



2 wego 7A, 10A & 13A

