




We bring speech to life™

# wego™ A-D Referencia Rápida

## TouchChat



### Editar Mensaje e Imagen del Botón

1. **Menú > Editar Página >** seleccione botón que editar > **Editado este Botón.**
2. *Etiqueta de Botón:* En la caja de texto debajo del botón de etiqueta, escriba el texto que se va a mostrar en el botón > **Guardar** (teclado).
3. *Mensaje del Botón:* En el texto debajo del Botón de Mensaje, escriba el mensaje. El Botón debe hablar cuando sea presionado > **Guardar** (teclado).
4. Seleccionar, importar, o tomar una imagen nueva para el botón:  
*Seleccionar un símbolo:* **Seleccionar Imagen** > toque la lupa  > escriba la palabra que buscar > **Buscar** > seleccione símbolo > **Guardar.**  
*Importar foto:* **Importar Imagen** > **Biblioteca de Imágenes** > seleccione retrato de la librería de fotos > **Usar** > **Guardar.**  
*Tomar una foto:* **Importar Imagen** > **Camera** > presione el círculo blanco en la pantalla para tomar una foto > **Usar foto** > **Guardar.**

### Añadir funciones al botón > NAVEGAR

1. **Menú > Editar Página >** toque botón que editar > **Editado este botón.**
2. Desplace hacia abajo a **Funciones del botón > Añadir > Navegar.**
3. Seleccione página a cual navegar > seleccione **Ninguna animación** o tipo de animación > **Guardar.**

### Crear una Página Nueva de una Plantilla

1. **Menú > Editar Página.**
2. **Menú > Añadir página nueva** > seleccione “.plantilla” > **Guardar.**
3. **Menú > Importar/Copiar Páginas > Duplicar esta página.**
4. **Menú > Añadir página nueva** > seleccione “.plantilla (Copia)”.
5. **Menú > Editar estilo de página** > bajo Nombre de Página, escriba el nombre nuevo de la página > **Guardar.**
6. Conectar la página nueva a un botón con seguir **Añadir funciones al botón > NAVEGAR Pasos 1–3.**

### Copiar y Pegar Botones

1. **Menú > Editar Página** > seleccione botón que copiar > **Copiar Botón.**
2. Toque el lugar donde pegar el botón > **Pegar Botón.**
3. Para solo copiar el estilo del botón, siga direcciones de arriba, pero seleccione **Pegar estilo solamente** en paso 2.

### Cambiar la Pronunciación de una Palabra

1. **Menú > Editar Pronunciaciones.**
2. Toque el icono **+**.
3. En la caja de texto, escriba la palabra que le gustaría editar (ej. fajita).
4. En la caja de Pronunciar como, escriba la pronunciación apropiada para la palabra (ej. fuhheeta).
5. Seleccione **Pronunciar** para escuchar la pronunciación.
6. **Guardar.**

### Modo de Esconder

1. **Menú > Editar Página > Menú > Modo de Esconder.** La barra de herramientas se convierte en color verde.
2. Seleccione botones que esconder > **Ok.**
3. Para des esconder botones: **Menú > Editar Página > Menú > Modo de Esconder** > seleccione botones para des esconder > **Ok.**

### Acceso Guiado

Todos los dispositivos dedicados vienen con *Acceso Guiado* iniciado.

1. Para apagar *Acceso Guiado*: habrá *Acceso Guiado* con presionar tres veces rápidamente el botón de Inicio en frente de su dispositivo.  
*Nota: si su modelo no tiene un botón de Inicio, utilice el botón de encender/prender conforme esta mostrado al otro lado.*
2. Entre el código: código predeterminado contiene 1s (1111 o 111111).
3. Seleccione el camino y lo va guiar por el plan de motor al botón seleccionado.
4. Para terminar *Acceso Guiado*: presiona **Finalizar** (arriba a la izquierda).
5. *Bloqueo del Menú* (desactivar/restringir uso de la barra de Menú o botones/páginas específicas): Habrá *Acceso Guiado* > use el dedo para dibujar un círculo alrededor del área/botones que desactivar/restringir.

*Nota: Si estas instrucciones no combinan con su archivo de vocabulario actual, por favor contacte Apoyo Técnico para asistencia.*

¿Necesita ayuda?



877.392.2299 Opción 3



support@talktometechnologies.com



talktometechnologies.com

Updated June 2020

# Equipo, Botones y Características

## 1 Encender

Presione y sostenga este botón (también un botón de volumen en algunos modelos) para encender o apagar el dispositivo.

*Nota: Presione este botón una vez mientras que el wego A está encendido para ponerlo en modo de "No molestar". Esta característica conserva la vida de la batería en el wego A cuando no se está usando.*

## 2 Volumen


Presione botones para aumentar o reducir volumen.

## 3 Inicio

Toque para regresar a la pantalla de inicio. Si su modelo del wego A no tiene un botón de Inicio, deslice hacia arriba de la parte de debajo de la pantalla.

## 4 Carga del wego A

Cargar del dispositivo y la bocina TTMT (SPKR) por la noche o cuando no esté en uso. Por favor solo utilice el cargador de TTMT-aprobado para su dispositivo.

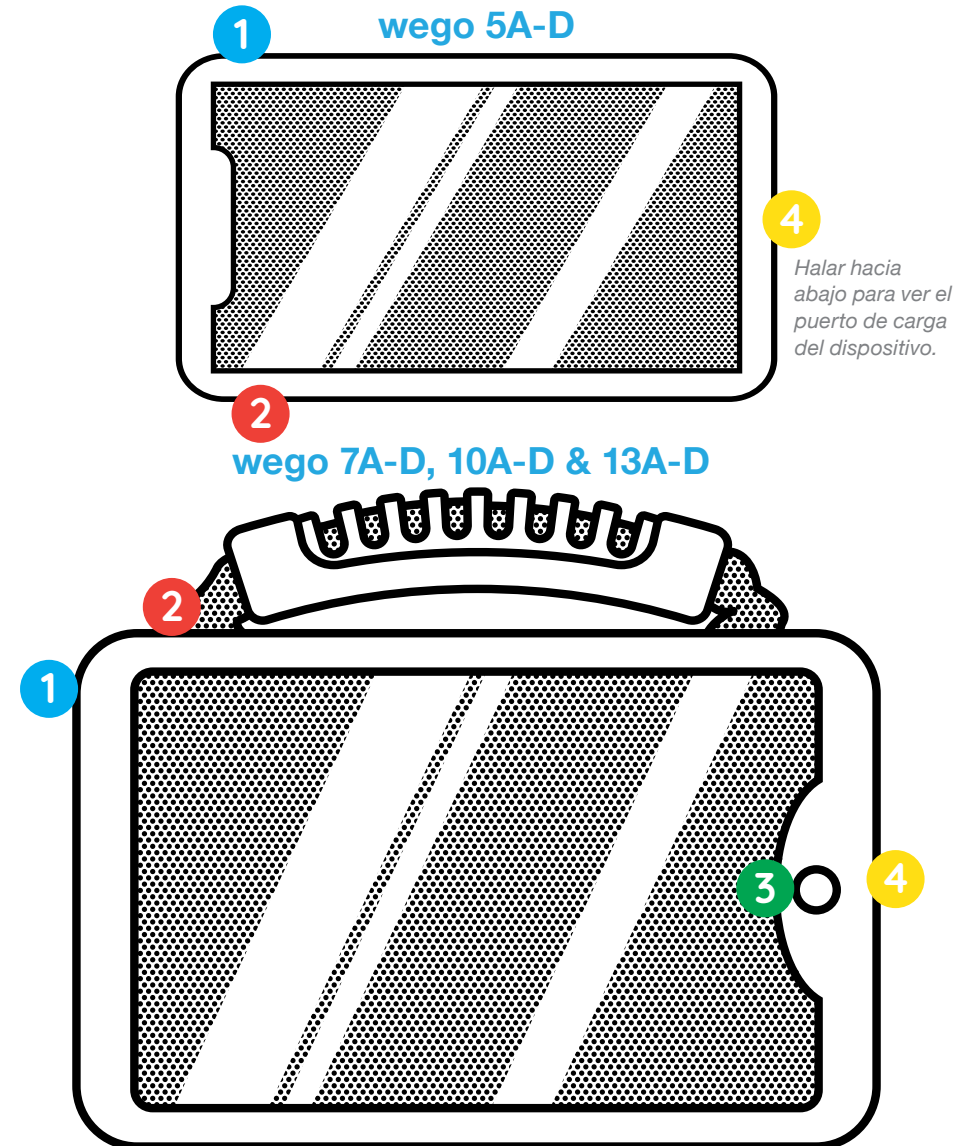

Halar hacia abajo para ver el puerto de carga del dispositivo.

*Si su modelo del wego A no tiene un botón de Inicio, desplace hacia arriba de la parte de debajo de la pantalla.*