



Wego 13A



Talk Pad Wego 10




Talk Pad Wego 8



Wego 5A



Editar Mensaje e Imagen del Botón

1. **Menú > Editar Página >** seleccione botón que editar > **Editar este Botón.**
2. *Etiqueta de Botón:* En la caja de texto debajo del botón de etiqueta, escriba el texto que se va mostrar en el botón > **Guardar** (teclado).
3. *Mensaje del Botón:* En el texto debajo del Botón de Mensaje, escriba el mensaje. El Botón debe hablar cuando sea presionado > **Guardar** (teclado).
4. Seleccionar, importar, o tomar una imagen nueva para el botón:
Seleccionar un símbolo: Seleccionar Imagen > toque la lupa  > escriba la palabra que buscar > **Buscar** > seleccione símbolo > **Guardar.**
Importar foto: **Importar Imagen > Biblioteca de Imágenes** > selecciones retrato de la librería de fotos > **Usar > Guardar.**
Tomar una foto: **Importar Imagen > Camera** > presione el círculo blanco en la pantalla para tomar una foto > Usar foto > Guardar.

Añadir funciones al botón > NAVEGAR

1. **Menú > Editar Página >** toque botón que editar > **Editar este botón.**
2. Desplace hacia abajo a *Funciones del botón* > **Añadir > Navegar.**
3. Seleccione página a cual navegar > seleccione **Ninguna animación** o tipo de animación > **Guardar.**

Crear una Pagina Nueva de una Plantilla

1. **Menú > Editar Página.**
2. **Menú > Añadir página nueva** > seleccione “.plantilla” > **Guardar.**
3. **Menú > Importar/Copiar Páginas > Duplicar esta página.**
4. **Menú > Añadir página nueva** > seleccione “.plantilla (Copia)”.
5. **Menú > Editar estilo de página** > bajo Nombre de Página, escriba el nombre nuevo de la página > **Guardar.**
6. Conectar la página nueva a un botón con seguir *Añadir funciones al botón > NAVEGAR* Pasos 1–3.

Copiar y Pegar Botones

1. **Menú > Editar Página** > seleccione botón que copiar > **Copiar Botón.**
2. Toque el lugar donde pegar el botón > **Pegar Botón.**
3. Para solo copiar el estilo del botón, siga direcciones de arriba, pero seleccione **Pegar estilo solamente** en paso 2.

4. Para copiar un botón y tener todos sus cambios reflectados sobre todas las paginas, siga las instrucciones de arriba, pero seleccione **Use el Mismo Botón** en paso 2. Use esto solo para botones que usted quiere que sean exactamente igual sobre el set de las páginas.

Cambiar la Pronunciación de una Palabra

1. **Menú > Editar Pronunciaciones.**
2. Toque el icono **+**.
3. En la caja de texto, escriba la palabra que le gustaría editar (eje. fajita).
4. En la caja de Pronunciar como, escriba la pronunciación apropiada para la palabra (eje. fuhheeta).
5. Seleccione **Pronunciar** para escuchar la pronunciación.
6. **Guardar.**

Modo de Esconder

1. **Menú > Editar Página > Menú > Modo de Esconder.** La barra de herramientas se convierte en color verde.
2. Seleccione botones que esconder > **Ok.**
3. Para des esconder botones: **Menú > Editar Página > Menú > Modo de Esconder** > seleccione botones para des esconder > **Ok.**

Acceso Guiado

Todos los dispositivos dedicados vienen con Acceso Guiado iniciado.

1. Para apagar *Acceso Guiado:* habrá Acceso Guiado con presionar tres veces rápidamente el boto de Inicio en frente de su dispositivo.

Nota: si su modelo no tiene un botón de Inicio, utilice el botón de encender/prender conforme esta mostrado al otro lado.

2. Entre el código: código predeterminado contiene 1s (1111 o 111111).
3. Seleccione el camino y lo va guiar por el plan de motor al botón seleccionado.
4. Para terminar Acceso Guiado: presiona **Finalizar** (arriba a la izquierda).
5. Bloqueo del Menú (desactivar/restringir uso de la barra de Menú o botones/páginas específicas): Habrá *Acceso Guiado* > use el dedo para dibujar un círculo alrededor del área/botones que desactivar/restringir.



Nota: Si estas instrucciones no combinan con su archivo de vocabulario actual, por favor contacte Apoyo Técnico para asistencia.

