


U-CUT®

LANGE PLASTIC SCHAAR MET STALEN BLAD CISEAUX LONGS EN PLASTIQUE AVEC LAME EN ACIER

Ref: S770114

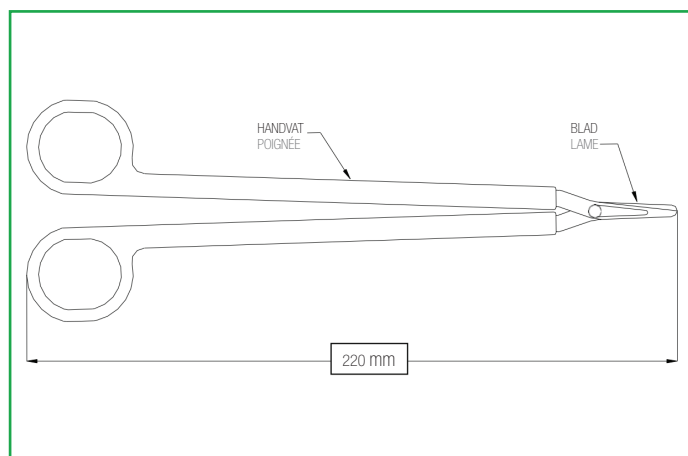

Gebruiksaanwijzing

Houd de schaar vast en gebruik hem voor het verwijderen van hechtingen, algemene medische ingrepen en waar het nodig is om touwtjes, gaasjes en dergelijke door te knippen.

De roestvrijstalen bladen met nauwkeurige slijping maken een precieze en veilige snede mogelijk.

Waarschuwing: Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Gebruik niet opnieuw. Gebruik enkel als de verpakking in perfecte staat is.

Onmiddellijk na het openen van de zak gebruiken. Gooi het apparaat na gebruik weg volgens de geldende voorschriften. Het apparaat moet worden gebruikt door gespecialiseerd medisch personeel.

Mode d'emploi

Tenez le ciseau et utilisez-le pour enlever les sutures, les procédures médicales générales et lorsqu'il est nécessaire de couper des ficelles, des gazes et autres.

Les lames en acier inoxydable avec un affûtage précis permettent une coupe précise et sûre.

Avvertissements: Lire le mode d'emploi avant l'utilisation. Ne pas réutiliser. Utilisez seulement si l'emballage est en parfait état. Utiliser immédiatement après l'ouverture du sachet. Après l'utilisation détruire le dispositif selon les règles en vigueur. Le dispositif doit être utilisé par personnel médical spécialisé.