


Correa de seguridad para la mordaza

Gancho de sujeción para la mordaza

Correa con cierre de velcro

Mordaza

Hebilla con guía simple

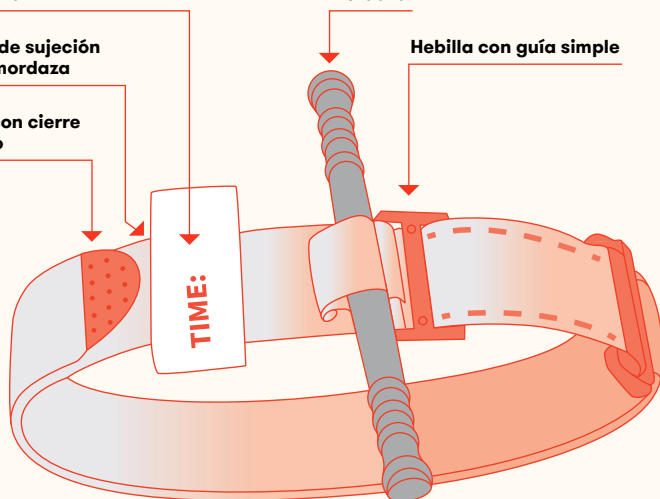

# TORNIQUETE

SKU / REF: PH-TQ-1

purahelp 



REF 318

LOT GK

000000

000000



FR  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE  
À SÉPARER ET À DÉPOSER  
DANS LE BAC DE TRI



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune

## SE UTILIZA PARA DETENER HEMORRAGIAS ARTERIALES MASIVAS EN LAS EXTREMIDADES (BRAZOS, PIERNAS)

- El diseño del torniquete permite utilizarlo con una sola mano para que el herido pueda aplicárselo a sí mismo sin ayuda de otras personas.
- Una hemorragia externa es grave si puede verse un chorro de sangre o la ropa se empapa rápidamente de sangre. Este tipo de hemorragia debe detenerse inmediatamente sin esperar a recibir ayuda médica, ya que una persona puede desangrarse por grandes vasos sanguíneos en un minuto y medio.

**Si hay alguien con usted, señale a esa persona y dígame: "Llame al 112". Si no hay nadie cerca, llame al 112 después de haber detenido la hemorragia.**




GAUKE Healthcare Co., Ltd., No. 82, TuanFeng Avenue, TuanFeng Town, TuanFeng, Huang Gang City, Hubei Province, 438800, P.R.China

[www.purahelp.de](http://www.purahelp.de)

[support@purahelp.de](mailto:support@purahelp.de)

EC REP MedPath Ltd., Mies-van-der-Rohe Straße 8, 80807 Munich, Germany. Issue: A/0

Purawerk GmbH, Floßhafenstr. 30, 97199 Ochsenfurt, Germany

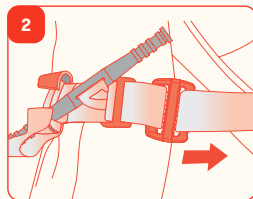
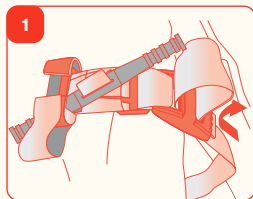
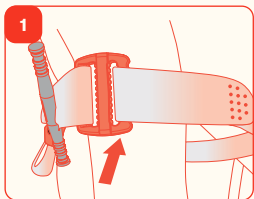


### APLICACIÓN CON UNA MANO ○ APLICACIÓN CON DOS MANOS

Pase la extremidad lesionada por el lazo de la correa y coloque el torniquete a 5-8 cm por encima del lugar de la hemorragia (directamente entre la herida y el corazón).

Pase la correa alrededor de la extremidad y deslice el extremo por las muescas de la hebilla. Coloque el torniquete a 5-8 cm por encima del lugar de la herida (directamente entre la herida y el corazón).

La correa debe pasar siempre por debajo de la palanca y los dientes deslizantes de la hebilla. Tire de la correa y apriétela con velcro, alrededor de todo el miembro, pero no sobre el soporte de la mordaza. La correa debe estar tan apretada que no quepan 3 dedos debajo de ella. Si este es el caso, apriétela de nuevo.

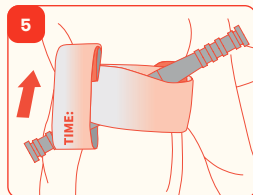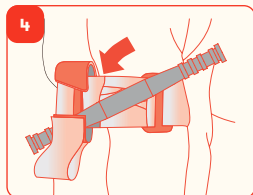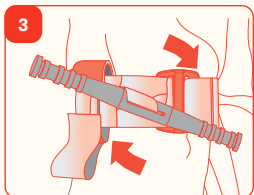

Gire la mordaza hasta que se detenga la hemorragia. Compruebe también el pulso distal bajo el torniquete cerca de la herida. Debería desaparecer.

Asegure la mordaza con el gancho de la pinza para mantenerla en su sitio. Compruebe la hemorragia y el pulso distal. Si la hemorragia continúa o el pulso distal sigue presente bajo el torniquete, apriete la mordaza una vez más o, si fuera necesario, aplique un segundo torniquete sobre el primero.

Vuelva a valorar la situación.

Pase la correa sobre el gancho de sujeción y la varilla. Asegure la varilla y la correa con la correa TIME. Anote el tiempo de aplicación con el bolígrafo en el extremo superior. Considere la posibilidad de apretar aún más con cinta médica. Asegúrese de que el torniquete sea visible para el personal médico.

# INSTRUCCIONES PARA APLICAR UN TORNIQUETE

- Coloque el torniquete a 5 cm por encima del punto de sangrado (entre la herida y el corazón), pero no sobre la articulación. Pase la extremidad lesionada a través del bucle de la correa.
- Si el lugar de sangrado no está claro o no hay tiempo para examinar la lesión debido a un entorno inseguro, aplique el torniquete lo más alto posible en la extremidad sin quitar la ropa.
- Al aplicar sobre la ropa, asegúrese de que no haya objetos innecesarios entre el torniquete y la extremidad, como llaves, teléfonos, encendedores u otros objetos que puedan obstaculizar el flujo sanguíneo adecuado de la extremidad.
- Apriete la abrazadera completamente después de aplicar el torniquete, o hasta que cese el sangrado y no se sienta más pulso distal. Asegure la abrazadera en su lugar con el gancho de sujeción y fjela.
- Si el torniquete no se aprieta lo suficiente y no detiene el flujo sanguíneo arterial, el sangrado puede aumentar.
- Si no se puede detener el sangrado con un torniquete, aplique un segundo torniquete encima del primero (entre la herida y el corazón).
- Después de aplicar el torniquete, registre el momento de la aplicación en la correa en el lugar designado (TIME) y anótelo en los documentos adjuntos. El tiempo durante el cual se puede interrumpir el flujo sanguíneo depende de muchos factores (fisiológicos, temperatura ambiental, fuerza o área de compresión, etc.), pero la "línea roja" convencional que no debe superarse es de 2 horas.
- El torniquete solo debe retirarse cuando haya ayuda médica disponible.
- Está prohibido aplicar el torniquete con vendajes u otros dispositivos.



**¡Atención! Aflojar o quitar el torniquete sin supervisión médica es peligroso para la vida del paciente.**

### IMPORTANTE:

Llame al servicio de emergencia según sea necesario. Monitoree los signos vitales: consciencia (si la persona responde), respiración y flujo sanguíneo, hasta que llegue el personal médico. Si la víctima pierde el conocimiento, abra las vías respiratorias y compruebe la respiración. Si la persona no respira, comience la reanimación cardiopulmonar (30 compresiones torácicas y 2 respiraciones).