

ORIGINAL

ICONIC

Material para aparelhos Original



Instruções de utilização

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA

- O Iconic Original é utilizado na produção de aparelhos termoformados removíveis para fabricar aparelhos intraorais, como aparelhos removíveis, alinhadores dentários, aparelhos de correção, férulas, aparelhos antirronco, placas para bruxismo e goteiras. O material Iconic Original é especialmente adequado para utilização com placas para bruxismo.

INDICAÇÕES

- Os aparelhos dentários elaborados com os aparelhos termoformados Iconic são indicados para utilização em doentes que necessitem de tratamento ortodôntico.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Os materiais termoformados Iconic são caracterizados pelo seu desempenho em matéria de resistência, durabilidade, clareza, resistência à produção de fissuras/quebra, facilidade de remoção do modelo e facilidade de polimento. Os benefícios clínicos dos aparelhos dentários elaborados a partir do material Iconic são a correção da má oclusão e uma melhoria geral da saúde dos dentes.

CONTRAINDICAÇÕES

- Os doentes com histórico de reações alérgicas a plásticos não devem utilizar este produto.

AVISOS

- O Iconic Original é moldado a temperaturas extremamente elevadas, pelo que deve ter cuidado ao efetuar a termoformação.
- Nunca deixe a máquina sem supervisão durante a termoformação.
- Aquecer excessivamente o Iconic Original poderá causar fissuras e fraturas no material, bem como um tempo reduzido de utilização pelo doente.
- Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do estado membro em que o usuário e/ou paciente está estabelecido

PRECAUÇÕES

- O Iconic Original deve ser armazenado a uma temperatura entre 5 °C e 25 °C, num local seco.
- Mantenha-o afastado da luz solar direta. Se estiver exposto durante períodos de tempo prolongados, o material poderá tornar-se propenso a degradação e descoloração.
- O Iconic Original só deverá ser utilizado conforme descrito nas instruções de utilização. Qualquer utilização do Iconic Original inconsistente com estas indicações de utilização é efetuada ao critério e à exclusiva responsabilidade do profissional.
- Os doentes com histórico de reações alérgicas a plásticos não devem utilizar este produto.
- O Iconic Original não contém bisfenol A (BPA).
- O material para aparelhos Iconic Alpha é recomendado para doentes com bruxismo.

REAÇÕES ADVERSAS

- Reações alérgicas.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1) O Iconic Original é fornecido com uma **película protetora resistente ao calor** em ambas as superfícies do vazio. Para melhores resultados, retire a película na superfície de contacto com calor do vazio, deixando a película na superfície de contacto com o modelo do vazio.

Tal evitará a necessidade de isolar o modelo, melhorando a transparência. Também irá criar um microespaço no aparelho termoforado, evitando a necessidade de tapar pequenos rebaixos.

- 2) O modelo deve ser cortado a uma profundidade de 20 mm (3/4") de altura.
- 3) Retire o palato dos modelos de arco completo.
- 4) Molde por vácuo/pressão através de uma máquina normalmente utilizada para termoformação.
- 5) Garanta o arrefecimento do Iconic Original antes de remover o material do modelo. Para melhores resultados, utilize o Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
- 6) Retire a película resistente ao calor do Iconic Original.
- 7) Corte e finalize o aparelho conforme necessário. Para melhores resultados, utilize o disco de polimento Iconic 4S04-1381.

O tempo de aquecimento poderá variar consoante a máquina. Se o Iconic Original não se adaptar ao modelo, aumente o tempo de aquecimento até uma adaptação completa. Se o Iconic Original se "dobrar" durante a termoformação, reduza o tempo de aquecimento até que tal não se verifique.

AO AQUECER O ICONIC ORIGINAL, NÃO DEIXE CEDER MAIS DE 20 MM.

Espessura	Tempo de aquecimento*	Código Biostar*	Drufomat*
0,75 mm (0,030")	25 segundos	113	55 segundos
1,0 mm (0,040")	35 segundos	133	65 segundos
1,5 mm (0,060")	45 segundos	153	80 segundos

*Após pré-aquecer a máquina

ELIMINAÇÃO SEGURA

- Os aparelhos dentários usados podem ser considerados um risco biológico. Deverá seguir as leis, diretivas, normas e diretrizes específicas do país em questão para a eliminação de dispositivos usados.

INDICAÇÕES DE CUIDADOS A TER COM O SEU APARELHO

- Depois de escovar os dentes, escove a parte superior e a parte inferior do aparelho com uma escova de dentes macia.
- Não escove o aparelho com pasta de dentes, pois tal irá reduzir significativamente a sua duração.
- Utilize água fria para lavar o aparelho. O aparelho também pode ser limpo com Retainer Brite ou uma solução de limpeza semelhante.
- A água quente irá deformar o aparelho.
- Lave bem antes e depois de utilizar e seque completamente.
- Manuseie o aparelho com cuidado e guarde-o numa caixa para aparelhos quando não o estiver a usar na boca.
- Ao retirar o aparelho, aplique uma pressão uniforme em todos os lados do aparelho – são recomendados acessórios para esta finalidade.
- Se o aparelho ficar demasiado apertado, não o force e contacte o seu Ortodontista ou Dentista.
- Não coma nem beba enquanto utilizar o aparelho, uma vez que os ácidos dos alimentos e das bebidas podem reduzir consideravelmente a sua duração.



Apenas para
uma única
utilização



Armazenar
num local
fresco e seco




Instruções
incluídas



EMERGO EUROPE
Westerbossteedijk 40
6627 AT, Arnhem
The Netherlands

db 
lab supplies

 **DB Lab Supplies**

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Reino Unido

T: +44 (0) 1535 656 999 | F: +44 (0) 1535 656 969 E: sales@dlablabb Supplies.co.uk

Web: www.dlablabb Supplies.co.uk

IFU008 – Edição 2 – 26/06/2023