



MSi

Mandibular Snoring Inhibitor

ANSAITSET HYVÄT YÖUNET

Toimittaja:



MSi

Mandibular Snoring Inhibitor

Ansaitset hyvät yöunet...

Lääkäri on valinnut MSi-kuorsauskojeen sinulle, koska se on korkealaatuinen ja mukava kuorsauskoje, joka on suunniteltu parantamaan unen laatua.

MSi-kuorsauskojeen sovittaminen

- Aseta kojeen yläosa (jossa on koukku) suuhun ja työnnä paikalleen niin, että se peittää ylähampaat.
- Aseta kojeen alaosa suuhun ja paina paikalleen niin, että se peittää alahampaat.
- Sijoitaaksesi koukun oikein siirrä alaleukaa eteenpäin, kunnes koukku kytkeytyy.

Poistaminen:


- Työnnä alaleukaa eteenpäin irrottaaksesi koukun.
- Työnnä alemmaa kiskoa reunasta ylöspäin ja ylempää kiskoa alaspäin irrottaaksesi ja poistaaksesi kojeen.

Käytä MSi-kojetta ensimmäisen yhden tai kahden viikon ajan ilman minkäänlaista eteenpäin säätämistä, kunnes olet tottunut kojeeseen ja tunnet olosi mukavaksi sen kanssa.

1. Kun olet tottunut laitteeseen, suositellaan MSi-kojeen asteittaista säätämistä (yksi ruuvin kierros = siirretään eteenpäin 0,5 mm viikossa), kunnes optimaalinen asento on löydetty. Mahdollisimman pitkälle eteenpäin asetettu koje ei välttämättä johda parempiin tuloksiin. Tavoitteena on löytää optimaalinen asento, jossa kuorsaus lakkaa tai vähenee.

2. Kierrä MSi-säätöavainta myötäpäivään siirtääksesi eteenpäin koukku eteenpäin, kuten lääkärisi on neuvonut.

3. MSi-kuorsauskojeen säätäminen on helppoa siihen erityisesti suunnitellulla MSi-säätöavaimella. MSi-säätöavaimen varressa oleva kolo auttaa huomaamaan, milloin täysi 360° kierros on käännetty. MSi-säätöavain voidaan aina asettaa niin, että kolo on näkyvässä.

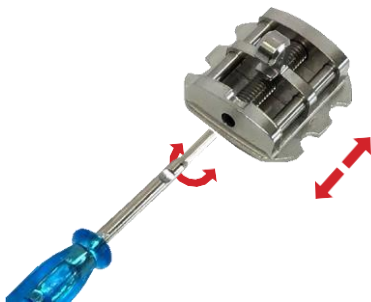

4. MSi-kojeen säätäminen on tehtävä suun ulkopuolella sen varmistamiseksi, että MSi-säätöavain on täysin paikallaan ja että koukun kierrettä ei ole säädetty koko sen pituudelle. Varoitus! Jos MSi-säätöavainta käännetään, kun koko laitteen pituus on jo käytössä, ja tunnet vastusta, voit vahingoittaa mekanisme, mikä voi vaatia kalliin korjauksen.

5. Jos lisäsäätöä ei voida tehdä, valmistaja voi muokata kojetta.

Kojeen puhdistaminen

MSi-kuorsauskoje on puhdistettava päivittäin pehmeällä hammasharjalla ja tavallisella käsisaispuulla sekä huuhdeltava puhtaaksi. Suosittelemme, että se desinfioidaan vähintään kerran viikossa myös antibakteerisilla nitrititableteilla mikro-organismeilta, plakilta ja värimuutoksilta suojaamiseksi.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kun totuttelet laitteeseen, saatat kokea joitain haittavaikutuksia. Nämä ovat normaaleja ja väliaikaisia, mutta ota kuitenkin yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on huolenaiheita.

Yleiset haittavaikutukset

- epämiellyttävä tunne / särky hampaissa
- epämukava tunne leuassa alaleuan eteenpäin siirtämisen jälkeen
- liiallinen syljeneritys ja/tai suun kuivuminen
- tilapäinen muutos purennassa aamun ensimmäisen tunnin aikana.

Allergiat

MSi-kuorsauskoje sisältää nikkelikromia.



MSi-koje on yksilöllisesti valmistettu laite.

IFU028 – Julkaisu 4 – 19.1.24