

ALIGN



ICONIC
ALIGN



Brugsanvisning

ICONIC ALIGN

TILSIGTET ANVENDELSE

• Iconic Align bruges til fremstilling af aftagelige termoformede enheder til fremstilling af intraorale enheder, såsom alignere, skinner, snorkeapparater, bøjler og bideskinner. Iconic Aligns materialegenskaber er særligt velegnede til brug i ortodontisk aligner-behandling.

INDIKATION

• De dentale enheder, der er dannet af Iconic-termoformningsmaterialer, er indiceret til brug hos patienter, der har behov for ortodontisk behandling.

KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNE OG KLINISKE FORDELE

• Karakteristika for ydeevne for Iconic-termoformningsmaterialerne omfatter styrke, holdbarhed, klarhed, modstandsdygtig over for frakturer, lette at fjerne fra modellen og lette at trimme. De kliniske fordele ved de dentale enheder, der er dannet af Iconic-materialet, er korrektion af malocclusion og en generel forbedring af tandsundheden.

KONTRAIKATIONER

• Patienter med en historik med allergiske reaktioner over for plastik bør ikke bruge dette produkt.

ADVARSLER

- Iconic Align er formet ved ekstremt høje temperaturer. Der skal udvises forsigtighed ved termoformning.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn ved termoformning.
- Overdreven opvarmning af Iconic Align kan resultere i, at materialet svækkes, hvilket reducerer brugstiden hos patienten.
- Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten befinder sig.

FORHOLDSREGLER

- Iconic Align skal opbevares mellem 5 °C - 25 °C på et tørt sted.
- Opbevares væk fra direkte sollys. Hvis det udsættes for sollys i længere perioder, kan materialet have tendens til nedbrydning og misfarvning.
- Iconic Align må kun bruges som beskrevet i brugsindikationerne. Enhver brug af Iconic Align, der ikke er i overensstemmelse med disse brugsindikationer, er efter den praktiserende tandlæges eget skøn og på dennes eget ansvar.
- Patienter med en historik med allergiske reaktioner over for plastik bør ikke bruge dette produkt. Iconic Align indeholder ikke bisfenol A (BPA).

BIVIRKNINGER

- Allergiske reaktioner.

BRUGSANVISNING

1) Iconic Align leveres med en let aftagelig varmebestandig beskyttelsesfilm på begge overflader af emnet. For at få de bedste

resultater skal du fjerne filmen på emnets varmekontaktflade, og efterlade filmen på emnets modelkontaktflade. Dette vil forhindre behovet for at isolere modellen, hvilket forbedrer klarheden. Dette skaber også et mikrogab, hvilket forhindrer behovet for at blokere mindre underskæringer.

- 2) Modellen skal beskæres til en dybde på 20 mm (3/4") i højden.
- 3) Fjern ganen på modeller med fuld bue.
- 4) Vakuum-/trykform ved at bruge en maskine, der traditionelt anvendes til termoformning.
- 5) Sørg for, at Iconic Align er afkølet, før du fjerner materiale fra modellen. For at få de bedste resultater bør du bruge Iconic Tricutter. DBL4-101/1063 eller Iconic Wheel Saw DBL4-0150.
- 6) Fjern den varmebestandige film fra Iconic Align.
- 7) Trim og afslut enheden efter behov. For at få de bedste resultater bør du bruge Iconic Polishing Disk Fine 4S04-1381.

Opvarmningstiden kan variere afhængigt af maskinen. Hvis Iconic Align ikke tilpasser sig modellen, kan du skruet op for opvarmningstiden, indtil den tilpasser sig. Hvis Iconic Align "folder", når den er termoformet, skal du reducere opvarmningstiden, indtil dette ikke sker.

Typkælse	Opvarmningstid ved vakuum*	Biostar-kode*	Drufomat*
0,8 mm (0,030")	45 sekunder	152 (45Sec)	75 sekunder
1,0 mm (0,040")	55 sekunder	173 (55Sec)	85 sekunder

*Efter forvarmning af maskinen

SIKKER BORTSKAFFELSE

- Brugte dentale enheder kan betragtes som en biologisk fare. Følg dine landespecifikke love, direktiver, standarder og retningslinjer for bortskaffelse af brugte enheder.

PLEJERÅD TIL DIN ENHED

- Når du har børstet tænder, kan du børste toppen og bunden af aligneren/skinnen med en blød tandbørste.
- Børst ikke aligneren/skinnen med tandpasta, da dette vil reducere alignerens/skinnsens levetid betydeligt.
- Brug koldt vand til at vaske aligneren/skinnen. Iconic Align kan også rengøres med Retainer Brite eller en lignende renseopløsning.
- Varmt vand vil forvrænge Iconic Align.
- Skyl skinnen godt før og efter brug, og tør den grundigt.
- Håndter Iconic Align med forsigtighed, og opbevar den i en skinneboks, når den ikke er i munden.
- Når du tager aligneren/skinnen ud, skal du trykke lige meget på alle sider af enheden – det anbefales at bruge et særligt udstyr til dette formål.
- Hvis skinnen bliver for stram, må du ikke tvinge den på – ring til din ortodontist eller tandlæge.
- Du må ikke spise eller drikke, når du har aligneren/skinnen på, da syrer i mad og drikke kan reducere alignerens/skinnsens levetid.




Kun til en-
gangsbrug



Opbevares på
et køligt og tørt
sted



Instruktioner
medfølger

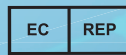

EMERGO EUROPE
Westerloortsteedijk 60
3827 AX, Amstelveen
The Netherlands

db 
lab supplies



DB Lab Supplies

Ryefield Way, Silsden, West Yorkshire, BD20 0EF, Storbritannien

T: +44 (0) 1535 656 999 | E: sales@dblabsupplies.co.uk

www.dblabsupplies.co.uk

IFU045 - Udgave 2 - 15/12/2023