

DOMREX™

AIGUILLES ET SERINGUES SÉCURITAIRES



ÉTAPE 1



Pour ouvrir l'emballage, repérer l'extrémité indiquant **PEEL HERE**. Séparer les bords thermocollés en écartant les languettes avec le pouce et l'index de chaque main.


Ne jamais pousser sur la seringue pour déchirer l'emballage.

ÉTAPE 2



Une fois ouvert, s'assurer que l'aiguille avec capuchon est bien ancrée sur la seringue qui peut se desserrer lors du transport.

ÉTAPE 3

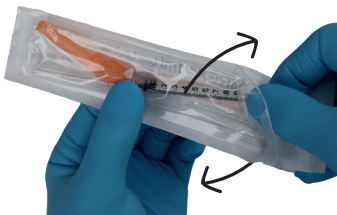

Saisir la base de l'aiguille avec capuchon d'une main et l'autre extrémité de la seringue avec l'autre main. **Pousser légèrement** sur la seringue et visser en tournant la seringue dans le sens horaire.

Attention: NE PAS POUSSER NI VISSER TROP FORT par risque d'affecter la jonction seringue-aiguille.

ÉTAPE 4



Écarter la gaine de sécurité de l'aiguille vers le corps de la seringue avant de retirer le capuchon de l'aiguille. Effectuer l'injection en respectant la technique établie.

Pour la commodité de l'utilisateur, la position de l'aiguille (biseau vers le haut) est orientée vers la position de la gaine de sécurité.

ÉTAPE 5

ACTIVATION AVEC LE POUCE




ACTIVATION SUR UNE SURFACE DURE



OU

Une fois l'injection terminée, utiliser l'une des 2 techniques à une main présentée ci-dessus pour activer le mécanisme de sécurité qui possède **3 points d'ancrage**. L'activation est confirmée par un **bruit audible de "Clic"**.

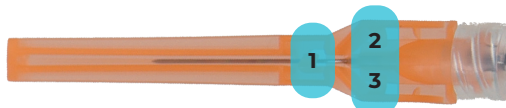

ÉTAPE 6

Jeter l'ensemble dans un bac prévu à cet effet tel que DOMREX™ bac pour objets tranchants souillés.

