
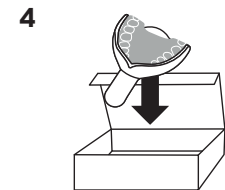
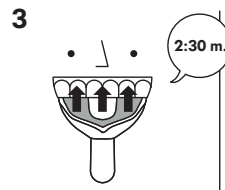
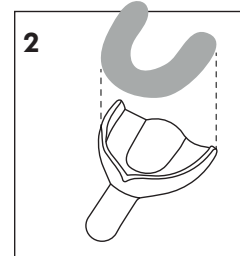
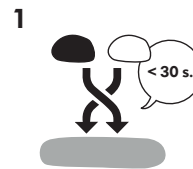


AFDRUK INSTRUCTIES (NL)

Als je wilt dat je afdruk bruikbaar is, lees dan de volgende instructies zorgvuldig door. Doe dit voordat je begint en neem de afdruk zo snel mogelijk, want de putty hardt snel uit.

- Poets je tanden en trek handschoenen aan
- Meng 1x gekleurd + 1x witte putty voor max. 30 sec. tot effen kleur (geen witte strepen)
- Rol de putty snel tot een bal en vervolgens tot een dikke cilindervorm, zonder dat er plooiën ontstaan. Voer deze stap snel uit
- Duw de putty zachtjes in de afdruklepel, zorg ervoor dat deze nergens gevouwen is (!). Voer deze stap snel uit
- Duw de afdruklepel in één beweging stevig op je tanden (met je duimen). Zorg ervoor dat je tanden volledig bedekt zijn met putty, schraap niet met je tanden over de afdruklepel. Beweeg of verplaats de afdruklepel NIET totdat de putty volledig is uitgehard
- Laat 2,5 minuten (02:30) uitharden. Bijt niet op de afdruklepel, houd alleen de voorkant met één hand vast.
- Haal eruit door voorzichtig naar beneden te trekken, beweeg hem niet van links naar rechts – indien nodig alleen zachtjes van voren naar achteren!
- Nog steeds een struggle? Bekijk dan een YouTube-video.

DENTÅLIMPRES

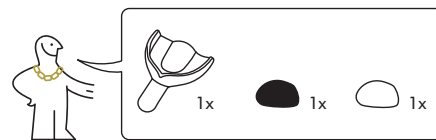

VOOR DE BEELDDENKERS ;)

GOED



Alle tanden zijn goed gedefinieerd en de lijnen van het tandvles zijn zichtbaar. Je afdruk zou er ongeveer zo uit moeten zien! :)

NIET GOED



De afdruklepel is niet in één vloeiende beweging op de tanden gedruwd - deze is te veel verplaatst. Je kunt zien dat de putty strepen getrokken heeft en dat de tanden en lijnen van het tandvles niet voldoende gedefinieerd zijn. Ook zie je de (witte) afdruklepel aan de voorkant, omdat de tanden erlangs schraapten. Vermijd dit.