



HELLINS

Il Medico specialista e l'Ottico applicatore, dopo un accurato esame, possono consigliare l'uso delle lenti a contatto. Questo leaflet contiene importanti informazioni sull'utilizzo del prodotto. Prego leggere accuratamente e conservare per futura consultazione.

PROGRAMMA D'USO CONSIGLIATO

Le lenti a contatto vengono usate per la correzione visiva di ametropie e laddove specificato di presbiopia. Si raccomanda che le lenti a contatto vengano sostituite giornalmente.

UTILIZZO DELLE LENTI

Pulirsi le mani accuratamente prima di maneggiare le lenti. Non utilizzare lenti danneggiate in qualunque modo.

USO TERAPEUTICO

La lente a contatto "plano" (potere +/-0.00) è indicata come blocco UV e per l'uso terapeutico. Utilizzare questa lente come benda per la protezione corneale e sollievo dal dolore corneale durante il trattamento di patologie oculari e le condizioni post-chirurgiche. Seguire attentamente le indicazioni del vostro specialista per l'uso terapeutico delle lenti.

BLOCCO UV

Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole perché non ricoprono totalmente l'intero segmento anteriore. Pertanto, i portatori di lenti a contatto devono continuare a portare gli occhiali da sole in caso di esposizione ai raggi UV.

INSERIMENTO DELLE LENTI

Non applicare trucco prima di aver indossato le lenti a contatto. Per evitare di confondere le lenti si prega di indossare una alla volta. Assicurarsi che le lenti siano orientate nel verso corretto. Sostenere la lente con il polpastrello del proprio dito indice per verificarne il profilo. Con l'indice e medio dell'altra mano libera sollevare entrambe le palpebre dell'occhio. Inserire la lente (vedere fig.3). Ripetere l'azione per l'altro occhio. In caso di dubbi o domande rivolgersi al proprio ottico.

RIMOZIONE DELLE LENTI

Ruotare l'occhio verso l'alto e con il dito di una mano piegare la palpebra inferiore verso il basso. Con l'indice ed il pollice della mano libera afferrare gentilmente la lente ed estrarla (vedere fig. 4). Ripetere l'azione per l'altro occhio. In caso di dubbi o domande rivolgersi al proprio ottico.

PRECAUZIONI

Non conservare le lenti in una soluzione salina poiché non le protegge da contaminanti nocivi; non utilizzare i prodotti oltre la loro data di scadenza. Usare cosmetici, saponi, creme e aerosol con cura, poiché possono irritare gli occhi. Il fumo aumenta il rischio di cheratite ulcerosa. Informare il datore di lavoro che si indossano le lenti a contatto. Nel caso di disagio per gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e farsi controllare dal vostro specialista. Non dormire indossando le lenti a contatto, poiché questo comporta il rischio di cheratite. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare le lenti nelle seguenti situazioni: infezioni, infiammazioni, allergie o eventuali disturbi che interessano la cornea, congiuntiva o palpebre, secchezza oculare, lenti danneggiate, le lenti sporche, sensazione di irritazione o il dolore negli occhi.



fig.3



fig.4