

Pour vous aider à les porter correctement



Respirateur à masque filtrant à bords repliables sans soupape



Respirateur à masque filtrant à bords repliables avec soupape

Respirateurs à masque filtrant à bords repliables – Directives de mise en place

1



Retirer le respirateur de l'emballage et le tenir en plaçant les courroies vers le haut. Placer la courroie inférieure sous le panneau central à côté du mot « ATTENTION ».

2



Ouvrir complètement les panneaux supérieur et inférieur en plaçant le pouce au centre de la pièce en mousse de manière à plier la pince nasale. Les courroies devraient se séparer quand les panneaux sont ouverts. S'assurer que le panneau inférieur est déplié et entièrement ouvert.

3



Placer le respirateur sur le visage, de manière que la mousse repose sur le nez et que le panneau inférieur s'appuie convenablement sous le menton.

4



Tirer la courroie supérieure et la placer haut à l'arrière de la tête. Passer ensuite la courroie inférieure par-dessus la tête et la placer autour du cou, sous les oreilles.

5



Tirer le panneau supérieur vers la voûte du nez et le panneau inférieur sous le menton de manière à obtenir un ajustement confortable.

6



Placer le bout des doigts des deux mains sur le dessus du nez et mouler la pince nasale pour obtenir une étanchéité sécuritaire.

Toujours vérifier l'étanchéité du respirateur à masque filtrant à bords repliables au moment de le mettre en place.



Respirateurs sans soupape

Couvrir complètement le panneau central du respirateur avec une ou les deux mains, puis *inhaler et expirer profondément*. Si l'air fuit autour du nez, rajuster la pince nasale. Si l'on décèle des fuites d'air entre le visage et le joint facial du respirateur, le replacer en ajustant les panneaux et les courroies. Si l'on ne peut obtenir un ajustement parfaitement étanche, **ne pas** pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur.



Respirateurs avec soupape

Couvrir complètement le panneau central du respirateur avec une ou les deux mains et *inhaler profondément*. Si l'air fuit autour du nez, rajuster la pince nasale. Si l'on décèle des fuites d'air entre le visage et le joint facial du respirateur, le replacer en ajustant les panneaux et les courroies. Si l'on ne peut obtenir un ajustement parfaitement étanche, **ne pas** pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son superviseur.



⚠ AVERTISSEMENT

Produits de protection respiratoire Ces respirateurs protègent contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. **Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.** Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, lire les directives sur l'emballage, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits d'hygiène industrielle et de sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414.