

Surgitube GL-110 W

Tubular Gauze
Gaze tubulaire

5/8" x 10 yd (1.57 cm x 9m)
5/8" x 10 v (1,57 cm x 9m)

Replaces conventional gauze
Applicator included
100% cotton

Remplace la gaze conventionnelle
Applicateur inclus
100 % coton

1. Slip applicator over finger. Holding gauze at base of finger, withdraw applicator past fingertip. Give applicator one complete twist/turn.

Glisser l'applicateur sur le doigt. Tenir la gaze à la base du doigt, retirez l'applicateur du bout du doigt. Donner à l'applicateur un tour complet.

2. Push applicator back over finger.

Repousser l'applicateur sur le doigt.

3. Withdraw and remove applicator. To hold Surgitube in place, use adhesive tape at base of finger. (not included)

Retirez et enlevez l'applicateur. Pour maintenir Surgitube en place, utilisez du ruban adhésif à la base du doigt. (Ruban non inclus)

Surgitube is surgically clean but is NOT a sterilized dressing. Do not apply directly to cuts, sores or other broken skin.

Surgitube est chirurgicalement propre mais n'est PAS un pansement stérilisé. Ne pas appliquer directement sur des coupures, des plaies ou d'autres lésions cutanées.

Glenwood Laboratories Canada Ltd.
2392 Speers Road, Oakville, ON L6L 5M2

Surgitube is quickly and easily applied.

Surgitube permet une application facile et rapide.

Surgitube tubular gauze is 100% cotton.

Surgitube gaze tubulaire est fabriqué à 100% de coton.

Surgitube allows maximum aeration with minimum restriction.

Surgitube permet une aération maximale avec un minimum de restriction.

Surgitube allows easy inspection and redressing of wounds.

Surgitube permet une surveillance et un bandage faciles des plaies.

Surgitube is comfortable allowing full free movement of the bandaged part.

Surgitube est confortable et permet une très grande liberté de mouvement de la partie pansée.

Surgitube est economical.

Surgitube est économique.

For small fingers and toes

White No. 1

Pour les petits doigts ou les orteils

Blanc No. 1