

# RingConn

Français

## Consignes de sécurité importantes

Ce produit contient des appareils électroniques. Afin de garantir votre sécurité, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant de l'utiliser :

1. Ne démontez pas le boîtier du produit.
2. Ne remplacez pas la batterie intégrée.
3. Ne le nettoyez pas avec des produits corrosifs.
4. Ne le chargez pas s'il est humide ou s'il n'est pas complètement sec.
5. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
6. Ne l'utilisez pas dans un sauna ou un bain à vapeur.
7. Ne le placez pas dans un environnement exposé à une température ou une humidité extrêmes.
8. Ne l'utilisez pas s'il est déformé ou endommagé à l'intérieur.
9. Ne le mettez pas au feu, sinon la batterie pourrait exploser.
10. Veuillez utiliser le compartiment de recharge normal de RingConn pour charger l'anneau, et utilisez un adaptateur électrique certifié pour charger le compartiment de charge.
11. Si la température du produit augmente excessivement ou si celui-ci devient très chaud pendant la charge, veuillez le débrancher immédiatement de la charge.
12. Cet appareil dispose d'une batterie au lithium intégrée. Si elle n'est pas utilisée pendant longtemps, cela peut entraîner une perte de capacité, une dilatation, un vieillissement prématuré, une corrosion du circuit imprimé ou d'autres risques de sécurité pour la batterie, ou endommager le produit. Il est recommandé de charger la batterie à environ 70 % avant de cesser d'utiliser l'anneau, de le ranger dans le compartiment de recharge afin de maintenir l'alimentation, et de charger régulièrement votre anneau et le compartiment de recharge.

## Contenu du carton



Anneau intelligent de surveillance de la santé



Étui de recharge intelligente



Câble de type C



Brochure d'information, guide de démarrage rapide

⚠ Ces informations sont fournies à titre de référence et ne constituent en aucun cas un engagement. Veuillez vous référer au produit réel pour connaître les détails exacts (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille, etc.)  
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. Si ces informations ne correspondent pas à la description du produit sur le site officiel, les informations disponibles sur le site officiel prévalent.

## Informations sur le produit

Nom du produit	Anneau intelligent de surveillance de la santé
Modèle du produit	BOR-01-6 BOR-01-7 BOR-01-8 BOR-01-9 BOR-01-10 BOR-01-11 BOR-01-12 BOR-01-13 BOR-01-14
Capacité de la batterie de l'anneau	22mAh
Méthode/temps de recharge	Chargement magnétique / environ 90 minutes pour une charge complète

Mode de transmission	Bluetooth 5.2
Compatibilité	iOS14.0, Android 8.0, Bluetooth 4.0 et ultérieur
Stockage hors ligne	5 à 7 jours
Matériau	Titane métallique
Poids de l'anneau (net)	3-5 grams
Température de fonctionnement	-10°C - 40°C / 14°F - 104°F
Niveau de protection	IP68
Nom du produit	Étui de recharge intelligente
Capacité de la batterie du compartiment de recharge	500 mAh
Méthode/temps de recharge	Câble de type C, tension nominale de 5 V / environ 120 minutes pour une charge complète
Poids du compartiment de recharge (net)	80 grams
Plage de fréquence Bluetooth LE	2400~2483.5MHz
Puissance de sortie RF maximale	0.00050W

- Limitation de responsabilité : RingConn, ses filiales, sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs, employés, représentants, agents, partenaires et revendeurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit, le service ou tout contenu y afférent, ou tout autre site Web ou tout service ou élément auquel on accède par le biais du service, y compris, mais sans s'y limiter, tout dommage direct, indirect, spécial, accidentel, dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou d'exclusion, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages corporels, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, la perte de revenus, la perte de profits, la perte d'affaires ou d'économies anticipées, la perte d'opportunités commerciales, l'interruption des activités, l'indisponibilité, la perte de clientèle ou la perte de données, que ces dommages soient ou non d'origine délictuelle (y compris la négligence), contractuelle ou autre, et même si la cause était prévisible. Cette exclusion ou limitation de responsabilité s'applique, que RingConn ait été ou non informé de la possibilité de tels dommages.
- Ce qui précède n'affecte pas toute responsabilité qui ne peut être exclue ou limitée en vertu des lois applicables. Dans la mesure où la responsabilité ne peut être exclue ou limitée conformément à ce qui précède, la responsabilité de RingConn pour toute réclamation contractuelle, délictuelle ou relevant d'une autre théorie de la responsabilité ne peut en aucun cas dépasser cent dollars (100 \$).

## • Avis médical •

- **Avvertissement :** Ce produit n'est pas un appareil médical. RingConn et les applications connexes ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état pathologique. Veuillez consulter un professionnel de santé avant d'adapter votre programme d'exercice, de sommeil ou d'alimentation.
- **Consignes de sécurité importantes :**
  1. Consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé préexistants pouvant être affectés par l'utilisation de ce produit.
  2. Ce produit est conçu pour enregistrer votre fréquence cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, des données sur votre sommeil et d'autres données connexes. L'utilisation prolongée du produit peut provoquer une irritation de la peau. En cas de rougeur, de gonflement, de démangeaison ou d'autres symptômes allergiques, veuillez consulter votre médecin et obtenir un avis médical dans les plus brefs délais.
  3. Veillez à ce que l'anneau soit suffisamment lâche de sorte qu'il ne soit pas être trop serré, ceci afin d'éviter une mauvaise circulation sanguine.
  4. N'utilisez pas ou ne regardez pas le produit en conduisant ou dans des situations qui exigent de la concentration.
  5. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des personnes mineures. Il contient des accessoires de petite taille pouvant présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Veuillez le tenir hors de portée des personnes mineures.
  6. Les performances de l'anneau peuvent être affectées par des facteurs externes. Ne placez pas l'anneau dans un environnement où la chaleur, le froid ou la lumière vive extérieure sont excessifs. Les données de performance figurant dans ces informations ne sont fournies qu'à titre de référence.
  7. Ne percez pas l'anneau ou la batterie au centre, car cela pourrait créer un court-circuit dans l'appareil.
  8. Ce produit peut présenter des risques pour les utilisateurs présentant certains symptômes ou certaines conditions médicales. Si vous êtes atteints de l'une des affections suivantes, cessez d'utiliser ce produit et consultez votre médecin :
    - Épilepsie ou sensibilité à la lumière ;
    - Mauvaise circulation sanguine ou abrasions ;
    - Maladie cardiaque ou autres conditions médicales ;
    - Si vous prenez des médicaments photosensibilisants.

## • Utilisation et entretien •

1. La taille de votre doigt change à différents moments de la journée et il est parfois difficile de retirer l'anneau. Si vous avez des difficultés à retirer l'anneau, essayez les méthodes suivantes :
  - Mouillez votre doigt avec de l'eau douce savonneuse ou de l'eau froide et tournez lentement l'anneau pour le retirer ;

- Levez votre main au-dessus de votre poitrine jusqu'à ce que votre tension artérielle baisse, puis essayez de le retirer ;
  - En cas d'urgence, si vous vous sentez mal à l'aise et que vous ne parvenez pas à retirer l'anneau par vous-même, veuillez consulter immédiatement un médecin.
2. Afin d'éviter d'user l'anneau, retirez-le lorsque vous faites de la musculation, lorsque vous tenez une pelle ou tout autre outil lourd, ou lorsque vous tenez des objets en métal, en céramique ou en pierre.
  3. Évitez de mettre l'anneau dans un nettoyeur à ultrasons afin d'éviter d'endommager certains de ses composants.
  4. Le produit est étanche lors des activités quotidiennes. Vous pouvez le porter dans une piscine et lors d'activités en eaux peu profondes. Évitez de l'utiliser dans les sources chaudes, les saunas (bains à vapeur), en plongée sous-marine et dans tout autre environnement soumis à une température ou à une humidité extrêmes.
  5. N'appliquez pas trop de produits de soins sur vos mains lorsque vous utilisez l'anneau afin d'éviter la corrosion de la surface de celui-ci.
  6. Nettoyez régulièrement l'anneau avec de l'eau et un savon doux, et essuyez-le avec un chiffon doux, en accordant une attention particulière aux parties en contact avec la peau.
  7. Retirez votre anneau de temps à autre pour permettre à votre peau de se détendre. Vous pouvez également profiter de ce temps pour le recharger.
  8. L'anneau peut être rayé et égratigner la peau en contact étroit avec celui-ci. Les bijoux en matériaux souples tels que l'or et l'argent, et les produits électroniques dotés d'un revêtement souple doivent être utilisés avec précaution et protégés afin d'éviter les rayures causées l'anneau.
  9. Afin de protéger votre batterie et préserver sa durée de vie, rangez votre anneau dans le compartiment de charge quand vous ne l'utilisez pas, et chargez-le régulièrement, de même que le compartiment. Il est recommandé de recharger la batterie au moins tous les 15 jours.

## IC

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

## Garantie

RingConn LLC fourni votre anneau intelligent RingConn avec une garantie d'un an.

Pour enregistrer votre produit pour une garantie, veuillez visiter: <https://ringconn.com/return-refund-policy/>

Pour une réclamation au titre de la garantie, nous demanderons : une copie de la preuve d'achat auprès d'un revendeur agréé.

Pour une assistance ou des questions d'ordre général, veuillez nous contacter au [cs@ringconn.com](mailto:cs@ringconn.com)

**Si la loi locale en vigueur au moment de l'achat exige une période de garantie supérieure à un (1) an, cette garantie sera invalide. étendu dans la mesure requise par la loi.**

<https://ringconn.com/pages/euro-compliance>



Version:V1.0/BOR-01

Made in China

中国制造

