

RingConn

简体中文

1 下载RingConn健康 APP:

在App Store
或安卓商城搜索RingConn健康 APP,
或扫二维码下载,按提示注册账号。



3 连接APP:


打开RingConn健康APP,进入【我的】页面,
选择绑定设备,按提示完成。

•手机蓝牙需开启,戒指与手机
保持1米内。



2 首次使用激活戒指:

将戒指放入充电仓,
蓝灯闪烁即激活,等待手机绑定。

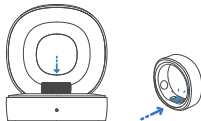

4 正确佩戴戒指:

转动戒指使其贴合手指指腹,保持正确佩戴。


- 位置偏移及时调整。
- 首次使用建议充电60分钟或电量高于80%。



5 查看数据：

通过RingConn健康 APP，
同步并查看健康数据和电量信息。

• 建议长期佩戴并每天同步数据，关注电量提示及时充电。

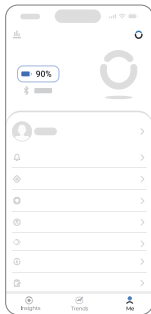

6 指示灯说明：


戒指：

- 蓝灯闪：激活并进入配对模式
- 蓝灯亮3秒：退出飞行模式



充电仓：

- 蓝灯亮5秒：戒指充电正常
- 白灯闪：戒指或充电仓充电中
- 白灯常亮：充电仓电量>40%
- 橙灯常亮：充电仓电量<40%
- 橙灯闪：充电仓异常

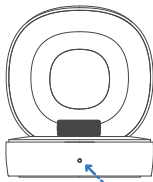



Version:V1.0/BOR-01

Made in China
中国制造

